


Phonak

Ricevitore ActiveVent™

Istruzioni per l'assemblaggio

Strumenti necessari

1. Ricevitore ActiveVent: MAV sinistro (blu) o destro (rosso)
2. Guscio: SlimTip Titanium AV
3. Tubo: SlimTip Link AV
4. Filtro anticerume HF3: sinistro (blu) o destro (rosso), compreso lo strumento per cambiare il filtro
5. Strumento da taglio, ad esempio pinzette da taglio
6. Attrezzo del ricevitore

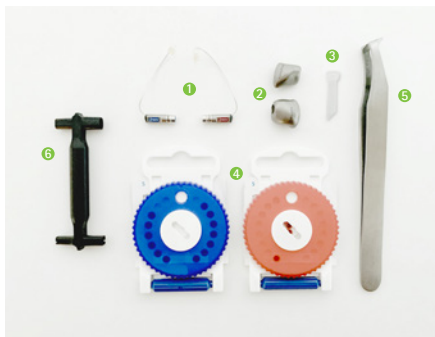


Inserimento di SlimTip Link AV


1. Inserire il tubo (SlimTip Link AV) nel guscio (SlimTip Titanium AV)



2. Tirare e muovere il tubo nel guscio finché non scatta in posizione.

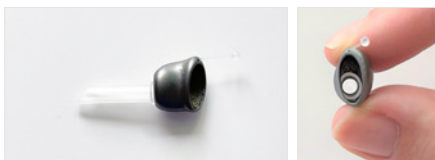

3. Tagliare il tubo il più vicino e in linea possibile rispetto all'anello.

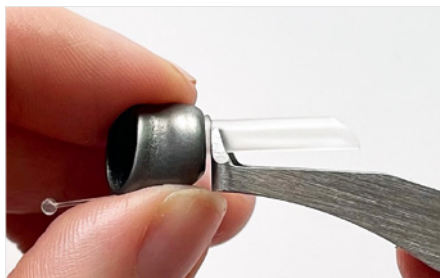


4. Guscio di SlimTip Titanium AV finito con SlimTip Link AV.



Inserimento del ricevitore ActiveVent (MAV) in SlimTip Titanium AV

1. Inserire il ricevitore ActiveVent nell'attrezzo. Usare l'impugnatura con l'etichetta "MAV".

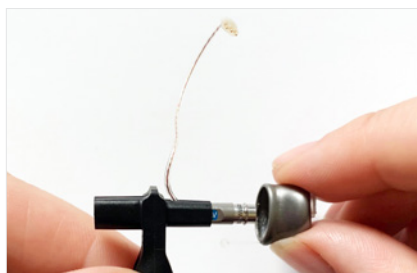

2. Spingere il ricevitore nel tubo nel guscio finché non si avverte una certa resistenza.



3. Il beccuccio del ricevitore dovrebbe essere allineato con l'anello del tubo.

