

Phonak CROS L.

Produktinformasjon

Phonak CROS L består av en CROS- og BICROS-løsning for personer med ett døvt øre. CROS L brukes på det døde øret og fanger opp lyder og overfører den trådløst til et kompatibelt Phonak-høreapparat som brukes på øret med bedre hørsel. CROS L har ingen akustiske lydsignaler.

CROS L er kompatibel med høreapparatene Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR og Sky L-PR, som er basert på den innovative teknologien i Phonak Lumity-plattformen.

Du finner mer informasjon på www.phonak.no



Produktbeskrivelse



CROS L-R
CROS L-R Trial

Batteri		oppladbart
Flerfunksjonsknapp		•
CROS-balanse		•
Vannavstøtende belegg		•
IP-rangering		IP68 ¹
Mål	L x B x D	27,7 x 12 x 8,1 mm
	Vekt	2,2 g
Ladetid ²	0 % til 100 %	3 t
	0 % til 80 %	1,5 t
	30 min tilpasning	15 min
Kompatibilitet med høreapparat		Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR og Sky L-PR

Kassefarger



P1
Sand
Beige



H0
Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver
Gray



P7
Graphite
Gray



P8
Velvet
Black



Q2
Electric
green



Q3
Caribbean
Pirate



T3
Precious
Pink

Proppalternativer

Standard dome (CROS-slange)	<ul style="list-style-type: none">• Standard dome finnes i tre ulike størrelser (S, M, L)• CROS-slangen finnes for venstre/høyre øre og i fire ulike lengder (0, 1, 2, 3)
SlimTip (CROS-slange)	<ul style="list-style-type: none">• Spesialtilpassede ørepropper• CROS-slangen finnes for venstre/høyre øre og i fire ulike lengder (0, 1, 2, 3)
CROS Tip	<ul style="list-style-type: none">• Spesialtilpassede ørepropper for CROS finnes med fire ulike slangelengder (0, 1, 2, 3)

Alternativer for Phonak CROS L-R-lader



CROS L-R kan lades ved hjelp av en Phonak Charger Ease. Phonak Charger Ease er en kompakt lader med magneter i ladeåpningene, slik at det blir lettere å sette inn og ta ut CROS L-R. Den bruker en standard USB-C-ladeport som lyser når den får tilført strøm.

¹ IP68 viser at CROS L-R-enheten er vann- og støvavvisende. Det tålte å være nedsenket i ferskvann på 1 meters dybde i 60 minutter og ligge 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529.

² Faktisk ladetid avhenger av gjenværende batterilevetid, men vil ikke overskride 3 timer.

Tilpasning

	CROS L-R CROS L-R Trial
Phonak Target	9.0 eller nyere
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•

Hovedfunksjoner

CROS L kan tilpasses Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR eller Sky L-PR med alle typer funksjonsnivå. Derfor vil brukere med et CROS L-system få gleden av ulike funksjoner, avhengig av funksjonsnivået på høreapparatet som brukes på øret med bedre hørsel. Se produktinformasjonen for Phonak Audéo L, Naída L eller Sky L for mer informasjon.

Phonak SmartSpeech™ Technology

I et CROS L-system kan brukere få tilgang til relevante SmartSpeech Technology-funksjoner, inkludert **StereoZoom 2.0**, takket være kombinasjonen med de kompatible Phonak Lumity-enhetene.

CROS-balanse

Lydstyrkeforholdet mellom CROS-enheten og høreapparatet kan justeres enten via Target tilpassningsprogramvare eller direkte via et kort trykk på flerfunksjonsknappen på CROS-enheten.

myPhonak og myPhonak Junior

Brukere med en CROS L-enhet og et kompatibelt høreapparat kan ha nytte av apphjelp via myPhonak eller myPhonak Junior.

CROS L-ytelse

Når CROS L kombineres med høreapparater på Premium- og Advanced-funksjonsnivå, har det et Tale i høy støy-program med StereoZoom 2.0. Se i tabellen under for å få en full oversikt over mikrofonmoduser fra CROS L, avhengig av funksjonsnivået til det kontralaterale høreapparatet.

Funksjonsnivå for høreapparat	Tilgjengelige mikrofon-moduser for CROS L		
	StereoZoom 2.0	Real Ear Sound	Omnidireksjonal
Premium	•	•	•
Advanced	•	•	•
Standard		•	•
Essential			•

Du finner mer informasjon på www.phonak.com/cros-l

Du finner mer informasjon om Audéo L-høreapparater på www.phonak.com/audeolumity

Du finner mer informasjon om eSolutions på www.phonak.com/apps

life is on

Siden 1947 har Phonak jobbet for å skape en verden hvor "life is on" for alle. Allerede da selskapet ble grunnlagt, var vi drevet av en urokkelig overbevisning: Vi mener at god hørsel er ensbetydende med velvære og dermed avgjørende for å leve livet fullt ut. Hørsel er faktisk direkte knyttet til sosial, følelsesmessig, kognitiv og fysisk velvære. Både nå og i fremtiden jobber vi for å tilby den bredeste porteføljen av innovative hørselsløsninger. Og sammen med audiografene våre fortsetter vi å fokusere på det som betyr mest: å forbedre taleforståelsen, forandre folks liv og ha en positiv innvirkning på samfunnet som helhet.

www.phonak.no



027-0668-10|V2.00|2023-06|NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved