

## Utilisation des appareils audio / FM

### Connexion via un câble audio



Jack 3,5 mm

### Connexion via un système FM



- Pour interrompre / relancer la transmission des entrées audio de n'importe quelle source, pressez la touche principale
- Pour arrêter le signal audio, mettez la source audio à l'arrêt ou débranchez le câble audio
- Pour arrêter la FM, mettez la FM à l'arrêt ou débranchez le récepteur FM d'iCom.

Si la transmission du signal audio via le câble audio ou le système FM est instable, pressez brièvement la touche marche / arrêt pendant la transmission pour «verrouiller» le programme audio.


## iCom – Guide simplifié et Fonctions

Témoins lumineux (pour plus de détails, voir le mode d'emploi)

Rouge, un flash  
= iCom s'arrête



Vert  
= iCom est en marche

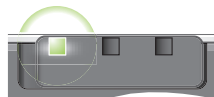

Jaune, interruption longue  
= Transmission audio verrouillée




Jaune, continu  
= Transmission audio




Jaune, clignotement moyen  
= Pause de la transmission audio




Bleu, clignotement moyen  
= 1 téléphone connecté ou pause Bluetooth audio

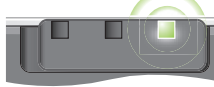

Bleu, clignotement bref  
= 2 téléphones connectés

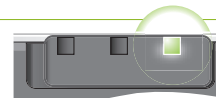

Bleu, continu  
= Transmission Bluetooth (musique ou appel)

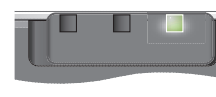


Pour vérifier quelle est la version de votre iCom, pressez une fois la touche marche / arrêt en mode veille.



Jaune, clignote trois fois  
= iCom version 3

cette version permet d'utiliser 2 téléphones, la numérotation vocale, le rappel du dernier numéro et le verrouillage audio.


Veillez vous adresser à votre audioprothésiste pour toute assistance supplémentaire.

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement le mode d'emploi iCom. Faites particulièrement attention au chapitre «Informations importantes» et au symbole suivant  qui souligne les précautions à prendre.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



## iCom Guide Simplifié et Fonctions

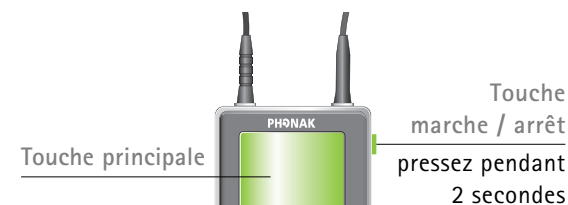

Numérotation vocale  
pressez pendant 2 secondes

Rappel du dernier numéro  
pressez 2x brièvement

Prendre ou terminer un appel, accepter un signal FM  
pressez brièvement

Refuser un appel entrant  
Pressez pendant 2 secondes

## Fonctions d'iCom

### Numérotation vocale

Veillez consulter le mode d'emploi de votre téléphone. Pressez pendant 2 secondes la touche principale. Quand vous entendrez un bip, dites le nom du correspondant que vous voulez appeler.\*

### Rappel du dernier numéro

Pour recomposer le dernier numéro appelé, pressez deux fois la touche principale. Le dernier numéro composé est activé et la communication s'établit.\*

\* Le téléphone doit accepter ces fonctions et les fonctions doivent avoir été activées par votre audioprothésiste. iCom doit être en marche, mais aucun appel, ni musique, ni audition FM ne doivent être en cours.


### Verrouillage audio

Quand vous utilisez le câble audio ou un récepteur FM, il se peut que le signal audio disparaisse pendant des pauses vocales ou de la musique faible. Dans ce cas, pressez brièvement la touche marche / arrêt pour «verrouiller» le signal audio.


## Mise en service

### Recharge de l'accumulateur iCom

iCom peut continuer à être utilisé pendant sa recharge.

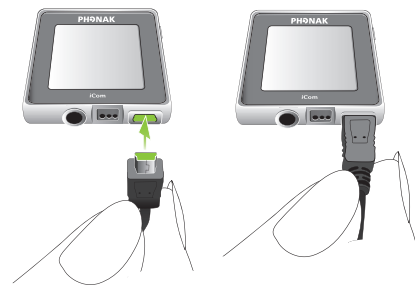


### Mise en marche / arrêt de votre iCom

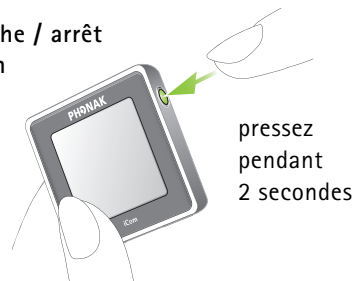

### Configuration des appareils Bluetooth

Avant de pouvoir utiliser votre iCom avec des appareils Bluetooth, vous devez coupler les appareils. Veillez vous reporter aux instructions figurant dans le mode d'emploi général. Le code de couplage est «0000».

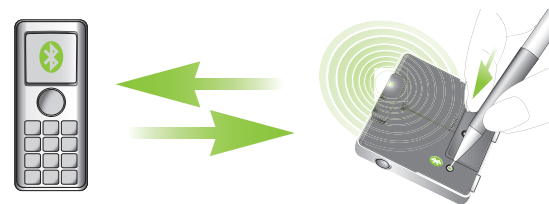

### Utiliser iCom avec un ou deux téléphones mobiles

- Vous pouvez connecter jusqu'à deux téléphones mobiles en même temps à iCom
- Chaque téléphone a sa propre sonnerie fixe
- Pressez brièvement la touche principale pour accepter un appel téléphonique entrant. Vous entendrez la voix de votre correspondant dans vos aides auditives. Rappelez-vous que votre voix est prélevée par iCom.
- Pendant une communication, le second téléphone ne peut pas être décroché.
- Si deux téléphones sont connectés en même temps, la numérotation vocale s'applique au dernier qui a été couplé.

### Utilisation d'iCom avec un téléphone sans fil (DECT) ou un téléphone plus ancien

Utilisation d'un téléphone sans fil (DECT) ou un téléphone plus ancien avec le profil «Oreillette» uniquement.

Remarque: L'indicateur Bluetooth (témoin bleu) peut ne pas clignoter avec ces téléphones, même si le téléphone a été préalablement couplé.

**Etape 1:** Composez le numéro que vous voulez appeler sur votre téléphone ou sélectionnez-le dans vos contacts.

**Etape 2:** Pressez brièvement la touche principale (ou pressez-la pendant 2 secondes si vous êtes déjà dans un programme de diffusion iCom)

**Etape 3:** Attendez 5 secondes

**Etape 4:** Le processus de numérotation commencera et votre aide auditive commutera automatiquement dans le programme téléphone