


iCom Kurzanleitung und Funktionen

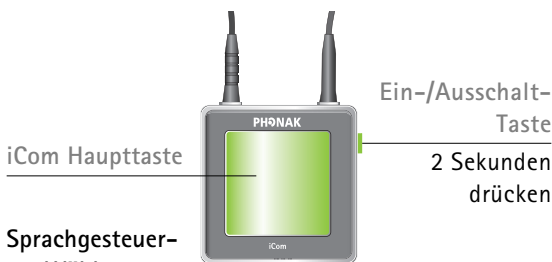

Sprachgesteuertes Wählen
2 Sekunden drücken

Wahlwiederholung
2 x kurz drücken

**Anruf annehmen oder beenden,
FM Signal bestätigen**
kurz drücken

Eingehenden Anruf ablehnen
2 Sekunden drücken

PHONAK

life is on

Funktionen in iCom

Sprachgesteuertes Wählen

Weitere Anweisungen erhalten Sie im Benutzerhandbuch des Mobiltelefons. Drücken Sie die Haupttaste 2 Sekunden lang. Nachdem Sie einen Piepton gehört haben, sagen Sie den Namen des Kontakts, den Sie anrufen wollen.*

Wahlwiederholung

Um die zuletzt gewählte Telefonnummer erneut zu wählen, drücken Sie zwei Mal auf die Haupttaste. Die Wahlwiederholung ist aktiviert und der Anruf wird ausgeführt.*

* Nur wenn das Telefon diese Funktionen unterstützt. Die Funktionen müssen von Ihrem Hörakustiker aktiviert werden.

iCom muss eingeschaltet sein, es darf jedoch kein Telefongespräch geführt oder ein Musik- oder FM Hörprogramm ausgeführt werden.


Audiosperre

Sie verwenden ein Audiokabel (Buchse) oder einen FM Empfänger. Während einer Sprechpause oder bei sehr leiser Musik fällt das Audiosignal manchmal jedoch aus. Drücken Sie in diesem Fall kurz auf die Taste zum Ein-/Ausschalten, um das Audiosignal «festzuhalten».

Erste Schritte

Laden des iCom Akkus

Sie können iCom auch während des Ladevorgangs verwenden.

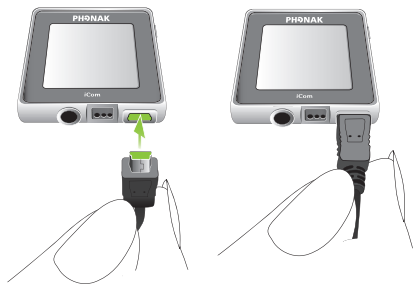


Ein- und Ausschalten Ihres iCom



2 Sekunden
drücken

Kopplung und Verbindung von Bluetooth-Geräten

Bevor Sie Ihren iCom mit Bluetooth-Geräten verwenden können, müssen Sie die Geräte koppeln. Weitere Anweisungen dazu erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung. Der Kopplungscode lautet «0000».

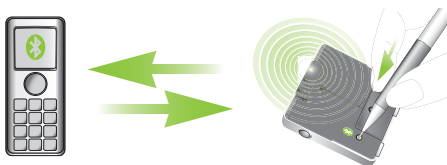

Verwendung Ihres iCom mit einem oder zwei Mobiltelefonen

- Sie können bis zu zwei Telefone gleichzeitig mit Ihrem iCom verbinden.
- Jedes Telefon verfügt über seinen eigenen fest zugeordneten Klingelton.
- Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie kurz auf die Haupttaste.
- Während eines Gesprächs kann kein Anruf vom zweiten Telefon angenommen werden.
- Wenn die beiden Telefone zur gleichen Zeit angeschlossen sind, ist das sprachgesteuerte Wählen nur beim zuletzt gekoppelten Telefon möglich.

Verwendung von schnurlosen (DECT) oder älteren Telefonen, die nur das «Kopfhörer»-Profil unterstützen

Hinweis: Bei diesen Telefonen blinkt die Bluetooth Anzeige (blaues Licht) u.U. nicht, auch wenn das Telefon zuvor gekoppelt wurde.

1. Geben Sie die Nummer, die Sie anrufen wollen, am Telefon ein, oder wählen Sie diese aus dem Telefonbuch aus
2. Drücken Sie kurz auf die Haupttaste (oder drücken Sie sie 2 Sekunden lang, wenn Sie sich bereits in einem iCom Streaming Programm befinden)
3. Warten Sie 5 Sekunden
4. Der Wählprozess wird gestartet und Ihre Hörgeräte wechseln automatisch zum Telefonprogramm

Verwendung von Audio und FM

Verbindung per Audiokabel



Verbindung mit einem FM System



3,5 mm Stereobuchse

- Um die Übertragung von Audiosignalen von einer beliebigen Quelle anzuhalten/neu zu starten, drücken Sie die Haupttaste
- Um die Audioübertragung zu deaktivieren, schalten Sie die Audioquelle aus oder ziehen Sie das Audiokabel ab
- Um die Funkübertragung zu deaktivieren, schalten Sie das FM Gerät aus oder ziehen Sie den FM Empfänger vom iCom ab

Falls die Signalübertragung über das Audiokabel oder das FM System nicht stabil ist, drücken Sie während der Übertragung kurz auf die Taste zum Ein/Ausschalten, um das Audioprogramm «festzuhalten».

iCom Kurzanleitung und Funktionen

Anzeigeleuchten (nähere Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung)

Rot, einmaliges Blinken
= iCom schaltet sich aus




Grün
= iCom schaltet sich ein



Gelb, leuchtet durchgängig mit kurzen Unterbrechungen
= Audioübertragung gehalten



Gelb, leuchtet durchgängig
= Audioübertragung

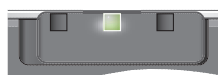

Gelb, blinkend
= Audioübertragung Pause



Blau, blinkend
= 1 Mobiltelefon angeschlossen
oder Bluetooth
Audioübertragung Pause



Blau, kurz blinkend
= 2 Mobiltelefone
angeschlossen



Blau, leuchtet durchgängig
= Bluetooth Übertragung




Zur Überprüfung Ihrer iCom-Version drücken Sie die Taste zum Ein-/Ausschalten, sobald Sie sich im Standby-Modus befinden.

Gelb, blinkt drei Mal
= iCom Version 3

unterstützt den Anschluss zweier Telefone und die Funktionen Sprachgesteuertes Wählen, Wahlwiederholung und Audio halten.



Bitte fragen Sie Ihren Hörakustiker für weitere Hilfe.

Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, die iCom Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen, besonders das Kapitel «Wichtige Sicherheitsinformationen» und die zu dem Warnsymbol  gehörigen Erläuterungen.

www.phonak.com



CE

0682

