



## Kopplung und Verbindung von iCom mit Ihrem Motorola Mobiltelefon

**1. Laden Sie iCom und Ihr Mobiltelefon und schalten Sie beide Geräte ein. Legen Sie sie nebeneinander.**

**2. Bereiten Sie Ihr Mobiltelefon für das Kopplungsverfahren vor.**

Suchen Sie die Verbindungseinstellungen Ihres Telefons. Bei den meisten Motorola Modellen trifft eine der folgenden Navigationsoptionen zu.

**Menü ▷ Verbindung ▷ Bluetooth Verbindung ▷ Audio Geräte**

oder

**Menü ▷ Bluetooth Link ▷ Freisprechen**

oder

**Einstellungen ▷ Verbindung ▷ Bluetooth Link ▷ Verbindung**

**3. Bereiten Sie Ihren iCom für das Kopplungsverfahren vor.**

Leiten Sie das Kopplungsverfahren auf Ihrem iCom ein. Drücken Sie dazu die Bluetooth Kopplungstaste 2 Sekunden lang, bis die Bluetooth-Anzeige blau blinkt. Ihr iCom bleibt zwei Minuten lang – bzw. bis das Kopplungsverfahren abgeschlossen ist – im Kopplungsmodus.

**4. Koppeln von iCom und Mobiltelefon.**

Wählen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Mobiltelefons eine der folgenden Optionen (je nach Handy-Modell):

**[Audio-Quelle hinzufügen]**

oder

**[Nach Geräten suchen]**

oder

**Zufügen**

oder

**Hinzufügen**

(Wenn die Bluetooth-Funktionalität nicht aktiviert ist, werden Sie möglicherweise zuerst gefragt, ob Sie Bluetooth einzuschalten wünschen. Bestätigen Sie, um die Suche nach Bluetooth-Geräten zu starten.)

Ihr Mobiltelefon sollte eine Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte anzeigen.

Wählen Sie **«iCom»** aus dieser Liste. Einige Handy-Modelle können Ihnen die folgende Frage stellen: **«Koppeln mit iCom?»** Antworten Sie in diesem Fall mit **«Ja»**.

Geben Sie den Zugangscode **«0000»** (vier Nullen) ein.

iCom wird nun zur Liste der Bluetooth-Geräte hinzugefügt.

**5. Verbinden von iCom mit Ihrem Mobiltelefon.**

Normalerweise wird iCom nach dem Koppeln automatisch verbunden.

Bei einigen Telefonen können Sie in den Zugangseinstellungen der Geräte-Details die Option **«Automatische Verbindung»** einstellen. Dadurch kann iCom die Verbindung ohne Bestätigung automatisch herstellen. Wir empfehlen Ihnen, diese Funktion zu aktivieren, falls vorhanden.

Sollten Sie Schwierigkeiten beim Navigieren zu den Bluetooth-Einstellungen haben, konsultieren Sie bitte die Gebrauchsanweisung Ihres Mobiltelefons oder wenden Sie sich an einen Mobiltelefon-Fachhändler.