


iCom Bluetooth-Kopplung Anleitung Mobiltelefone generell

PHONAK

life is on

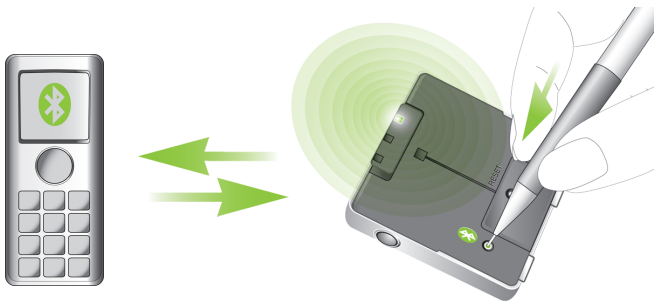

Kopplung und Verbindung von iCom mit Ihrem Mobiltelefon

Laden Sie iCom und Ihr Mobiltelefon und schalten Sie beide Geräte ein. Legen Sie sie nebeneinander.

1. Aktivieren Sie Bluetooth.

Suchen Sie die Verbindungseinstellungen Ihres Telefons. Suchen Sie die «Bluetooth»-Funktion im Menü oder einem der Submenüs und aktivieren Sie sie.

Sind die Bluetooth-Einstellungen nicht im Menü, suchen Sie unter «Optionen», «Tools», «Einstellungen», «Verbindungen», «Anbindungen», «Anwendungen», «Bedienungsfeld», «Installierung» oder irgendeiner Kombination dieser Möglichkeiten (z.B. «Menü» ▷ «Einstellungen» ▷ «Verbindungen» ▷ «Bluetooth»).

2. Versetzen Sie Ihren iCom in den Kopplungsmodus.


Um das Kopplungsverfahren des iCom zu starten, versetzen Sie Ihren iCom in den Kopplungsmodus, indem Sie die Bluetooth Kopplungstaste 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Bluetooth-Anzeige blau blinkt. iCom befindet sich nun 2 Minuten lang - bzw. bis das Kopplungsverfahren abgeschlossen ist - im Kopplungsmodus.

3. Suchen Sie nach iCom und bestätigen Sie die Kopplung.

Wählen Sie auf Ihrem Mobiltelefon «**Neues Bluetooth-Gerät hinzufügen**». Das Mobiltelefon beginnt nach Bluetooth-fähigen Geräten in seiner Reichweite zu suchen.

Wählen Sie «**iCom**» in der Liste der verfügbaren Geräte und geben Sie dann «**0000**» (vier Nullen) ein, wenn Sie nach dem Zugangscod oder Hauptschlüssel gefragt werden. Erlauben Sie den Geräten, das Kopplungsverfahren abzuschließen. Auf dem Mobiltelefon wird iCom als ein gekoppeltes Gerät dargestellt, und auf iCom blinkt die Bluetooth LED-Anzeige langsam, was bedeutet, dass die beiden Geräte erfolgreich gekoppelt wurden.

4. Verbinden von iCom mit Ihrem Mobiltelefon.

Zusätzlich zur Kopplung, die nur einmal durchzuführen ist, müssen Ihr iCom und Ihr Mobiltelefon auch noch miteinander verbunden werden. Dies geschieht entweder automatisch oder über das Menü des Mobiltelefons. Wählen Sie im Bluetooth-Menü «**Gekoppelte Geräte**» oder «**Meine Geräte**», markieren Sie «**iCom**» und wählen Sie «**Verbinden**». Einige Mobiltelefone fragen Sie möglicherweise, welchen Bluetooth Dienst Sie aktivieren wollen. Wählen Sie «**Kopfhörer**» und, sofern verfügbar, «**Stereo-Kopfhörer**». Bei einigen Mobiltelefonen zeigt das Kopfhörer-Symbol  an, dass iCom verbunden ist.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, die Option «**Automatische Wiederverbindung**» zu erlauben, empfehlen wir Ihnen, dies zu tun. Auf diese Weise können iCom und Ihr Mobiltelefon immer wieder eine Verbindung herstellen, wenn sie in Reichweite zueinander sind.

Mobiltelefon-Kompatibilität

Die Bluetooth-Funktionalität wird von den verschiedenen Mobiltelefon-Herstellern auf unterschiedliche Weise implementiert. Wenn ein Problem bei der Verbindung Ihres Mobiltelefon mit iCom auftritt oder wenn Sie sich bezüglich der Bluetooth-Fähigkeit Ihres Handys nicht sicher sind, konsultieren Sie bitte die Gebrauchsanweisung Ihres Mobiltelefons oder wenden Sie sich an Ihren Mobiltelefon-Fachhändler.