



Kopplung und Verbindung von iCom mit einem Personalcomputer (PC)

Sie können Ihren iCom dazu verwenden, Audiodateien von Ihrem PC zu hören, wenn Ihr PC Bluetooth unterstützt.

Dazu müssen Sie zunächst das Bluetooth Kopplungsverfahren zwischen iCom und PC durchführen. Konsultieren Sie bitte die Gebrauchsanweisung Ihres PCs oder einen Fachhändler, sollten Sie das Kopplungsverfahren nicht anhand der hier beschriebenen allgemeinen Schritte ausführen können.

Kopplung Ihres iCom und eines Personalcomputers (PC):

1. Laden Sie Ihren iCom und schalten Sie ihn ein. Schalten Sie Ihren PC ein. Legen Sie Ihren iCom neben den PC.
2. Öffnen Sie am PC **«Systemsteuerung»** und wählen Sie den Bluetooth-Geräteassistenten. Dieser hilft Ihnen beim Aufbau einer Bluetooth Verbindung zwischen Ihrem iCom und dem PC.
3. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth Verbindung aktiviert ist: Aktivieren Sie entweder die eingebaute Bluetooth Funktion oder schließen Sie einen externen Bluetooth Adapter an Ihren PC an.
4. Leiten Sie das Kopplungsverfahren auf Ihrem iCom ein. Drücken Sie dazu die Bluetooth Kopplungstaste 2 Sekunden lang, bis die Bluetooth-Anzeige blau blinkt. Ihr iCom bleibt zwei Minuten lang – bzw. bis das Kopplungsverfahren abgeschlossen ist – im Kopplungsmodus.
5. Starten Sie nun die **«Suche nach neuen Geräten»** auf Ihrem PC.
6. Wählen Sie unter den gefundenen Geräten **«iCom»** aus.
7. Wenn der PC Sie zum Eingeben eines Zugangscodes oder PINs auffordert, geben Sie **«0000» (vier Nullen)** ein.
8. Warten Sie, bis die Geräte mit der Herstellung einer gesicherten Verbindung fertig sind.
9. Wenn Sie vom PC aufgefordert werden, Bluetooth Dienste auszuwählen, können Sie möglicherweise aus mehreren verfügbaren Optionen wählen. Wählen Sie die Option **«Stereo-Kopfhörer»**, um Audiosignale in Stereo zu übertragen. Nachdem Sie die Dienste, die Sie zu aktivieren wünschten, ausgewählt haben, können Sie die Verbindung beenden und das Installationsmenü auf Ihrem PC verlassen.
Eine erfolgreiche Verbindung wird auf dem iCom dadurch bestätigt, dass die Bluetooth-Anzeige langsam blau blinkt.