



Kopplung und Verbindung von iCom mit Ihrem Mobiltelefon

1. Laden Sie iCom und Ihr Mobiltelefon und schalten Sie beide Geräte ein. Legen Sie sie nebeneinander.

2. Bereiten Sie Ihr Mobiltelefon für das Kopplungsverfahren vor.

Suchen Sie die Verbindungseinstellungen Ihres Telefons. Bei den meisten Sony Ericsson Modellen trifft eine der folgenden Navigationsoptionen zu.

Menü ▷ **Einstellungen** ▷ **Tab «Verbindungen»** ▷ **Bluetooth** ▷ **Tab "Geräte"**

oder

Systemsteuerung ▷ **Verbindungen** ▷ **Bluetooth** ▷ **Meine Geräte**

oder

Hauptmenü ▷ **Systemsteuerung** ▷ **Verbindungen** ▷ **Bluetooth**

3. Bereiten Sie Ihren iCom für das Kopplungsverfahren vor.

Leiten Sie das Kopplungsverfahren auf Ihrem iCom ein. Drücken Sie dazu die Bluetooth-Kopplungstaste 2 Sekunden lang, bis die Bluetooth-Anzeige blau blinkt. Ihr iCom bleibt zwei Minuten lang - bzw. bis das Kopplungsverfahren abgeschlossen ist - im Kopplungsmodus.

4. Koppeln von iCom und Mobiltelefon.

Wählen Sie im Bluetooth Menü Ihres Mobiltelefons **Neues Gerät** oder **Verbinden**.

(Wenn die Bluetooth-Funktionalität nicht aktiviert ist, werden Sie möglicherweise zuerst gefragt, ob Sie Bluetooth einzuschalten wünschen. Bestätigen Sie, um die Suche nach Bluetooth-Geräten zu starten.)

Ihr Mobiltelefon sollte eine Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte anzeigen.

Wählen Sie **«iCom»** aus dieser Liste.

Geben Sie dann den Zugangscode **«0000»** (vier Nullen) ein.

iCom wird nun zur Liste der Bluetooth-Geräte hinzugefügt.

5. Verbinden von iCom mit Ihrem Mobiltelefon.

Wählen Sie **«iCom»** im Menü **Meine Geräte** Ihres Mobiltelefons und anschließend **Verbinden**.

Bei einigen Telefonen können Sie die Option **«Automatische Verbindung»** einstellen. Dadurch kann iCom die Verbindung ohne Bestätigung automatisch herstellen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Funktion zu aktivieren, falls vorhanden.

Sollten Sie Schwierigkeiten beim Navigieren zu den Bluetooth-Einstellungen haben, konsultieren Sie bitte die Gebrauchsanweisung Ihres Mobiltelefons oder wenden Sie sich an einen Mobiltelefon-Fachhändler.