

# Uso de dispositivos de audio y FM

## Conexión mediante cable de audio



## Conexión mediante un sistema FM



Clavija estéreo de 3,5 mm

- Para poner en pausa/reiniciar la transmisión de entradas de audio desde cualquier fuente, pulse el botón principal.
- Para detener el audio, desactive la fuente de audio o desconecte el cable de audio.
- Para detener el receptor FM, apagarlo o desconectarlo de iCom.

Si la transmisión de señales mediante el cable de audio o el sistema FM no es estable, pulse el botón de encendido y apagado durante la transmisión para "bloquear" el programa de audio.

---

## Guía rápida de iCom y sus funciones

**Indicador luminoso** (para obtener más información, consulte las instrucciones de uso)

---

**Rojo, un parpadeo**  
= Apagado de iCom



**Verde**  
= Encendido de iCom



**Amarillo, interrupción fija**  
= Transmisión de audio  
bloqueada



**Amarillo, fijo**  
= Transmisión de audio



**Amarillo, parpadeo medio**  
= Transmisión de audio  
en pausa



**Azul, parpadeo medio**  
= 1 teléfono conectado o  
audio Bluetooth en pausa



---

Azul, parpadeo breve  
= 2 teléfonos conectados



---

Azul, fijo  
= Transmisión de Bluetooth



---


Para comprobar la versión de su iCom, pulse el botón de encendido y apagado una vez que se encuentre en modo en espera.



Amarillo, 3 parpadeos  
= Versión 3 de iCom,  
que ofrece compatibilidad con dos teléfonos, marcación por voz, remarcación del último número y bloqueo de audio.

---

Consulte a su audioprotesista para obtener más ayuda.

Para preservar su seguridad, lea detenidamente las instrucciones de uso de iCom. Preste especial atención a la sección "Información importante" y al siguiente símbolo  que hace referencia a las advertencias asociadas.

[www.phonak.es](http://www.phonak.es)




CE  
0682



# iCom Guía rápida y sus funciones

---

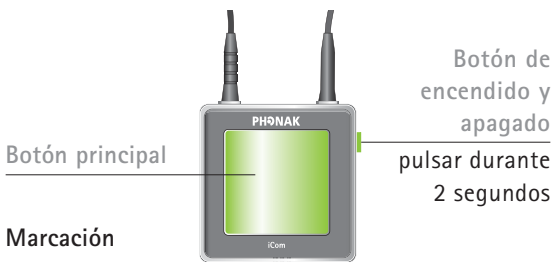

## Marcación

por voz

pulsar durante 2 segundos

## Remarcación del último número

pulsar 2 veces

## Recepción o finalización de

llamadas, aceptación de señal FM

pulsar 1 vez

## Rechazo de llamadas entrantes

pulsar durante 2 segundos

PHONAK

life is on

---

## Funciones de iCom

### **Marcación por voz**

Consulte el manual de usuario del teléfono para obtener información. Pulse el botón principal durante dos segundos. Una vez que oiga un pitido, diga el nombre del contacto al que desea llamar.\*

### **Remarcación del último número**

Para volver a marcar el último número, pulse dos veces el botón principal. Se activa el último número y se realiza la llamada.\*

\* El teléfono debe ser compatible con estas funciones y el audióprotesista debe haberlas activado. iCom debe encenderse cuando no se esté utilizando FM, escuchando música o realizando una llamada.

### **Bloqueo de audio**

Cuando esté utilizando un cable de audio (clavija) o un receptor FM.

Sin embargo, durante la pausa del altavoz o cuando la música se reproduce a un volumen suave, la señal de audio a veces disminuye.


A continuación, pulse el botón de encendido y apagado brevemente para "bloquear" la señal de audio.

---

# Inicio

## Carga de la pila de iCom

Puede seguir utilizando iCom mientras se carga.

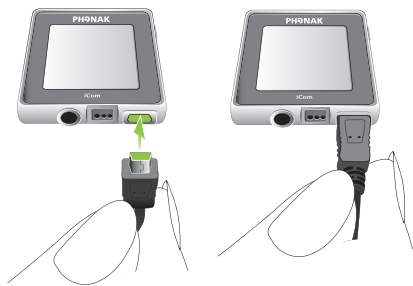


## Encendido y apagado de iCom



---

## Configuración de dispositivos Bluetooth

Antes de empezar a utilizar iCom con dispositivos Bluetooth, es necesario emparejar los dispositivos. Consulte las instrucciones de uso del iCom para obtener más información. El código de emparejamiento es "0000".

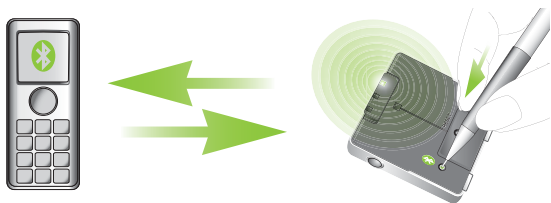

### Uso de iCom con uno o dos teléfonos móviles

- Puede conectar hasta dos teléfonos al mismo tiempo con iCom.
- Cada teléfono tiene su propio tono de llamada fijado.
- Para aceptar una llamada de teléfono entrante, pulse el botón principal. Oirá la voz del interlocutor en los audífonos. Recuerde que iCom capta la voz.
- Cuando haya una llamada activa, no se podrá atender a otra en el segundo teléfono.
- Si hay dos teléfonos conectados a la vez, la marcación por voz se aplica al último emparejado.

---

## Uso de iCom con teléfonos inalámbricos (DECT) o teléfonos antiguos

### Uso de teléfonos inalámbricos (DECT) o teléfonos antiguos con sólo el perfil "Auriculares"

Nota: Puede que en estos teléfonos el indicador de Bluetooth (luz azul) no parpadee a pesar de que se haya emparejado el teléfono antes.

**Paso 1:** Marque el número al que desee llamar en el teléfono o selecciónelo de la agenda.

**Paso 2:** Pulse el botón principal (o púlselo durante dos segundos si ya está en un programa de transmisión iCom).

**Paso 3:** Espere cinco segundos.

**Paso 4:** Se iniciará el proceso de marcación y su audífono cambiará al programa de teléfono automáticamente.