


iCom Snabbguide och funktioner

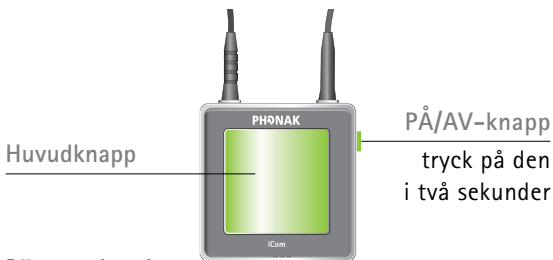

Röstuppringning

tryck på knappen i två sekunder

Återuppringning av senaste numret

tryck lätt två gånger

Svara eller avsluta samtalet,

acceptera FM-signal

tryck lätt

Avvisa inkommande samtal

tryck på knappen i två sekunder

PHONAK

life is on

Funktioner i iCom

Röstuppringning

Anvisningar finns i telefonens bruksanvisning. Tryck på huvudknappen i två sekunder. När du hör en signal, säger du namnet på den person som du önskar ringa till.*

Återuppringning av senaste numret

Tryck två gånger på huvudknappen för att ringa upp det nummer, som du senast ringde till. Det nummer som du senast ringde till aktiveras och samtalet kopplas.*

- * Telefonen måste ha stöd för dessa funktioner och funktionerna måste aktiveras av din audionom. iCom måste vara på, men du får varken lyssna på samtal, musik eller FM under tiden.


Ljudlås

Du använder ljudkabeln (uttag) eller en FM-mottagare. Under en talarpaus eller mycket dämpad musik försvinner emellertid ljudsignalen ibland. Tryck då lätt på PÅ/AV-knappen för att "låsa" ljudsignalen.

Komma igång

Ladda iCom-batteriet

Du kan fortsätta att använda iCom medan batteriet laddas.

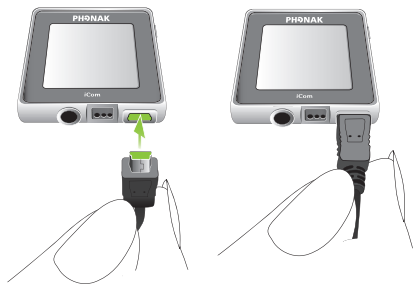


Sätta PÅ och stänga AV
din iCom



Installera Bluetooth-enheter

Innan du börjar använda din iCom tillsammans med Bluetooth-enheter, måste du koppla ihop enheterna. Anvisningar finns i huvudbruksanvisningen. Ihopkopplingskoden är "0000".

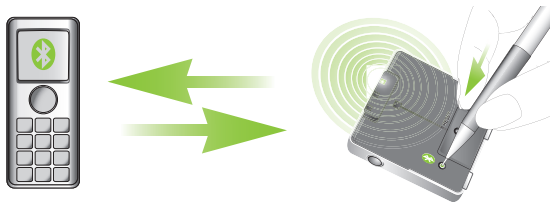

Använda iCom med en eller två mobiltelefoner

- Du kan ansluta upp till två telefoner samtidigt med iCom
- Varje telefon har sin egen bestämda ringsignal
- För att ta emot ett inkommande telefonsamtal trycker du lätt på huvudknappen. Du hör då uppringarens röst i dina hörapparater. Kom ihåg att iCom tar upp din röst.
- Du kan inte svara den andra telefonen under samtalet
- Om två telefoner är anslutna samtidigt, kan den sist ihopkopplade telefonen användas vid Röststoppning

Använda iCom med en trådlös telefon (DECT) eller äldre telefoner

Använda trådlösa telefoner (DECT) eller äldre telefoner med enbart "Hörlurar"-profil

Anmärkning: I dessa telefoner blinkar kanske inte Bluetooth-indikationslampan (blått ljus), även om telefonen ihopkopplades tidigare.

Steg 1: Knappa in önskat telefonnummer på telefonen eller välj nummer i telefonboken

Steg 2: Tryck lätt på huvudknappen (eller tryck på den i två sekunder, om du redan är i ett streaming iCom-program)

Steg 3: Vänta i fem sekunder

Steg 4: Uppringningen startar och din hörapparat växlar automatiskt över till telefonprogrammet

Använda ljudutrustning och FM

Anslutning via ljudkabel



Anslutning via ett FM-system



3,5 mm-stereouttag

- För att göra en paus i/starta om överföringen av ljudsignalerna från valfri källa trycker du på huvudknappen
- För att stoppa ljudet stänger du av ljudkällan eller kopplar ur ljudkabeln
- För att stoppa FM stänger du av FM eller kopplar ur FM-mottagaren från iCom

Om signalöverföringen via ljudkabel eller FM-system är instabil, trycker du lätt på PÅ/AV-knappen under överföringen för att "låsa" ljudprogrammet.

iCom, snabbguide och funktioner

Indikationslampa (mer information finns i bruksanvisningen)

Rött, en blinkning
= iCom stängs av



Grönt
= iCom sätts på



Gult, avbrutet fast sken
= Ljudöverföringen "låses"



Gult, fast sken
= Ljudöverföring



Gult, medelsnabbt blinkande
= Paus i ljudöverföringen



Blått, medelsnabbt blinkande
= en telefon ansluten eller
Bluetooth-ljud gör en paus



Blått, kort blinkande
= två telefoner anslutna



Blått, fast sken
= Bluetooth-överföring




Tryck en gång på PÅ/AV-knappen i standby-läge,
om du vill veta vilken iCom-version du har.



Gult, tre blinkningar
= iCom-version 3
erbjuder stöd för två telefoner, röstuppringning, återuppringning av senaste numret och ljudlås.

Du kan få ytterligare hjälp av audionomen.

Var god läs genom bruksanvisningen för iCom noga för din egen säkerhets skull. Ägna särskild uppmärksamhet åt avsnittet "Viktig information" och följande symbol , som hänvisar till motsvarande varningsmeddelanden.

www.phonak.se

