

Bluetooth-Kopplungsanweisung SmartLink+


SmartLink+ kann mit Bluetooth-Geräten verbunden werden, die folgenden Profile unterstützen:

- Headset (HS)
- Freisprechanlage (HF)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

Hinweis:

Wenn Bluetooth in Betrieb ist, hängt SmartLink+ von der Bluetooth-Funktionalität des Handys oder anderer Bluetooth-Geräte ab. Jedoch ist Bluetooth in solchen Geräten nicht immer gut eingebaut. Deshalb sollten Sie, wenn die Bluetooth-Funktionalität von SmartLink+ nicht so funktioniert wie erwartet, Ihren Bluetooth-Gerätehändler kontaktieren.

Koppeln mit einem Handy

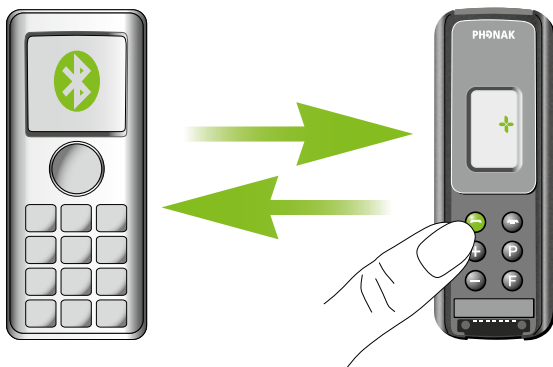

1. Schalten Sie Ihr Handy und den SmartLink+ ein. Legen Sie beide nebeneinander.

2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys ein.

Um die Bluetooth-Funktion Ihres Handys zu aktivieren, durchsuchen Sie dessen Haupt- und Untermenüs. Seine Bluetooth-Einstellungen können unter «Optionen», «Tools», «Einstellungen», «Verbindungen», «Konnektivität», «Applikationen», «Bedienungsfeld», «Installation» oder jede Kombination dieser Funktionen (z.B. «Menü» / «Einstellungen» / «Konnektivität» / «Bluetooth») hinterlegt sein.

3. Schalten Sie SmartLink+ in den Kopplungs-Modus.

Beginnen Sie den Kopplungs-Prozess mit SmartLink+, indem Sie die grüne Telefentaste 5 Sekunden gedrückt halten, bis das gesamte Display zu blinken anfängt. SmartLink+ wird für eine Minute im Kopplungs-Modus bleiben oder so lange bis das Koppeln abgeschlossen ist.

4. Mit Ihrem Handy nach SmartLink+ suchen.

Wählen Sie «ein neues Bluetooth-Gerät zufügen» auf Ihrem Handy. Das Handy beginnt nach der Suche nach allen aktiven Bluetooth-Geräten in Reichweite.

5. Kopplung fertig stellen.

Wenn eine Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte auf Ihrem Handy erscheint, wählen Sie SmartLink+. Sollte nach einem Passwort oder Sicherheitsschlüssel gefragt werden, dann geben Sie «0000» (vier Nullen) ein.

Hinweis: «0000» ist das Standard-Passwort und kann von Ihrem Audiologen oder Hörspezialisten auf Wunsch geändert werden. Ihr Handy stellt den Kopplungs-Prozess nun fertig. Wenn das Koppeln mit dem SmartLink+ und Ihrem Handy erfolgreich verlaufen ist, hört das Blinken im Display auf.


6. Verbinden.

Zusätzlich zum Koppeln, das nur einmal durchgeführt werden muss, müssen der SmartLink+ und das Handy ebenfalls miteinander verbunden werden. Dies geschieht entweder automatisch oder mittels des Handy-Menüs. Sollte nicht automatisch verbunden werden, wählen Sie in Ihrem Bluetooth-Funktionsmenü «Gekoppeltes Gerät» oder «Meine Geräte». Markieren Sie «SmartLink+» und wählen Sie «Verbinden». Einige Handys können nach dem gewünschten Bluetooth-Service fragen. Wählen Sie «Headset» und wenn erhältlich «Stereo-Headphones». Bei manchen Handys erscheint ein Headset-Symbol, das anzeigt, dass SmartLink+ verbunden ist.

Sollte nach einer erlaubten automatischen Verbindung gefragt werden, sollten Sie dies bejahen. Auf diese Weise werden SmartLink+ und das Handy automatisch wieder verbunden, wenn sie sich im Empfangsbereich befinden.

Bluetooth-Kopplungsanweisung SmartLink+

Koppeln mit einem A2DP-Gerät, wie einem Bluetooth MP3-Spieler

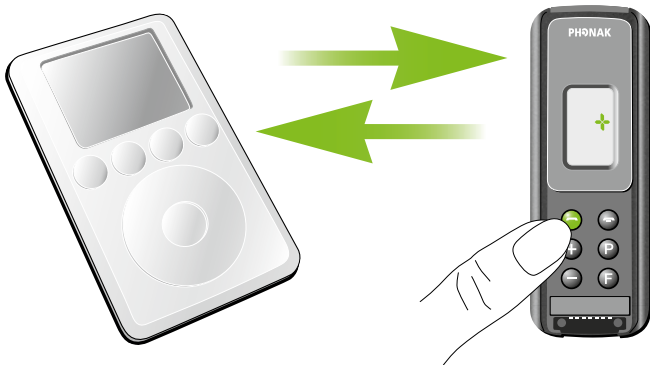

Hinweis:

Zur Vereinfachung, wird der Ausdruck «Bluetooth MP3» im unteren Text für ein A2DP-fähiges Bluetooth-Gerät gebraucht.

1. Laden Sie und schalten Sie den Bluetooth MP3-Spieler und SmartLink+ ein. Legen Sie beide nebeneinander.

2. Schalten Sie SmartLink+ in den Kopplungs-Modus.

Beginnen Sie den Kopplungs-Prozess mit SmartLink+, indem Sie die grüne Telefontaste 5 Sekunden gedrückt halten, bis das gesamte Display zu blinken anfängt. SmartLink+ wird für eine Minute im Kopplungs-Modus bleiben oder so lange bis das Koppeln abgeschlossen ist.

3. Bereiten Sie den Bluetooth MP3 Spieler für das Koppeln vor.


Schalten Sie Ihr Bluetooth MP3 in den Kopplungs-Modus. Schlagen Sie in Ihrer Gebrauchsanweisung Ihres Bluetooth MP3 nach, um zu lernen, wie dieser Vorgang ausgeführt werden muss. Sollte Ihr Bluetooth MP3 mit einem Display und einer Menüoption ausgestattet sein, ist der Kopplungs-Prozess derselbe, wie auf der ersten Seite dieses Dokumentes beschrieben.

4. Kopplung fertig stellen.

Wenn das SmartLink+ Display aufhört zu blinken, ist der Kopplungs-Prozess abgeschlossen. Drücken Sie auf «Play» an Ihrem Audio-Gerät. Sie sollten nun den Klang über ihr Hörsystem hören.

Bluetooth-Kopplungsanweisung SmartLink+

Koppeln mit einem Computer (PC)

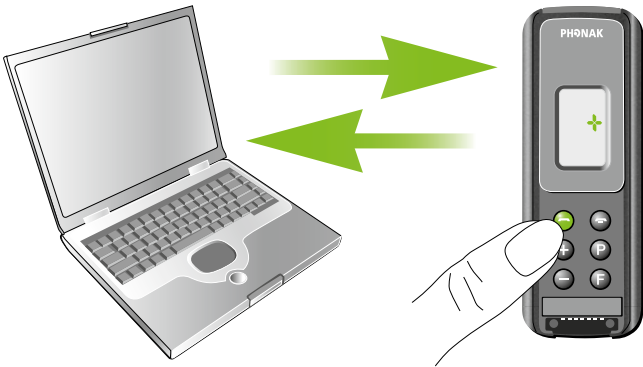

1. Schalten Sie den PC und den SmartLink+ ein. Legen Sie beide nebeneinander.

2. Schalten Sie Ihre Bluetooth-Funktion am PC ein.

Die Bluetooth-Funktion des PCs muss eingeschaltet sein: Entweder schalten Sie die eingebaute Bluetooth-Funktionalität am PC ein, oder sollte Ihr PC keine Bluetooth-Funktion haben, verbinden Sie einen externen USB-Bluetooth-Adapter. Öffnen Sie «Bluetooth-Geräte» an der Bedienungskonsole Ihres PCs oder rufen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres PCs mittels des Bluetooth-Symbols auf.

3. Schalten Sie SmartLink+ in den Kopplungs-Modus.

Beginnen Sie den Kopplungs-Prozess mit SmartLink+, indem Sie die grüne Telefontaste 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis das gesamte Display zu blinken anfängt. SmartLink+ wird für eine Minute im Kopplungs-Modus bleiben oder so lange bis das Koppeln abgeschlossen ist.

4. Suchen und koppeln Sie SmartLink+ mit Ihrem PC.

Wählen Sie auf Ihrem PC «Bluetooth-Gerät finden und hinzufügen».

Wählen Sie SmartLink+ aus der Liste gefundener Bluetooth-Geräte aus.

Wenn der PC Sie nach einem Passwort oder PIN fragt, geben Sie «0000» (vier Nullen) ein.

«0000» ist der Standardpasswort und kann von Ihrem Audiologen, auf Wunsch, geändert werden. Sollte das Passwort geändert worden sein, muss Ihr persönliches Passwort eingegeben werden.

Die Geräte bauen nun eine sichere Verbindung auf. Wenn SmartLink+ erfolgreich mit Ihrem PC verbunden wurde, hört das Blinken im Display auf.

5. Verbinden.

Wenn vom PC gefragt wird, welche Bluetooth-Verbindung gewählt werden soll, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Wählen Sie «Stereo Headset», damit Audio in Stereo gesendet werden kann. Nachdem Sie den zu aktivierenden Service ausgewählt haben, könne Sie die Verbindung abschliessen und die Bluetooth-Einstellungen des PCs verlassen.