

iSense

iSense Classic

Bruksanvisning



PHONAK

life is on

Innehållsförteckning

Välkommen	4
Online-resurser	5
<hr/>	
iSense Classic-paketet	6
<hr/>	
Viktiga iSense Classic-siffror	7
<hr/>	
Instrumentbeskrivning	8
Huvuddelar	8
iSense Classic, statusindikator	10
<hr/>	
Laddning av iSense Classic	16
<hr/>	
Komma igång	18
Fästa iSense Classic runt halsen	18
Fästa ledningen runt örat	19
Slå PÅ iSense Classic	21
Ställa in ljudvolymen	22
<hr/>	
Byta vaxfiltret	23
<hr/>	

Viktig information	25
Service och garanti	26
Överensstämmelsedeklaration	27
Phonak över hela världen	28

Välkommen

iSense Classic är en moderiktig, MP3-liknande FM-mottagare som tagits fram speciellt för lyssnare, som har svårt att uppfatta tal i komplexa lyssnings-situationer.

Vänligen läs igenom den här bruksanvisningen noggrant för att kunna utnyttja alla iSense Classic-funktioner.

Mer information om hur du använder FM-sändaren, som ingår i det kompletta FM-systemet, finns i din FM-sändares bruksanvisning (se även www.phonak.se). iSense är en kvalitetsprodukt, som är utvecklad av det schweiziska företaget Phonak, det världsledande företaget när det gäller FM-teknologi, innovation och tillförlitlighet. Med rätt skötsel och användning kommer iSense att hjälpa dig att höra och kommunicera bättre under många år.

Phonak – life is on

Online-resurser

För att få veta mer om iSense och Phonaks övriga FM-produkter, rekommenderar vi att du besöker följande webbplatser:

- **www.eSchoolDesk.com**

Den här webbplatsen skapades i första hand som stöd åt lärare. Den är emellertid även till hjälp för föräldrar och brukare. Den innehåller flera korta filmklipp, som förklarar hur olika produkttegenskaper och produktfunktioner fungerar. Den innehåller även specialavsnitt om hur man sköter och underhåller FM-system samt felsökning, som hjälper brukare att leva komfortabelt med sina FM-system.

- **www.phonak.se**

Detta är Phonaks webbplats. Gå till Brukare/Produktavsnittet och klicka sedan på FM-system för att hitta information om hela vårt sortiment av sändare och mottagare.

- **www.iSense.phonak.com**

Detta är iSense-hemsidan. Här kan du hitta information om iSense-produkter, detaljerade rekommendationer från brukare m.m.

- **www.FMeLibrary.com**

Detta är vårt vetenskapligt online-bibliotek, som bara handlar om FM-system. Här kan man hitta FM-relaterade artiklar och rapporter från hela världen.

iSense Classic-paketet

iSense Classic levereras som ett komplett paket, som innehåller vaxfilter, hållare och ett halsband.

iSense Classic



Extra vaxfilter



Viktiga iSense Classic-siffror

Driftstid:

- Driftstid i aktiverat läge tills batteriet är urladdat och måste laddas om:
 - ▷ 10 timmar
- Information om hur man laddar iSense Classic finns på sidan 16.


Räckvidd:

- Inne i en byggnad:
 - ▷ cirka 15 meter
- Utomhus:
 - ▷ cirka 40 – 50 meter
- 🚫 Kraftfull elektronisk utrustning, stora elektroniska installationer och metallstrukturer kan påverka och signifikant reducera räckvidden hos iSense.

Instrumentbeskrivning

Huvuddelar


- ① Ledning
- ② Vaxfilter
- ③ Hållare

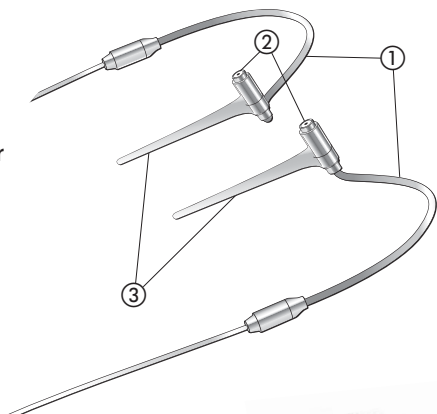

- ④ Y-kabel tillgänglig i två storlekar
- ⑤ Halsbandsadapter
- ⑥ Halsband



- ⑦ Statusindikator
- ⑧ Volymkontroll
- ⑨ PÅ/AV-omkopplare

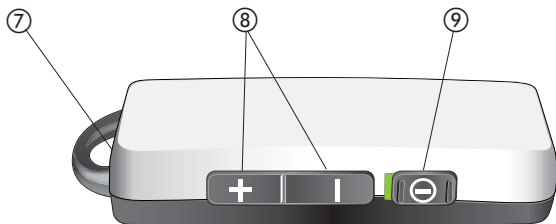


iSense Classic, statusindikator

Grön indikator



Orange indikator

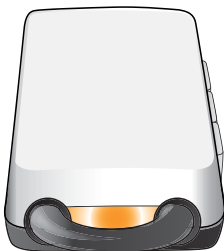

- ① Batteriet nästan urladdat
- ② Batteriet helt urladdat
- ③ Batteriladdning pågår
- ④ Batteriladdning slutförd
- ⑤ Volymkontrollens lägsta/högsta läge
- ⑥ Volymkontrollens mittläge



Lampan blinkar

Allmän indikation



Koppla PÅ iSense Classic



Den gröna lampan lyser
i tre sekunder



Indikation om batteriets laddningsnivå

a)  60 sekunder 
Tre orange blinkningar (och tre pip),
som upprepas var 60:e sekund

b) 
orange blinkningar (och 10 pip)



Innebörd	Åtgärd
iSense Classic har kopplats PÅ och är klar att användas.	Koppla PÅ sändaren (t ex inspiro).
Batteriet är nästan urladdat och måste laddas inom en timme.	Ladda iSense Classic och sändaren (t ex inspiro) så snart som möjligt. *
Batteriet är helt urladdat. iSense Classic kan inte längre användas utan att först laddas upp. iSense Classic stängs automatiskt AV efter tio blinkningar.	Ladda iSense Classic och sändaren (t ex inspiro) så snart som möjligt. *

* För att förenkla hanteringen rekommenderas att iSense Classic och sändaren alltid laddas samtidigt.

Instrumentbeskrivning

iSense Classic, statusindikator

Indikation om laddningsförloppet

- c) 

Gröna dubbelblinkningar var femte sekund




- d) 

Den gröna lampan lyser hela tiden

Volymindikation

- e)  En orange blinkning
(och ett dubbelpip)

- f)  En grön blinkning
(och ett dubbelpip)

Innebörd	Åtgärd
iSense Classic är ansluten till batteriladdaren och laddas.	Det tar cirka två timmar att ladda ett helt urladdat batteri. Inom en timme är batteriets laddningsnivå cirka 80%.
iSense Classic-batteriet är fulladdat	Koppla ur batteriladdaren. Den gröna lampan slocknar och iSense Classic är klar att användas igen.


Volymkontrollen är i högsta eller lägsta läget.

Volymkontrollen är i mittläget.

Laddning av iSense Classic

- a) Ladda iSense Classic och sändaren helt innan du använder systemet för första gången. Ett urladdat iSense Classic-batteri har
- 80% laddningsnivå efter en timme
 - 100% laddningsnivå efter två timmar


Sätt i batteriladdarens väggkontakt i ett lätt åtkomligt vägguttag.

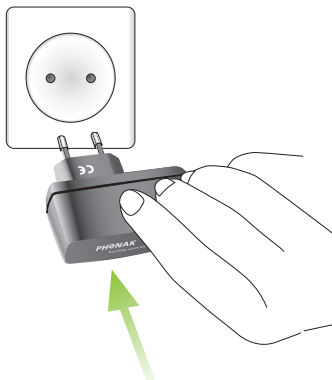

 Använd endast batteriladdare från Phonak.

- b) Sätt i batteriladdarens kontakt i iSense Classic-laddningsuttaget.



-  iSense Classic skall endast laddas vid en omgivningstemperatur på 0°C – 40°C.


Komma igång

Fästa iSense Classic runt halsen

Kontrollera att kabeln är ansluten till ljuduttaget.




Bär iSense Classic runt halsen, så som visas på bilden.

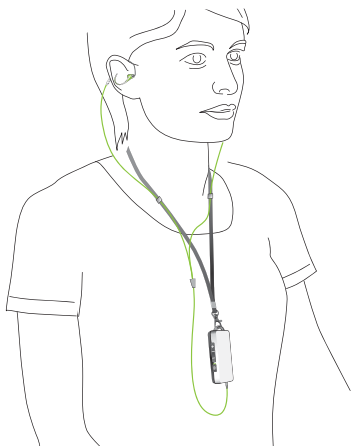


Fästa ledningen runt örat


Kontrollera att de båda ledningarna är väl böjda och att hållarna är festsatta.

Ledning för
vänster öra

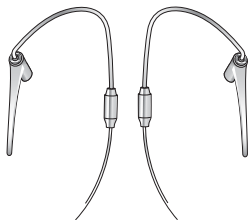


Ledning för
höger öra

 **Använd aldrig
iSense Classic utan
hållarna!**

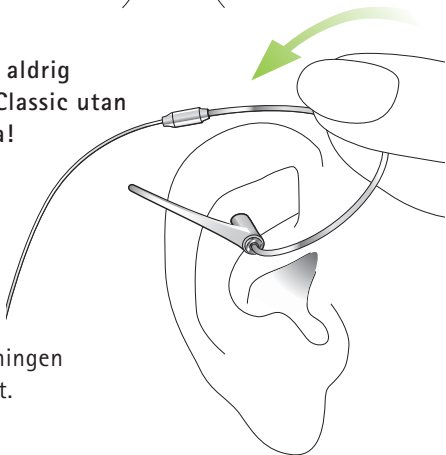

Placera ledningen
ovanför örat.


Komma igång

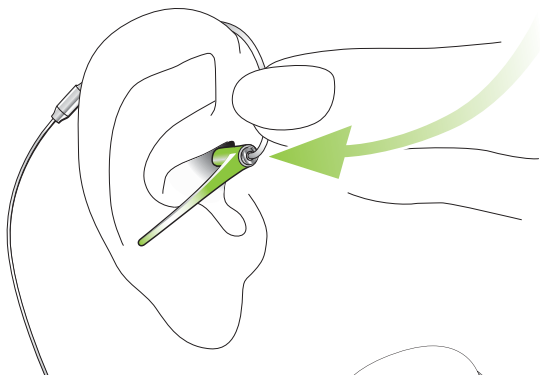

Se till att mottagaren är placerad mitt framför hörselgången. Använd den transparenta hållaren för att placera mottagaren i concha (öronmusslan).



Slå PÅ iSense Classic

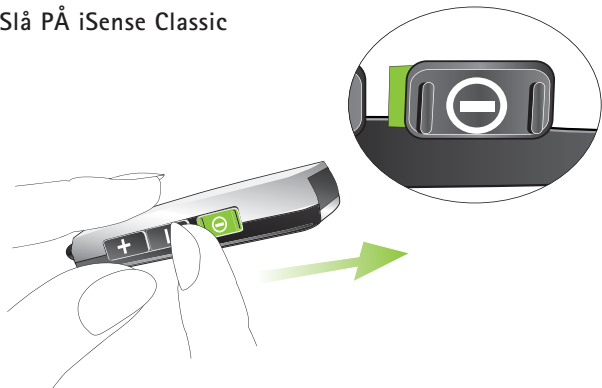

Skjut PÅ/AV-reglaget åt höger.

När du har kopplat PÅ iSense Classic, koppla då PÅ FM-sändaren (t ex inspiro)

Komma igång

Ställa in ljudvolymen

Volym upp



Volym ner



Lätt tryckning på knappen:

Volymen ökar/minskar med endast ett steg.

Lång tryckning på knappen:


Volymen ökar/minskar kontinuerligt tills du släpper knappen.

När du har ställt in önskad ljudvolym, lagrar iSense Classic automatiskt denna inställning, t o m efter det att apparaten har stängts AV.

Om den trådlöst överförda signalen inte är tillräckligt stark, öka då volymen på iSense Classic.

Byta vaxfiltret

Vaxfiltret är en utbytbar del, som skyddar mottagaren från öronvax. Då och då måste vaxfiltret bytas ut. Följ audionomens råd när det gäller byte av vaxfilter för att få bäst resultat.

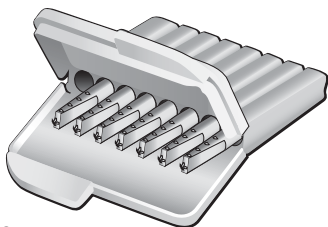

borttagningssida




isättningsida

Använd enbart de verktyg som medföljer iSense vid utbyte av vaxfiltret.


Dessa verktyg är konstruerade för engångsanvändning; kassera dem efter användning.

Byta vaxfiltret



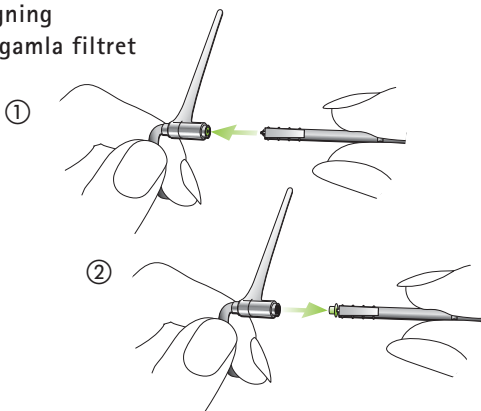

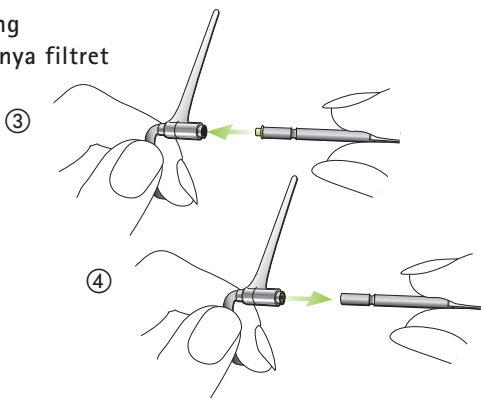


Borttagning av det gamla filtret



Isättning av det nya filtret



Viktig information

-  Använd inte ditt FM-system på en plats där det är förbjudet att använda elektronisk utrustning, som t ex i flygplan eller på sjukhus. I tveksamma fall, var god rådfråga ansvarig person.
-  Personer med pacemakers eller annan medicinsk utrustning ska ALLTID rådfråga sin läkare, tillverkaren av pacemakern eller inhämta annan medicinsk rådgivning FÖRE användning av FM-systemet. Användning av FM-system tillsammans med en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska ALLTID ske enligt säkerhetsrekommendationerna från den läkare, som ansvarar för pacemakern eller från tillverkaren av pacemakern.
-  Kom ihåg att radiosignaler även kan tas emot och höras av andra mottagare.
-  Använd inte vatten eller andra vätskor vid rengöring av iSense Classic
-  Använd endast originaltillbehör från Phonak.
-  Din iSense Classic bör endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad.
-  Använd aldrig iSense Classic utan hållarna.

Service och garanti

Som tillverkare lämnar Phonak en fabriksgaranti för din iSense Classic. Denna garanti omfattar alla tillverknings- och materialdefekter. Problem som uppstår med iSense Classic, orsakade av felaktig hantering eller skötsel, eller av reparationer som utförts av en oauktoriserad part, omfattas inte av garantin. Mer information om denna garanti lämnas av försäljningsstället. Försäljaren antecknar nedan serienumret på din iSense Classic. Numret behövs i händelse av en garantireparation.

iSense Classic-serienummer:

Inköpsdatum:

Överensstämmelsedeklaration

Härmed intygar Phonak Communications AG att iSense Classic uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta föreskrifter i 1999/5/EC-direktivet. För att erhålla en kopia av Överensstämmelsedeklarationen, kontakta vänligen närmaste Phonak-representant, med adress som finns i listan över Phonak-importörer över hela världen.

Denna enhet uppfyller Del 15 och Del 95 av FCC-reglerna och RSS 210-reglerna i Industry Canada. För handhavandet gäller följande två villkor: (1) Denna enhet kan inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera eventuella mottagna störningar, inklusive störningar, som kan orsaka oönskad funktion.

⚠ Varning: Ändringar eller modifieringar som utförs på denna utrustning och som inte uttryckligen godkänts av Phonak kan leda till att brukarens behörighet att använda denna utrustning blir ogiltig.

Phonak över hela världen

Dotterbolag:	(mer information finns på www.phonak.se)
Australien	Phonak Australasia Pty. Ltd. Baulkham Hills N.S.W 2153
Belgien	Ets Lapperre B.H.A.C. NV B-1702 Groot-Bijgaarden Phonak Belgium NV, B-1700 Dilbeek
Brasilien	CAS Produtos Médicos São Paulo – SP 04363-100
Canada	Phonak Canada Limited Mississauga, Ontario L5W 0B3
Danmark	Phonak Danmark A/S, Nitvej 10 2000 Frederiksberg
Frankrike	Phonak France SA, 69500 Bron
Indien	Phonak Indien Pvt. Ltd., 100 034 New Delhi
Italien	Phonak Italia S.r.l., 20159 Milano
Japan	Phonak Japan Co., Ltd., Tokyo 101-0044
Jordanien	Phonak Middle East, 11181 Amman
Kina	Phonak (Shanghai) Co. Ltd. Shanghai City 200233
Mexico	Phonak Mexicana, S.A. de C.V. 03920, México
Nederländerna	Phonak B.V., 3439 ME Nieuwegein
Norge	Phonak AS, 0105 Oslo
Nya Zeeland	Phonak New Zealand Ltd., Takapuna Auckland 9
Polen	Phonak Polska SP Z.0.0 00-567 Warszawa
Portugal	Phonak Ibérica S.A., 03008 Alicante, Spanien
Ryssland	Phonak CIS Ltd., Moscow, 115114
Schweiz	Phonak AG, Phonak Schweiz, 8712 Stäfa
Spanien	Phonak Ibérica S.A., 03008 Alicante

Storbritannien	Phonak UK Limited Warrington, Cheshire WA1 1PP
Sverige	Phonak AB, 117 43 Stockholm
Turkiet	Phonak Turkey A.S., 34357 Istanbul
Tyskland	Phonak GmbH, 70736 Fellbach-Oeffingen EG-representant
USA	Phonak LLC, Warrenville, IL 60555-3927
Österrike	Hansaton Akustische Geräte GmbH 5020 Salzburg

**Oberoende
generalagenter:** En komplett förteckning över importörer
av Phonaks produkter finns på Phonaks
hemsida: www.phonak.se. Besök oss
eller be din audionom om mer information.

Tillverkare: Phonak Communications AG
Länggasse 17, CH-3280 Murten, Schweiz



CE-märkningen är en bekräftelse av Phonak AG på att den här Phonak-produkten uppfyller kraven i R&TTE-direktivet 1999/5/EC om radio- och teleterminalutrustning.

Varningstecknet innebär att det i en eller flera europeiska stater finns potentiella begränsningar, när det gäller användning av utrustningen.



Denna symbol anger att det är viktigt att brukaren följer tillämpliga varningsmeddelanden, som finns i den här bruksanvisningen.



Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder, att denna produkt inte ska behandlas som hushållsavfall. Återlämna din gamla produkt till din hörcentral, när du inte har bruk för den längre. Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt, bidrar du till att förebygga eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Användningsföreskrifter

Denna produkt är konstruerad för att fungera felfritt utan begränsningar vid avsedd användning, om inget annat anges i denna bruksanvisning.

Transport- och lagringsföreskrifter

Temperaturen får inte överstiga $-20 / 60^{\circ}\text{C}$ vid en relativ luftfuktighet på 65 % vid längre perioder under transport och lagring. Ett lufttryck mellan 500 och 1100 hPa är inte skadligt för den här enheten.



www.phonak.se

029-0094-09/V1.00/2008-12/A+W Printed in Switzerland © Phonak AG All rights reserved