


Estación base Phonak TVLink S

Datos técnicos

La estación base TVLink S es una solución específica para televisión que ofrece una excelente experiencia auditiva. La transmisión de baja latencia desde la televisión a los audífonos y la de StereoSound aportan una calidad sonora excelente. Enchufar y funcionar: configuración sencilla de un solo paso en menos de 60 segundos. El uso de la estación base Phonak TVLink S con ComPilot convierte cualquier audífono inalámbrico de Phonak en un auricular inalámbrico ligero.



Descripción

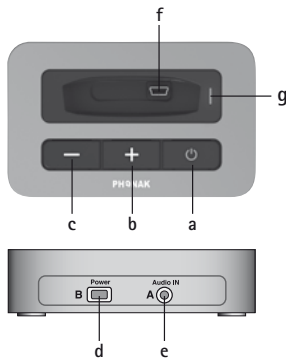

Botones

- a Botón de encendido y apagado
- b Control de volumen (aumentar)
- c Control de volumen (disminuir)

Entradas

- d Entrada de alimentación (mini-USB)
- e Entrada de audio (clavija de 3,5 mm)
- f Ranura de carga ComPilot
- g Luz de estado

Características especiales

- Compatible con ComPilot de Phonak
- Opción de crear prueba de sonido
- Visualización de la falta de entrada de audio
- Instalación rápida y sencilla
- Conjunto completo con enchufe y cables
- No es necesario que los audífonos estén en la misma línea visual
- Alcance de transmisión de hasta 30 metros (100 pies)
- Ajuste de volumen digital con realimentación audiovisual
- Ranura de carga integrada para ComPilot

Información general

Dimensiones:	L x An. x Al.: 90 x 60 x 23 mm (3,8 x 2,5 x 1 pulgadas)
Peso:	100 g
Color:	Plateado metálico claro
Condiciones de funcionamiento:	El producto se ha diseñado para un funcionamiento sin problemas siempre que la utilización sea la indicada. A menos que se indique lo contrario en estas instrucciones de uso, se debe usar a una temperatura de -10°/55° Celsius y con una humedad relativa de <95% (sin condensación)
Condiciones de transporte y almacenamiento:	-20°/60° Celsius y humedad relativa del 90% durante un período largo de tiempo

Indicadores de la luz de estado

- Encendido con entrada de audio
- - - Encendido sin entrada de audio
- Transmitiendo a ComPilot
- - - Transmisión pausada
- Vinculación con Bluetooth

Vinculación manual con Bluetooth:

- Pulse el botón de encendido y apagado durante 5 segundos

Eliminación de la tabla de vinculación con Bluetooth:

- Pulse el botón de encendido y apagado durante 10 segundos



Datos técnicos

Estación base Phonak TVLink S

Fuente de alimentación

Tipo:	CC, estabilizada
Tensión secundaria:	5 V de CC
Corriente máx.:	500 mA
Enchufe:	Mini-USB
Nota importante:	Utilice sólo el enchufe original de Phonak o un adaptador USB certificado de alimentación > 500 mA

Información sobre audio

Entrada de audio:	Con cable (toma de 3,5 mm)
Calidad del audio:	Estéreo, 20 Hz – 22 kHz

Basado en tecnología Bluetooth®

Perfil de Bluetooth:	
Perfil de distribución de audio avanzado, A2DP	<ul style="list-style-type: none">Optimizado para el uso con ComPilot de PhonakNo se garantiza el cumplimiento de los dispositivos que no sean de Phonak
Rango de frecuencia:	De 2402,0 a 2,480,0 MHz
Potencia de RF:	Max. 100 mW
Radio de alcance de Bluetooth:	Hasta 30 m (100 pies)
Conformidad de Bluetooth:	Bluetooth versión 2.1, Clase 1
Número máx. de dispositivos vinculados:	4
QDID:	B018562

Normativas


Europa	
Radio:	EN 300 328
EMC:	EN 301.489
Seguridad eléctrica:	EN 60950-1

EE. UU.	CFR 47, part 15
----------------	-----------------

Canadá	RSS-210 Issue 8
---------------	-----------------



La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Phonak está sujeto a la correspondiente licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

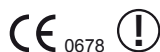

Este dispositivo es de clase 2 y puede funcionar en los estados miembro de la Unión Europea sin restricciones de uso en interiores, pero en Francia no se puede utilizar en exteriores.

Accesorios

- Clavija para cable de audio de 3,5 mm
- Cable de audio para RCA/Cinch
- Adaptador SCART (opcional)
- Enchufe: específico de cada país
- Instrucciones de uso
- Guía de instalación rápida

Nota de compatibilidad:

Asegúrese de que se usa la siguiente combinación:



Transmisor:	ComPilot	iCom
Ranura de carga:	TVLink S	TVLink
Características:	Forma redonda Color plateado	Forma rectangular Color bronce