


# Station de base Phonak TVLink S

## Données techniques

La station de base Phonak TVLink S est une solution dédiée pour la télévision qui offre une expérience auditive exceptionnelle. La faible latence de transmission du téléviseur aux aides auditives et StereoSound procurent une excellente qualité sonore. Véritablement 'plug & play' et configuré en une seule étape, elle est prête à l'emploi en moins de 60 secondes. La station de base Phonak TVLink S, couplée à Phonak ComPilot, transforme toute aide auditive sans fil de Phonak (sauf les modèles Petite) en une oreillette sans fil très légère.



### Description

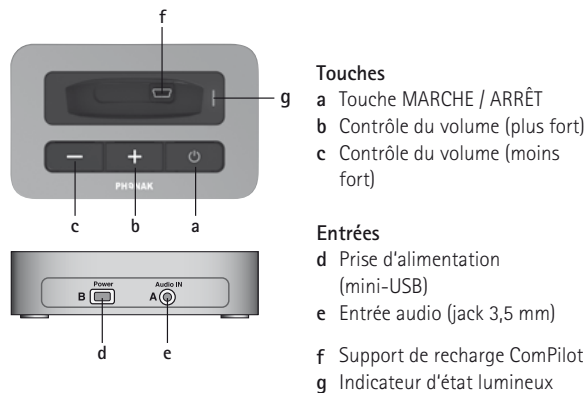

#### Touches

- a Touche MARCHÉ / ARRÊT
- b Contrôle du volume (plus fort)
- c Contrôle du volume (moins fort)

#### Entrées

- d Prise d'alimentation (mini-USB)
- e Entrée audio (jack 3,5 mm)
- f Support de recharge ComPilot
- g Indicateur d'état lumineux

### Fonctions spéciales

- Compatible avec Phonak ComPilot
- Générateur de son test
- Indication visuelle de l'absence de signal d'entrée audio
- Installation simple et rapide
- Livré complet avec alimentation et câbles
- Inutile d'être en vue des aides auditives
- Jusqu'à 30 mètres (100 ft) de portée
- Ajustement numérique du volume avec confirmation audio-visuelle
- Chargeur intégré pour Phonak ComPilot

### Informations générales

Dimensions:	L x W x H: 90 x 60 x 23 mm (3.8 x 2.5 x 1 pouces)
Poids:	100 g
Couleur:	Argent clair métallisé
Conditions de fonctionnement:	Sauf cas particulier précisé dans le mode d'emploi, ce produit a été conçu pour fonctionner correctement quand il est utilisé dans les règles. -10° / +55° Celsius et humidité relative < 95% (sans condensation).
Conditions de transport et de stockage:	Température -20°/+60° Celsius et 90% d'humidité relative pour une période prolongée

### Indicateur d'état

- En marche avec signal d'entrée audio
- - - En marche sans signal d'entrée audio
- Transmission à ComPilot
- - - Pause de transmission
- Couplage Bluetooth

Couplage Bluetooth manuel:

- Presser la touche MARCHÉ / ARRÊT pendant 5 secondes

Suppression du couplage Bluetooth:

- Presser la touche MARCHÉ / ARRÊT pendant 10 secondes



# Données techniques

## Station de base Phonak TV Link S

### Source d'alimentation

Type:	Continue stabilisée
Tension au secondaire:	5 volts continus
Courant maximal:	500 mA
Prise:	mini-USB
<b>Remarque importante:</b>	Utiliser exclusivement l'alimentation originale Phonak ou un adaptateur d'alimentation certifié USB > 500 mA

### Informations audio

Entrée audio:	Câblée (prise de 3,5 mm)
Qualité audio:	Stéréo, 20 Hz - 22 kHz

### Basé sur la technologie Bluetooth®

Profil Bluetooth:	
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimisé pour être utilisé avec Phonak ComPilot</li> <li>La conformité avec les appareils autres que Phonak n'est pas garantie</li> </ul>
Bande passante:	2402,0 à 2480,0 MHz
Puissance RF:	100 mW max
Portée Bluetooth:	Jusqu'à 30 m (100 ft.)
Conformité Bluetooth:	Bluetooth version 2.1, Classe 1
Maximum d'appareils couplés:	4
QDID:	B018562

### Normes

<b>Europe</b>	
Radio:	EN 300 328
CEM:	EN 301.489
Sécurité électrique:	EN 60950-1

<b>USA</b>	CFR 47, part 15
------------	-----------------

<b>Canada</b>	RSS-210 Issue 8
---------------	-----------------



Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Phonak est faite sous licence. Toutes les autres marques déposées ou appellations commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Cet appareil est un appareil de classe 2 qui peut fonctionner sans restriction dans tous les pays membres de l'Union Européenne quand il est utilisé à l'intérieur, mais il ne doit pas être utilisé à l'extérieur en France.

### Accessoires

- Câble audio avec fiche de 3,5 mm
- Câble audio RCA/Cinch
- Adaptateur SCART/Peritel (optionnel)
- Prise d'alimentation: selon les pays
- Mode d'emploi
- Guide d'installation rapide

### Note sur la compatibilité:

Assurez-vous d'utiliser l'une des combinaisons suivantes:



<b>Emetteur:</b>	Phonak ComPilot	iCom
<b>Station de base:</b>	TVLink S	TVLink
<b>Caractéristiques:</b>	Forme arrondie Couleur argent	Forme rectangulaire Couleur bronze