

Click'nTalk


Руководство по эксплуатации



PHONAK

life is on

Описание

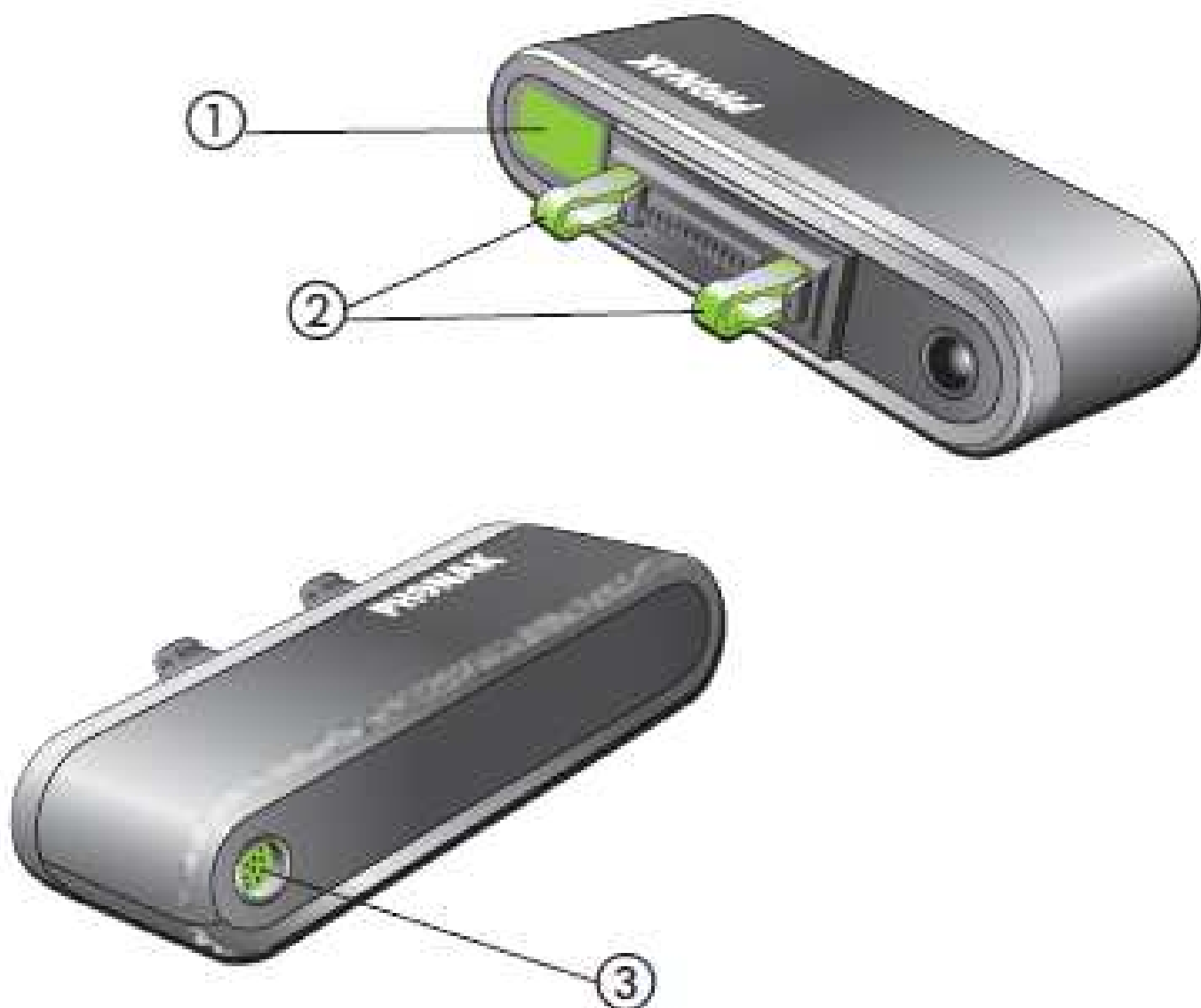

- (1) Этикетка
- (2) Разъем
- (3) Микрофон

Введение

Спасибо за выбор Click'nTalk компании Phonak. Click'nTalk осуществляет беспроводную передачу телефонного разговора непосредственно в слуховые аппараты Phonak с цифровым качеством звучания и одновременно в оба уха. Click'nTalk обеспечивает высококачественную передачу речи из вашего мобильного телефона в слуховые аппараты.


Чтобы полностью воспользоваться всеми преимуществами Click'nTalk, внимательно ознакомьтесь с этим руководством. Если у вас возникли вопросы, обратитесь к специалисту. Более подробная информация размещена на сайтах www.phonak.com и www.phonak.ru.

Phonak – life is on

Phonak – жизнь в действии

Важная информация


Каждая модель Click'nTalk предназначена для конкретных типов и брендов мобильных телефонов. Справочник по совместимости Click'nTalk и мобильных телефонов вы найдете на страничке <http://clickntalk.phonak.com/>

 Ознакомьтесь также с руководством по эксплуатации своего мобильного телефона.


Приступая к работе


Аккуратно подключите Click'nTalk к аудиоразъему телефона (1). Расположение и внешний вид разъема могут зависеть от модели мобильного телефона.



Через несколько секунд на экране мобильного телефона появится значок гарнитуры . При необходимости выберите в меню мобильного телефона пункт "проводная гарнитура".



 Для транспортировки отключайте Click'nTalk. Возьмите Click'nTalk двумя пальцами и аккуратно выньте его из разъема (2).

 **Перед тем, как позвонить по телефону, убедитесь, что Click'nTalk надежно подключен к разъему.**

Использование телефона

Для принятия, отклонения и посылки вызовов пользуйтесь клавишами мобильного телефона.



 Для более быстрого подключения к слуховым аппаратам пользуйтесь функциональными клавишами и рингтонами.



Поднесите мобильный телефон к уху, как обычно (2). Слуховые аппараты автоматически переключатся в режим телефона в течение 2 секунд.

Чтобы вернуть слуховые аппараты в обычный режим работы, отстраните Click'nTalk более чем на 40 см от слуховых аппаратов. Для предотвращения случайного прерывания разговора слуховые аппараты будут оставаться в режиме телефона еще в течение 13 секунд.

Во время разговора максимальное расстояние между Click'nTalk и обоими слуховыми аппаратами не должно превышать 25 см. При перемещении мобильного телефона к другому уху звук может прерваться. Это нормально и не ведет к разъединению связи.

Отключение микрофона

Отключение и повторное включение микрофона производится, как у обычной проводной гарнитуры. Подробности вы найдете в руководстве по эксплуатации вашего мобильного телефона.

Сочетание Click'nTalk с другими устройствами









Click'nTalk предназначен исключительно для работы со слуховыми аппаратами Phonak. Мы не рекомендуем одновременно пользоваться другими устройствами, такими как iCom или индукционная петля.







Питание

Click'nTalk питается непосредственно через разъем и в режиме ожидания повышает расход энергии мобильным телефоном примерно на 10%. Для увеличения времени работы мобильного телефона в режиме ожидания, отключайте Click'nTalk, если вы не пользуетесь им.

Перед тем, как начать заряжать мобильный телефон, отключите Click'nTalk от разъема.

Важная информация

-  Протирайте Click'nTalk влажной тканью. Никогда не пользуйтесь чистящими средствами или спиртом.
-  Оберегайте Click'nTalk от избыточной влажности, перегрева, ударов и вибрации.
-  Не прикасайтесь к контактам разъема и оберегайте отверстие микрофона и разъем от загрязнения.
-  Храните устройство в недоступном для детей (младше 3 лет) месте.
-  Людям, пользующимся медицинскими устройствами, такими как кардиостимуляторы, запрещено использовать Click'nTalk.
-  Технология индукционной передачи цифровой информации, используемая в данном устройстве, чрезвычайно надежна и практически не подвержена внешним помехам. Тем не менее, мы рекомендуем не приближаться к источникам сильных электромагнитных полей (напр., компьютерные терминалы) ближе, чем на 60 см.
-  Рентгеновское излучение (напр., компьютерная или магнитно-резонансная томография) может отрицательно сказаться на работе устройства. Не пользуйтесь Click'nTalk там, где запрещено использование электронных устройств.
-  Если вы недовольны качеством звучания, обратитесь к специалисту.

-  Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию устройства.
-  Вскрытие устройства может привести к его повреждению. При возникновении неисправностей обратитесь к специалисту. Ремонт Click'nTalk осуществляется только в уполномоченных сервисных центрах
-  В районах со слабым покрытием GSM мобильный телефон может создавать помехи в виде шума в слуховых аппаратах.
-  Подключение к несовместимой модели мобильного телефона может повредить телефон или Click'nTalk. Список совместимых телефонов вы найдете на страничке <http://clickntalk.phonak.com/>
-  Подключайте и отключайте устройство с осторожностью. Чрезмерное усилие может привести к его повреждению.
-  Внешний вид разъема (2) зависит от модели Click'nTalk.

Гарантийные обязательства

Гарантийное обслуживание устройства Click'nTalk

осуществляет компания _____.

Средний срок службы устройства Click'nTalk _____ лет.

Бесплатное гарантийное обслуживание устройства Click'nTalk осуществляется в течение _____ со дня продажи (с отметкой о ремонте в гарантийном талоне) при:

- наличии даты продажи, печати и подписи представителя предприятия-изготовителя или торгующей организации в данном руководстве и гарантийном талоне;
- предъявлении изделия в чистом виде.

В случае отсутствия гарантийного талона или даты продажи в гарантийном талоне, гарантийные обязательства на устройство Click'nTalk вступают в силу с даты проверки.

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства Click'nTalk:

- с механическими повреждениями;
- носящие следы химического воздействия;
- подвергавшиеся самостоятельной разборке, а также при нарушении условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации;
- при обращении в неуполномоченные сервисные центры.

В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

Свидетельство о приемке и продаже

....Устройство Click'nTalk _____ (Phonak)

серийный № _____

признано годным для эксплуатации.

Устройство Click'nTalk сертифицировано. Сертификат
соответствия _____.

Дата проверки _____

Штамп

Дата продажи _____

м.п.

*Адрес предприятия, осуществляющего
гарантийное обслуживание:*

<p>Корешок талона №2 на гарантийное обслуживание</p> <p>Устройство</p> <p>Click'nTalk _____</p> <p>Серийный № _____</p> <p>Дата проверки _____</p> <p>Изъят _____</p> <p>Представитель ремонтной организации _____ м.п.</p>	<p>Корешок талона №1 на гарантийное обслуживание</p> <p>Устройство</p> <p>Click'nTalk _____</p> <p>Серийный № _____</p> <p>Дата проверки _____</p> <p>Изъят _____</p> <p>Представитель ремонтной организации _____ м.п.</p>
--	--

ТАЛОН № 2 на гарантийное обслуживание
Устройство Click'nTalk _____

Серийный № _____

Дата проверки _____ Штамп _____

Дата продажи _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.

ТАЛОН № 1 на гарантийное обслуживание
Устройство Click'nTalk _____

Серийный № _____

Дата проверки _____ Штамп _____

Дата продажи _____

Представитель ремонтной
организации _____ м.п.

**Фонак АГ,
Лаубисрютиштрассе 28,
СН-8712 Штефа, Швейцария**

Центр слухопротезирования:

