

Phonak PilotOne

Пульт дистанционного управления

Руководство по эксплуатации



PHONAK

life is on

Содержание

1. Введение 5

2. Важная информация:

**Прочтите перед первым использованием
пульты дистанционного управления**

Phonak PilotOne 6

Предупреждения о возможном риске 6

Информация по безопасности продукции 8

3. Описание 10

4. Пошаговая инструкция по использованию пульты дистанционного управления

Phonak PilotOne 11

Шаг 1. Установка или замена батареи 11

Шаг 2. Блокировка и разблокирование
пульты дистанционного управления 12

Шаг 3. FlexControl / Регулировка громкости 12

Шаг 4. Кнопка переключения программ 13

Шаг 5. Кнопка возврата ("Home") 13

Шаг 6. Световой индикатор состояния 14

5. Поиск и устранение неисправностей 16

6. Гарантийные обязательства 18

1. Введение

Поздравляем Вас с приобретением высококачественного швейцарского изделия Phonak PilotOne.

Оно разработано компанией Phonak – одним из мировых лидеров в производстве систем коррекции слуха.

Пульт Phonak PilotOne обеспечит Вам доступ к важнейшим функциям Ваших слуховых аппаратов. Он гарантирует простоту управления аппаратами и комфортность их использования в любой обстановке.

Чтобы максимально воспользоваться всеми преимуществами Вашего нового пульта дистанционного управления, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к специалисту-сурдологу.



Phonak – жизнь в действии!

www.phonak.ru

2. Важная информация


Перед началом использования пульта дистанционного управления Phonak PilotOne внимательно ознакомьтесь с информацией, представленной на последующих страницах.

2.1. Предупреждения о возможном риске

- ⚠ Держите пульт дистанционного управления в месте, недосягаемом для детей младше трех лет.
- ⚠ Пользуйтесь только тем пультом PilotOne, который был запрограммирован специально для Вас специалистом-сурдологом.
- ⚠ Не допускается внесение несанкционированных изменений в пульт PilotOne.
- ⚠ Батареи токсичны при проглатывании! В случае проглатывания батарей немедленно обратитесь к врачу!

⚠ Допускается подключение только тех внешних устройств, которые прошли проверку на соответствие стандартам IECXXXXX. Пользуйтесь только одобренными Phonak AG принадлежностями.

⚠ Порт мини-USB используется исключительно для программирования специалистом-сурдологом.

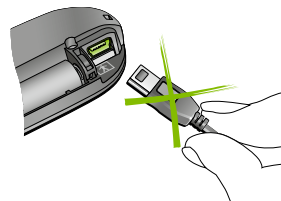


⚠ **Возможные помехи.** Связь данного пульта дистанционного управления со слуховыми аппаратами осуществляется посредством передачи цифровых сигналов малой мощности. Маловероятно, но не исключено возникновение помех в работе таких медицинских устройств, как кардиостимуляторы. Поэтому пользователям кардиостимуляторов не рекомендуется носить пульт дистанционного управления в нагрудном кармане одежды.

2.2 Информация по безопасности продукции

- ① Оберегайте PilotOne от избыточной влажности (купание, плавание) и перегрева (радиаторы, приборная панель автомобиля). Предохраняйте устройство от ударов и вибрации.
- ① Протирайте PilotOne влажной тканью. Не пользуйтесь бытовыми чистящими средствами (стиральный порошок, мыло и т.п.) или спиртом для чистки PilotOne. Не пользуйтесь микроволновыми печами и другими нагревательными приборами для просушивания PilotOne.
- ① При замене элементов питания пользуйтесь только высококачественными долговечными щелочными (алкалиновыми) батареями. Не рекомендуется пользоваться аккумуляторами.
- ① Если вы не собираетесь пользоваться пультом PilotOne в течение длительного времени, извлеките батарею.

- ① Используемая в данном пульте дистанционного управления передача цифровых сигналов малой мощности чрезвычайно надежна и практически не подвержена помехам со стороны других устройств. Тем не менее, при использовании устройства вблизи компьютеров, электронных установок и в зоне действия мощных электромагнитных полей рекомендуется не подходить к источнику электромагнитного излучения ближе чем на 60 см.
- ① Рентгеновское излучение (например, компьютерная или магниторезонансная томография) может отрицательно повлиять на работу пульта дистанционного управления PilotOne.
- ① Не пользуйтесь пультом дистанционного управления PilotOne там, где запрещено использование электронных устройств.

3. Описание

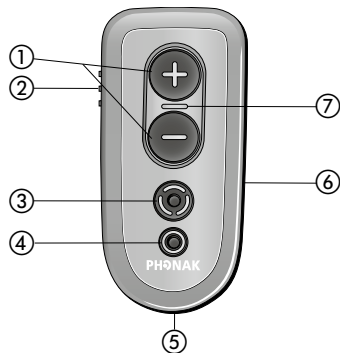

- ① FlexControl / Громкость
- ② Блокировка кнопок PilotOne
- ③ Переключение программ
- ④ Кнопка возврата («Home»)
- ⑤ Ушко для шнура
- ⑥ Крышка батарейного отсека
- ⑦ Световой индикатор состояния PilotOne

4. Пошаговая инструкция по использованию пульта дистанционного управления Phonak PilotOne

Шаг 1. Установка или замена батареи

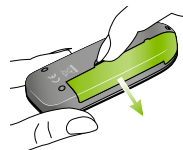


Рис. 1a



Рис. 1b

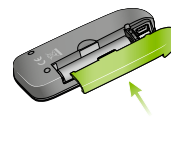


Рис. 1c

Чтобы снять крышку батарейного отсека, сдвиньте ее в направлении, указанном стрелкой (рис. 1a).

При необходимости вначале извлеките старую батарею. Вставьте одну новую батарею с соблюдением полярности. Пользуйтесь щелочными (алкалиновыми) батареями типоразмера AAA, LR03 или AM4 (рис. 1b).

Установите крышку батарейного отсека на место, задвинув ее в направлении, указанном стрелкой (рис. 1c).


⚠ Порт мини-USB нельзя использовать для подзарядки батареи. Не пользуйтесь аккумуляторами.

4. Использование Phonak PilotOne

Шаг 2. Блокировка и разблокирование пульта дистанционного управления

Во избежание непреднамеренного нажатия на кнопки ваш пульт снабжен функцией блокировки. Рекомендуется блокировать пульт дистанционного управления при хранении и транспортировке.

Чтобы заблокировать или разблокировать пульт дистанционного управления, сдвиньте блокиратор в одном из указанных направлений.

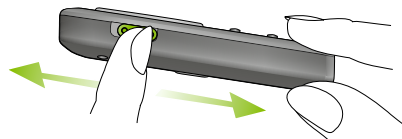

Разблокировать Заблокировать

Перед использованием пульта PilotOne убедитесь, что он разблокирован.

Ниже описано управление слуховыми аппаратами

Шаг 3. FlexControl / Регулировка громкости

Помимо регулировки громкости, FlexControl позволяет Вам оптимизировать четкость и комфортность звучания в различной акустической обстановке. Для этого воспользуйтесь кнопками «+» и «-».

Эта инновационная технология Phonak доступна в слуховых аппаратах класса «премиум». Она конфигурируется специалистом-сурдологом.

Подробности Вы можете узнать у специалиста.

Нажмите «+» для повышения громкости
Нажмите «-» для снижения громкости



Шаг 4. Кнопка переключения программ

Воспользуйтесь этой кнопкой для смены программы прослушивания.



Шаг 5. Кнопка возврата («Home»)

Нажмите кнопку возврата для возвращения к исходной программе и заданному уровню громкости.



4. Использование Phonak PilotOne


Примечания:


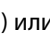
- Переключение программы или регулировка громкости могут сопровождаться подтверждающим звуковым сигналом
- Управление обоими слуховыми аппаратами осуществляется одновременно
- Попросите сурдолога распечатать краткое руководство по PilotOne
- Доступные программы прослушивания и уровни громкости настраиваются специалистом-сурдологом






Шаг 6. Индикатор состояния

Если клавиатура PilotOne разблокирована, индикатор состояния обеспечит Вас дополнительной информацией:





- После разблокирования () индикатор состояния загорается на одну секунду, свидетельствуя о готовности PilotOne к работе
- Индикатор состояния загорается всякий раз при нажатии на кнопки регулировки громкости PilotOne

- При нажатии на кнопку переключения программ () или кнопку возврата () индикатор состояния мигает в соответствии с выбранной программой


-   Автоматическая
-  Ручная программа 1
-  Ручная программа 2
-  Отключение микрофонов (приглушение)

Цвет всех вышеперечисленных сигналов может быть зеленым или желтым, в зависимости от уровня заряда батареи PilotOne:

-  **Зеленый:** Нормальный заряд батареи
-  **Желтый:** Осталось 20% заряда. Замените батарею

5. Поиск и устранение неисправностей

Нажатие на кнопку не сопровождается световой индикацией

- Разблокируйте PilotOne ()
- Если это не помогло, замените батарею PilotOne

Слуховой аппарат не реагирует на команды пульта дистанционного управления

- Убедитесь, что слуховой аппарат включен и правильно расположен на (в) ухе
- PilotOne должен находиться не дальше чем на расстоянии вытянутой руки. Во время использования поверхность пульта должна быть направлена в сторону вашего лица
- Попросите специалиста-сурдолога перепрограммировать PilotOne

Радиус действия

1 метр



Присоединение шнура для ношения (рис. 5)

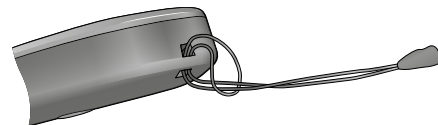


Рис. 5

6. Гарантийные обязательства

Гарантийное обслуживание пульта управления PilotOne осуществляет компания _____

Средний срок службы пульта управления PilotOne пять лет. Бесплатное гарантийное обслуживание пульта управления PilotOne осуществляется в течение _____ со дня продажи (с отметкой о ремонте в гарантийном талоне) при:

- наличии даты продажи, печати и подписи представителя предприятия-изготовителя или торгующей организации в данном руководстве и гарантийном талоне;
- предъявлении изделия в чистом виде.

В случае отсутствия гарантийного талона или даты продажи в гарантийном талоне гарантийные обязательства на пульт управления PilotOne вступают в силу с даты проверки.

Гарантийные обязательства не распространяются на пульты управления PilotOne:

- с механическими повреждениями;
- носящие следы химического воздействия;
- подвергавшиеся самостоятельной разборке, а также при нарушении условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации;
- при обращении в неуполномоченные сервисные центры.

В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.

6. Гарантийные обязательства

Свидетельство о приемке и продаже

Пульт управления PilotOne (Phonak)
серийный № _____ признан годным
для эксплуатации.

Пульт управления PilotOne сертифицирован.

Дата проверки _____

Штамп

Дата продажи _____

м.п.

Адрес предприятия, осуществляющего
гарантийное обслуживание:

Для заметок

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Для заметок

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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
.....

.....

.....

Фонак АГ,
Лаубисрютиштрассе, 28,
Штефа, Швейцария, СН-8712

Центр слухопротезирования:



www.phonak.ru