

myPilot

Краткое руководство по эксплуатации



АЯ 46




0682

PHONAK

life is on

Описание

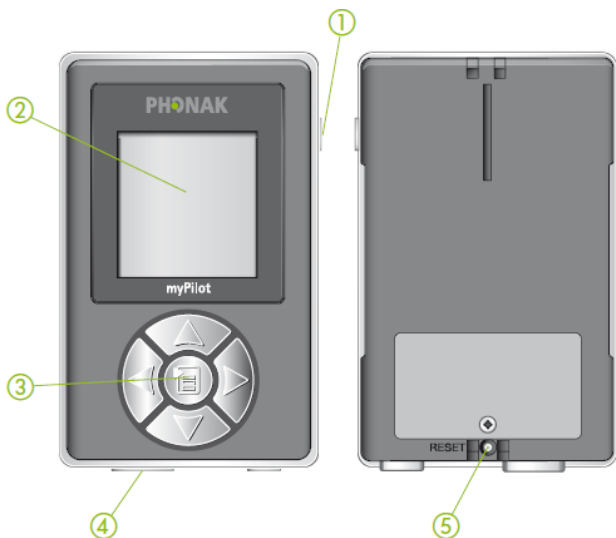

1 – кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

2 – цветной ЖК-дисплей

3 – клавиши:

верхняя



громче

нижняя



тише

правая



следующая программа

левая



предыдущая программа

центральная



меню/выбор/в начало

4 – разъем мини-USB

5 – кнопка
перезагрузки

Подготовка к работе

Зарядка аккумулятора myPilot снабжен встроенным аккумулятором. Чтобы зарядить **myPilot**, подключите к нему шнур зарядного устройства, как показано на рисунке. После этого вставьте зарядное устройство в розетку.





Включение и выключение myPilot

Чтобы включить/выключить **myPilot**, нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ до тех пор, пока не включится/выключится дисплей (приблизительно в течение двух секунд).



Кнопка "В начало"

Чтобы вернуть исходные настройки слуховых аппаратов, нажмите и удерживайте центральную кнопку  в течение 4 секунд; при этом экран **myPilot** также вернется в исходное состояние.


Выбор предпочтительного варианта исходного экрана
Чтобы выбрать нужный вариант исходного экрана, войдите в меню, нажав центральную кнопку . После этого выберите **Settings** (настройки) и **Home screen** (исходный экран).

Стандартный режим (standard) предполагает наибольшие возможности управления аппаратами и отображения их состояния, включая графические значки программ.



В режиме "direct control" (прямое управление) каждой кнопке соответствует одна из программ слухового аппарата. В этом режиме можно только переключать программы и регулировать громкость. Такие функции, как меню или ZoomControl, недоступны.



 В зависимости от настройки, выполненной специалистом, вид экрана **myPilot** может отличаться от приведенного на рисунке.

"Стандартный" режим

Стандартный режим предлагает вам полный доступ к управлению программами и громкостью слуховых аппаратов.



- Для переключения программ воспользуйтесь клавишами "влево" или "вправо" (◀/▶)
- Для изменения громкости воспользуйтесь клавишами "вверх" или "вниз" (▲/▼)
- Для входа в подменю коротко нажмите центральную клавишу 📄
- Для перехода в экран ZoomControl нажмите и удерживайте в течение 2 секунд центральную клавишу 📄

Режим "direct control"

В режиме "direct control" каждая клавиша соответствует определенной программе.



Нажатие\Клавиша	Левая	Центральная	Правая
	◀	📄	▶
Короткое	1	A	2
В течение 2 секунд	3	4	5

После выбора очередной программы ее название отображается в течение 10 секунд.

- Для изменения громкости воспользуйтесь клавишами "вверх" или "вниз" (▲/▼)
- Чтобы выйти из режима "direct control", одновременно нажмите клавиши (◀/▶) и удерживайте их в течение 2 секунд.
- 👤 Доступные программы прослушивания настраиваются специалистом.
- 👤 В режиме "direct control" экраны регулировки громкости, подменю и "ZoomControl" не отображаются.

Регулировка громкости

Перейдите из главного экрана стандартного режима в экран **Volume** (громкость), нажав \triangle или ∇ . Перейдя в экран **Volume**, вы можете одновременно менять громкость обоих слуховых аппаратов, нажимая \triangle (громче) или ∇ (тише).











Чтобы изменить громкость только одного (левого или правого) слухового аппарата, перейдите из главного экрана в экран **Volume**, нажав \triangle или ∇ . Перейдя в экран **Volume**, нажмите \triangleleft (чтобы выбрать левую сторону) или \triangleright (чтобы выбрать правую сторону), после чего отрегулируйте громкость клавишами \triangle (громче) или ∇ (тише).

ZoomControl (опция)

Эта специальная функция позволяет выбрать нужное вам направление прослушивания (вперед, назад, влево, вправо).



- Находясь в главном экране "стандартного" режима, нажмите центральную клавишу  и удерживайте ее в течение 2 секунд. Откроется экран ZoomControl.
- Чтобы выбрать нужное направление прослушивания, нажмите на клавишу ,  или .
- Для доступа в подменю, коротко нажмите центральную клавишу .
- Чтобы вернуться в экран выбора программ и активировать последнюю использовавшуюся программу, нажмите центральную клавишу  и удерживайте ее в течение 2 секунд.
- Чтобы войти в экран регулировки громкости, нажмите клавишу  или  и удерживайте ее в течение 2 секунд.

Примечание: Узнайте у специалиста, доступен ли ZoomControl в ваших слуховых аппаратах.

Специальные функции

В меню *Settings* (настройки) → *Quick access* (быстрый доступ) → *ON/OFF button* (кнопка ВКЛ/ВЫКЛ) вы можете выбрать специальные функции, связанные с коротким нажатием на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

Quick access (быстрый доступ)

Кратковременное нажатие на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ активирует сохраненную программу/громкость, даже если myPilot находится в режиме ожидания.


Status readout (считывание состояния)

При кратковременном нажатии на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ происходит считывание состояния слуховых аппаратов.

Визитная карточка

Специалист может сохранить свою контактную информацию в myPilot в разделе *Contact* главного меню.

Важная информация

Для обеспечения безопасного и полноценного использования myPilot внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации устройства. Уделите особое внимание разделу "Важная информация", а также примечаниям, отмеченным значком .

Если вам потребуется помощь, обращайтесь к специалисту.

Фонак АГ,
Лаубисрютиштрассе 28,
СН-8712 Штефа, Швейцария

Центр слухопротезирования:

