

Accessories and Charger Update 2.2

Februar 2023

Installationsanleitung

Der „Zubehör und Charger Updater“ ist für den Fachhandel vorgesehen und kann von qualifizierten Fachpersonal für das Aktualisieren von Firmware für TV Connector, Partner Mic und Charger Case Go verwendet werden.

Die Installationsanleitung erläutert Ihnen Schritt für Schritt die Anwendung des „Zubehör und Charger Updater“.

Bitte beachten Sie, dass der Name der Applikation „TV ConnectorUpgrader.exe“, nicht die Namen aller Geräte widerspiegelt, die von der Anwendung unterstützt werden. Der Name der Applikation wird mit kommenden Versionen abgeändert. Dies hat aber auf die Funktionen des Upgraders keinen Einfluss.


Table of Contents

Herunterladen	2
Installation	2
Starten Sie die Anwendung	6
Schließen Sie ein Gerät an, z. B. Charger Case Go	7
Aktualisierung der Geräte-Firmware	8
Firmware bereits auf dem neuesten Stand	9

Herunterladen

Sie sollten einen Link zum Herunterladen des Installationsprogramms erhalten haben, der in einer Zip-Datei enthalten ist. Zum Beispiel die Version **SonovaFirmwareUpgrader_2.2.4102**

SonovaFirmwareUpgrader_2.2.4102-bf22c640fed084-2023.02.14.zip.

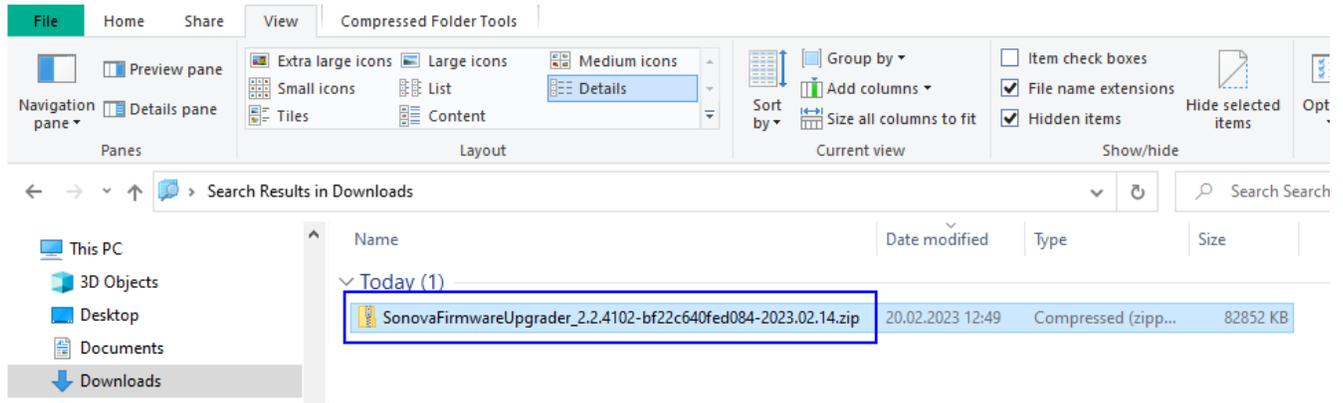


Installation

Wählen Sie nach dem Herunterladen die Datei aus und doppelklicken Sie darauf.

Der Inhalt des Installationsprogramms wird angezeigt.


Wählen Sie Setup.exe und doppelklicken Sie darauf.

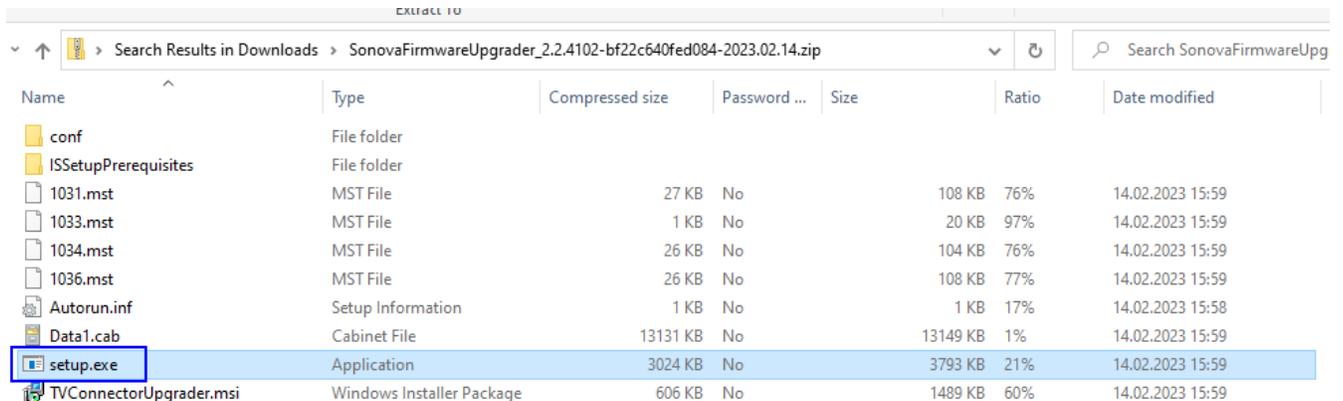


Folgen Sie den Anweisungen, die vom Installationsprogramm auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Anmerkung:

Der Text, der in den Installationsfenstern angezeigt wird, ist in der Sprache, die Sie für Windows ausgewählt haben.

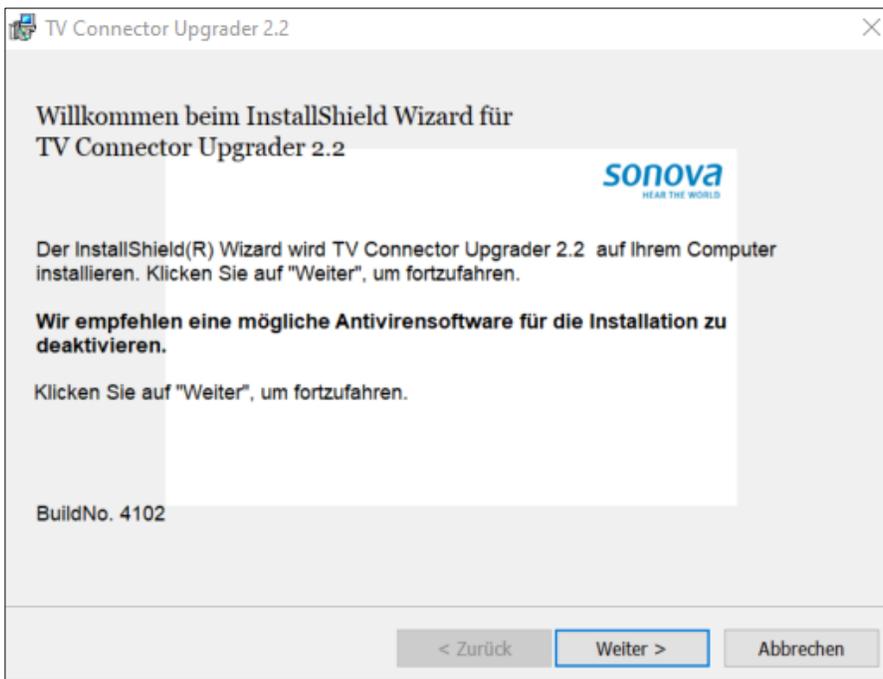

Klicken Sie auf "Weiter".

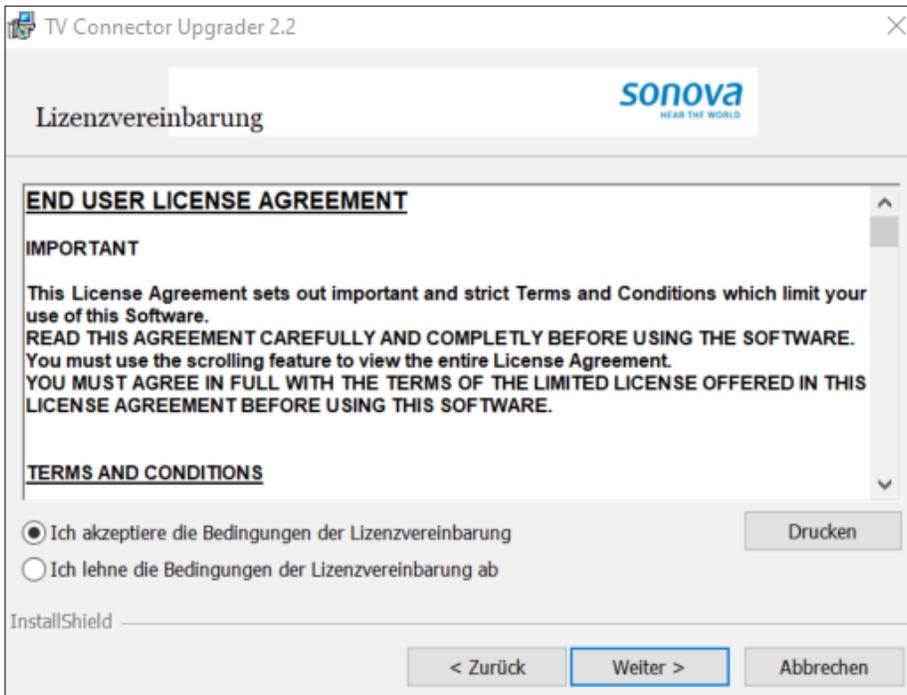


Wählen Sie "Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung".

Klicken Sie auf "Weiter".



Klicken Sie auf "Installieren", um die Installation zu starten.

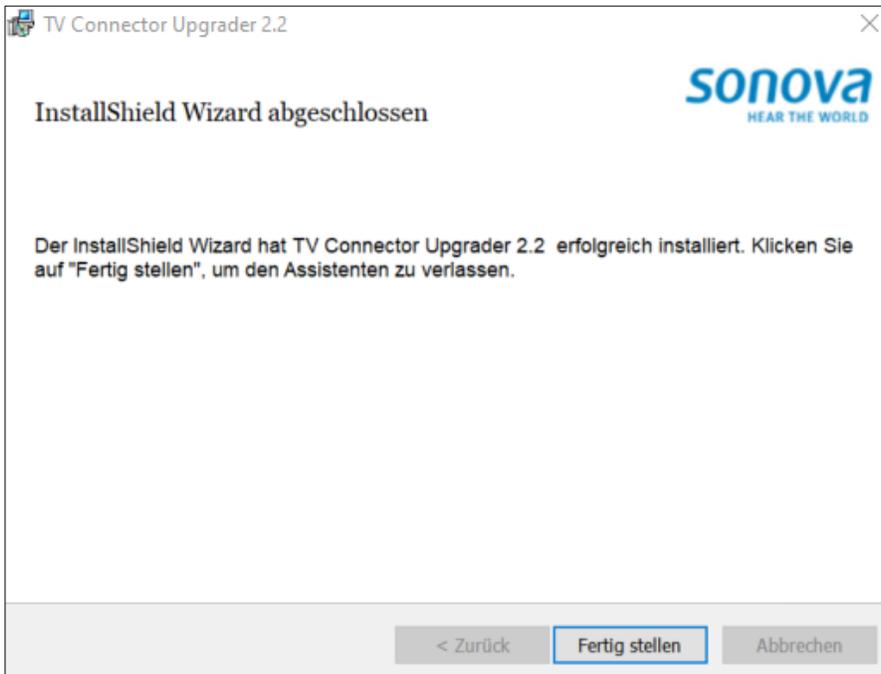

Klicken Sie auf "Fertig stellen", um die Installation abzuschließen.


Starten Sie die Anwendung

Sie sollten ein neues Symbol auf Ihrem Desktop mit dem Namen "TV Connector Upgrader" finden.



Doppelklicken Sie darauf, um die Anwendung zu starten.


Das folgende Fenster wird angezeigt.

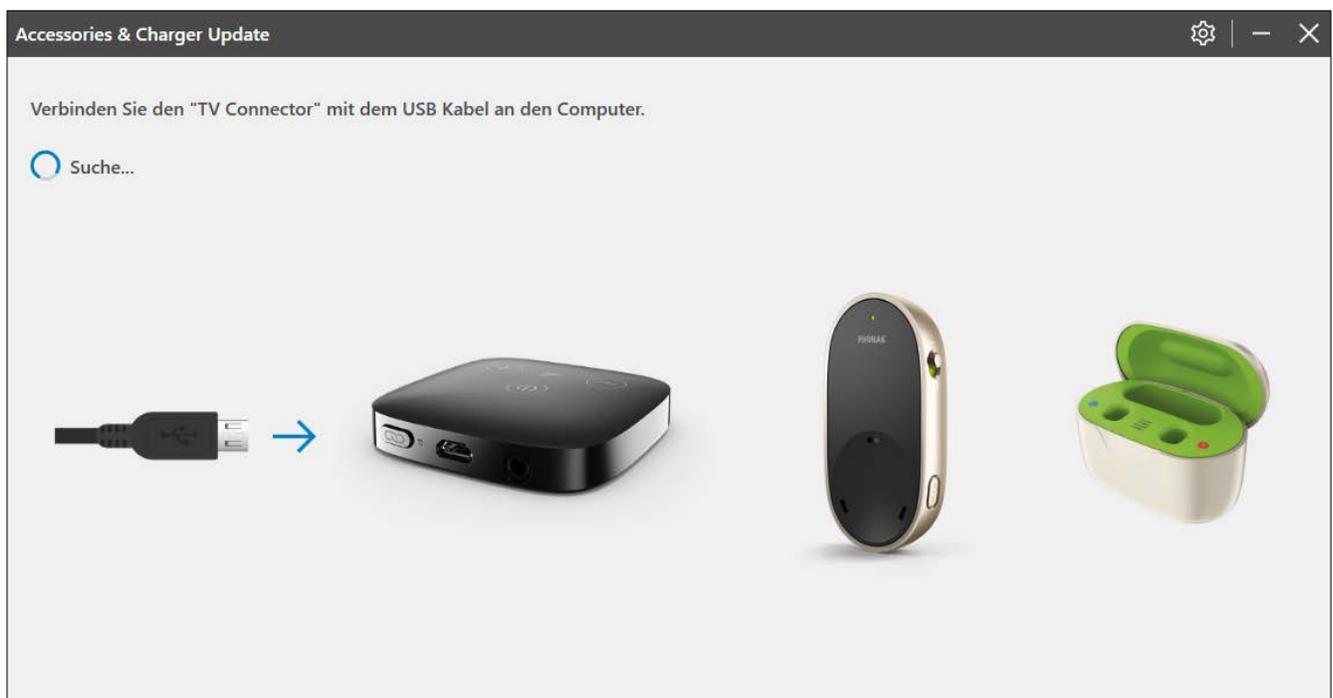

Schließen Sie ein Gerät an, z. B. Charger Case Go


Schließen Sie den Charger oder ein anderes unterstütztes Gerät über ein USB-Kabel an, das an den PC angeschlossen ist.

Die Anwendung informiert den Benutzer, dass eine neue Firmware verfügbar ist.

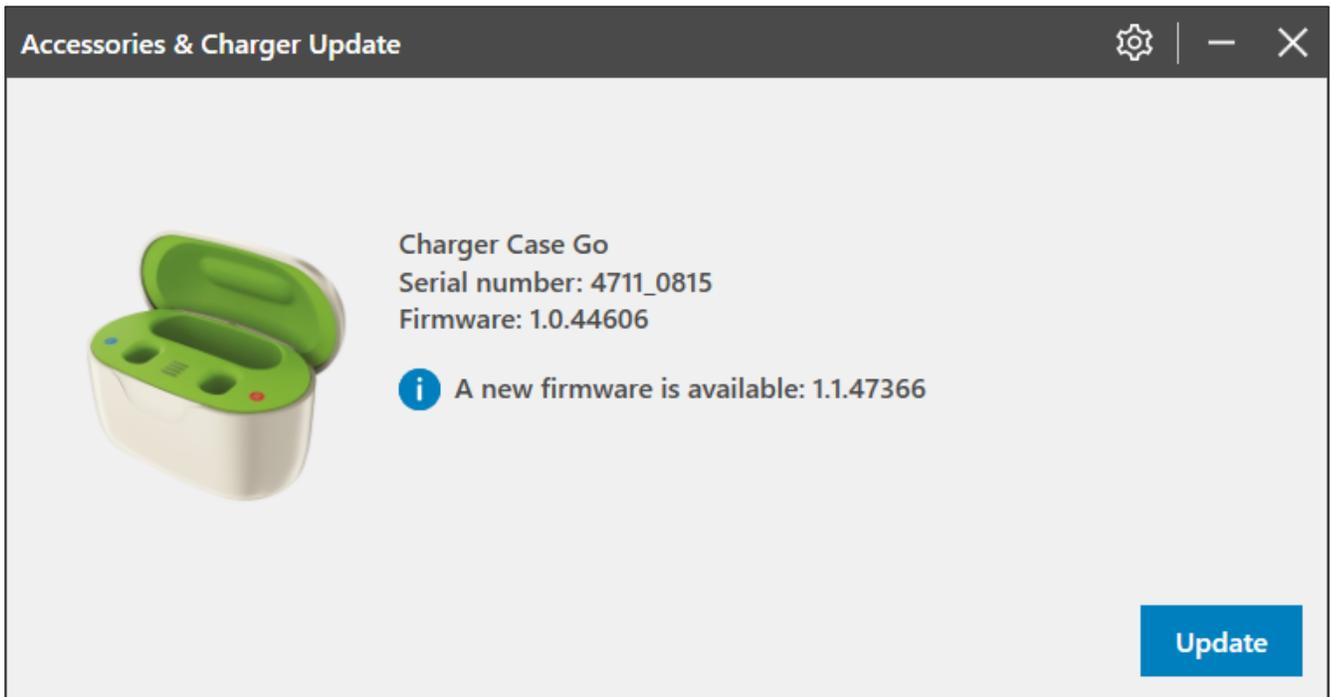


Aktualisierung der Geräte-Firmware

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Update], um das Firmware-Upgrade zu starten.

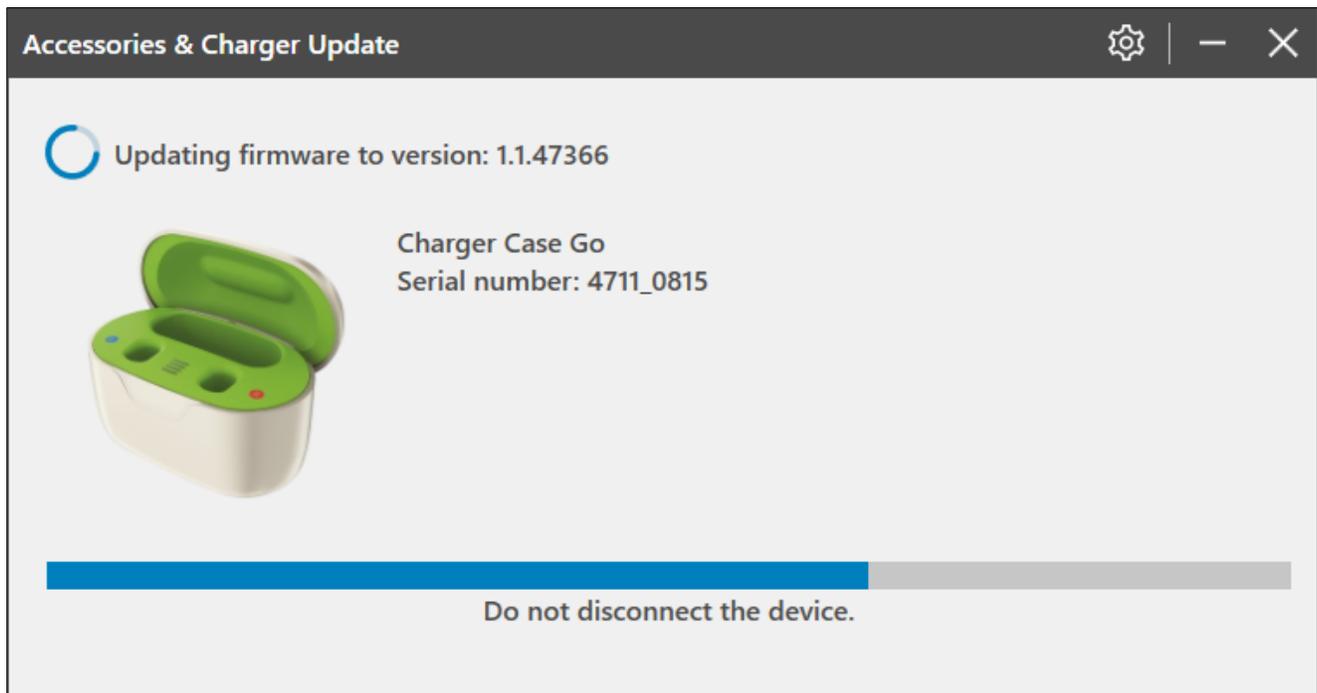

Wenn das Firmware-Upgrade abgeschlossen ist, können Sie Ihr Gerät trennen, um mit einem anderen von vorne zu beginnen.

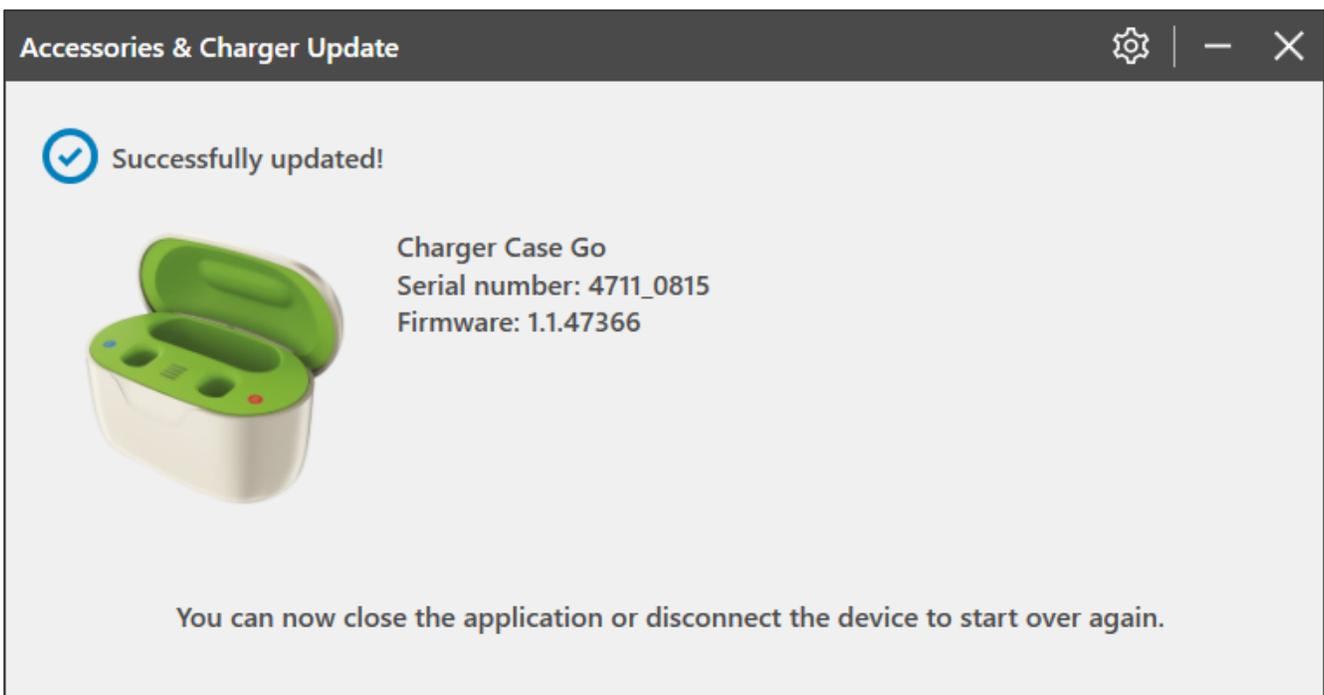

Firmware bereits auf dem neuesten Stand


Falls die Firmware bereits auf dem neuesten Stand ist, wird das folgende Fenster angezeigt.



Anleitung

Weitere Informationen zur Anwendung finden Sie in den Einstellungen.

Klicken Sie auf das Zahnrad.

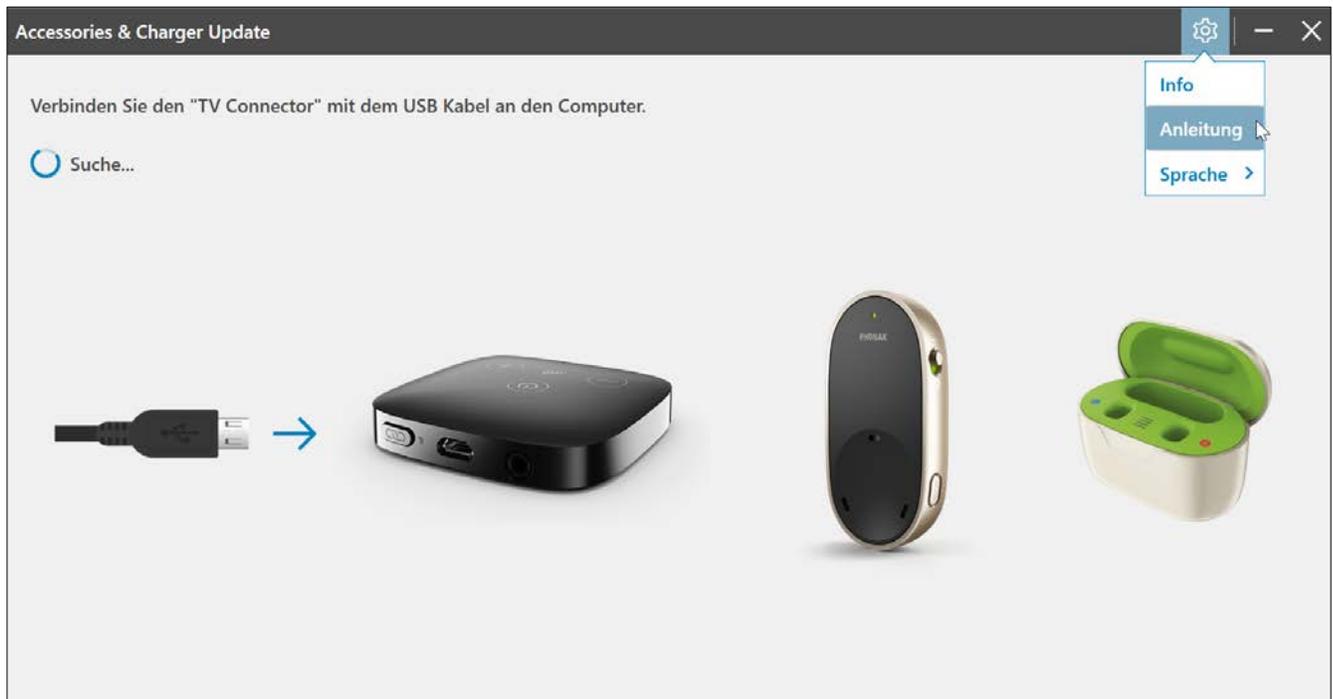

Wählen Sie "Anleitung".

Die Anleitung wird geöffnet.