

# Restablecimiento de los audífonos para aplicaciones multiusuario.

Instrucciones de uso



# Introducción

Deben aplicarse las normas de higiene a todos los dispositivos que se utilicen con varios usuarios (por ejemplo, dispositivos de prueba o prestados).

Aquí se incluyen todas las secciones de un sistema auditivo: dispositivos RIC o BTE y auricular RIC. Cada sección debe someterse a una limpieza, desinfección y reajuste del sistema completos antes de que otro usuario proceda a la reutilización.

Dispositivos RIC/BTE: Además de la limpieza/desinfección, se requiere la eliminación de los datos personales del audífono y una inspección que evalúe el aspecto y el rendimiento.

Auriculares RIC: Si un auricular ha sido usado por un usuario para una prueba breve, normalmente de hasta 15 minutos, puede limpiarse y desinfectarse para transferirse a otro usuario. Si un auricular se ha utilizado durante más tiempo, puede transferirse al dispositivo que compre finalmente el usuario o, si no es necesario, debe desecharse.



# Limpieza y desinfección

## 1. Preparación

---

Utilice guantes durante la limpieza y desinfección del dispositivo

---

### RIC

- Mantenga el auricular conectado o utilice masilla para evitar que el líquido de limpieza entre en el puerto del auricular

### BTE

- Quite el molde al usuario

### Auriculares

- Los auriculares utilizados para pruebas breves pueden limpiarse higiénicamente para su reutilización
- Quite la protección anticerumen y la cápsula

## 2. Desinfección

---

- Primero limpie los dispositivos con toallitas destinadas a la limpieza y desinfección para eliminar la contaminación visible (por ejemplo, cera)
- Envuelva los dispositivos con toallitas destinadas a la limpieza y desinfección garantizando el contacto de la superficie con los dispositivos

- No es necesario envolver los dispositivos individualmente, varios RIC/ BTE/auriculares pueden envolverse simultáneamente en las mismas toallitas.

---

#### RIC y BTE

- Asegúrese de que los dispositivos estén en contacto con la toallita durante al menos 8 minutos en total
- Si la toallita se seca, utilice una nueva para asegurarse de que los dispositivos permanecen húmedos durante el tiempo que dure la limpieza

#### Auriculares

- Asegúrese de que los auriculares estén en contacto con la toallita durante al menos 4 minutos en total

### 3. Secado

---

- Para eliminar los restos de líquido de limpieza de los dispositivos/ auriculares, límpielos con un paño que no deje pelusas humedecido en agua del grifo
- Deje que los dispositivos se sequen completamente antes de volver a utilizarlos

# Inspección

Realice las siguientes comprobaciones:

- No se aprecian signos de deterioro físico de la superficie, por ejemplo, la carcasa está rayada.
- El audífono puede cargarse (en el caso de los dispositivos recargables), la tapa del portapilas está intacta (en el caso de los dispositivos de pila).
- Realice una prueba acústica activando la realimentación. En el caso de los dispositivos RIC, conecte un auricular al dispositivo para la prueba de retroalimentación.

Si estos puntos son aplicables, proceda a preparar los dispositivos para su reutilización, de lo contrario, en el caso de los auriculares, deséchelos; en el caso de los audífonos, envíelos a fábrica para su reparación (se aplica una tarifa de reparación si no están en garantía, según el país) o, si ya no los necesita, deséchelos.

## Restablecer los ajustes de fábrica

Todos los dispositivos de prueba deben restablecerse con los ajustes de fábrica al final de cada periodo de prueba. Puede conseguirlo a través del software de adaptación desde [Trial y herramientas] > [Volver a poner ajustes "de fábrica"] > [Resetear].

Si el audífono no puede conectarse al software de adaptación o falla durante la adaptación, envíelo a la fábrica para su reparación (se aplicarán los gastos de reparación si no está en garantía, según el país) o bien, si ya no lo necesita, deséchelo.

EC REP

Sonova Deutschland GmbH  
Max-Eyth-Strasse 20  
70736 Fellbach-Oeffingen  
Alemania



**Fabricante:**

Sonova AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa  
Suiza  
[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

**sonova**  
HEAR THE WORLD



CE  
0459

