

Kuulokojeiden nollaaminen ja palauttaminen tehdasasetuksiin seuraavaa käyttäjää varten.

Käyttöohje



Johdanto

Erityisiä hygieniavaatimuksia on noudatettava kaikkien sellaisten kuulokojeiden (esim. kokeilu- ja lainakojien) suhteen, joita käyttää useampi käyttäjä.

Tämä koskee kaikkia kuulokojejärjestelmän osia, eli kuuloke korvakäytävässä kojetta tai korvantauskojetta sekä kuuloke korvakäytävässä kojeen kuuloketta. Jokainen osa on puhdistettava perusteellisesti ja desinfioitava, ja koje nollattava ennen kuin toinen henkilö voi käyttää sitä.

RIC/BTE-kojeet: puhdistuksen ja desinfioinnin lisäksi vaaditaan henkilökohtaisten tietojen poistaminen kuulokojeesta sekä kuulokojeen ulkoisen kunnon ja suorituskyvyn arviointi.

RIC-kojeiden kuulokkeet: jos asiakas on kokeillut kuuloketta lyhytaikaisesti, tyypillisesti korkeintaan 15 minuutin ajan, se voidaan puhdistaa ja desinfioida toiselle asiakkaalle siirtämistä varten. Jos kuuloketta on käytetty tätä pidempään, se voidaan joko siirtää saman asiakkaan lopulliseen laitteeseen tai hävittää siinä tapauksessa, että sitä ei tarvita enää.

Puhdistus ja desinfiointi

1. Valmistelu

Käytä hanskoja laitteen puhdistuksen ja desinfiointin aikana

Kuuloke korvakäytävässä -koje

- Pidä kuuloke liitettynä kojeeseen tai käytä tiivistemassaa, jotta puhdistusneste ei pääse sisään kuulokkeen liitoskohdasta

Korvantauskoje

- Ota pois asiakkaan korvakappale

Kuulokkeet

- Lyhytaikaiseen kokeiluun käytetyt kuulokkeet voidaan puhdistaa uudelleenkäyttöä varten
- Poista sovite ja vahasuoja

2. Desinfiointi

- Poista ensin näkyvä lika (esim. korvavaha) pyyhkimällä koje (tai kojeet) puhdistukseen ja desinfiointiin tarkoitetuilla pyyhkeillä
- Kääri sitten koje (tai kojeet) puhdistukseen ja desinfiointiin tarkoitettujen pyyhkeiden sisään varmistaen, että pyyhkeet koskettavat kaikkia kojeen (tai kojeiden) pintoja

- Kojeita ei tarvitse välttämättä kääriä pyyhkeiden sisään yksitellen, vaan useampia korvakäytävä-/korvantauskojeita ja kuulokkeita voidaan kääriä saman pyyhkeen sisään

Kuuloke korvakäytävässä- ja korvantauskojeet

- Varmista, että koje (tai kojeet) pysyy kosketuksissa pyyhkeen kanssa vähintään 8 minuutin ajan
- Jos pyyhe kuivuu, ota käyttöön uusi pyyhe sen varmistamiseksi, että kojeet pysyvät kosteina koko puhdistuksen ajan

Kuulokkeet

- Varmista, että kuuloke (tai kuulokkeet) pysyy kosketuksissa pyyhkeen kanssa vähintään 4 minuutin ajan

3. Kuivaus

- Poista puhdistusnestejäämät kuulokojeista/kuulokkeista pyyhkimällä nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu vesijohtovedellä
- Anna kojeiden kuivua täysin ennen uudelleenkäyttöä

Tarkastus

Tee seuraavat tarkastukset:

- Pinnoilla ei ole näkyvissä fyysisiä vaurioita, kuten naarmuja kuorissa.
- Kuulokoje latautuu normaalisti (ladattava koje) ja paristoluukku on ehjä (paristokäyttöinen kuulokoje).
- Tee akustinen testi aktivoimalla vinkumistestaus. Kuuloke korvakäytävissä -kojeissa liitä kuuloke kojeeseen vinkumistestausta varten.

Jos näissä tarkastuksissa ei havaita ongelmia, valmistele kojeet uudelleenkäyttöä varten. Muussa tapauksessa hävitä kuulokkeet ja toimita kuulokojeet huoltoon (korjaus saattaa olla maksullinen, jos takuu ei ole voimassa) tai hävitä ne asianmukaisesti, jos niitä ei enää tarvita.

Tehdasasetusten palauttaminen

Kaikki kokeilukojeet on palautettava tehdasasetuksiin kokeilujakson päätyttyä. Tämä voidaan tehdä sovitushjelmassa valitsemalla [Kokeilu&työkalut] > [Palauta tehdasasetukset] > [Palauta].

Jos kuulokojetta ei voida yhdistää sovitushjelmaan tai siihen tulee toimintahäiriö sovituksen aikana, ja kojeen nollaus ei auta (ladattava koje), niin toimita se huollettavaksi (korjaus saattaa olla maksullinen, jos takuu ei ole voimassa) tai hävitä se, jos sitä ei enää tarvita.



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Saksa



Valmistaja:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Sveitsi
www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD



CE
0459

