



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak CROS L-R

PHONAK



Rechargeable
Lithium-ion



Applications
intelligentes

Description

Phonak CROS L-R offre une solution CROS et BiCROS aux personnes touchées par une perte auditive non appareillable sur une oreille. CROS L-R est porté sur l'oreille non appareillable pour capter les sons et les transmettre, à l'aide d'une connexion sans fil, à une aide auditive Phonak compatible portée sur l'oreille dotée d'une meilleure audition. CROS L-R ne dispose d'aucune sortie acoustique. Modèle garanti 2 ans.

Fonctions clés

CROS L-R peut être appareillé avec une aide auditive Audéo L-R, Audéo L-RT, Naïda L-PR ou Sky L-PR de n'importe quel niveau de performances. Par conséquent, l'ensemble des fonctions disponibles pour un patient portant un système CROS L-R dépend principalement du niveau de performances de l'aide auditive utilisée sur l'oreille possédant la meilleure audition. Veuillez vous reporter aux fiches devis patients des aides auditives Phonak Audéo L, Naïda L ou Sky L pour plus d'informations.

Technologie Phonak SmartSpeech™

Dans un système CROS L-R, les patients peuvent accéder aux fonctions pertinentes de la technologie SmartSpeech, y compris le StereoZoom 2.0, grâce à l'association des appareils Phonak Lumity compatibles.

Balance CROS

Le rapport de sonie entre l'appareil CROS L-R et l'aide auditive peut être réglé soit via le logiciel d'appareillage Target, soit directement via une courte pression sur le bouton multifonctions de l'appareil CROS L-R.

Performances de CROS L-R

Lorsqu'il est combiné avec des aides auditives de niveaux de performances Premium et Avancé, CROS L-R donne accès au programme Parole dans le bruit intense avec StereoZoom 2.0. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour un aperçu complet des modes microphoniques fournis par CROS L-R, en fonction du niveau de performances de l'aide auditive contralatérale.

		Modes microphoniques disponibles pour CROS L-R		
		StereoZoom 2.0	Real Ear Sound	Omnidirectionnel
Niveaux de performances de l'aide auditive CROS L-R	Premium (90)	•	•	•
	Avancé (70)	•	•	•
	Standard (50)		•	•