

Hallókészülékek alaphelyzetbe állítására többfelhasználós használathoz ●

Használati útmutató



Bevezetés

A higiéniai előírásokat minden olyan készülékre alkalmazni kell, amelyet több ügyfél is használ (így például a Trial készülékek esetében is).

Ez a hallási rendszer minden szakaszára vonatkozik, legyen az külső hangszóró, fül mögötti készülék vagy külső hangszórós készülék. Mielőtt egy másik ügyfél újra használná, minden egyes résznek alapos tisztításon, fertőtlenítésen és alaphelyzetbe állításon kell átesnie.

Külső hangszórós/fül mögötti készülékek: a tisztításon/fertőtlenítésen kívül a hallókészülékben lévő személyes adatok törlése, valamint a megjelenést és a teljesítményt értékelő vizsgálat elvégzése is szükséges.

Külső hangszórók: ha a külső hangszórót az ügyfél rövid ideig, jellemzően legfeljebb 15 percig tartó felpróbálás céljából viseli, akkor a hangszóró megtisztítható és fertőtleníthető, hogy át lehessen adni egy másik ügyfélnek. Ha a külső hangszórót hosszabb ideig viselték, akkor áthelyezhető az ügyfél végleges, megvásárolt készülékébe, vagy pedig – ha nincs rá szükség – selejtezni szükséges.

Tisztítás és fertőtlenítés

1. Előkészítés

Az eszköz tisztítása és fertőtlenítése során viseljen kesztyűt.

Külső hangszórós hallókészülékek (RIC)

- A tisztítófolyadék hangszórónyílásba való bejutásának megakadályozásához tartsa a hangszórót csatlakoztatva, vagy pedig használjon tömitőgyurmát

Fül mögötti hallókészülékek (BTE)

- Távolítsa el az ügyfél fülillesztékét

Hangszórók

- A rövid ideig tartó felpróbáláshoz viselt hangszórók higiénikusan tisztíthatók az újbóli használathoz
- A dóm és a cerumen védelem eltávolítása

2. Fertőtlenítés

- Először törölje át a készülék(ek)et tisztításra és fertőtlenítésre szolgáló törlőkendővel, eltávolítva így a látható szennyeződéseket (pl. a cerumet)
- Tegye és tekerje bele a készülék(ek)et a tisztításra és fertőtlenítésre szolgáló kendőbe, így gondoskodva a kendőnek a készülék felületével való érintkezését

- A készülékeket nem szükséges egyenként beletekerni a kendőbe, több külső hangszórós/fül mögötti készülék/hangszóró is beletekerhető egyidejűleg ugyanabban a törülőkendőben.

-
- Külső hangszórós (RIC) és fül mögötti készülékek (BTE)
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék(ek) összesen legalább 8 percig érintkezzen(ek) a törülőkendővel
 - Ha a törülőkendő megszárad, használjon új törülőkendőt annak biztosítására, hogy a készülékek a teljes tisztítási idő alatt nedvesek maradjanak

Hangszórók

- Gondoskodjon arról, hogy a hangszóró(k) összesen legalább 4 percig érintkezzen(ek) a törülőkendővel

3. Szárítás

-
- A tisztítófolyadék maradványainak eltávolításához törölje le a készüléket/hangszórókat csapvízben megnedvesített, nem szőszölő kendővel
 - Az újbóli használat előtt hagyja a készülékeket teljesen megszáradni

Ellenőrzés

Végezze el a következők ellenőrzését:

- A készüléken nem láthatók a felület fizikai károsodásának jelei, pl. nem karcos a burkolat.
- A hallókészülék (újratölthető készülékek esetén) tölthető, illetve (elemes készülékek esetén) az elemajtó sértetlen.
- Visszacsatolást kiváltva végezzen akusztikai tesztet. Külső hangszórós eszköz esetén a visszacsatolási teszthez csatlakoztasson hangszórót a készülékhez.

Ha a készülék megfelel a fenti pontok szerinti ellenőrzésen, folytassa a készülék előkészítését az újrahasználatra, ellenkező esetben a hangszórókat dobja ki, a hallókészüléket küldje el a Sonova Központba javításra.

Visszaállítás a gyári beállításokra

Az egyes próbaidőszakok végén minden próbakészüléket vissza kell állítani a gyári beállításokra. Ezt az illesztőszoftveren keresztül teheti meg a [Kipróbálás és eszközök] > [Visszaállítás a gyári beállításokra] > [Visszaállítás] menüpontra kattintva.

Ha a hallókészülék nem csatlakoztatható az illesztőszoftverhez vagy meghibásodik illesztés közben, küldje el a Sonova Központba javításra.



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Németország



Gyártó:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Svájc
www.phonak.com

Importőr az EU-ba:

Sonova Hungary Kft.
Dunavirág utca 2-6. 3.
ép.7.em.,
1138 Budapest,
Hungary

