

Roger™ DigiMaster /V2 ●

User Guide

Bruker-guide




roger


Start

Components and functions Komponenter og funksjoner


Roger DigiMaster

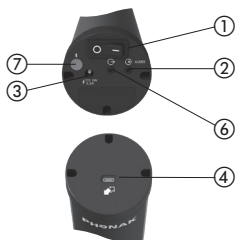

- ① On/off / På/Av
- ② 3.5 mm audio input / lydingang
- ③ Power socket / Inngang til strømforsyning
- ④ USB C
- ⑤ Indicator light / Indikatorlampe (LED)
- ⑥ 3.5 mm audio output / lydutgang
- ⑦ Bluetooth

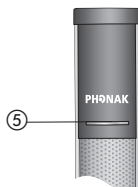

Power supply Strømforsyning

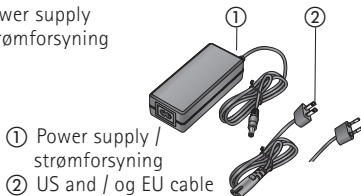


- ① Power supply / strømforsyning
- ② US and / og EU cable


Package contents may vary slightly depending on your country
Innholdet i pakken kan variere noe, avhengig av landet du bor i

Components and functions Komponenter og funksjoner


Option: DigiMaster Floor stand + bag
Alternativ: DigiMaster gulvstativ + veske

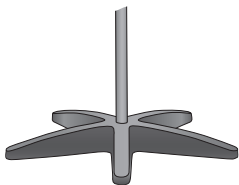

Option: Wall mount kit
Alternativ: Veggfeste

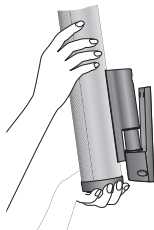


Option: UK and AU cable
Alternativ: UK og AU kabel

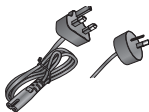


1

Mains Strømnettet

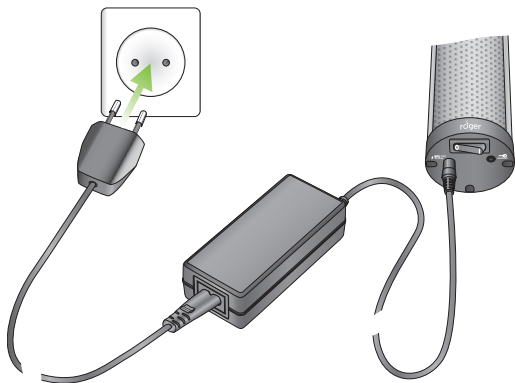


Switching Roger DigiMaster on Skrú på Roger DigiMaster

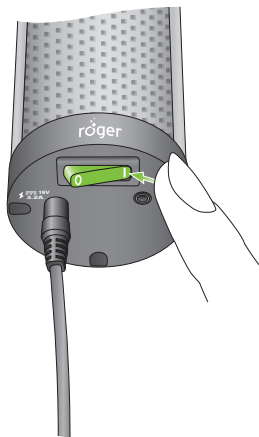


3

Connecting Roger DigiMaster Koble til RogerDigimaster

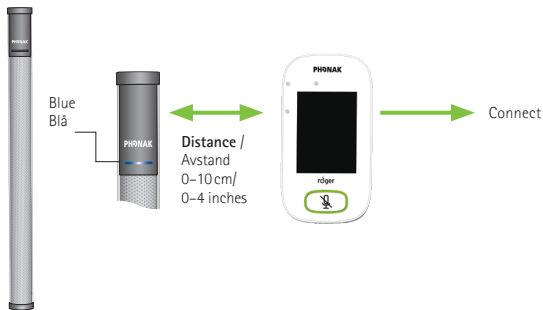


Connect Roger DigiMaster before first use (Connect).
Koble til Roger Digimaster før førstegangsbruk .

Connecting Roger DigiMaster Koble til Roger DigiMaster

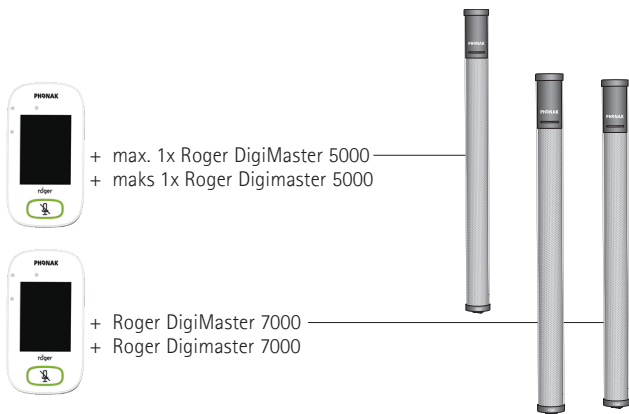

How to use Roger DigiMaster Hvordan bruke Roger DigiMaster

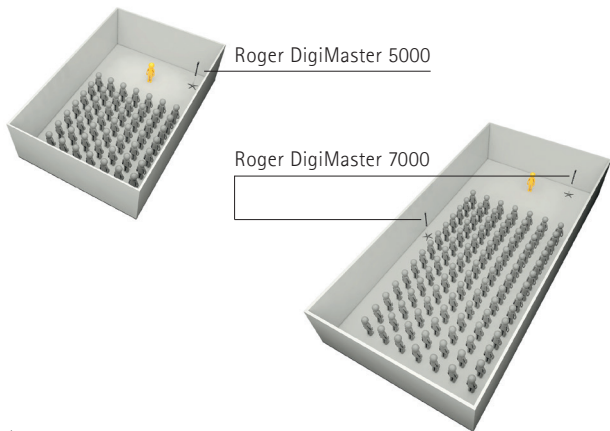

Same loudspeaker position whether using floor stand or wall mount.
Posisjonering av høyttaler gjelder for både gulvstativ og veggfeste

Bluetooth® Pairing

Bluetooth®-paring



- 1) Press shortly the Bluetooth button on the DigiMaster
Kort trykk på Bluetooth-knappen på DigiMaster
- 2) LED: fast blue blinking (60 s pairing mode)
LED: blinker raskt blått (60 sekunder paringsmodus)
- 3) Pair the device (BT settings: DigiMaster xxxx)
Par enheten (BT innstillinger: DigiMaster xxxx)
- 4) LED: connected, blinking blue twice (1 s)
LED: Tilkoblet, blinker blått to ganger (1 s.)

Operating range

Rekkevidde

Roger microphone
Roger-mikrofon

Roger DigiMaster



Up to 25 meters/
85 feet
Opp til 25 meter




Out of range! If distance greater than 25 meters/85 feet
Dersom avstanden mellom enhetene er større enn 25 m,
blir lydoverføringen avbrutt



Audio connection Lydtilkobling

Roger DigiMaster

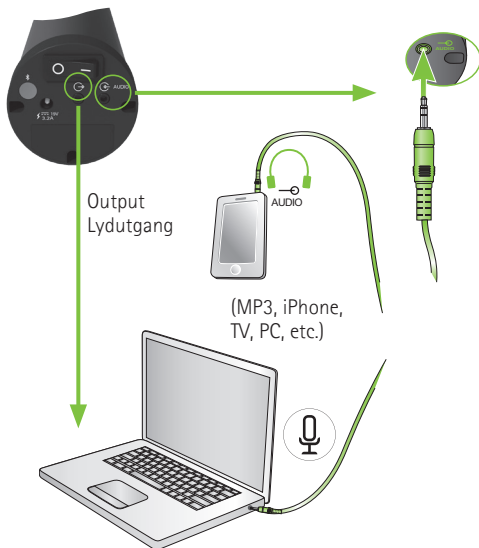

Network compatibility
Nettverkskompatibilitet



Network compatibility Nettverkskompatibilitet



Indicator light (LED status)

Indikatorlampe



Roger DigiMaster off / Roger DigiMaster avslått



Standard operation mode / driftmodus



Roger Microphone off / Roger- mikrofon utenfor rekkevidde eller avslått



Muted / Mute, Dempet



Volume +/-



Software update / Programvareoppdatering



Call technician / Kontakt tekniker

Operating conditions

Driftsforhold

+0° to +40° Celsius / +32° to + 104° Fahrenheit /

+0 til +40 grader celsius

<95% (non condensing) relative humidity/

<95% relativ luftfuktighet (ikke kondenserende)



Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.

Bruk av annet tilbehør, omformere og kabler enn de som er spesifisert eller levert av produsenten av dette utstyret kan føre til økte elektromagnetiske utslipp eller redusert elektromagnetisk immunitet for dette utstyret og resultere i feil drift.



Do not use the device in areas where electronic equipment is prohibited.

Ikke bruk enheten i områder der elektronisk utstyr er forbudt.



Keep this device out of reach of children aged under 3 years.

Oppbevar denne enheten utilgjengelig for barn under 3 år.



Do not expose your device to temperatures and humidity outside of the recommended conditions stated in the User Guide.

Ikke utsett enheten for temperaturer og fuktighet utenfor de anbefalte betingelsene oppgitt i bruker-guiden.



For charger , use only IEC 62368- and/or EN60601-1 certified equipment with an output rating of 19 VDC, 3200 mA.

Lading: bruk kun IEC 62368- og/eller EN60601-1 sertifisert utstyr med output-vurdering på 19 VDC, 3200 mA.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sonova AG is under license.

Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Sonova AG er under lisens.



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Germany

sonova
HEAR THE WORLD

