

Roger™ Multimedia Hub


Quick setup guide | Bruker-guide



roger

Start


Device description
Produktbeskrivelse

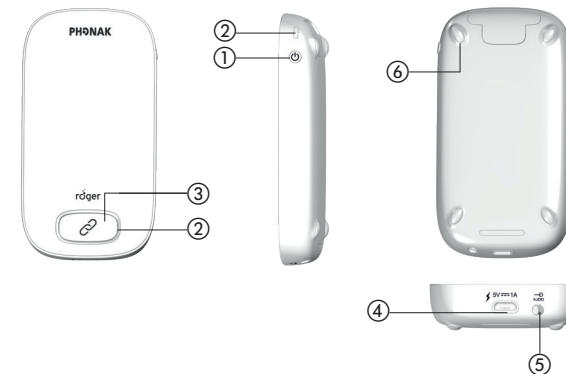

- ① On/Off
På/Av
- ② Indicator light
Indikatorlampe
- ③ **Connect**
Tikoblingsknapp
- ④ micro-USB
mikro-USB inngang
- ⑤ Jack 3,5 mm / 1/8"
- ⑥ Feet
Bein

Start

Components
Komponenter

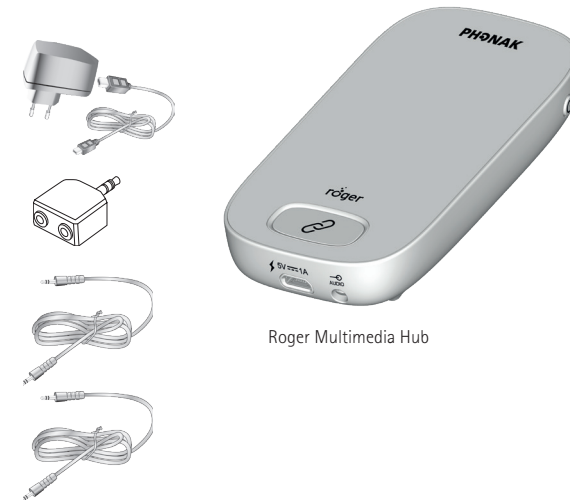


Roger Multimedia Hub

Package contents may vary slightly depending on country.
Innholdet i pakken kan variere noe, avhengig av landet du bor i


1

Charging
Lading

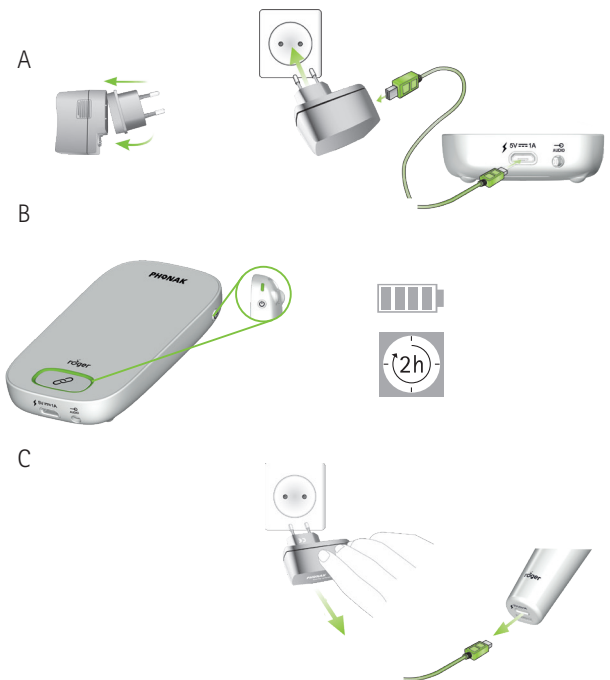


2

Switching On/Off
Skrú På/Av

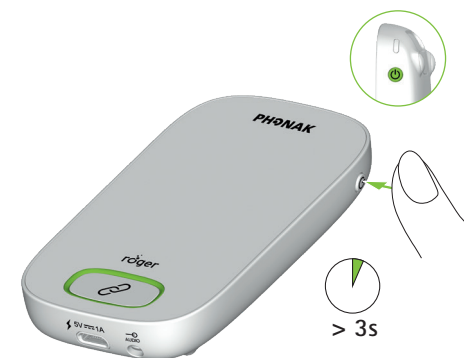

3


Stand-alone use
Frittstående bruk

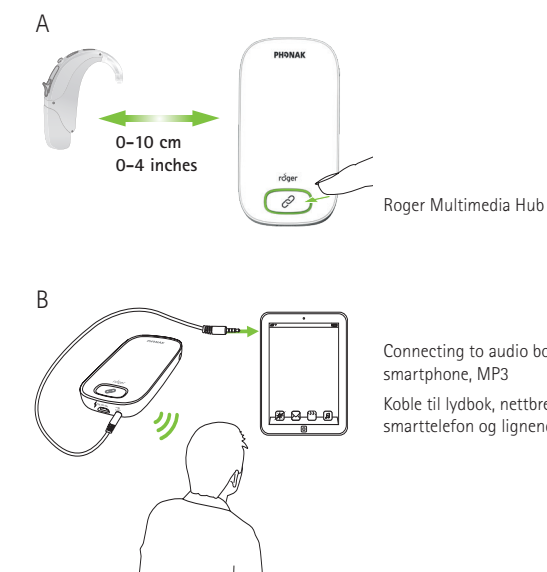

Connecting to audio book, tablet, smartphone, MP3
Koble til lydbok, nettbrett, smarttelefon og lignende


4

Connecting to whiteboard
Koble til Whiteboard

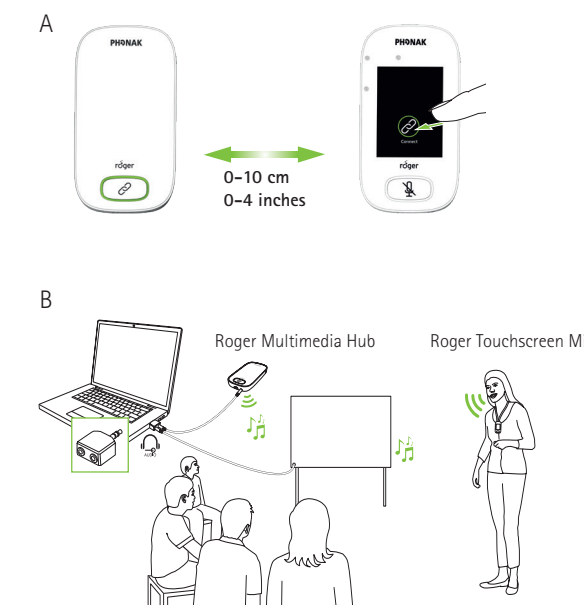



Indicator light Indikatorlampe (tilkoblingsknapp)

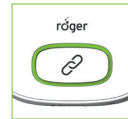

- On/Off | På/Av
- Charging | Lader
- Fully charged | Fulladet
- Audio broadcast | Sender lyd
- Connecting | Kobler til
- Connection successful | Tilkobling vellykket
- Connection failed | Tilkobling mislyktes

Roger Multimedia Hub = Secondary
Roger Multimedia Hub = sekundær


- Primary not available | Primærmikrofon er ikke tilgjengelig

Indicator light Indikatorlampe (Av/På knapp)



- On/Off | På/Av
- Charging | Lader
- Fully charged | Fulladet
- Switched on | Slått på
- Recharge device | Lad enhet

Operation range Rekkevidde

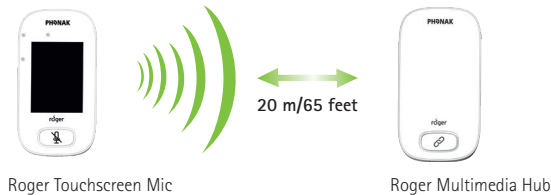

Out of range! If distance greater than 20 meters/65 feet
Hvis avstanden mellom enhetene er større enn 20 m, blir
lydoverføringen avbrutt



Reset Tilbakestill



Hold inne tilkoblings-knappen og På/Av knappen
i minst åtte sekunder. Indikatorlampen vil blinke
grønt, og Roger Multimedia hub vil automatisk
starte på nytt.



Only Roger transmitters running on software version 4.x are compatible with
Roger Multimedia Hub.

Kun Rogermottakere som har programvare versjon 4.x er kompatibel med Roger
Multimedia Hub

Operating conditions:
Driftsforhold 0° to +45° Celsius
32° to +113° Fahrenheit

<95%
Relative humidity | Relativ luftfuktighet
>8 h

Waste Electrical and Electronic Equipment Directive
Elektronisk avfall

CE marking
CE merket

Class II
Klasse II

Indoor use
Innendørs bruk

Important to read
Viktig informasjon om
håndtering og
produksikkerhet.

ACMA - AUS/NZ