

Phonak

Mikrofony Roger™ iN

Mikrofon Roger iN – instrukcja instalacji

Spis treści


| | |
|--|---|
| Instalowanie odbiorników Roger w parze aparatów słuchowych z rozwiązaniem RogerDirect™ | 1 |
| Sprawdzanie liczby odbiorników Roger w mikrofonie Roger iN | 2 |
| Odinstalowanie odbiornika Roger z aparatu słuchowego | 3 |

Instalowanie odbiorników Roger w parze aparatów słuchowych z rozwiązaniem RogerDirect™


Upewnij się, że w aparacie słuchowym zainstalowano najnowsze oprogramowanie, które jest dostępne w oprogramowaniu Phonak Target w wersji 6.1 lub nowszej.

Kroki instalacji:


1. Włącz mikrofon Roger iN.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk instalacji, aż wskaźnik świetlny zacznie migać na zielono:

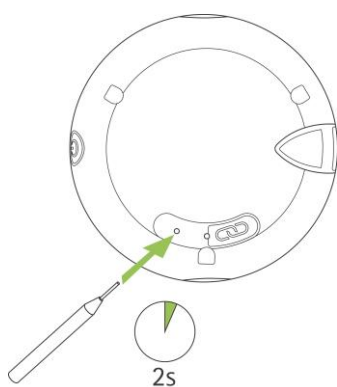

Roger Select™ iN

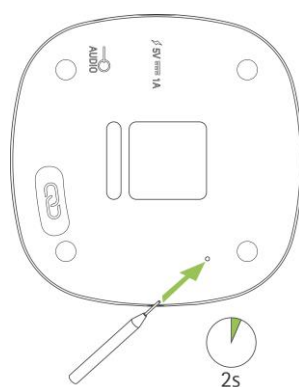


Roger Table Mic II iN

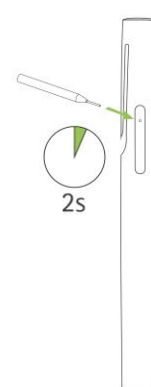

Roger Pen™ iN

3. Połóż mikrofon Roger iN na stole.
4. Włącz jeden aparat słuchowy (pozostałe aparaty pozostaw wyłączone).

5. Umieść aparat słuchowy obok mikrofonu Roger iN (w odległości do 10 cm).

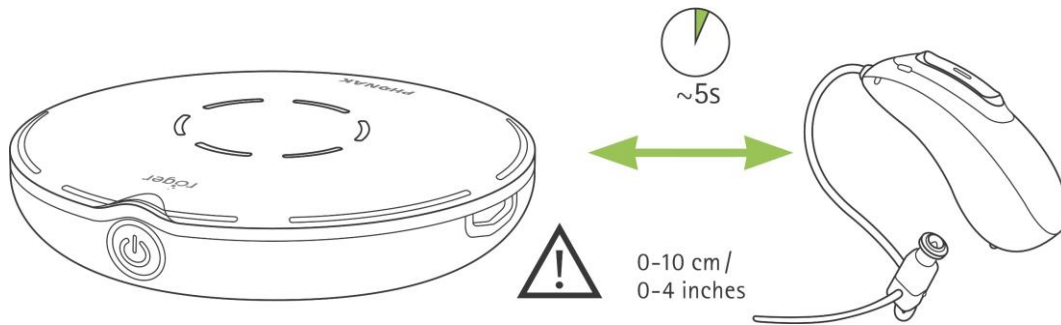

6. Poczekaj około 5 sekund, aż wskaźnik świetlny mikrofonu Roger iN zacznie świecić światłem ciągłym na zielono.

7. Powtórz kroki od 2 do 6 dla drugiego aparatu słuchowego.


Uwaga: Aparaty słuchowe połączą się z mikrofonem Roger iN automatycznie.

Jeśli po wykonaniu procedury instalacji wskaźnik świetlny zaświeci się na czerwono, oznacza to, że instalowanie zakończyło się niepowodzeniem. Oto możliwe przyczyny takiej sytuacji:


- odległość między mikrofonem Roger iN i aparatem słuchowym była za duża,
- w mikrofonie Roger iN nie zostały zainstalowane żadne odbiorniki Roger,
- aparaty słuchowe mają już zainstalowany system Roger,
- aparaty słuchowe nie są kompatybilne z rozwiązaniem RogerDirect.

Sprawdzanie liczby odbiorników Roger w mikrofonie Roger iN


Po włączeniu mikrofonu Roger krótko naciśnij przycisk instalacji na mikrofonie Roger iN:

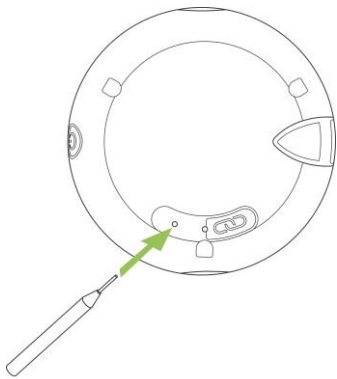

Roger Select iN

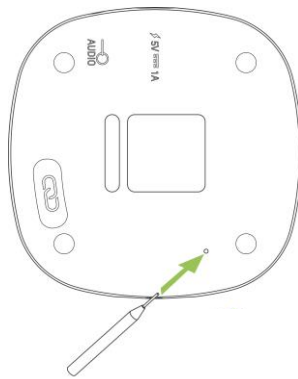

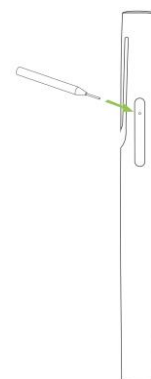


Roger Table Mic II iN



Roger Pen iN


Wskaźnik świetlny wskaże liczbę dostępnych odbiorników Roger:

-  Zainstalowane są dwa odbiorniki Roger.
-  Zainstalowany jest jeden odbiornik Roger.
-  Brak zainstalowanego odbiornika Roger.


Odinstalowanie odbiornika Roger z aparatu słuchowego

Kroki odinstalowania:


1. Włącz mikrofon Roger iN.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk instalacji, aż wskaźnik świetlny zacznie migać na zielono.

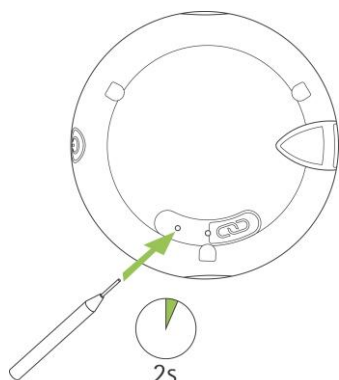

Roger Select iN

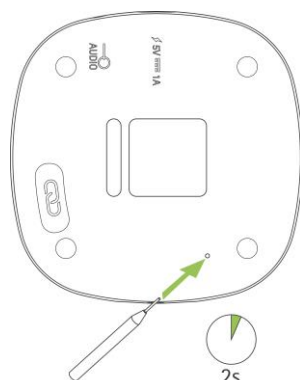


Roger Table Mic II iN

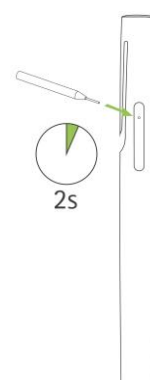

Roger Pen iN

3. Połóż mikrofon Roger iN na stole.
4. Włącz jeden aparat słuchowy (pozostałe aparaty pozostaw wyłączone).
5. Umieść aparat słuchowy obok mikrofonu Roger iN (w odległości do 10 cm).

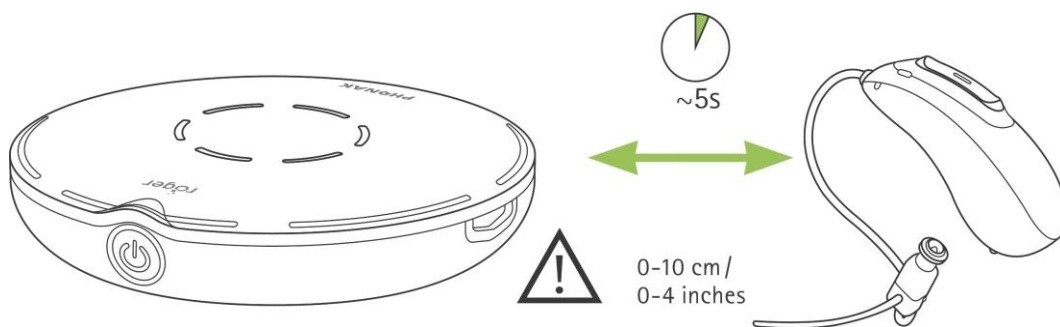

6. Poczekaj około 5 sekund, aż wskaźnik świetlny mikrofonu Roger iN zacznie świecić światłem ciągłym na zielono.
7. Jeśli to konieczne, powtórz kroki od 2 do 6 dla drugiego aparatu słuchowego.

Jeśli po wykonaniu procedury odinstalowywania wskaźnik świetlny zaświeci się na czerwono, oznacza to, że odinstalowanie zakończyło się niepowodzeniem. Oto możliwe przyczyny takiej sytuacji:

- odległość między mikrofonem Roger iN i aparatem słuchowym była za duża,
- w mikrofonie Roger iN były już zainstalowane dwa odbiorniki Roger,
- aparaty słuchowe nie miały zainstalowanego żadnego odbiornika Roger,
- aparaty słuchowe nie są kompatybilne z rozwiązaniem RogerDirect.