

# Roger NeckLoop til tale-til-tekst

## Betjeningsvejledning

Roger NeckLoop kan forbindes med en computer, tablet eller smartphone til at generere live, automatiske undertekster ved hjælp af tale-til-tekst software fra en anden leverandør.


### Forberedelser

1. Sørg for, at din Roger NeckLoop og din Roger mikrofon er opladet.
2. Sørg for, at der er installeret et program til tale-til-tekst fra en anden leverandør på din computer, smartphone eller tablet.

### Tilslutning til computer


*Du skal bruge:* Det medfølgende USB-C til USB-A kabel.

1. Slut USB-kablet til Roger NeckLoop og din computer:

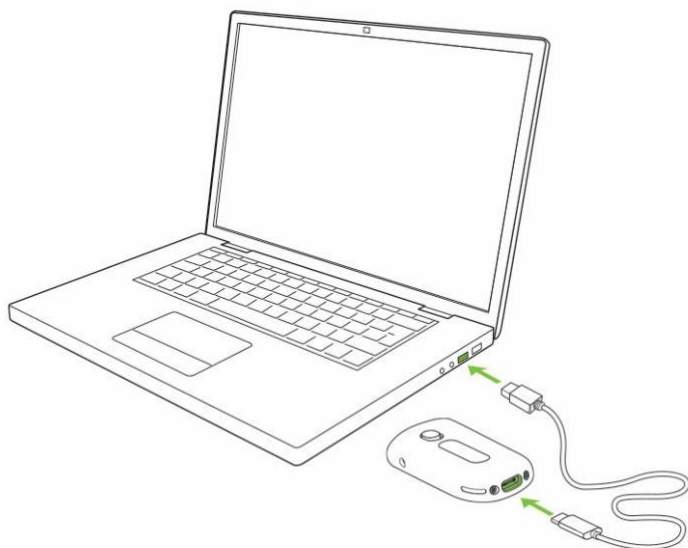

2. Tænd for Roger NeckLoop.

3. På din computer skal du tjekke, at Roger NeckLoop er valgt som inputkilde (lydindstillinger):

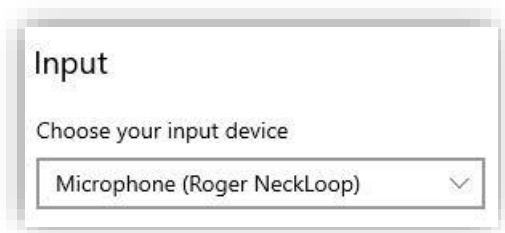

4. Kør tale-til-tekst softwaren (program fra anden leverandør) på din computer. Alternativt kan du også udføre "Diktat" funktionen i Microsoft Word:




5. Tal nu ind i Roger mikrofonen, og tale-til-tekst softwaren eller MS Word vil transskribere de talte ord til tekst.

### Tilslutning til smartphone eller tablet med et USB-C stik

*Du skal bruge:* Det medfølgende USB-C til USB-A kabel og en *On-the-Go (OTG) adapter*, ELLER et *USB-C til USB-C kabel*.

1. Slut Roger NeckLoop til din smartphone eller tablet med en OTG-adapter og det medfølgende USB-kabel, ELLER brug et USB-C til USB-C kabel.
2. Tænd for Roger NeckLoop.
3. Kør programmet til tale-til-tekst (f.eks. Google Transcribe) på din smartphone eller tablet.
4. Hvis det er nødvendigt, skal Roger NeckLoop vælges som inputkilde.
5. Tal ind i Roger mikrofonen, og tale-til-tekst programmet vil transskribere de talte ord til tekst.

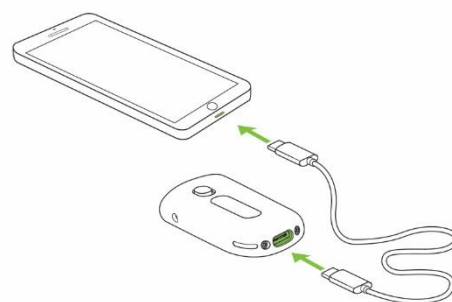

### Tilslutning til smartphone eller tablet med et Lightning stik

*Du skal bruge:* Det medfølgende USB-C til USB-A kabel og en *Lightning til USB 3 kameraadapter*. Opladeren til din telefon.

1. Slut adapteren til din smartphone.
2. Slut din telefonoplader til adapteren.
3. Slut Roger NeckLoop til adapteren med det medfølgende USB-C til USB-A kabel.
4. Tænd for Roger NeckLoop.
5. Kør programmet til tale-til-tekst på din smartphone eller tablet.
6. Hvis det er nødvendigt, skal Roger NeckLoop vælges som inputkilde.
7. Tal ind i Roger mikrofonen, og tale-til-tekst programmet vil transskribere de talte ord til tekst.

