

Roger On™

Betjeningsvejledning



roger



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Indholdsfortegnelse

1. Velkommen	5
2. Lær din Roger On at kende	6
2.1 Beskrivelse af enheden	10
2.2 Dockingstation	11
2.3 Tilbehør	12
2.4 Display	13
2.5 Tekniske data	14
3. Opladning af din Roger On mikrofon	15
4. Sådan bruger du Roger On	18
4.1 Sådan tænder du din Roger On	18
4.2 Generel brug	19
4.3 Anvendelse på et bord	20
4.4 Anvendelse i kraftig støj	22
4.5 Lyt til en taler over afstand	24
5. Låsning af mikrofonindstillingen	26
6. Sluk mikrofon	28
7. Lytte til TV og andre stationære lydkilder	29
7.1 Opsætning af dockingstationen	29
7.2 Lytte til TV ved hjælp af dockingstationen	31

8. Lytte til en bærbar lydkilde	33
9. myRogerMic appen	35
10. Netværksfunktioner	36
10.1 Oprette forbindelse til et høreapparat eller en Roger modtager	36
10.2 Tilslutte en anden mikrofon	39
10.3 Afbryde forbindelse til Roger enheder	41
11. Brug i en stor gruppe	42
11.1 Brug af flere mikrofoner	43
12. Nulstilling	44
13. Transporttilstand	45
14. Pleje og vedligeholdelse	46
15. Fejlfinding	48
16. Information om overensstemmelse	52
17. Information om og forklaring af symboler	56
18. Vigtige sikkerhedsoplysninger	59
19. Service og garanti	66

Denne betjeningsvejledning gælder for:

Roger On CE-mærkning: 2021

Roger On iN CE-mærkning: 2021



1. Velkommen

Din Roger On er udviklet af Phonak – verdens førende virksomhed inden for høreløsninger, som har base i Zürich, Schweiz.

Dette førsteklasses produkt er resultatet af flere årtiers forskning og ekspertise og er udviklet for, at du kan høre livets smukke lyde! Vi takker for, at du har truffet et så fremragende valg, og ønsker dig stor lytteglæde i mange år frem.

Du bedes læse betjeningsvejledningen grundigt for at sikre, at du er fortrolig med din Roger On og får størst muligt udbytte af den. Kontakt din høreapparatspecialist eller Sonova Denmark A/S, hvis du vil vide mere om funktioner, fordele, opsætning, anvendelse og vedligeholdelse af din Roger On og tilbehør.


Kontakt din hørespecialist ved spørgsmål om reparation af Roger On eller tilbehør.

Phonak – life is on
www.phonak.com

2. Lær din Roger On at kende

Roger On opfanger stemmen hos den, der taler, og sender den trådløst direkte til dine ører. Din Roger On anvendes i fire primære brugssituationer:

På et bord: Placer Roger On midt på et bord, og lyt til de personer, der sidder omkring det.

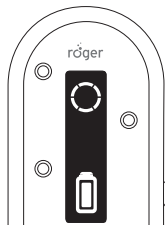


Restaurant




Møde

Retningstilstand: Hold Roger On i retning af den person, du gerne vil høre.


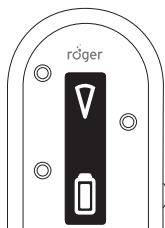


Fest

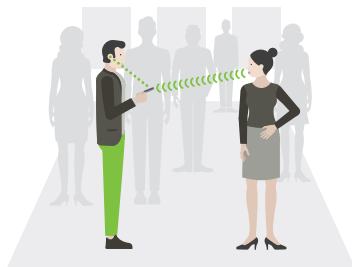


Ansigt til ansigt

Oplægsholder: Roger On klipses fast eller hænges om halsen i nærheden af munden på en taler, der står på afstand, for bedre at høre denne.

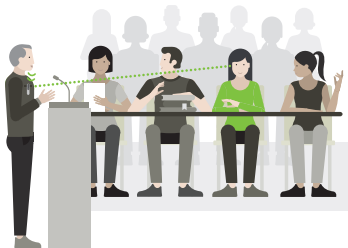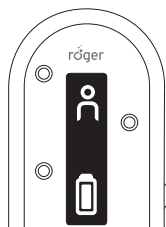


Tale/forelæsning

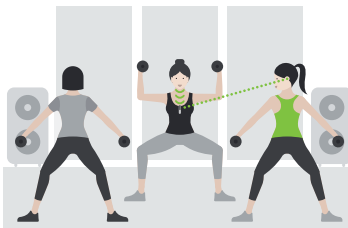


Holdtræning

TV og multimedier: Stream lyden fra dit TV eller en anden lydkilde direkte ind i dine ører.

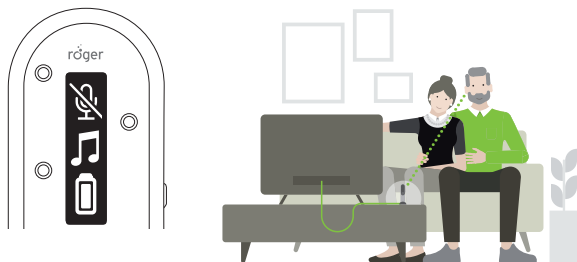


Når du ser TV


2.1 Beskrivelse af enheden

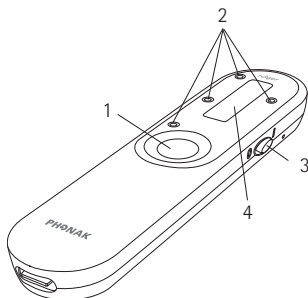

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1 Funktionsknap | 5 Tilslutningsknap |
| 2 4 mikrofoner | 6 Klips |
| 3 Tænd/sluk-knap | 7 Indbygget batteri |
| 4 Display | 8 USB C-stik |

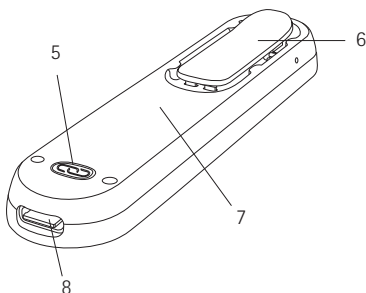


2.2 Dockingstation

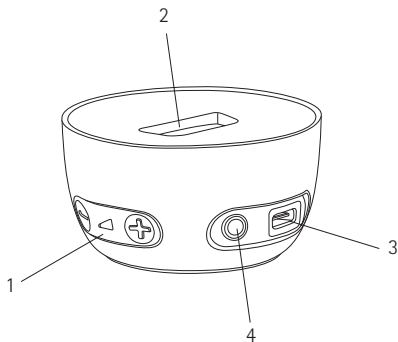


- 1 Indstilling af volumen på lydindgang
- 2 Åbning til Roger On
- 3 USB C-stik
- 4 3,5 mm analog og optisk digital (Toslink) lydindgang


2.3 Tilbehør

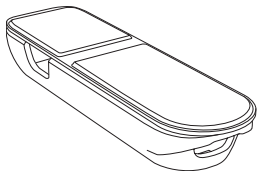


Etui

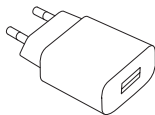


Strømforsyning

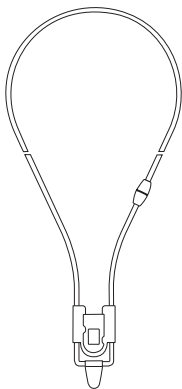


Snor

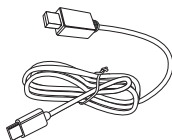

Ladekabel

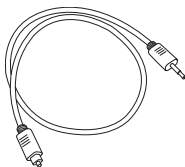


TV-kabel

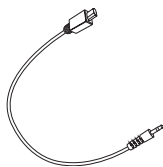

USB C audiokabel


2.4 Display

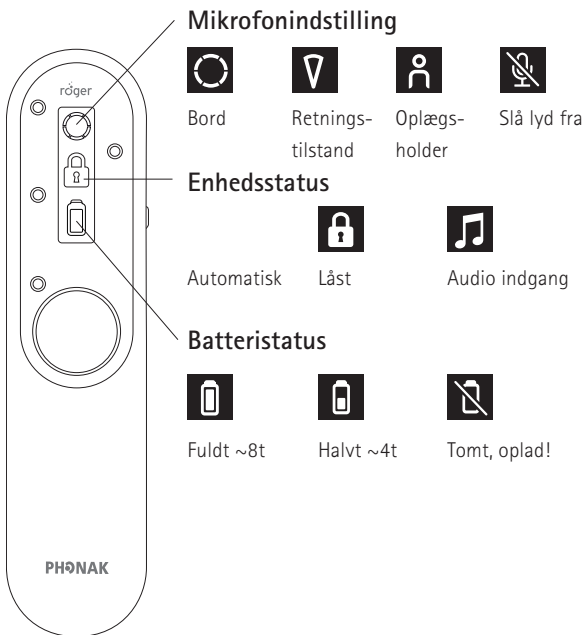

2.5 Tekniske data

Område:

Du kan placere din Roger On i en afstand på op til 25 meter. Bemærk, at forhindringer, herunder vægge, kan reducere denne afstand. Den maksimale afstand er mulig, hvis du kan se Roger On (dvs. direkte synslinje).

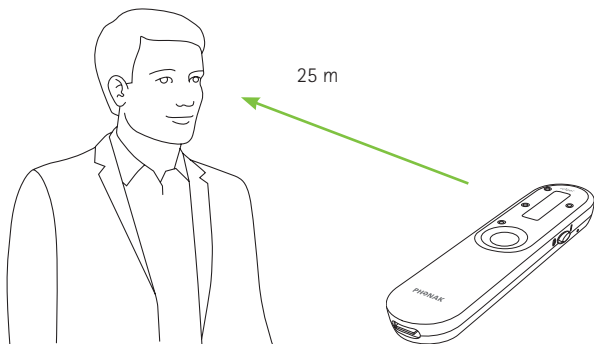

Batteriets levetid:


Et fuldt opladet batteri holder typisk til ca. 8 timers brug.

3. Opladning af din Roger On mikrofon

Roger On mikrofonen kan oplades på tre måder:


A) Ved hjælp af ekstern strømforsyning

1. Slut ladekablets lille stik (USB C) i Roger mikrofonen.
2. Slut kablets store stik (USB A) til den eksterne strømforsyning.
3. Slut den eksterne strømforsyning til en stikkontakt.

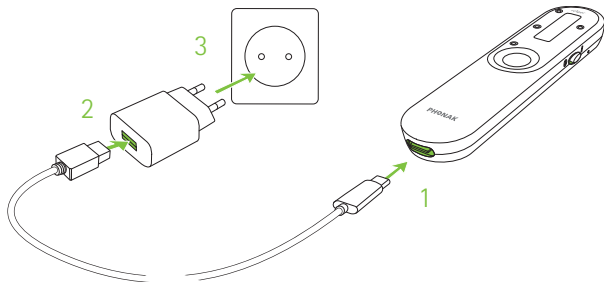

B) Fra computer eller tablet


1. Slut ladekablets lille stik (USB C) i Roger On.
2. Slut kablets store stik (USB A) til computerens USB-port, og tænd computeren.

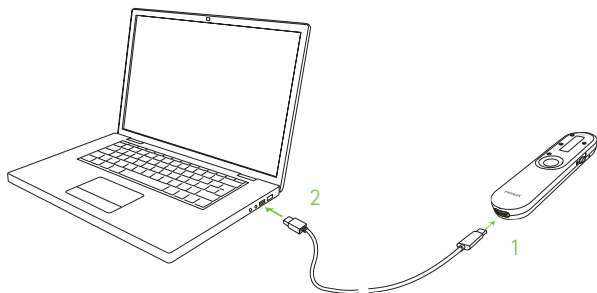

C) Via dockingstation

Sæt Roger On i dockingstationen.

i Læs kapitel 7.1 for at få oplysninger om opsætning af dockingstationen.

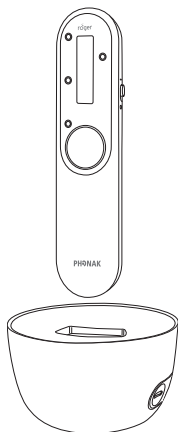

Opladningsoplysninger



Batteriikonet bevæger sig under opladning.



Når batteriet er fuldt opladet, stopper batteriikonet med at bevæge sig og viser et fuldt opladet batteri. Efter 15 minutter bliver displayet sort.


Med den medfølgende oplader er Roger On:

- 80 % opladet efter en time
- 100 % opladet efter tre timer

4. Sådan bruger du Roger On

4.1 Sådan tænder du din Roger On

Flyt tænd/sluk-knappen til tændt positionen. Efter en kort opstartsanimation er din Roger On klar til brug.

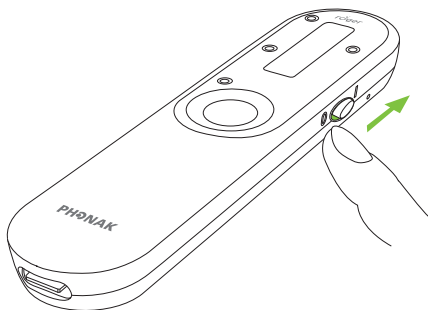

- ❗ Hvis du ser et kædeikon med et kryds over  på skærmen, skal du først forbinde din Roger On med dine høreapparater eller Roger modtager som beskrevet i kapitel 10.

4.2 Generel brug


Roger On er et alsidigt, intelligent produkt. Det registrerer, hvilken situation du befinder dig i og tilpasser automatisk mikrofonindstillingerne.

- ① Du opnår den bedste taleforståelighed ved at anbringe Roger mikrofonen så tæt på din(e) samtalepartner(e) som muligt.


- ① Juster længden på halssnoren, sådan at Roger On befinder sig maks. 20 cm fra talerens mund.

4.3 Anvendelse på et bord

Placer Roger On midt på et bord for at lytte til en gruppe personer.

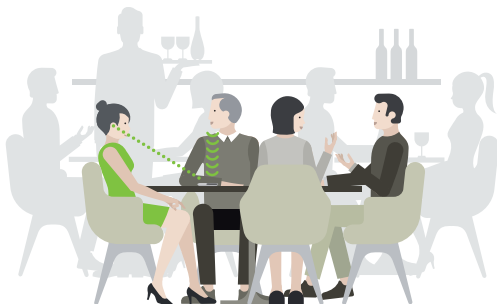

Mikrofonen opfanger alle omkring bordet, hvilket vises med en cirkel på displayet.

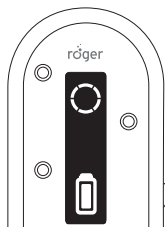


Anvend appen til at styre mikrofonens retning

MyRogerMic appen gør det muligt at styre retningen på mikrofonen og fokusere på en eller flere individuelle talere. I kapitel 9 kan du se, hvordan du downloader appen.

Anvend etuiets standerfunktion

Hvis du ønsker at fokusere på en enkelt person foran dig, kan du placere Roger On i etuiet og vippe det op ved hjælp af standerfunktionen.

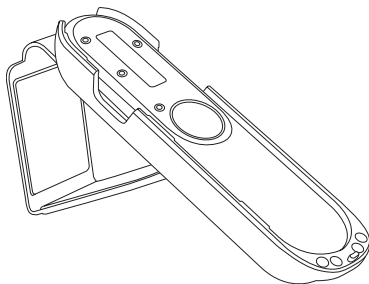


V


Når du bruger standeren, går mikrofonen automatisk i retningstilstand.

4.4 Anvendelse i kraftig støj

Hold Roger On i hånden, og peg den i retning af den person, du ønsker at høre.

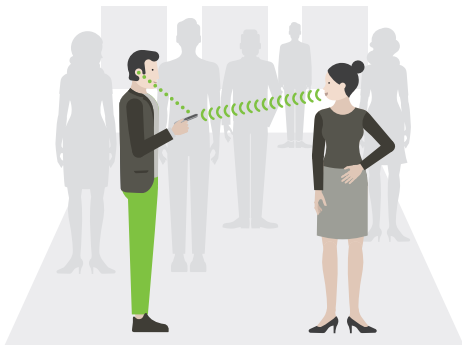


Mikrofonen aktiverer automatisk et smalt opfangelsesområde og opfanger stemmen fra den person, du peger på. Dette angives med en trekant i displayet.

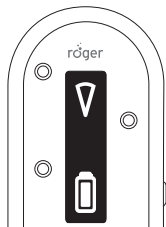


- ① Sørg for, at din Roger On peger lige mod munden af taleren.

- ① Dæk ikke for mikrofonåbningerne, mens du holder Roger On i hånden.

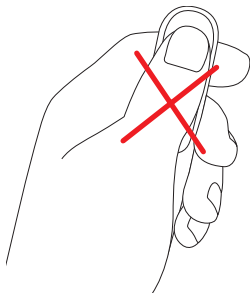


4.5 Lyt til en taler over afstand


Roger On klipses fast på tøjet på en taler, der står på afstand, for bedre at høre denne.

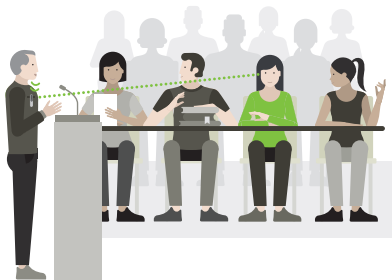

Mikrofonen opfanger kun personen, der bærer mikrofonen, hvilket vises med et personikon i displayet.

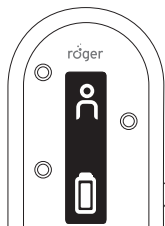


- ① Som alternativ kan du fastgøre halssnoren til Roger On og hænge den om halsen på en taler, der står på afstand:

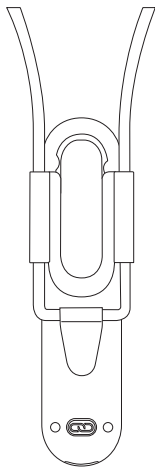


5. Låsning af mikrofonindstillingen

Hvis du ønsker, at Roger On beholder en bestemt mikrofonindstilling uafhængigt af, hvordan den placeres, skal du trykke flere gange på funktionsknappen, indtil du når til den mikrofonindstilling, som du ønsker at låse mikrofonen i.

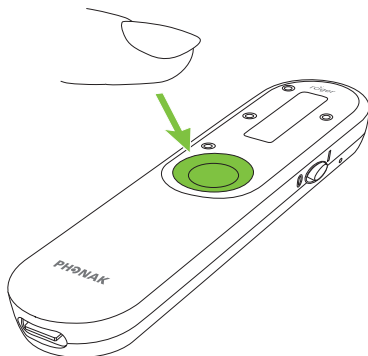

Låsetilstandene vises i følgende rækkefølge:

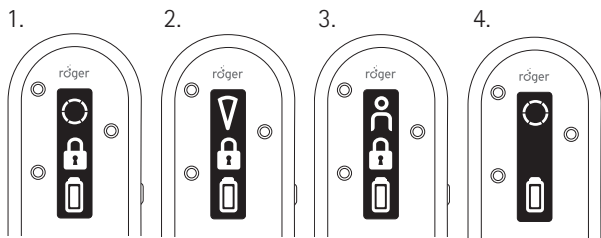


1. Automatisk retning
2. Retningstilstand
3. Oplægsholdertilstand
4. Hvis der ikke er noget låseikon, betyder det, at Roger On er tilbage i automatisk tilstand


Låseikonet indikerer, at mikrofonindstillingen er låst.

6. Deaktiver mikrofon

Hvis du vil deaktivere Roger On, skal du trykke vedvarende på funktionsknappen i to sekunder:

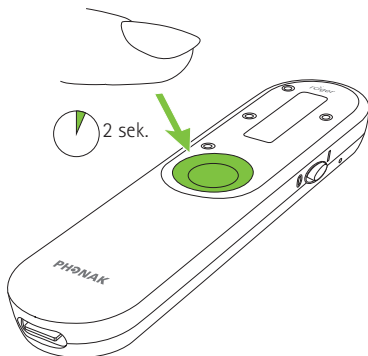


Den deaktiverede mikrofon angives med et mikrofonikon med et kryds over på displayet. Hvis du vil aktivere mikrofonen til igen, skal du igen trykke vedvarende på funktionsknappen i to sekunder.

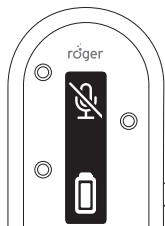


7. Lytte til TV og andre stationære lydkilder

7.1 Opsætning af dockingstationen

1. Sæt USB-kablets mindste stik i stikket på dockingstationen.
2. Sæt USB-kablets store stik i den eksterne strømforsyning.
3. Slut den eksterne strømforsyning til en stikkontakt.

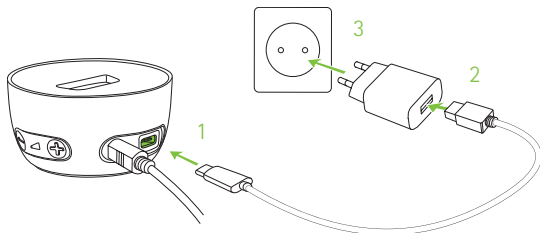


4. Tilslut den anden ende af det optiske kabel (Toslink) i den optiske UD GANG på dit TV eller anden lydenhed.

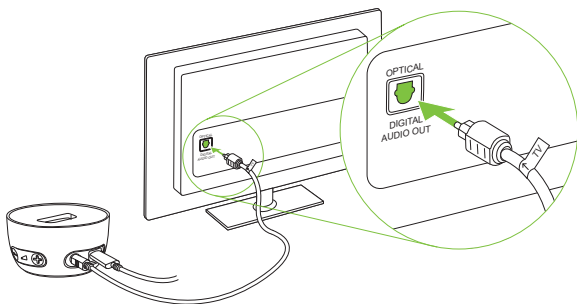


- i Beskyt øjnene mod det optiske lys fra det optiske Toslink-kabel, når det er sat i enheden eller TV'et.
- i Hvis dit TV (eller anden lydkilde) ikke har en optisk lydudgang, kan du som alternativ bruge et analogt lydkabel til at oprette forbindelse mellem TV'et og dockingstationen. Spørg din høreapparatspecialist angående et sådant analogt lydkabel.

7.2 Lytte til TV ved hjælp af dockingstationen

1. Sæt Roger mikrofonen i dockingstationen.
2. Tænd for TV'et (eller anden valgt lydkilde).
Roger mikrofonen sender herefter automatisk lydsignalet fra TV'et.

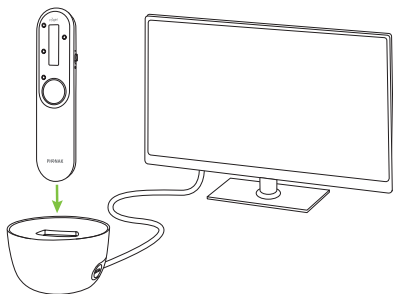


Dette angives med et musikikon i displayet.

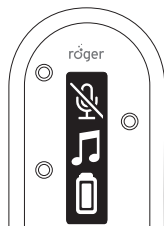

3. Juster lydstyrken i henhold til dine præferencer ved hjælp af knapperne +/- på dockingstationen.


❶ Mikrofonen i din Roger On slås automatisk fra, når den overfører TV-signalet. Du kan slå mikrofonen til ved at tænde for enheden og trykke på funktionstasten. Nu høres både TV-signalet og mikrofonen.

Transmissionen af lydsignalet afbrydes ved at slukke for TV'et (eller anden valgt lydkilde) eller tage Roger mikrofonen ud af dockingstationen.

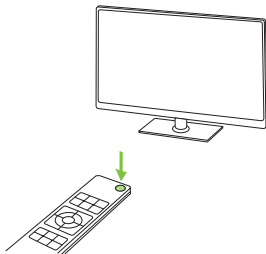

8. Lytte til en bærbar lydkilde

1. Kontrollér, at du har tændt Roger mikrofonen.
2. Tilslut den rektangulære ende af det korte lydkabel til Roger mikrofonen.
3. Tilslut den runde ende af det korte lydkabel til den bærbare enheds hovedtelefonudgang.

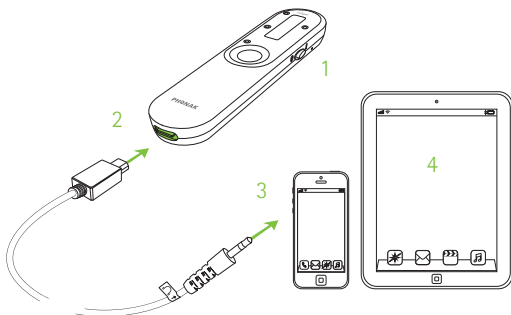

4. Start musikken på den bærbare lydkilde.

- ① Mikrofonen i din Roger On slås automatisk fra, når du tilslutter lydkalet. Du kan aktivere mikrofonen ved at trykke på den midterste knap. Nu høres både lydkilden og mikrofonen.

Transmissionen af lydsignalet afbrydes ved at koble lydkalet fra eller slukke for Roger mikrofonen.

9. myRogerMic appen



Du kan anvende MyRogerMic appen til at fjernstyre din Roger On via din smartphone.

Du vil kunne:

- Styre retningen på mikrofonen
- Skifte mikrofontilstand
- Slå lyd fra/til
- Kontrollere den aktuelle enhedsstatus, eksempelvis batteriniveau og nuværende mikrofonindstilling

Din smartphone skal understøtte Bluetooth® LE for at kunne oprette forbindelse til Roger On. MyRogerMic appen kan downloades fra Google Play og App Store.



Du kan finde yderligere oplysninger om appen i betjeningsvejledningen til MyRogerMic appen, der kan downloades fra www.phonak.com


Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Sonovas side sker under licens. Apple App Store-logoet er et varemærke tilhørende Apple Inc. Google Play Store-logoet er et varemærke tilhørende Google LLC.

10. Netværksfunktioner


10.1 Oprette forbindelse til et høreapparat eller en Roger modtager

Følg nedenstående trin for at forbinde Roger On med et høreapparat med Roger installeret eller en Roger modtager:


1. Tænd for din Roger On og høreapparatet.
2. Tryk på forbindelsesknappen på bagsiden af din Roger On.

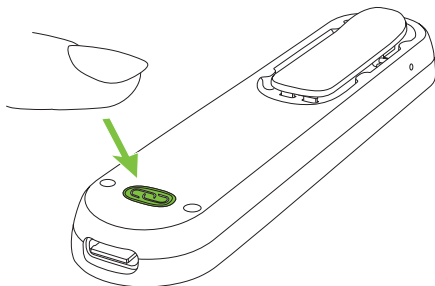


3. Hold din Roger On tæt på (maks. 10 cm) høreapparatet eller Roger modtageren.

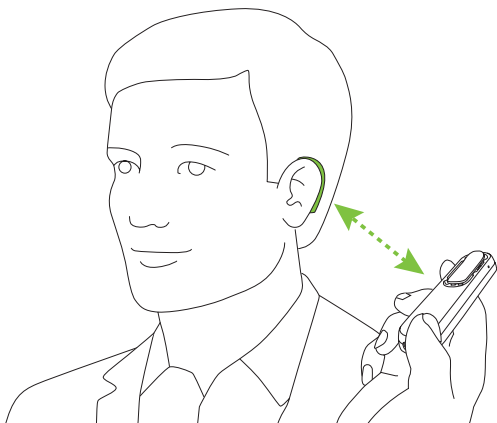


4. Kontrollér den feedback, du modtager i displayet på Roger On:

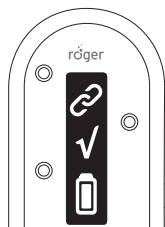

Forbindelse
oprettet

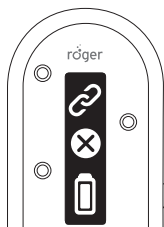

Modtager ikke
kompatibel

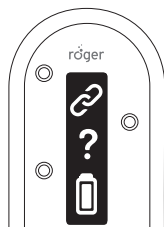


Ingen modtager fundet,
gå tættere på

- ① Du behøver kun at tilslutte en modtager én gang. Høreapparatet/Roger modtageren forbliver tilsluttet til din mikrofon, også selvom du genstarter høreapparatet/Roger modtageren.


10.2 Tilslutte en anden mikrofon

Følg nedenstående trin for at forbinde en anden kompatibel Roger mikrofon med din Roger On. Se kapitel 11 for at finde ud af, hvordan man bruger flere mikrofoner på et netværk.


1. Tænd for begge Roger mikrofoner.
2. Hold din Roger On tæt på (maks. 10 cm) den anden Roger mikrofon.

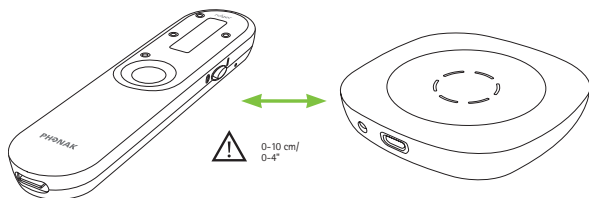


3. Tryk på tilslutningsknappen på din Roger On.

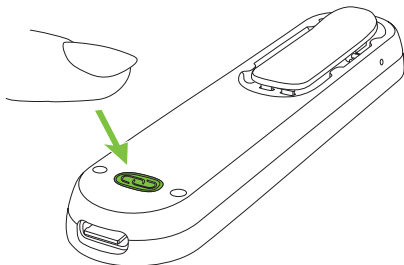


4. Kontrollér den feedback, du modtager i displayet på Roger On:

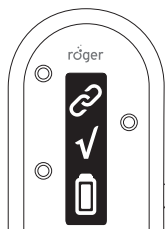

Forbindelse
oprettet

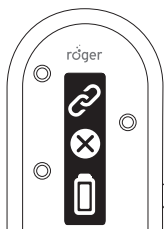


Enhed ikke
kompatibel

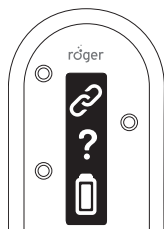


Intet apparat fundet,
gå tættere på

- i** Du behøver kun at tilslutte en anden mikrofon én gang. Den anden mikrofon forbliver tilsluttet til din Roger On, også selvom du genstarter mikrofonerne.

10.3 Afbryde forbindelse til Roger enheder

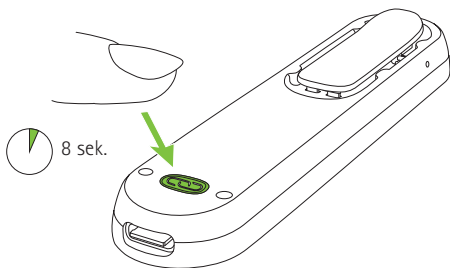


Hvis du vil afbryde forbindelsen mellem din Roger On og tilsluttede modtagere eller andre Roger mikrofoner, skal du trykke på forbindelsesknappen'  i 8 sekunder, indtil du ser denne oplysning i displayet:

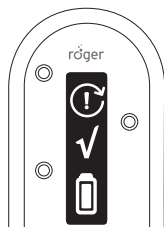

11. Brug i en stor gruppe


Roger On kan kombineres med andre Roger mikrofoner, f.eks. Roger Table Mic II. I kapitel 10 kan du se, hvordan du tilslutter endnu en mikrofon.

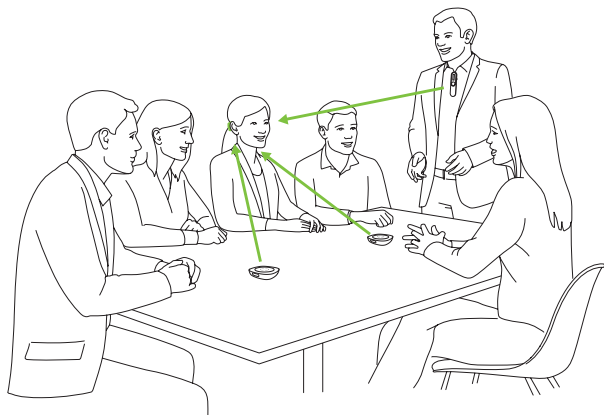


Ved at bruge flere mikrofoner kan du høre en større gruppe eller flere talere på afstand.

11.1 Brug af flere mikrofoner


Når Roger On bruges sammen med andre mikrofoner, skal den bæres på brystet af taleren. Lyden slås automatisk fra, når du placerer Roger On på bordet, eller når du holder den i hånden. Hvis du aktiverer Roger On igen med et langt tryk (2 sekunder) på den midterste knap, blokeres de andre mikrofoner, der er sluttet til Roger On. Hvis Roger On slukkes, aktiveres den/de andre mikrofoner igen.

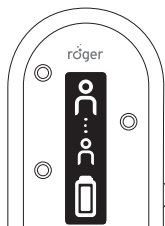

Roger On er sluttet til mindst en anden Roger mikrofon

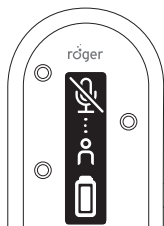

Roger On slås automatisk fra, når den placeres på bordet eller holdes i hånden

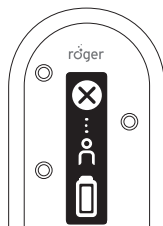


Roger On blokeres af en anden Roger mikrofon på netværket

12. Nulstilling

Hvis Roger On ikke længere reagerer på kommandoer, kan du nulstille den ved at trykke på den midterste knap og knappen Tilslut  samtidig i 10 sekunder.

13. Transporttilstand

Hvis du er nødt til at returnere Roger On i forbindelse med en reparation, anbefales det at sætte enheden i transporttilstand. Dette gør du ved at trykke vedvarende på forbindelsesknappen og slukke for enheden. Transporttilstanden bekræftes med følgende visning i displayet:

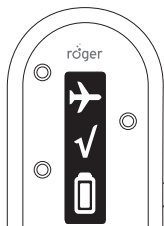

14. Pleje og vedligeholdelse

Omhyggelig og jævnlig vedligeholdelse af din Roger mikrofon og tilbehøret er med til at sikre god ydelse og lang levetid. For at sikre en lang levetid tilbyder Sonova Communications AG mindst fem års serviceperiode, efter den pågældende Roger mikrofon er blevet udfaset.

❶ Sørg altid for, at Roger mikrofonen, dockingstationen og ladekablerne er tørre og rene, inden de tages i brug.

Generelle oplysninger

Din Roger mikrofon er beskyttet mod vandstænk og støv. Roger mikrofonen rengøres og tørres, hvis den har været udsat for vand, sved eller støv.

Rengøringsvejledning

Rengør overfladen med en fnugfri klud. Anvend aldrig rengøringsmidler som f.eks. opvaskemiddel, sæbe osv. til rengøring af din Roger mikrofon. Det anbefales ikke at skylle mikrofonen i vand. Hvis det er nødvendigt med en grundig rengøring af din Roger mikrofon, så spørg din høreapparatspecialist til råds.

Sørg for, at dockingstationens ladestik og porte er rene. Fjern støv eller snavs fra ladestikket. Brug aldrig rengøringsmidler, sæbe osv. til rengøring af dockingstationen.

15. Fejlfinding

Problem

Jeg kan ikke tænde for min Roger mikrofon.

Jeg kan ikke høre nogen lyd fra min Roger mikrofon.

Jeg kan høre taleren, men jeg kan ikke forstå, hvad han eller hun siger

Jeg mister hele tiden lydsignalet.

Årsager

Batteriet er tomt.

Lyden i din Roger mikrofon er slået fra.

Din Roger mikrofon er låst.

Roger modtagerne er ikke forbundet med Roger mikrofonen.

Roger modtageren fungerer ikke.

Dine høreapparater er ikke indstillet til det rigtige program.

Mikrofonen er for langt fra taleren.

Mikrofonens åbninger er blokeret af fingre.

Mikrofonens åbninger er blokeret af snavs.

Rogers mikrofonindstilling er låst.

Der er for langt mellem dig og Roger mikrofonen.

Løsninger

Oplad din Roger mikrofon i mindst to timer.

Slå lyden til i Roger mikrofonen ved at trykke på den midterste knap i to sekunder.

Skift til automatisk mikrofonindstilling, eller sørg for at låse mikrofonen i den ønskede tilstand.

Hold Roger mikrofonen tæt på hver Roger modtager eller det Roger compatible høreapparat, og tryk på forbindelsesknappen.

Kontrollér, at du har tilsluttet Roger modtageren til dit høreapparat, og at den er tændt.

Kontrollér, at dine høreapparater er indstillet til det rigtige program (Roger/FM/DAI/EXT).

Flyt Roger mikrofonen tættere på talerens mund.

Hold mikrofonen på en måde, så dens åbninger ikke er blokeret.

Rengør mikrofonens åbninger.

Skift til automatisk mikrofonindstilling, eller sørg for at låse mikrofonen i den ønskede tilstand.

Flyt dig tættere på Roger mikrofonen.

Problem

Jeg hører for meget støj.

Jeg bryder mig ikke om at høre min egen stemme i Roger mikrofonen.

Multimedieenhedens lydstyrke er for lav.

Jeg kan ikke høre min multimedieenhed

Min Roger mikrofon fungerer ikke og reagerer ikke ved tryk på nogen af knapperne.

Årsager

Genstande blokerer signalet mellem dig og Roger mikrofonen.

Støj opfanges af Roger mikrofonen.

Din stemme opfanges af Roger mikrofonen.

Lydindstillingerne er forkerte.

Lyden er slået fra på lydkilden.

Din Roger mikrofon er slukket.

Lydkablet er ikke tilsluttet korrekt.

Software problem.

Løsninger

Undgå at blokere signalet mellem dig og Roger mikrofonen, eller flyt dig tættere på Roger mikrofonen.

Skift til retningstilstand, og peg din Roger mikrofon i retning af taleren.

I myRogerMic appen skal du slå mikrofon retningen, der peger i din retning, fra.

Skru op for lydstyrken på Roger mikrofonens dockingstation eller på din lydkilde.

Slå lyden til på lydkilden.

Tænd for din Roger mikrofon.

Tilslut lydkablet korrekt.

Nulstil din Roger mikrofon ved at trykke på funktionsknappen og forbindelsesknappen samtidig i 10 sekunder

16. Information om overensstemmelse

Europa:

Overensstemmelseserklæring

Sonova Communications AG erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med Rådets direktiv nr. 2014/53/EØF om radioudstyr. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan fås hos producenten eller den nærmeste Phonak-repræsentant, hvis adresse kan hentes fra listen på <https://www.phonak.com/com/en/certificates.html> (Phonak global tilstedeværelse).

Driftsfrekvens: 2400 til 2483,5 MHz

Effektniveau: < 100 mW

Australien/New Zealand:



Angiver, at en enhed er i overensstemmelse med reglerne i den gældende Radio Spectrum

R-NZ

Management's (RSM) and Australian Communications and Media Authority (ACMA) vedrørende lovligt salg i New Zealand og Australien. Overensstemmelsesmærkningen R-NZ gælder for radioprodukter, som sælges på det new zealandske marked i henhold til overensstemmelsesniveau A1.

FCC ID: KWCTX33
IC: 2262A-TX33

Note 1:



Denne enhed overholder kravene i Del 15 i FCC-bestemmelserne og RSS-210 fra Industry Canada. Enheden må kun anvendes på følgende to betingelser:

- 1) enheden må ikke forårsage interferens, og
- 2) enheden skal kunne modstå den interferens, den modtager, herunder også interferens, som kan forårsage uønsket brug.

Note 2:

Ændringer eller modificeringer af enheden, som Sonova Communications AG ikke udtrykkeligt har givet tilladelse til, kan resultere i, at FCC-tilladelsen til brug af udstyret inddrages.

Note 3:

Enheden er blevet testet og overholder grænserne for en digital klasse B-enhed i henhold til Del 15 i FCC-bestemmelserne og ICES-003 i Industry Canada.

Disse grænser er opstillet med henblik på at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Enheden genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en given installation. Hvis enheden forårsager skadelig interferens ved radio- eller TV-modtagelse, hvilket afgøres ved at tænde og slukke for enheden, skal brugeren forsøge at afhjælpe interferensen på en af følgende måder:

- Modtagerantennen skal drejes eller anbringes et andet sted.
- Afstanden mellem enheden og modtageren skal øges.
- Enheden skal sluttes et udtag i et andet kredsløb end det kredsløb, som modtageren er sluttet til.
- Bed forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjælp.

Note 4:



Overholdelse af den japanske lov om radiokommunikation. Overholdelse af erhvervslovgivning Denne enhed overholder den japanske lov om radiokommunikation (電波法). Enheden må ikke modificeres (i modsat fald vil det bevilgede designationsnummer blive ugyldigt).

Note 5:

Erklæring om overholdelse af FCC/Industry Canadas grænseværdier for eksponering for RF-stråling. Denne enhed er i overensstemmelse med FCC/Industry Canadas grænseværdier for RF-strålingseksponering i et ukontrolleret miljø. Denne sender må ikke placeres sammen med eller betjenes i forbindelse med en anden antenne eller sender.

17. Information om og forklaring af symboler



CE-symbolet angiver, at Sonova Communications AG bekræfter, at dette produkt er i overensstemmelse med Rådets direktiv nr. 2014/53/EØF om radioudstyr.



Dette symbol betyder, at det er vigtigt, at brugeren læser og overholder de relevante oplysninger i denne betjeningsvejledning.



Angiver producenten af udstyret.



Dette symbol angiver, at det er vigtigt, at brugeren er opmærksom på de relevante advarselssmeddelelser i denne betjeningsvejledning.



Vigtige oplysninger om håndtering og produktsikkerhed.

Brugsforhold

Dette produkt er udformet på en sådan måde, at det fungerer problemfrit og uden begrænsninger, hvis det anvendes som tilsigtet, medmindre andet er angivet i denne vejledning.



Temperatur ved transport og opbevaring:
-20 til +60° celsius.

Driftstemperatur: 0° til +40° celsius
(+32° til +104° fahrenheit).



Skal holdes tør.



Luftfugtighed ved transport og opbevaring:
< 90 % (ikke-kondenserende).

Luftfugtighed under drift: < 90 % (ikke-kondenserende).



Atmosfærisk tryk: 500 hPa til 1060 hPa.



Dette symbol angiver producentens
serienummer, så det er muligt at identificere
en specifik enhed.



Angiver produktionsdatoen.



Emballage og betjeningsvejledning
kan genbruges.



Dette symbol på produktet eller emballagen betyder, at det ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det er dit ansvar, at brugt udstyr ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald. Ved at bortskaffe dit brugte apparat korrekt undgås eventuelle negative konsekvenser for miljøet og sundheden. Produktet har et indbygget batteri, som ikke kan udskiftes. Prøv ikke på at åbne enheden eller fjerne batteriet, da dette kan skade dig og beskadige produktet. Kontakt din lokale genbrugsstation vedrørende bortskaffelse af batteriet.

18. Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs venligst oplysningerne på de følgende sider, før du tager enheden i anvendelse.

18.1 Advarsler

- ⚠ Dette udstyr må ikke anvendes til børn under 36 måneder. Det indeholder små dele, som kan medføre kvælning, hvis de sluges af børn. Opbevar dem derfor utilgængeligt for børn, mentalt handicappede personer og kæledyr. Hvis de sluges, skal der straks søges læge eller hospital.
- ⚠ Enheden kan skabe magnetfelter. Hvis man oplever, at Roger On påvirker implantater (f.eks. pacemakere, defibrillatorer), skal man holde op med at bruge Roger On og kontakte lægen og/eller producenten af implantatet for at få hjælp.
- ⚠ Benyt kun høreapparater, som din høreapparatspecialist har programmeret til dig.

- ⚠ Baggrundsstøj kan blive mindsket ved brug af denne enhed. Vær opmærksom på, at advarselssignaler og støj, f.eks. fra biler, bliver helt eller delvist dæmpet.
- ⚠ Elektriske komponenter skal bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser.
- ⚠ Enhederne må ikke udsættes for ændringer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af Sonova Communications AG.
- ⚠ Benyt kun tilbehør, som er godkendt af Sonova Communications AG.
- ⚠ Opladeren, som leveres af Sonova Communications AG, kan bruges til opladning af Roger On i op til 5.000 meters højde. Af sikkerhedsgrunde må du kun bruge opladere, der leveres af Sonova Communications AG, eller IEC 62368-godkendte opladere med en specifikation på 5VDC, min. 500 mA, maks. 2000 mA og op til 2.000 meters højde.

- ⚠ Enheden må ikke anvendes i områder, hvor der er eksplosionsfare (i miner eller industriområder, hvor der er eksplosionsfare, og i iltholdige miljøer eller områder, hvor der håndteres brændbare anæstesimidler), eller på steder, hvor det er forbudt at bruge elektronisk udstyr.
- ⚠ Ved betjening af maskiner skal du sikre, at ingen af din Rogers dele kan sætte sig fast i maskinen.
- ⚠ Oplad ikke enheden, når du har den på.
- ⚠ Enheden må ikke tildækkes under opladning, f.eks. med en klud eller lignende.
- ⚠ Enheden fungerer i frekvensområdet 2,4-2,48 GHz.
Hvis du skal rejse med fly, skal du huske at kontrollere, om flyselskabet kræver, at trådløse enheder skal slukkes.
- ⚠ På grund af risikoen for elektrisk stød må produktet og tilbehør kun åbnes af en fagmand.

18.2 Produktsikkerhedsoplysninger

- ❗ Beskyt enhedens stik og strømforsyning mod støv og snavs.
- ❗ Vær forsigtig, når du slutter de forskellige kabler til enheden.
- ❗ Beskyt enheden mod store mængder fugt (badning og svømning) samt varmekilder (radiator). Beskyt enheden mod kraftige stød og rystelser.
- ❗ Rengør enheden med en fugtig klud. Brug aldrig vaske- og rengøringsmidler (vaskepulver, sæbe osv.) eller alkohol til rengøring af enhederne. Brug aldrig en mikrobølgeovn eller andre varmeapparater til at tørre enheden.
- ❗ Røntgenstråler, CT- og MR-skanninger kan ødelægge eller have en negativ indvirkning på enhedens funktion.
- ❗ Sørg altid for, at enheden og dockingstationen er rene og tørre.

- ① Opbevar enheden et tørt sted, hvis den ikke skal bruges i en længere periode.
- ① Anvendelse af denne enhed i umiddelbar nærhed af andet udstyr bør undgås, da det kan medføre funktionsfejl. Hvis dette ikke kan undgås, skal det kontrolleres, at både denne enhed og det andet udstyr fungerer, som det skal.
- ① Anbring ikke opladningstilbehør tæt på induktionskogeplader. Konduktive strukturer inden i opladningstilbehøret kan absorbere induktiv energi, hvilket medfører termisk ødelæggelse.
- ① Enheden er beskyttet mod vandstænk, men er ikke vandtæt.
- ① Enheden indeholder et litium-ion-batteri. Enheden må ikke være placeret i den indtjekkede bagage, men kun være placeret i håndbagagen.

- ① Ved forsendelse af enheden med fly gælder alle regler og bestemmelser om sikker forsendelse af litium-ion batterier. Hvis der er mistanke om, at batterier er defekte, må de ikke sendes med luftfragt.
- ① Opladerens USB-port må kun bruges til det beskrevne formål.
- ① Hvis enheden er blevet tabt eller beskadiget, hvis den overopheder, har en beskadiget ledning eller stikprop eller er blevet tabt ned i væske, skal du holde op med at bruge den og kontakte et autoriseret servicecenter.

18.3 Andre vigtige oplysninger

- ① Beskyt øjnene mod det optiske lys fra det optiske Toslink-kabel, når det er sat i enheden eller TV'et.
- ① Elektronisk udstyr med høj effekt, større elektroniske installationer og metalstrukturer kan begrænse og reducere rækkevidden betydeligt.
- ① Enheden indsamler og lagrer interne tekniske data. Disse data kan aflæses af en høreapparatspecialist for at kontrollere enheden og for at hjælpe dig med at bruge enheden korrekt.
- ① Det digitale signal, der sendes fra enheden til en tilsluttet modtager, kan ikke aflyttes med andet udstyr, som ikke er i mikrofonens netværk.

19. Service og garanti

19.1 Lokal garanti

Bed hørespecialisten, som har udleveret enheden, om de garantivilkår, der gælder lokalt.

19.2 International garanti

Phonak yder en et-årig, begrænset international garanti, som træder i kraft på udleveringsdatoen. Denne begrænsede garanti dækker produktions- og materialefejl. Garantien gælder kun ved fremvisning af købsdokumentation.

Den internationale garanti har ikke indflydelse på de juridiske rettigheder, du måtte have i henhold til den lokale garanti eller den gældende nationale lovgivning om salg af forbrugsvarer.

19.3 Begrænsning af garantien

Garantien dækker ikke skader, der opstår som følge af forkert håndtering eller vedligeholdelse, udsættelse for kemiske stoffer, nedsænkning i vand eller for stor belastning. Skader forårsaget af tredjepart eller ikke-autoriserede servicecentre medfører, at garantien bortfalder. Garantien omfatter ikke service, der er udført af hørespecialisten på dennes klinik.

Serienummer: _____

Udleveringsdato: _____

Autoriseret hørespecialist
(stempel/underskrift):

Noter

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Phonak repræsentant Danmark:

Sonova Denmark A/S

Østre Hougvej 42-44

5500 Middelfart



Producent:

Sonova Communications AG

Herrenschwandweg 4

CH-3280 Murten

Schweiz

www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD

029-0874-08N3.00/2020-09/NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved



716133891440058

