

Phonak


Referenceblad

Anvendelse af RogerDirect™ i et Phonak-høreapparat

Vigtigt: Det anbefales at have en afstand på minimum 3 m mellem hver Roger Installer under installation/afinstallation samt at alle andre høreapparater tæt på Roger Installer skal være slukket. Det anbefales, at Roger enheder i nærheden af Roger Installer skal være slukket under en installation.


Installation af Roger™ modtager i et Phonak-høreapparat fra Roger X

- Slut Roger X til Roger Installer (3).
- Tænd Roger Installer (1) (indikatorlyset (2) vil lyse grønt).
- Indikatorlys (4) lyser grønt (Roger X er klar til installation).
- Tænd høreapparatet, og anbring det på høreapparatlogoet.
- Vent, til indikatorlyset (5) blinker grønt (installation er i gang) når indikatorlyset lyser grønt, er installationen færdig.
- Sluk for Roger Installer. Fjern og opbevar Roger X. Høreapparatet er klar til at blive brugt sammen med RogerDirect.

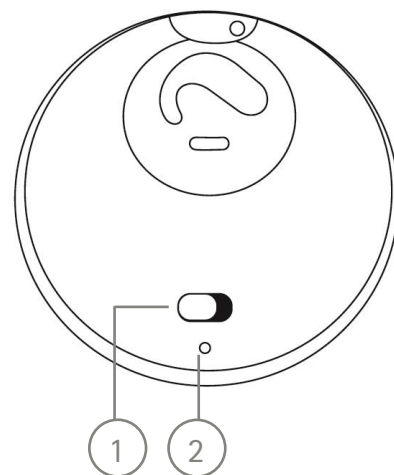

Afinstallation af Roger modtager fra et Phonak-høreapparat til Roger X

- Slut Roger X til Roger Installer (3).
- Tænd Roger Installer (1) (indikatorlyset (2) vil lyse grønt).
- Indikatorlys (4) forbliver inaktivt i flere sekunder (Roger X er klar til at blive afinstalleret).
- Tænd høreapparatet, og anbring det på høreapparatlogoet.
- Vent, til indikatorlyset (5) lyser grønt (bekræfter, at Roger er installeret i dette høreapparat).
- Når afinstallationen begynder, vil indikatorlyset (5) blinke grønt, til processen er afsluttet.
- Indikatorlys (4) lyser grønt, når afinstallationen er afsluttet (Roger er nu installeret i Roger X).

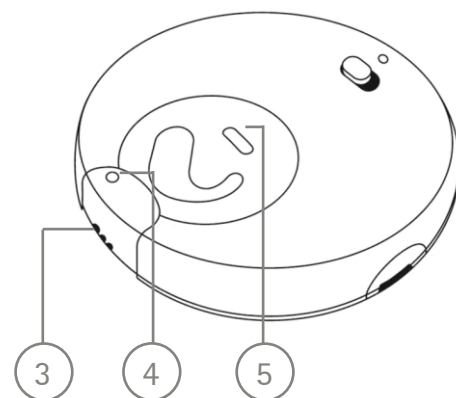

- h. Sluk for Roger Installer. Fjern Roger X. Høreapparatet kan ikke længere anvendes sammen med Roger.