

Phonak Sky™ Link M

Betjeningsvejledning



Phonak Sky Link M



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Denne betjeningsvejledning gælder for:

Modeller

Phonak Sky Link M

CE-mærket

2019



Oplysninger om dit høreapparat

ⓘ Dine høreapparater fungerer i frekvensområdet 2,4-2,48 GHz. Hvis du skal rejse med fly, skal du huske at kontrollere, om flyselskabet kræver at trådløse enheder indstilles til flytilstand (se kapitel 13).

Model

Phonak Sky Link M

Batteristørrelse

13

Ørestykke

- Øreprop
- Universal øretip
- Lydkuppel
- SlimTip

Dine høreapparater er udviklet af Phonak – verdens førende virksomhed inden for høreløsninger, som har base i Zürich, Schweiz.

Disse premiumprodukter er resultatet af flere årtiers forskning og ekspertise og er udviklet for, at du kan høre livets smukke lyde! Vi takker for, at du har truffet et så fremragende valg, og ønsker dig stor lytteglæde i mange år frem.

Du bedes læse betjeningsvejledningen grundigt for at sikre, at du har forstand på dine høreapparater og får stor gavn af dem. Hvis du gerne vil vide mere om funktionerne og fordelene, bedes du kontakte din hørespecialist.

Phonak – life is on
www.phonak.com

Indholdsfortegnelse

Dit høreapparat

- 1. Lynvejledning 8
- 2. Beskrivelse af høreapparatet 10

Brug af høreapparatet



- 3. Mærkninger på venstre og højre høreapparat 11
- 4. Tænd/sluk 12
- 5. Batterier 13
- 6. Sæt dit høreapparat rigtigt 18
- 7. Udtagning af høreapparatet 20
- 8. Multifunktionsknap med indikatorlys 22
- 9. Dit høreapparat kan bruges på flere måder 25
- 10. Oversigt over tilkoblingsmuligheder 26
- 11. Indledende paring 27
- 12. Telefonopkald 29
- 13. Flytilstand 34

Yderligere information

| | |
|---|----|
| 14. Betjening, transport og opbevaring | 36 |
| 15. Pleje og vedligeholdelse | 38 |
| 16. Udskiftning af ørestykket | 41 |
| 17. Service og garanti | 44 |
| 18. Information om overensstemmelse | 46 |
| 19. Oplysninger og forklaring af symboler | 52 |
| 20. Fejlfinding | 56 |
| 21. Vigtige sikkerhedsoplysninger | 58 |

1. Lynvejledning


Mærkninger på venstre og højre høreapparat

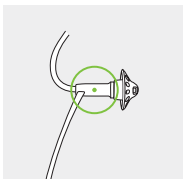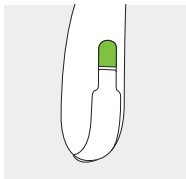


Blå mærkning betyder **venstre høreapparat**.

Rød mærkning betyder **højre høreapparat**.


Udskiftning af batterier

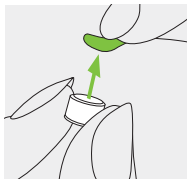

1. Fjern klistermærket fra det nye batteri, og vent to minutter.


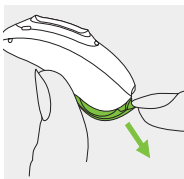


2. Åbn batteriskuffen. Se kapitel 5.2 vedrørende sikrede batteriskuffer.

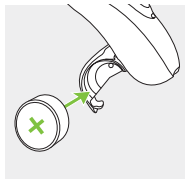

3. Læg batteriet i batteriskuffen med symbolet "+" opad.


Tænd/sluk

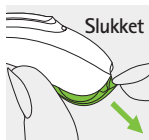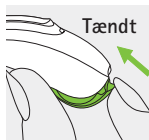

Se kapitel 5.2
vedrørende sikrede
batteriskuffer.


Multifunktionsknap med indikatorlys

Denne knap har flere funktioner. Du kan bruge den til at skrue op/ned for lydstyrken eller til at ændre program, alt efter hvad der er indstillet på dit høreapparat. Læs mere herom i vejledningen til høreapparatet. Hvis høreapparatet parres med en Bluetooth®-aktiveret telefon, vil et kort tryk acceptere et indgående opkald, og et langt tryk vil afvise det. Se kapitel 8 vedrørende indikatorlyset.

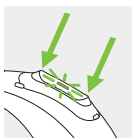

Flytilstand

Du kan aktivere flytilstand ved at holde den nederste del af knappen nede i syv sekunder, mens du lukker batteriskuffen. Du deaktiverer flytilstand igen ved at åbne og lukke batteriskuffen.

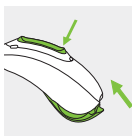


2. Beskrivelse af høreapparatet

De følgende billeder viser de mulige ørestykker og høreapparatmodellen, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning.


Mulige ørestykker



Øreprop

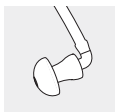

Universal
øretip

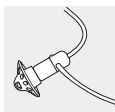


Lydkuppel



SlimTip



Sky Link M*

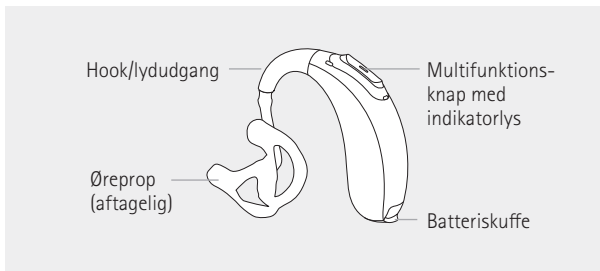

* Fås også med sikret løsning til børn under 36 måneder, se kapitel 5.2

3. Mærkninger på venstre og højre høreapparat

Der er et rødt eller blåt mærke, som viser, om det er venstre eller højre høreapparat.

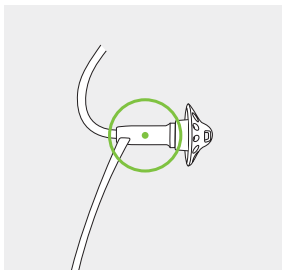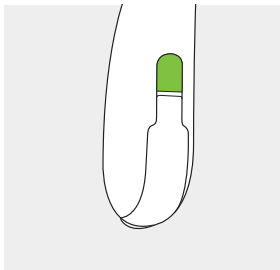

Blå mærkning betyder **venstre høreapparat**.


Rød mærkning betyder **højre høreapparat**.

4. Tænd/sluk

Batteriskuffen fungerer også som tænd/sluk-knap. Se kapitel 5.2 vedrørende åbning af sikrede batteriskuffer.


1.

Batteriskuffen er lukket =
høreapparatet er **tændt**

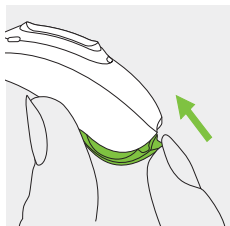

2.


Batteriskuffen er åben =
høreapparatet er **slukket**

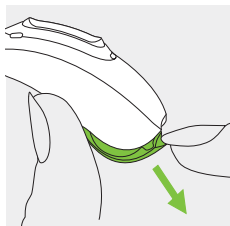

❶ Når du tænder høreapparatet, hører du muligvis en opstartsmelodi.


5. Batterier

5.1 Isæt batteri (standardbatteriskuffer)

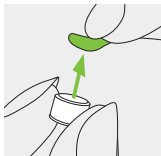


1.

Fjern klistermærket fra det nye batteri, og vent to minutter.

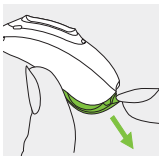

2.

Åbn batteriskuffen.

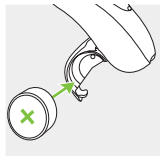


3.

Læg batteriet i batteriskuffen med symbolet "+" opad.

Hvis batteriskuffen er sikret til mindre børn, skal du læse de vigtige oplysninger nedenfor og følge de specifikke instruktioner i kapitel 5.2 vedrørende isætning af batteriet.

ⓘ Hvis det er svært at lukke batteriskuffen: Kontrollér, at batteriet er isat korrekt, og at symbolet "+" vender opad. Hvis batteriet ikke er korrekt isat, vil høreapparatet ikke fungere, og batteriskuffen kan blive beskadiget.

 Lavt strømniveau: Du hører to bip, når batteriets strømniveau er lavt. Du har ca. 30 minutter til at skifte batteriet (dette kan variere afhængigt af høreapparatets indstillinger og batteritypen). Vi anbefaler, at du altid har et ekstra batteri med dig.

Nyt batteri

Dette høreapparat kræver zink-luft-batterier i størrelse 13.


| Model | Zink-luft- batteri- størrelse | Farvemærkning på emballagen | IEC- kode | ANSI- kode |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Phonak Sky Link M | 13 | orange | PR48 | 7000ZD |

❗ Sørg for at bruge den korrekte type batteri i høreapparaterne (zink-luft). Se også kapitel 20.2 for at få yderligere oplysninger om produktsikkerhed.


5.2 Isætning af batteri med sikret batteriskuffe

Dette høreapparat kan udstyres med sikret batteriskuffe, hvis det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde (børn under 36 måneder).

Åbning af batteriskuffen

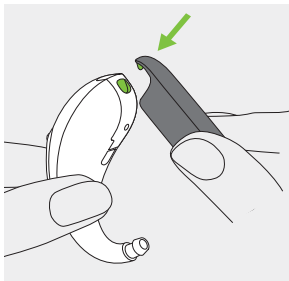


1. Anbring værktøjets spids i det lille hul i bunden af høreapparatet.

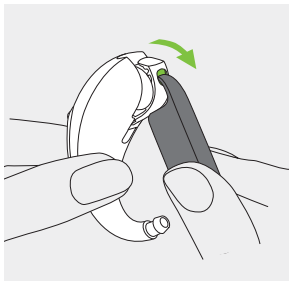


2. Anvend værktøjet som en vægtstang for at åbne batteriskuffen med kraft i den grønne pils retning.

Isætning af batteri

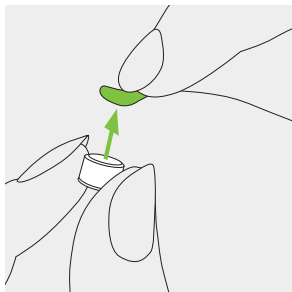


1. Fjern klistermærket fra det nye batteri, og vent to minutter.

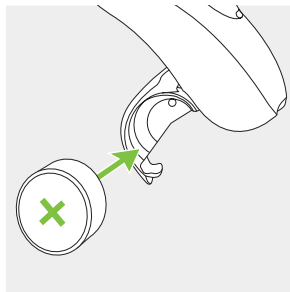

2. Læg batteriet i batteriskuffen med symbolet "+" opad.

Lukning af batteriskuffen

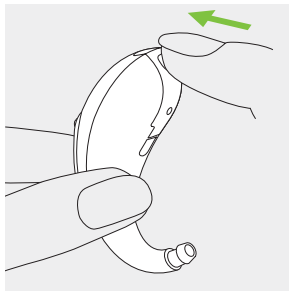


Batteriet er først sikret, når batteriskuffen er lukket korrekt. Kontrollér altid, at batteriskuffen ikke kan åbnes med fingrene.

6. Sæt dit høreapparat rigtigt

6.1 Påsætning af et høreapparat med øreprop


1.

Før øreproppen op til øret, og sæt øregangsdelen ind i øregangen.

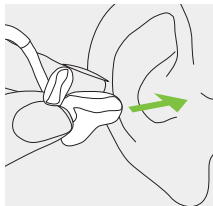


2.

Anbring høreapparatet bag øret.

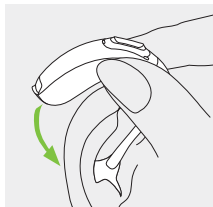

3.


Sæt den øverste del af øreproppen ind i den øverste del af ørets hulrum.

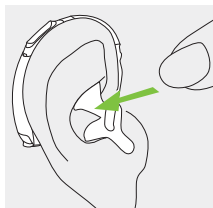

6.2 Påsætning af et høreapparat med lydskupel, SlimTip eller universal øretip


1.

Anbring høreapparatet bag øret.

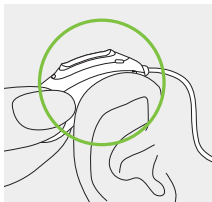


2.

Sæt ørestykket ind i øregangen.

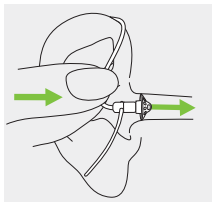

3.

Hvis der er monteret en fastholdelsesdel på ørestykket, skal du sætte den ind i øreskålen for at holde høreapparatet på plads.

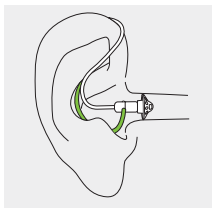


7. Udtagning af høreapparatet

7.1 Fjernelse af et høreapparat med øreprop


1.

Løft høreapparatet op over den øverste del af øret.

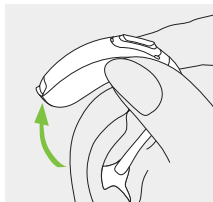

2.

Hold om øreproppen i øret, og fjern den forsigtigt.

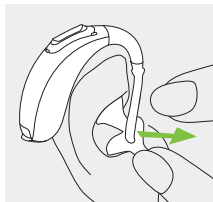


❗ Undlad at gribe om slangen for at fjerne høreapparatet.

7.2 Fjernelse af et høreapparat med lydkuppel, SlimTip eller universal øretip

1.


Træk i bukket på slangen, og fjern høreapparatet, som sidder bag øret.

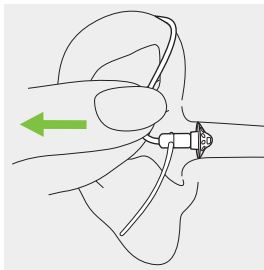

8. Multifunktionsknap med indikatorlys

Multifunktionsknappen har flere funktioner.

Du kan bruge den til at skrue op/ned for lydstyrken eller til at ændre program, alt efter hvad der er indstillet på dit høreapparat. Du kan læse mere herom i vejledningen til høreapparatet. Du kan få en udskrift af denne vejledning hos din hørespecialist.

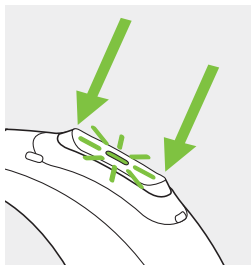

Hvis høreapparatet parres med en Bluetooth®-aktiveret telefon, vil et kort tryk på den øverste eller nederste del af knappen acceptere et indgående opkald, og et langt tryk vil afvise det – se kapitel 12.

Forældre og omsorgspersoner for spædbørn og mindre børn kan nemt følge med i høreapparatets status via et indikatorlys. Det grønne indikatorlys er indbygget i multifunktionsknappen og viser høreapparatets status, mens det er tændt. Din høreapparatspecialist kan aktivere/deaktivere indikatoren på forskellige måder.






Listen med alle høreapparatets indikatorlysmønstre er vist nedenfor. Bed din høreapparatspecialist markere, hvad der er aktiveret.

Ved parring med en kompatibel lydprocessor fra Advanced Bionics aktiveres indikatorlyset på samme måde som lydprocessorens indikatorlys.

Status for høreapparat

- Høreapparatet er tændt
- Høreapparatet er tændt, og der er forbindelse til Roger
- Batteriniveauet er lavt*
- Ændring i lydstyrkeniveau (enten via fjernbetjening eller multifunktionsknap)
- Ændring i program (enten via fjernbetjening eller multifunktionsknap)

Indikatorlysmønstre (grøn)

- Gentaget enkelt blink 
- Gentaget dobbelt blink 
- Fortsat blink 
- Enkelt blink pr. lydstyrkeændring 
- Enkelt blink pr. programændring 

* Meddelelsen om lavt batteriniveau udløses ca. 30 minutter før, batteriet skal oplades. Vi anbefaler, at du altid har et ekstra batteri med dig.

9. Dit høreapparat kan bruges på flere måder


Du kan bruge dit Sky Link M-høreapparat

- som et enkelt høreapparat,
- som et par med ét Sky Link M-høreapparat i hvert øre,
- som en bimodal høreøsning med en Advanced Bionics-kompatibel lydprocessor på det kontralaterale øre.

I bimodal konfiguration arbejder høreapparatet og lydprocessoren sammen på en koordineret, dynamisk måde. Hvis der f.eks. sker ændringer i lytteomgivelserne, så sker skiftet til et andet lytteprogram automatisk både i høreapparatet og i lydprocessoren. Kombinationen af høreapparatet og lydprocessoren fra AB er optimal og velfungerende. Du kan få mere at vide om tilkoblingsmuligheder i kapitel 10.

10. Oversigt over tilkoblingsmuligheder

Nedenstående illustration viser tilkoblingsmulighederne med dit høreapparat.

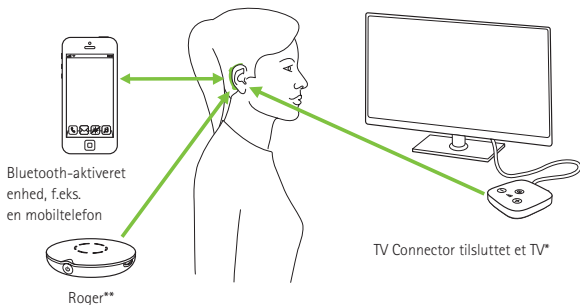

* TV Connector kan slutes til alle lydilder, eksempelvis et TV, en PC eller et lydanlæg.

** Trådløse Roger mikrofoner kan også slutes til dine høreapparater.

11. Indledende parring

11.1 Indledende parring af Bluetooth®-aktiveret enhed


- ① Parringsproceduren skal kun udføres én gang for hver enhed med Bluetooth-teknologi. Efter første parring opretter høreapparatet automatisk forbindelse til din enhed. Dette kan tage op til 2 minutter.

1.

Du skal sørge for, at din enheds (f.eks. din telefons) Bluetooth-funktion er aktiveret og søge efter Bluetooth-enheder i menuen med forbindelsesindstillinger.

2.

Tænd for høreapparaterne.
Du har nu 3 minutter til at parre høreapparaterne med enheden.

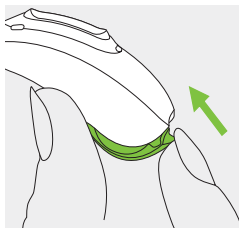

3.

Vælg høreapparatet på listen over aktiverede Bluetooth-enheder. Dette vil parre begge høreapparater samtidigt. Et bip er lig med korrekt parring.

- ① Få yderligere oplysninger om parring af Bluetooth-enheder fra nogle af de mest populære telefonproducenter på <https://marvel-support.phonak.com>


11.2 Tilslutning til enheden

Når dine høreapparater er parret med enheden, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes.

- ① Forbindelsen opretholdes, så længe enhederne er tændt og inden for rækkevidde.
- ① Dine høreapparater kan parres med op til to enheder.
- ① Dine høreapparater kan være forbundet med én enhed ad gangen.

12. Telefonopkald

Dine høreapparater tilkobles direkte med Bluetooth®-aktiverede telefoner. Hvis høreapparaterne er parret med og forbundet til din telefon, hører du den opkaldendes stemme direkte i dine høreapparater. Dit høreapparat eller den kompatible lydprocessor opfanger din stemme via den interne mikrofon.

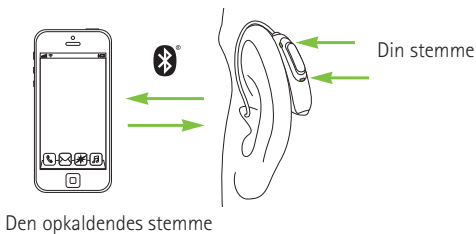


12.1 Foretag et nyt opkald

Indtast telefonnummeret, og tryk på opkaldsknappen. Du vil høre ringetonen igennem dine høreapparater. Dine høreapparater eller høreapparatet og den kompatible lydprocessor registrerer din stemme og overfører den til telefonen.

12.2 Besvar et opkald



Når du modtager et opkald, hører du en opkaldsmeddelelse i dine to høreapparater eller i høreapparatet og den compatible lydprocessor.

Du kan tage opkaldet ved at trykke kort tid på den øverste eller nederste del af multifunktionsknappen på høreapparatet (under to sekunder) eller direkte på din telefon.

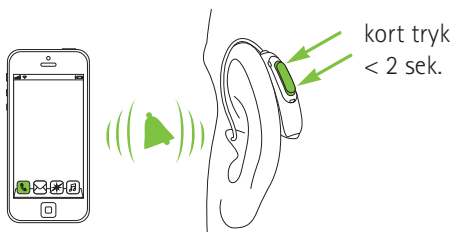

12.3 Afslut et opkald


Du kan afslutte opkaldet ved at trykke lang tid på den øverste eller nederste del af multifunktionsknappen på høreapparatet (over to sekunder) eller direkte på din telefon.

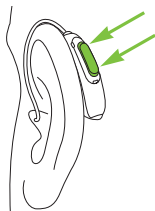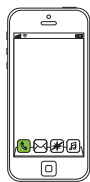

langt tryk
> 2 sek.

12.4 Afvis et opkald

Du kan afvise et indgående opkald ved at trykke lang tid på den øverste eller nederste del af multifunktionsknappen på høreapparatet (over to sekunder) eller direkte på din telefon.

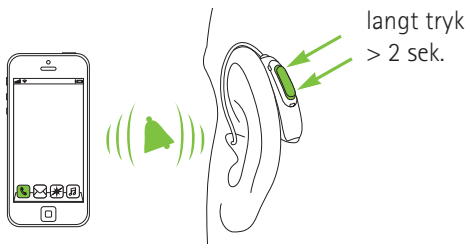

13. Flytilstand


Dine høreapparater fungerer i frekvensområdet 2,4 til 2,48 GHz. Hvis du skal rejse med fly, kræver nogle flyselskaber, at trådløse enheder indstilles til flytilstand. Aktivering af flytilstand deaktiverer ikke den normale høreapparatsfunktion, kun Bluetooth-forbindelsen.

13.1 Aktivering af flytilstand

Sådan deaktiverer du den trådløse funktion og aktiverer flytilstand for hvert høreapparat:


1.

Åbn batteriskuffen.

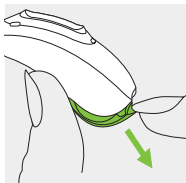

2.

Hold den nederste del af multifunktionsknappen på høreapparatet nede i syv sekunder, mens du lukker batteriskuffen.

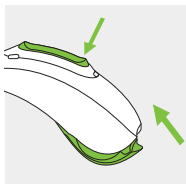


Så længe flytilstand er aktiveret, er der ingen forbindelse til din telefon.

13.2 Deaktivering af flytilstand

Sådan aktiverer du den trådløse funktion og afslutter flytilstand for hvert høreapparat:


1.

Åbn batteriskuffen.

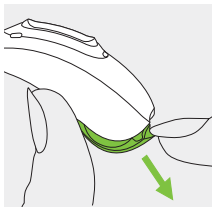

2.

Luk batteriskuffen igen.

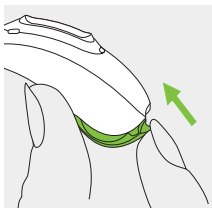

14. Betjening, transport og opbevaring

Dette produkt er udformet på en sådan måde, at det fungerer problemfrit og uden begrænsninger, hvis det anvendes som tilsigtet, medmindre andet er angivet i denne betjeningsvejledning.

Sørg for at bruge, transportere og opbevare høreapparatet inden for disse brugsforhold:

| | Brug | Transport | Opbevaring |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Temperatur | +5° til +40°C | -20° til +60°C | -20° til +60°C |
| Luftfugtighed | 30% til 85% (ingen kondensdannelse) | 0% til 90% (ingen kondensdannelse) | 0% til 70% (ingen kondensdannelse) |
| Lufttryk | 500 til 1060 hPa | 500 til 1060 hPa | 500 til 1060 hPa |

Høreapparatet har kapslingsklassen IP68 (tåler nedsænkning i vand på én meters dybde i 60 minutter) og er beregnet til at blive brugt i alle situationer i dagligdagen. Du behøver derfor ikke bekymre dig om at udsætte høreapparatet for regnvejr eller sved.

Høreapparatet er dog ikke beregnet til brug i vand, herunder klorholdigt vand, sæbevand, saltvand eller andre væsker med kemisk indhold.

15. Pleje og vedligeholdelse

Omhyggelig, og jævnlig vedligeholdelse af høreapparatet er med til at sikre en god ydelse og lang levetid. For at sikre en lang levetid tilbyder Sonova AG mindst fem års serviceperiode, efter det pågældende høreapparat er blevet udfaset.

Brug venligst følgende specifikationer som retningslinje. I kapitel 21.2 er der yderligere oplysninger om produktsikkerhed.

Generelle oplysninger

Før du anvender hårspray eller kosmetik, bør du fjerne dit høreapparat fra øret, da disse produkter kan beskadige det.

Lad batteriskuffen være åben, når du ikke benytter høreapparatet, så eventuel fugt kan fordampe. Sørg for, at høreapparatet altid tørrer helt efter brug. Opbevar høreapparatet på et sikkert, tørt og rent sted.

Dine høreapparater kan modstå vand, sved og støv under følgende forhold:

- Batteriskuffen er helt lukket. Kontrollér, at der ikke sidder fremmedlegemer, såsom hår, fast i batteriskuffen, når den er lukket.
- Høreapparatet er blevet rengjort og tørret, når det har været udsat for vand, sved eller støv.
- Høreapparatet bruges og vedligeholdes som beskrevet i denne betjeningsvejledning.

ⓘ Hvis du benytter høreapparatet i vand, kan luftstrømmen til batterierne blive nedsat, hvorefter apparatet holder op med at fungere. Hvis høreapparatet ikke fungerer efter at have været i kontakt med vand, skal du læse fejlfindingstrinnene i kapitel 20.

Dagligt

Efterse ørestykket og slangen for ørevoks og fugt. Rengør overfladen med en fnugfri klud. Brug aldrig rengøringsmidler som f.eks. opvaskemiddel, sæbe osv., til rengøring af høreapparatet. Det anbefales ikke at skylle disse dele i vand, da der er risiko for, at vandet bliver siddende i slangen. Hvis det er nødvendigt med en grundig rengøring af høreapparatet, så spørg din hørespecialist om råd.

Ugentligt

Rengør ørestykket med en blød, fugtig klud eller med en specialklud, der er beregnet til rengøring af høreapparater. Kontakt din høreapparatspecialist, hvis du ønsker flere anvisninger om rengøring eller vedligeholdelse.

Månedligt

Kontrollér lytteslangen for farveændringer, hærkning eller revner. Udskift lytteslangen, hvis nogen af disse ændringer forekommer. Kontakt din høreapparatspecialist.

16. Udskiftning af ørestykket


Hvis høreapparatet er udstyret med en tynd slange, skal ørestykket muligvis udskiftes eller renses.

Vi anbefaler at kontrollere ørestykket jævnligt og udskifte eller rense det, når det er snavset, eller hvis lydstyrken eller lyd kvaliteten forringes. En eventuel lyd kuppel bør udskiftes hver tredje måned.

16.1 Fjernelse af ørestykket fra den tynde slange


1.

Fjern ørestykket fra SlimTube ved at holde SlimTube i den ene hånd og ørestykket i den anden.

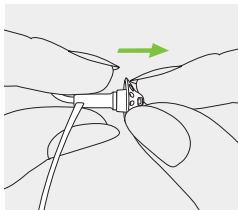


2.

Træk let i ørestykket for at fjerne det.

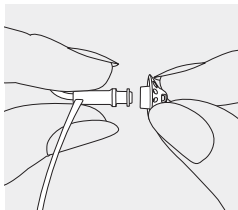

3.


Rengør den tynde slange med en fnugfri klud.

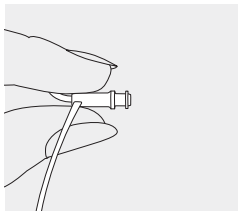

16.2 Montering af ørestykket på den tynde slange


1.

Hold den tynde slange i den ene hånd og ørestykket i den anden.

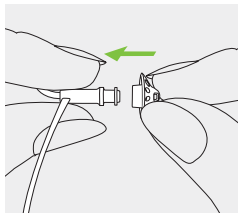


2.

Før ørestykket hen over lydudgangen.

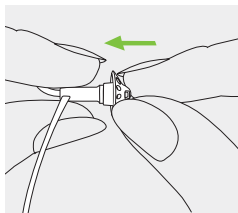

3.

Den tynde slange og ørestykket skal passe perfekt sammen.

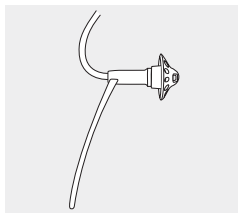

17. Service og garanti

Lokal garanti

Bed hørespecialisten om de gældende garantivilkår.

International garanti

Sonova AG yder en etårig, begrænset, international garanti, som træder i kraft på købsdatoen. Den begrænsede garanti dækker materiale- og produktionsfejl på selve høreapparatet, men ikke på tilbehør, såsom batterier, slanger, ørepropper og eksterne modtagere. Garantien gælder kun, hvis klienten kan fremvise købsdokumentation.

Den internationale garanti har ikke indflydelse på de juridiske rettigheder, du måtte have i henhold til den gældende nationale lovgivning om salg af forbrugsvarer.

Begrænsning af garantien

Garantien dækker ikke skader, der skyldes forkert behandling eller vedligeholdelse, eksponering for kemikalier eller unødige belastninger.

Skader forårsaget af tredjepart eller ikke-autoriserede servicecentre medfører, at garantien bliver ugyldig. Garantien omfatter ikke tjenester, der er udført af hørespecialisten på dennes klinik.

Serienummer (venstre side):

Serienummer (højre side):

Købsdato:

Autoriseret hørespecialist (stempel/underskrift):

18. Information om overensstemmelse

Europa:

Overensstemmelseserklæring

Sonova AG erklærer hermed, at dette produkt opfylder kravene i Direktivet om medicinsk udstyr 93/42/EØF samt direktiv 2014/53/EU om radioudstyr.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan fås hos producenten eller den nærmeste Phonak-repræsentant, hvis adresser kan hentes fra listen på www.phonak.com/us/en/certificates (Phonak global tilstedeværelse).

Australien/New Zealand:



Angiver, at en enhed er i overensstemmelse med reglerne i den gældende Radio Spectrum Management's (RSM) and

R-NZ

Australian Communications and Media Authority (ACMA) vedrørende lovligt salg i New Zealand og Australien.

Overensstemmelsesmærkningen R-NZ gælder for radioprodukter, som sælges på det new zealandske marked i henhold til overensstemmelsesniveau A1.

Modellerne, som er anført på side 2, er certificeret under:

Phonak Sky Link M

USA

FCC ID: KWC-BSP

Canada

IC: 2262A-BSP

Note 1:

Enheden overholder kravene i Del 15 i FCC-bestemmelserne og RSS-210 i Industry Canada. Enheden må kun bruges på følgende to betingelser:

- 1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
- 2) Enheden skal kunne tolerere den interferens, den modtager, herunder også interferens, som kan forårsage uønskede funktioner.

Note 2:

Ændringer eller modifikationer af enheden, som Sonova AG ikke udtrykkeligt har givet tilladelse til, kan resultere i, at FCC-tilladelsen til brug af udstyret inddrages.

Note 3:

Enheden er blevet testet og overholder grænserne for en digital klasse B-enhed i henhold til Del 15 i FCC-bestemmelserne og ICES-003 i Industry Canada.

Disse grænser er opstillet med henblik på at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Enheden genererer, bruger og kan udsende radiofrekvenser, og hvis den ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en given installation. Hvis enheden forårsager skadelig interferens ved radio- eller TV-modtagelse, hvilket afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, skal brugeren forsøge at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Modtagerantennen skal drejes eller anbringes et andet sted.
- Afstanden mellem enheden og modtageren skal øges.
- Enheden skal slttes til et udtag i et andet kredsløb end det kredsløb, som modtageren er sluttet til.
- Bed forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjælp.

Radiooplysninger for dit høreapparat

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Antennetype | Frekvenssløjfeantenne |
| Driftsfrekvens | 2,4 GHz-2,48 GHz |
| Modulation | GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK |
| Udstrålet effekt | < 1 mW |
| Bluetooth® | |
| Rækkevidde | ~1m |
| Bluetooth | 4.2 Dual-tilstand |
| Understøttede profiler | HFP (håndfri profil), A2DP |

Overholdelse af emissions- og immunitetsstandarder

| | |
|---------------------|------------------------|
| Emissionsstandarder | EN 60601-1-2:2015 |
| | IEC 60601-1-2:2014 |
| | EN 55011:2009+A1 |
| | CISPR11:2009/AMD1:2010 |
| | CISPR22:1997 |
| | CISPR32:2012 |
| | ISO 7637-2:2011 |
| | CISPR25:2016 |
| | EN 55025:2017 |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Immunitetsstandarder | EN 60601-1-2:2015 |
| | IEC 60601-1-2:2014 |
| | EN 61000-4-2:2009 |
| | IEC 61000-4-2:2008 |
| | EN 61000-4-3:2006+A1+A2 |
| | IEC 61000-4-3:2006+A1+A2 |
| | EN 61000-4-4:2012 |
| | IEC 61000-4-4:2012 |
| | EN 61000-4-5:2014 |
| | IEC 61000-4-5:2014 |
| | EN 61000-4-6:2014 |
| | IEC 61000-4-6:2013 |
| | EN 61000-4-8:2010 |
| | IEC 61000-4-8:2009 |
| | EN 61000-4-11:2004 |
| | IEC 61000-4-11:2004 |
| | IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005 |
| ISO 7637-2:2011 | |

19. Oplysninger og forklaring af symboler



Med CE-symbolet bekræfter Sonova AG, at dette produkt, herunder tilbehørsdele, opfylder kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, og direktiv 2014/53/EU om radioudstyr. Numrene efter CE-symbolet svarer til koden fra de konsulterede certificerede myndigheder i henhold til ovennævnte direktiver.



Dette symbol angiver, at de produkter, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, overholder kravene til en anvendt del af type B iht. EN 60601-1. Høreapparatets overflade er angivet som en anvendt del af type B.



Angiver producenten af det medicinske udstyr som defineret i EU-direktiv 93/42/EØF.



Angiver den autoriserede repræsentant i Det Europæiske Fællesmarked. Den autoriserede repræsentant i EU er også importør til EU.



Dette symbol angiver, at det er vigtigt, at brugeren læser og tager hensyn til de relevante oplysninger i denne betjeningsvejledning.



Dette symbol angiver, at det er vigtigt, at brugeren er opmærksom på de relevante advarselsmeddelelser i denne betjeningsvejledning.



Vigtige oplysninger om håndtering og produktsikkerhed.



Opbevares tørt under transport.



Bluetooth® Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG's side sker under licens. Øvrige varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.



Japansk symbol for certificerede radioenheder.

Segurança



Angiver, at enheden overholder de generelle brasilianske krav til produktcertificering.

SN

Dette symbol angiver producentens serienummer, så det er muligt at identificere en specifik medicinsk enhed.

REF

Dette symbol angiver producentens katalognummer, så det er muligt at identificere den medicinske enhed.

MD

Angiver enheden som medicinsk udstyr.



Temperatur ved transport og opbevaring:
-20 til +60° celsius.



Luftfugtighed under transport: Op til 90 %
(ikke-kondenserende)

Luftfugtighed under opbevaring: 0 - 70 %, hvis enheden ikke er i brug. Se anvisningerne i kapitel 21.2 vedrørende tørring af høreapparatet efter brug.



Lufttryk: 500 hPa til 1060 hPa



Symbolet med krydset over skraldespanden betyder, at dette høreapparat ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Kassér brugte høreapparater på et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr, eller aflever høreapparatet hos din hørespecialist, der vil sørge for korrekt bortskaffelse. Korrekt bortskaffelse beskytter miljøet og sundheden.

20. Fejlfinding

Problem

Høreapparatet fungerer ikke

Høreapparatet hylér

Høreapparatets volumen er for kraftig

Høreapparatets volumen er ikke kraftig nok eller er forvrænget

Høreapparatet afspiller to bip

Høreapparatet tænder og slukker (periodisk)

Telefonfunktionen virker ikke

Indikatorlyset blinker ikke

Årsager

Batteriet er fladt

Ørestykket er tilstoppet

Batteriet er ikke isat korrekt

Der er slukket for høreapparatet

Høreapparatet er ikke sat korrekt på

Der er ørevoks i øregangen

Volumen er for kraftig

Batteriniveauet er lavt

Ørestykket er tilstoppet

Volumen er for lav

Hørelsen har ændret sig

Betyder, at batteriniveauet er lavt

Der er fugt på batteriet eller høreapparatet

Høreapparatet er i flytilstand

Høreapparatet er ikke parret med telefonen

Batteriet er fladt

Batteriet er ikke isat korrekt

Indikatorlyset ikke aktiveret

❶ Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din høreapparatspecialist for at få hjælp.

Hvad skal du gøre?

Skift batteri (kapitel 5)

Rengør ørestykket (kapitel 15)

Sæt batteriet korrekt i (kapitel 5)

Tænd for høreapparatet ved at lukke batteriskuffen helt (kapitel 4)

Sæt høreapparatet korrekt i (kapitel 6)

Kontakt din hørespecialist

Skru ned for lydstyrken, hvis der er en knap til dette (kapitel 8)

Skift batteri (kapitel 5)

Rengør ørestykket (kapitel 15)

Skru op for lydstyrken, hvis der er en knap til indstilling af lydstyrken (kapitel 8)

Kontakt din hørespecialist

Skift batteri inden for de næste 30 minutter (kapitel 5)

Tør batteriet og høreapparatet af med en tør klud

Åbn og luk batteriskuffen (kapitel 13.2)

Par den med telefonen (kapitel 11)

Skift batteri (kapitel 5)

Sæt batteriet korrekt i (kapitel 5)

Kontakt din hørespecialist

Se <https://marvel-support.phonak.com> for at få flere oplysninger.

21. Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs venligst oplysningerne på de følgende sider, før du bruger dit høreapparat.

Tilsigtet anvendelse

Høreapparatet er beregnet til at forstærke og transmittere lyd til øret og dermed kompensere for nedsat hørelse.

Indikationer

Tegn på hørenedsættelse.

Kontraindikationer

Tegn på aktiv eller kronisk patologi i mellemøret eller det ydre øre, kronisk dræn eller flåd, tegn på kronisk betændelsestilstand.

Et høreapparat vil ikke genskabe normal hørelse og vil ikke forhindre eller forbedre hørehandicap, der skyldes organiske tilstande. Ved sjældnen benyttelse af et høreapparat vil brugeren ikke få fuld gavn af det. Brug af et høreapparat udgør kun en del af hørehabiliteringen og skal muligvis suppleres med høretræning og vejledning i mundaflæsning.

Høreapparater er kendetegnet ved en let og kompakt konstruktion, som gør dem velegnede til såvel privatpersoner som fagfolk.


Målgruppen er primært børn under 18 år. Produktet kan også bruges til børn i en alder på 36 måneder eller yngre.


Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted med relation til høreapparatet, skal rapporteres til producentens repræsentant og den relevante myndighed på opholdsstedet. En alvorlig hændelse beskrives som enhver hændelse, som direkte eller indirekte har ført til, kunne have ført til eller kan føre til følgende:


- a) død hos en patient, bruger eller anden person
- b) midlertidig eller permanent alvorlig svækkelse af en patients, brugers eller anden persons sundhedstilstand
- c) en alvorlig trussel mod den offentlige sundhed


Uventede brugsmønstre eller hændelser rapporteres til producenten eller dennes repræsentanter.

21.1 Advarsler

-  Dine høreapparater fungerer i frekvensområdet 2,4 til 2,48 GHz. Hvis du skal rejse med fly, skal du huske at kontrollere, om flyselskabet kræver, at trådløse enheder indstilles til flytilstand (se kapitel 13).

-  Høreapparaterne (der er specielt programmeret til hver enkelt hørehedsættelse) må kun bruges af den person, de er beregnet til. De bør ikke bruges af andre personer, da de kan beskadige hørelsen.

-  Der må ikke foretages ændringer af høreapparatet, som ikke er udtrykkeligt godkendt af Sonova AG. Sådanne ændringer kan skade dit øre eller høreapparatet.

-  Høreapparaterne må ikke anvendes i områder, hvor der er eksplosionsfare (i miner eller industriområder, hvor der er eksplosionsfare, og i iltholdige miljøer eller områder, hvor der håndteres brændbare anæstesimidler), eller på steder, hvor det er forbudt at bruge elektronisk udstyr.

- ⚠ Høreapparatbatterier er giftige ved indtagelse! Opbevar dem derfor utilgængeligt for børn, mentalt handicappede personer og kæledyr. Hvis batterier sluges, skal der øjeblikkeligt søges læge!

- ⚠ Børnesikrede løsninger til batteriskuffen og hooken skal anvendes til børn under 36 måneder for at forhindre, at de sluger batteriet eller de små dele fra enheden. I tilfælde af at en af disse sikrede mekanismer beskadiges ved brug af for stor kraft eller brug af uegnet værktøj, skal udstyret indleveres til en høreapparatspecialist til reparation eller ombytning.

- ⚠ Hvis børn og mentalt handicappede personer bruger dette apparat, skal de hele tiden være under opsyn af hensyn til deres sikkerhed. Høreapparatet er en lille enhed og indeholder små dele. Sørg for, at børn og mentalt handicappede personer, der bruger dette høreapparat, altid er under opsyn. Hvis høreapparatet sluges, skal du straks søge læge eller tage på hospitalet, da høreapparatet eller dele heraf kan medføre kvælning!


- ⚠ Hvis du føler smerte i eller bag øret, hvis det er betændt, eller hvis der forekommer hudirritation og øgede mængder ørevoks, skal du kontakte din hørespecialist eller læge.


- ⚠ I meget sjældne tilfælde kan lydakuplen forblive i øregangen, når lytteslangen tages ud af øret. Hvis det mod forventning skulle ske, bør du søge læge eller kontakte din hørespecialist for at få den fjernet.
Prøv aldrig at sætte slangen ind i øregangen igen, da dette kan medføre, at lydakuplen trykkes mod trommehinden.





- ⚠ Lytteprogrammerne i den retningsbestemte mikrofonindstilling reducerer baggrundsstøj. Vær opmærksom på, at advarselssignaler og støj bagfra, f.eks. biler, bliver helt eller delvist dæmpet.

- ⚠ Følgende gælder kun for personer med aktive medicinske enheder (dvs. pacemakere, defibrillatorer etc.):

- Hold høreapparatet i en afstand af mindst 15 cm fra det aktive implantat. Hvis der mærkes interferens, så undlad at benytte høreapparaterne, og kontakt fabrikanten af det aktive implantat. Bemærk, at interferens også kan skyldes elektriske ledninger, elektrostatisk udladning, metaldetektorer i lufthavne etc.
- Magneter (dvs. batteriværktøj, EasyPhone-magnet osv.) skal holdes i en afstand af mindst 15 cm fra det aktive implantat.
- Ved brug af trådløst Phonak-tilbehør henvises der til afsnittet "Vigtige informationer om sikkerhed" i betjeningsvejledningen til dit trådløse tilbehør.

 Brug af andet tilbehør, andre transducere og andre kabler end dem, der leveres eller anbefales af producenten af dette udstyr, kan medføre øget elektromagnetisk emission eller forringet elektromagnetisk immunitet og føre til funktionsfejl.

 Bærbart RF-kommunikationsudstyr (eksempelvis perifert udstyr såsom antennekabler og eksterne antenner) må ikke anvendes inden for en afstand på 30 cm fra nogen del af høreapparaterne, heriblandt de kabler, som producenten anbefaler. Hvis dette ikke overholdes, er der risiko for forringelse af dette udstyrs ydeevne.

-  Høreapparater bør ikke tilpasses med lydskjold, når de anvendes af brugere, der har perforeret trommehinde eller betændelse i øregangen, eller hvis mellemøret på anden måde er udsat. I sådanne tilfælde anbefaler vi brug af et specialtilpasset ørestykke. Hvis det mod forventning skulle ske, at en del af produktet sidder tilbage i øregangen, anbefales det kraftigt, at der søges lægehjælp for at få den fjernet.
-  Undgå kraftige stød mod øret, når der bruges et høreapparat med tilpasset ørestykke. De tilpassede ørestykker er robuste nok til at modstå almindelig hverdagsbrug. I tilfælde af kraftige stød eller slag mod øret, f.eks. i forbindelse med sport, kan det tilpassede ørestykke gå i stykker. Dette kan medføre perforation af øregangen eller trommehinden.
-  Hvis det tilpassede ørestykke udsættes for mekanisk belastning eller slag, skal det kontrolleres for skader, inden det sættes i øret igen.
-  Brug af dette udstyr i umiddelbar nærhed af andet udstyr bør undgås, da det kan medføre funktionsfejl. Hvis dette ikke kan undgås, skal det kontrolleres, at både dette udstyr og det andet udstyr fungerer, som det skal.

21.2 Oplysninger om produktsikkerhed

- ① Disse høreapparater er vandafvisende, men ikke vandtætte. De er designet til at modstå normale aktiviteter og lejlighedsvis udsættelse for ekstreme forhold. Læg aldrig høreapparaterne i vand! Læg aldrig høreapparatet i vand! Disse høreapparater er ikke specifikt designet til gentagne længere perioder under vand, dvs. til brug i forbindelse med aktiviteter såsom svømning eller badning. Fjern altid høreapparatet, inden du foretager sådanne aktiviteter, da høreapparatet indeholder følsomme elektroniske dele.
- ① Mikrofonindgangene må ikke vaskes. Hvis de vaskes, kan de miste deres særlige akustiske egenskaber.
- ① Beskyt høreapparatet mod varme (efterlad det aldrig nær et vindue eller i bilen). Brug aldrig en mikrobølgeovn eller andre opvarmningsenheder til at tørre dit høreapparat. Forhør dig om egnede tørremetoder hos din hørespecialist.
- ① Lydkuplen skal udskiftes hver tredje måned, eller når den bliver stiv eller porøs. Ellers er der risiko for, at lydkuplen kan løsnes fra slangens studs, når høreapparatet sættes i eller tages ud af øret.

- ① Lad batteriskuffen være åben, når du ikke benytter høreapparatet, så eventuel fugt kan fordampe. Sørg for, at høreapparatet altid tørrer helt efter brug. Opbevar høreapparatet på et sikkert, tørt og rent sted.
- ① Pas på ikke at tabe høreapparatet! Hvis det tabes på en hård overflade, kan høreapparatet tage skade.
- ① Anvend altid nye batterier i dit høreapparat. Hvis et batteri lækker, skal det straks udskiftes med et nyt for at undgå hudirritation. Du kan aflevere brugte batterier til din hørespecialist.
- ① Hvis høreapparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal du opbevare det i en æske med en tørretablett eller et sted med god ventilation. På denne måde kan fugt fordampe fra høreapparat og en potentiel påvirkning af dets ydeevne forebygges.

- ① De batterier, der bruges i disse høreapparater, må ikke have en spænding på over 1,5 V. Brug ikke genopladelige sølv-zink- eller lithium-ion-batterier, da det kan medføre alvorlig beskadigelse af høreapparaterne. I tabellen i kapitel 5 er vist, præcis hvilken type batterier der skal bruges i de forskellige høreapparater.

- ① Tag batteriet ud, hvis høreapparatet ikke skal bruges i en længere periode.

- ① Specielle medicinske eller dentale undersøgelser, der omfatter stråling som beskrevet herunder, kan påvirke den korrekte funktion af dine høreapparater alvorligt. Fjern dem og efterlad dem uden for undersøgelseslokalet inden:
 - Medicinsk eller dental undersøgelse med røntgen (samt CT-scanning).
 - Medicinske undersøgelser med MRI/NMRI-scanning, som genererer magnetfelter.Høreapparaterne behøver ikke at blive fjernet ved passage af sikkerhedskontroller (lufthavne osv.). Hvis der overhovedet bruges røntgenstråling, vil det være i meget små doser, og det påvirker ikke høreapparaterne.

- ① Brug ikke høreapparatet i områder, hvor elektronisk udstyr er forbudt.

Din hørespecialist:



Producent:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Schweiz
www.phonak.com

Phonak-repræsentant Danmark:

Sonova Denmark A/S
Østre Hougvej 42-44
5500 Middelfart

sonova
HEAR THE WORLD



0459



029-0838-08/V1.00/2020-05/NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved