

Ihr Roger On™ Erste Schritte.

Wir freuen uns, dass Sie Roger On testen möchten!

Roger™ ist Ihr drittes Ohr, mit dem Sie garantiert keinen schönen Moment in Ihrem Leben mehr verpassen. Sie können Gesprächen folgen, mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben und ein aktives Sozialleben genießen.

Sind Sie bereit, all das zu hören, was Sie bisher verpasst haben?

Dieser Leitfaden mit den ersten Schritten beschreibt alles, was Sie wissen müssen, um Ihr Roger On Mikrofon bestmöglich zu nutzen.

Erste Schritte mit Ihrem Roger On

1 RogerDirect™ einrichten

In diesem einmaligen Schritt verbinden Sie Roger mit Ihrem Hörsystem. Ihr Hörakustiker hat diesen Schritt bei Ihrem letzten Termin möglicherweise schon durchgeführt.

Falls nicht, lesen Sie bitte die Schritt-für-Schritt-Anleitung im RogerDirect Einrichtungsleitfaden, der dem Produkt beiliegt, oder sehen Sie sich das Erklärvideo auf dem Phonak YouTube-Kanal an.



Hier scannen, um das Erklärvideo anzusehen.

2 Mit Roger On vertraut werden

Wenn Sie Ihr neues Mikrofon auspacken, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um die dem Produkt beiliegende Kurzanleitung für die Einrichtung zu lesen. Darin sind der Lieferumfang, die Symbole auf dem Bildschirm und Beispiele für den täglichen Gebrauch beschrieben.

3 Vor Gebrauch aufladen

Eine volle Aufladung dauert zwei Stunden. Bei vollem Akku kann das Produkt bis zu 8 Stunden lang ununterbrochen verwendet werden.

4 Die myRogerMic App herunterladen

Mit der App können Sie Roger leicht einstellen. Sie ist zwar optional, ermöglicht Ihnen aber eine noch bessere Erfahrung.



Google Play



App Store

Das war's! Sie sind jetzt bereit und können Roger überallhin mitnehmen.



Testen Sie Roger On

Mit Roger On an Ihrer Seite sind Sie mit einer leistungsstarken und vielseitigen Hörlösung ausgestattet. Testen Sie sie in verschiedenen Umgebungen und notieren Sie, ob sie Ihnen geholfen hat (Ja/Nein). Wir empfehlen Ihnen, Ihre Ergebnisse nach Ende Ihres Testzeitraums mit Ihrem Hörakustiker zu besprechen, um von Ihren Erfahrungen bestmöglich zu profitieren.

Bei sozialen Aktivitäten	Empfohlene Nutzung	Ja	Nein
In einem Café/lauten Restaurant, beim Essen mit Freunden und Familie	Legen Sie Roger On auf die Tischmitte. Sie können die Richtung des Mikrofons auswählen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei einer sozialen Aktivität mit lauter Musik und vielen Gesprächen	Halten Sie es in der Hand und richten Sie es auf die Person, die gerade spricht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Im Einkaufszentrum/Supermarkt	Halten Sie es in der Hand und richten Sie es auf die Person, die gerade spricht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sport und andere Aktivitäten			
Im Fitnessstudio oder beim Training im Freien	Geben Sie Roger On Ihrem Trainer oder Mitspieler und bitten Sie ihn, es an seinem Oberteil zu befestigen Alternativ kann er es sich mit dem Band um den Hals hängen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wandern oder Radfahren	Bitten Sie die Person, die Sie auf Ihrer Wanderung oder Radtour begleitet, das Mikrofon am Oberteil zu befestigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zu Hause			
Gespräch mit Ihrem Partner oder einem Freund, wenn Sie sich nicht direkt sehen können (sich zum Beispiel in unterschiedlichen Räumen befinden)	Geben Sie Roger On Ihrem Partner/Freund, damit er es sich am Oberteil befestigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fernsehen	Verbinden Sie Roger On über die Docking-Station mit Ihrem Fernseher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterwegs			
Unterhalten Sie sich im Auto oder öffentlichen Verkehrsmittel mit Mitreisenden	Geben Sie Roger On Ihrem Mitreisenden, damit er es sich am Oberteil befestigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berufliche Veranstaltungen			
Vorträge und Präsentationen	Geben Sie Roger On dem Referenten und setzen Sie sich bequem ins Publikum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podiumsdiskussionen	Legen Sie es auf die Bühne, idealerweise auf einen Tisch, wo die Podiumsdiskussion stattfindet. Öffnen Sie die mobile App und wählen Sie den Interview-Modus aus. Jetzt können Sie sich bequem ins Publikum setzen und die Diskussion verfolgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Am Arbeitsplatz			
Team-Workshops	Legen Sie Roger On bei einer Teambesprechung in die Tischmitte. Geben Sie es dem Gesprächsleiter, damit er es sich am Oberteil befestigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stehmeetings und Gespräche auf dem Flur	Halten Sie es in der Hand und richten Sie es auf die Person, die gerade spricht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kleine Meetings	Legen Sie es in die Mitte des Besprechungstischs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Online-Meetings	Roger On kann auch als Headset verwendet werden. Verbinden Sie es zuerst über das Kabel mit Ihrem Laptop. Befestigen Sie es anschließend an Ihrem Oberteil. Es nimmt Ihre Stimme auf und übermittelt sie an den Computer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>