

# Phonak


## Reference Sheet

### Verwendung von RogerDirect™ in einem Phonak Hörgerät

**Wichtig:** Wir empfehlen, während der Installation/Deinstallation einen Mindestabstand von 3 m zwischen den einzelnen Roger Installern einzuhalten und alle anderen Hörgeräte in der Nähe des Roger Installers ausgeschaltet zu lassen. Roger-Geräte, die sich in der Nähe des Roger Installers befinden, sollten während der Installation ausgeschaltet sein.


#### Installieren eines Roger-Empfängers in ein Phonak Hörgerät von einem Roger X

- Stecken Sie den Roger X in den Roger Installer ein (3).
- Schalten Sie den Roger Installer ein (1) (die Statusanzeige (2) leuchtet konstant grün).
- Die Statusanzeige (4) leuchtet konstant grün (Roger X ist installationsbereit).
- Schalten Sie das Hörgerät ein und legen Sie es auf die Hörgerätemarkierung des Roger Installers.
- Warten Sie, bis die Statusanzeige (5) grün blinkt (Installation wird durchgeführt). Leuchtet die Statusanzeige konstant grün, ist die Installation abgeschlossen.
- Schalten Sie den Roger Installer aus. Entfernen Sie den Roger X und bewahren Sie ihn auf. Das Hörgerät ist nun bereit zur Verwendung mit RogerDirect.

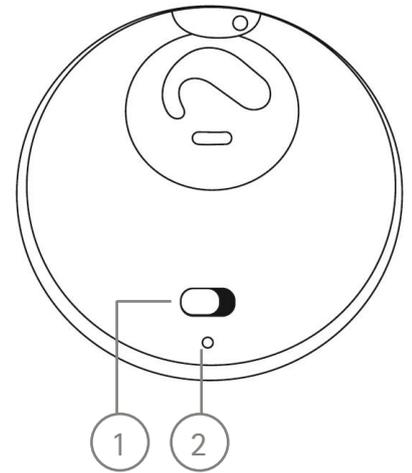

#### Deinstallieren des Roger-Empfängers von einem Phonak Hörgerät auf einen Roger X

- Stecken Sie den Roger X in den Roger Installer ein (3).
- Schalten Sie den Roger Installer ein (1) (die Statusanzeige (2) leuchtet konstant grün).
- Die Statusanzeige (4) bleibt einige Sekunden lang inaktiv (Roger X ist bereit für die Deinstallation).
- Schalten Sie das Hörgerät ein und legen Sie es auf die Hörgerätemarkierung des Roger Installers.
- Warten Sie, bis die Statusanzeige (5) konstant grün leuchtet (Bestätigung, dass Roger in dem Hörgerät installiert ist).

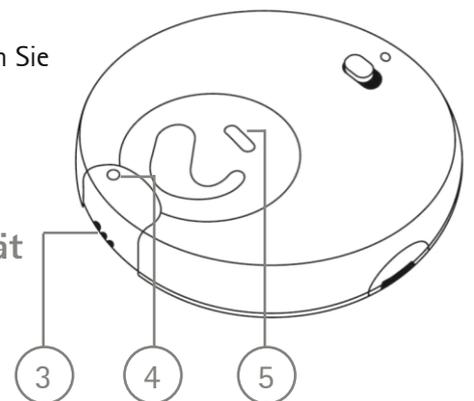

- f. Sobald die Deinstallation startet, blinkt die Statusanzeige (5) grün, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
- g. Leuchtet die Statusanzeige (4) konstant grün, ist die Deinstallation abgeschlossen (Roger ist nun im Roger X installiert).
- h. Schalten Sie den Roger Installer aus. Entfernen Sie den Roger X. Das Hörgerät kann nun nicht mehr mit Roger verwendet werden.