


Phonak

ActiveVent™ Receiver

Montageanweisungen

Benötigte Artikel

1. ActiveVent™ Receiver: MAV links (blau) oder rechts (rot)
2. Schale: SlimTip Titanium AV
3. Tube: SlimTip Link AV
4. HF3 Cerumenfilter: links (blau) oder rechts (rot), inkl. Filterwechselwerkzeug
5. Schneidewerkzeug, z. B. Schneidepinzette
6. Werkzeug für Receiver

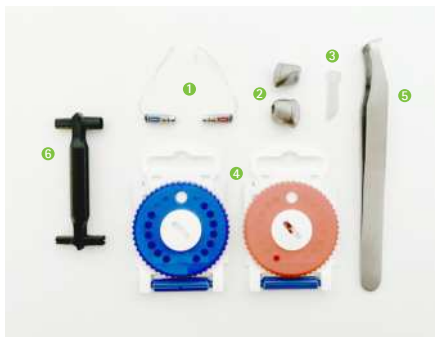

Einsetzen des SlimTip Link AV

1. Führen Sie den Schlauch (SlimTip Link AV) in die Schale ein (SlimTip Titanium AV).



2. Ziehen und bewegen Sie den Schlauch in der Schale, bis er sich an der korrekten Stelle befindet.



3. Schneiden Sie den Schlauch so nah und flach wie möglich am Ring ab.




4. Fertige SlimTip Titanium AV Schale mit SlimTip Link AV.




Einsetzen des ActiveVent (MAV) Receivers in SlimTip Titanium AV

1. Setzen Sie den ActiveVent Receiver in das Werkzeug ein. Verwenden Sie den mit „MAV“ gekennzeichneten Griff.

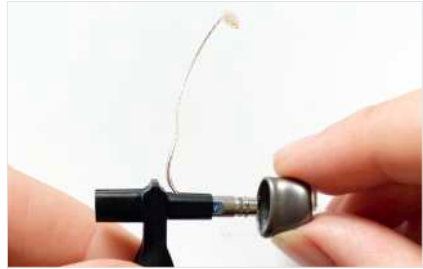

2. Schieben Sie den Receiver in den Schlauch in der Schale, bis Sie einen Widerstand spüren.

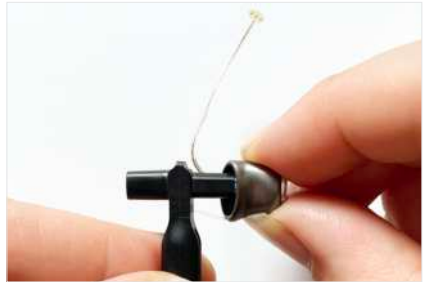

3. Die Tülle des Receivers sollte am Ring des Schlauchs ausgerichtet sein.

