

Lyric



SoundLync
Quick
Reference



EIN 1 Ton (entfernen)

RUHEMODUS 2 Töne
(entfernen)

AUS 2 Töne (halten)
4 Töne

PHONAK

Lyric



SoundLync
Quick
Reference

LAUTSTÄRKE

2 Töne (entfernen für 2 Sek.)

1 Ton (halten)

Mit jedem Ton wird die Lautstärke um ein Stufe angehoben.

Max. Lautstärke: 2 Töne

(danach startet das Gerät erneut auf Lautstärkestufe 1)

Hinweis: Lyric leistet im Lautstärke-
modus keine Verstärkung, damit die
Töne besser wahrgenommen werden
können.

02.8-12.20-0 1/2014 - 05/14/14/Ph in ved in XXXX ©Phonak AG All rights

PHONAK