


Roger™ Multimedia Hub.

Vejledning for lærere




1 Foretag aktivering

Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder, indtil indikatorlampen på enheden blinker grønt.

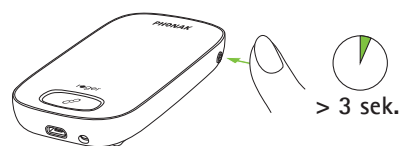

2 Opret forbindelse til en lydkilde

- Opret forbindelse ved at sætte et lyd kabel med et stik på 3,5 mm i lydudstyrets (f.eks. en bærbar computers, en telefons eller et TV's) hovedtelefonstik eller lydudgang.
- Sørg for, at der afspilles lyd, og at der er skruet op for lydstyrken.
- Alt efter hvilken lydkilde der er tale om, kan det være nødvendigt at bruge en adapter.

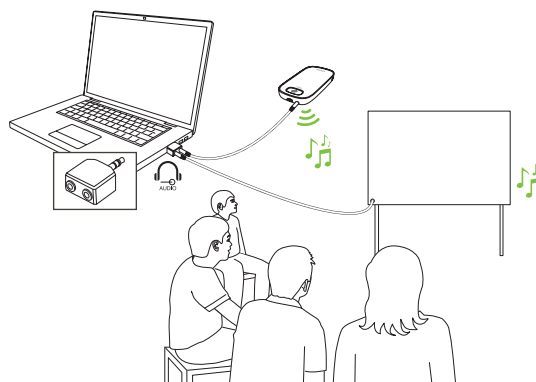


3 Opret forbindelse til et allerede oprettet Roger netværk i klasseværelset

- Sørg altid for at bruge Roger Touchscreen Mic som primær netværksenhed, når der oprettes forbindelse til Roger Multimedia Hub (MMH).
- Placer Roger MMH inden for 10 cm/4" fra Roger Touchscreen Mic, og tryk på "Tilslut".




Der må ikke trykkes på knappen "Tilslut" på Roger MMH, da det medfører oprettelse af et nyt netværk (NewNet).

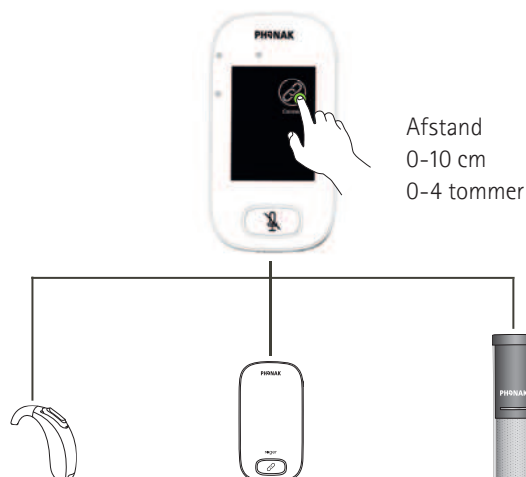

4 Opret forbindelse til høreapparater uden brug af andre Roger enheder

Hold Roger MMH inden for en afstand på 10 cm/4" fra høreapparatet, og tryk på "Tilslut". Sørg for, at der er tændt for høreapparatet. Eleven hører et bip som bekræftelse på, at der er oprettet forbindelse.

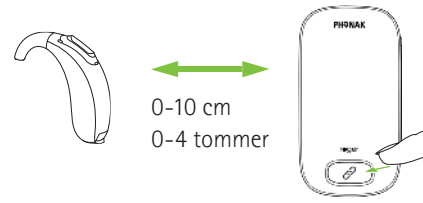


Nyttige tips




Husk at oplade enheden, når skoledagen er slut.

- Kontrollér, at der er oprettet korrekt forbindelse til udstyret via kabler med stik på 3,5 mm fra lydkilden (f.eks. et TV eller en projektor).
- Sørg for, at der er skruet op for lydstyrken på samtlige enheder, der er i brug.
- Brug kun en splitter til oprettelse af forbindelse til andre personer end høreapparatbrugere, hvis der ikke er adgang til Roger DigiMaster.
- Vær opmærksom på, at der kun kan bruges én Roger Multimedia Hub pr. netværk ad gangen. Der kan ikke oprettes forbindelse fra Roger Multimedia Hub til Roger WallPilot, medmindre der bruges en Roger Touchscreen Mic på samme netværk.

Indikatorlys

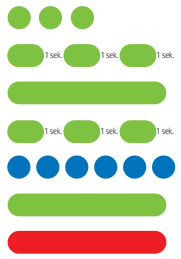

Tænd/sluk
Opladning i gang
Helt opladet
Lydudsendelse
Der oprettes forbindelse
Forbindelsen er oprettet
Der kunne ikke oprettes forbindelse

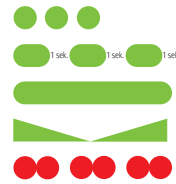

Tænd/sluk
Opladning i gang
Helt opladet
Tændt
Oplad enheden



Roger Multimedia Hub = sekundær enhed



Primær mikrofon ikke tilgængelig (sørg for, at den primære mikrofon "1" er inden for det område, hvor der er forbindelse, og at der ikke er valgt gruppetilstand)