


# Roger™ Multimedia Hub.

## Guide de l'enseignant




### 1 Mise en marche

Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un témoin lumineux vert s'allume et se mette à clignoter sur l'appareil.

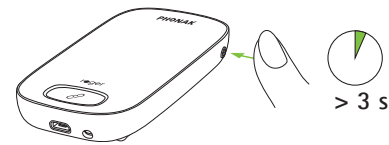

### 2 Connexion à une source audio

- Branchez un câble audio de 3,5 mm dans la prise casque ou la sortie audio de l'appareil audio (ordinateur portable, téléphone, écran de télévision, par exemple).
- Assurez-vous que le son est activé et que le volume est réglé correctement.
- Un adaptateur peut être nécessaire en fonction de la source audio.

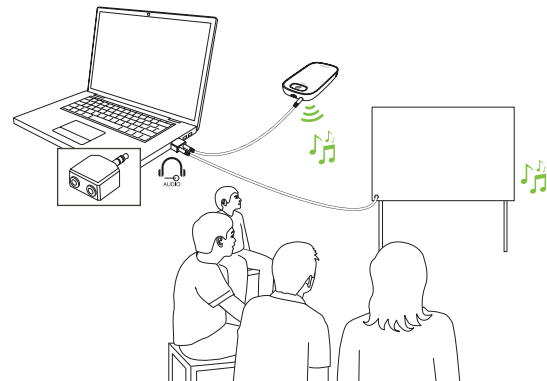


### 3 Connexion à un réseau Roger existant dans la salle de cours

- Utilisez toujours le Roger Touchscreen Mic comme dispositif de réseau principal pour vous connecter au Roger Multimedia Hub (MMH).
- Tenez le Roger MMH à moins de 10 cm du Roger Touchscreen Mic et appuyez sur « Connecter ».




N'appuyez pas sur le bouton « Connecter » du Roger MMH, car cela créera un NewNet.

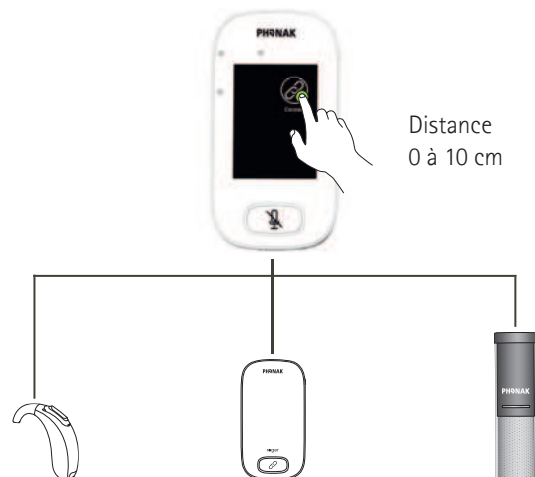

# 4 Connexion aux aides auditives sans d'autres appareils Roger

Tenez le Roger MMH à moins de 10 cm de l'aide auditive et appuyez sur « Connecter ». Assurez-vous que l'aide auditive est bien allumée. L'élève entendra un bip confirmant que la connexion a bien été établie.

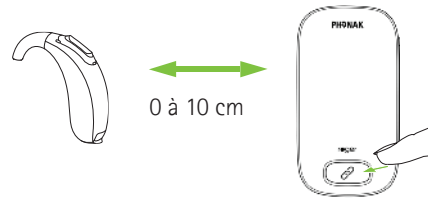

## Conseils essentiels



N'oubliez pas de recharger l'appareil à la fin de la journée de cours.

- Vérifiez que les câbles sont correctement connectés à l'équipement à l'aide de câbles de 3,5 mm provenant de la source audio (écran de télévision, projecteur, etc.).
- Assurez-vous que le volume des appareils utilisés est audible.
- Utilisez un répartiteur audio pour permettre aux non-utilisateurs d'aide auditive d'accéder à la parole uniquement si Roger DigiMaster n'est pas disponible.
- Veuillez noter que vous ne pouvez utiliser qu'un seul Roger Multimedia Hub à la fois sur un même réseau. Le Roger Multimedia Hub ne peut pas se connecter au Roger WallPilot, sauf si un Roger Touchscreen Mic est utilisé sur le même réseau.

## Témoins lumineux

- ● ● Marche/arrêt
- 1s ● 1s ● 1s Charge
- ▬ Totalemment chargé
- 1s ● 1s ● 1s Diffusion audio
- ● ● ● ● Connexion
- ▬ Connexion réussie
- ▬ Échec de connexion



- ● ● Marche/arrêt
- 1s ● 1s ● 1s Charge
- ▬ Totalemment chargé
- ▬ Mis en marche
- ● ● ● ● Recharger l'appareil



Roger Multimedia Hub = secondaire

- 2s ● 2s ● 2s Microphone principal non-disponible (assurez-vous que le microphone principal « 1 » se trouve à portée de l'appareil et n'est pas en mode petit groupe)