


# Roger™ Multimedia Hub.

## Gids voor leerkrachten




### 1 Inschakelen

Druk op de aan-/uitknop en houd deze 3 seconden ingedrukt, totdat een groen licht op het apparaat begint te knipperen.

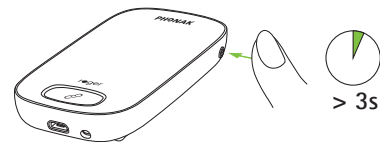

### 2 Verbinden met een audiobron

- Maak verbinding met een audiokabel met een 3,5 mm aansluiting die is aangesloten op een koptelefoon of andere uitvoerbron van het geluidsapparaat (bijv. laptop, telefoon, tv-scherm).
- Zorg ervoor dat de audio wordt afgespeeld en het volume aan staat.
- Afhankelijk van de audiobron kan een adapter nodig zijn.

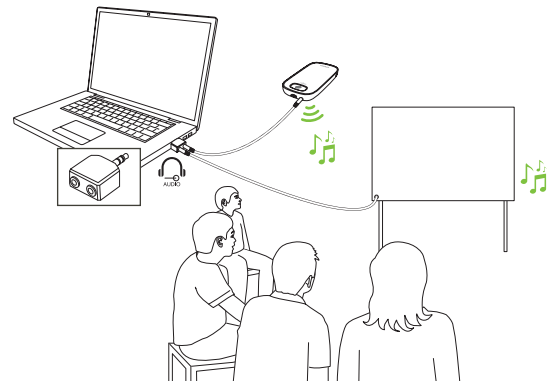


### 3 Verbinden met een bestaand Roger netwerk in het klaslokaal

- Maak altijd gebruik van de Roger Touchscreen Mic als het primaire netwerkapparaat om verbinding te maken met de Roger Multimedia Hub (MMH).
- Plaats de Roger MMH binnen 10 cm van de Roger Touchscreen Mic en tik op 'Verbinden'.




Tik niet op de knop 'Verbinden' op de Roger MMH; dit maakt namelijk een NewNet aan.

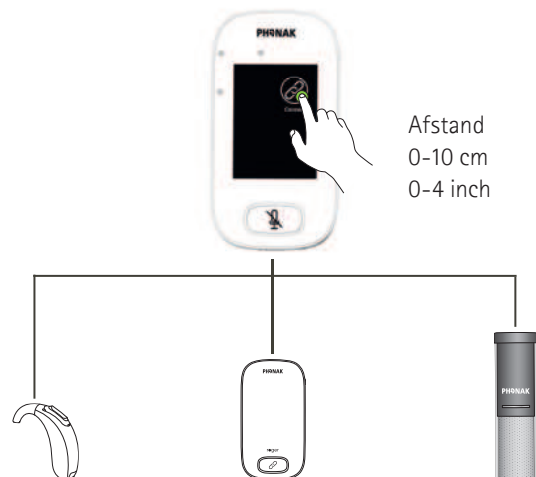

## 4 Verbinden met hoortoestellen zonder andere Roger apparaten

Houd de Roger MMH binnen 10 cm (4 inch) van het hoortoestel en tik op 'Verbinden'. Zorg ervoor dat het hoortoestel is ingeschakeld. De leerling zal vervolgens een piepton horen die de verbinding bevestigt.

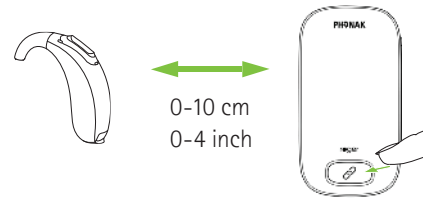


### Belangrijke tips




Vergeet niet om het apparaat aan het einde van de schooldag op te laden.

- Controleer of alle kabels juist zijn aangesloten op de apparatuur met de kabels van 3,5 mm vanuit de audiobron (bijv. tv-scherm, projector).
- Zorg ervoor dat het volume aan staat op alle apparaten in gebruik.
- Gebruik alleen een audiosplitser om spraaktoegang te bieden aan mensen zonder hoortoestellen, als de Roger DigiMaster niet beschikbaar is.
- Houd er rekening mee dat er op ieder moment slechts één Roger Multimedia Hub in een netwerk kan worden gebruikt. Roger Multimedia Hub kan geen verbinding maken met de Roger WallPilot, tenzij een Roger Touchscreen Mic in hetzelfde netwerk wordt gebruikt.

### Indicatorlampjes

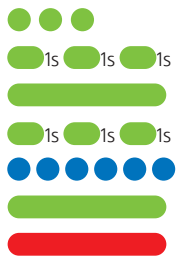

Aan/uit  
 Bezig met opladen  
 Volledig opgeladen  
 Audio-uitzending  
 Bezig met verbinden  
 Verbinding gelukt  
 Verbinding mislukt

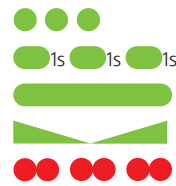

Aan/uit  
 Bezig met opladen  
 Volledig opgeladen  
 Ingeschakeld  
 Apparaat opladen



**Roger Multimedia Hub = secundair**



Primair niet beschikbaar (Zorg ervoor dat de primaire microfoon '1' in bereik is en niet in Kleine groep-modus is ingesteld)