


Roger™ SoundField.

Vejledning for lærere

Roger SoundField System omfatter følgende højttalere: Roger DigiMaster 5000, DigiMaster 5000 V2, Roger DigiMaster 7000 og Roger DigiMaster 7000 V2.


1 Tænd enheden

- Slut højttaleren Roger DigiMaster til en stikkontakt.
- Tryk på tænd/sluk-knappen i bunden af enheden, indtil et blåt lys begynder at blinke i toppen af højttaleren.

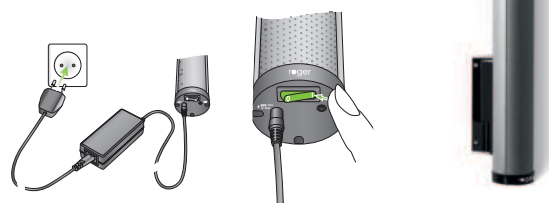

2 Opret forbindelse til Roger Touchscreen Mic

- Tænd for Roger Touchscreen Mic (se den vejledning, der omhandler Roger Touchscreen Mic), og hold den inden for en afstand af 10 cm/4" fra højttaleren Roger DigiMaster.
- Tryk på "Tilslut" på Roger mikrofonens skærm. Indikatorlampen på højttaleren Roger DigiMaster lyser blåt, når der er oprettet forbindelse.

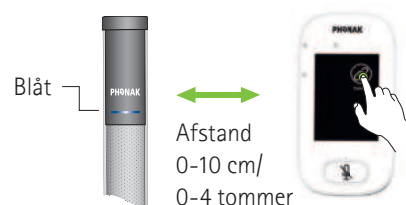

⚠ Højttalere af typen Roger DigiMaster 7000 eller 7000 V2:


Der kan oprettes samtidig forbindelse til flere højttalere af typen Roger DigiMaster ved at gentage trin 2 for hver af dem.

3 Opret forbindelse til lydudstyr

Der kan oprettes forbindelse til andet udstyr med direkte lydindgang ved at tilslutte lyd-kablet med et stik på 3,5 mm i bunden af enheden.

⚠ Roger DigiMaster 5000 V2 og 7000 V2 kan parres med en Bluetooth® enhed med henblik på lydstreaming.

- Tryk på Bluetooth knappen i bunden af højttaleren for at aktivere parringstilstand (indikatorlampen blinker blåt med korte intervaller i 60 sekunder).
- Foretag parring af enhederne via menuen med Bluetooth indstillinger på lyd-kilden (f.eks. en bærbar computer eller en mobiltelefon). Indikatorlampen på højttaleren Roger DigiMaster blinker blåt to gange, når parringen er fuldført. Bluetooth parringen kan annulleres ved at holde Bluetooth knappen inde i 10 sekunder.

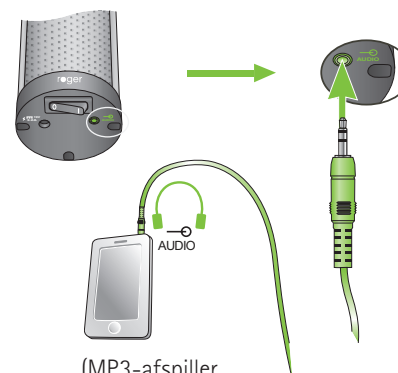

(MP3-afspiller, smartphone, TV, PC osv.)

Nyttige tips

Forbindelsen fra højttaleren Roger DigiMaster til Roger Touchscreen Mic opretholdes op til en afstand på 25 meter.



Op til 25 meter



Der kan højst tilsluttes 20 højttalere af typen Roger DigiMaster 7000 V2 til et netværk ad gangen.

Indikatorlys



Roger DigiMaster deaktiveret



Standardtilstand



Roger mikrofon deaktiveret/uden for forbindelsesområdet



Lyden slået fra (Mute)



Lydstyrke (+/-)



Softwareopdatering



Tilkald tekniker

Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG's side sker under licens.