

# Roger™ SoundField.

## Guide de l'enseignant

Le système Roger SoundField comprend les haut-parleurs suivants : Roger DigiMaster 5000, DigiMaster 5000 V2, Roger DigiMaster 7000 et Roger DigiMaster 7000 V2.

### 1 Mise en marche

- Branchez le haut-parleur Roger DigiMaster à une prise électrique.
- Faites basculer l'interrupteur marche/arrêt en bas de l'appareil jusqu'à ce qu'un témoin lumineux bleu se mette à clignoter sur le dessus du haut-parleur.



### 2 Connexion au Roger Touchscreen Mic

- Allumez le Roger Touchscreen Mic (consultez le Guide de l'enseignant pour le Roger Touchscreen Mic) et tenez-le à moins de 10 cm du haut-parleur Roger DigiMaster.
- Appuyez sur « Connecter » sur l'écran avant du microphone Roger. Une fois la connexion établie, le témoin lumineux sur le haut-parleur Roger DigiMaster deviendra bleu et arrêtera de clignoter.



#### ! Pour les haut-parleurs Roger DigiMaster 7000 et 7000 V2 :

Vous pouvez connecter plusieurs haut-parleurs Roger DigiMaster ensemble. Il vous suffit de suivre l'étape 2 pour chaque appareil, l'un après l'autre.

### 3 Connexion à n'importe quel appareil audio

Connectez-vous à n'importe quel appareil pour une entrée audio directe. Utilisez le câble audio de 3,5 mm branché à la partie inférieure de l'appareil.

#### ! Pour les modèles Roger DigiMaster 5000 V2 et 7000 V2, un appareil Bluetooth® peut être appairé pour la diffusion audio en streaming.

- Appuyez sur le bouton Bluetooth sur la partie inférieure du haut-parleur pour activer le mode appairage (témoin lumineux bleu qui clignotera pendant 60 secondes).
- Appairez les appareils dans le menu des paramètres Bluetooth de la source audio (ordinateur ou téléphone portable, par exemple). Un témoin lumineux bleu clignotera deux fois sur le haut-parleur Roger DigiMaster pour indiquer que l'appairage a réussi. Pour supprimer un appairage Bluetooth, maintenez le bouton Bluetooth enfoncé pendant 10 secondes.



(MP3, iPhone, télévision, ordinateur portable, etc.)

**roger**

## Conseils essentiels

Le haut-parleur Roger DigiMaster restera connecté au Roger Touchscreen Mic dans un rayon de 25 mètres.



Jusqu'à 25 mètres



Vous pouvez connecter jusqu'à 20 haut-parleurs Roger DigiMaster 7000 V2 à un réseau donné à tout moment.

## Témoins lumineux



- Roger DigiMaster éteint
- Mode de fonctionnement standard
- Microphone Roger éteint/hors de portée
- Mis en sourdine
- Volume +/-
- Mise à jour du logiciel
- Appeler un technicien

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence.