

Roger™ SoundField.

Gids voor leerkrachten

Het Roger SoundField systeem bevat de volgende speakers: Roger DigiMaster 5000, DigiMaster 5000 V2, Roger DigiMaster 7000 en Roger DigiMaster 7000 V2.

1 Inschakelen

- Sluit de Roger DigiMaster speaker aan op een stopcontact.
- Schakel het apparaat in met de aan-/uitknop aan de onderkant, totdat er een blauw licht knippert bovenop de speaker.



2 Verbinden met de Roger Touchscreen Mic

- Schakel de Roger Touchscreen Mic in (raadpleeg de Roger Touchscreen Mic Gids voor leerkrachten) en houd deze binnen een afstand van 10 cm bij de Roger DigiMaster speaker.
- Druk op 'Verbinden' op het voorste scherm van de Roger microfoon. Als het apparaat is verbonden, zal het licht op de Roger DigiMaster speaker continu blauw oplichten.



! Voor de Roger DigiMaster 7000 of 7000 V2 speakers:


Er kunnen meerdere Roger DigiMaster speakers samen worden aangesloten. Voer stap 2 één voor één uit.

3 Verbinden met elk audio-apparaat

Verbind de speakers met elk ander apparaat voor directe audio-input door middel van een audiokabel van 3,5 mm die is aangesloten aan de onderzijde van het apparaat.

! Voor de Roger DigiMaster 5000 V2 en 7000 V2 kan een Bluetooth®-apparaat worden gekoppeld voor audiostreaming.

- Druk op de Bluetooth-knop aan de onderzijde van de speaker om koppelingsmodus te activeren (snel blauw knipperlicht voor 60 seconden).
- Koppel de apparaten in het menu voor Bluetooth-instellingen van de audiobron (bijv. laptop of mobiele telefoon). Als een blauw licht op de Roger DigiMaster speaker tweemaal knippert, betekent dit dat het koppelen is gelukt. Om de Bluetooth-koppeling ongedaan te maken, houd de Bluetooth-knop 10 seconden ingedrukt.

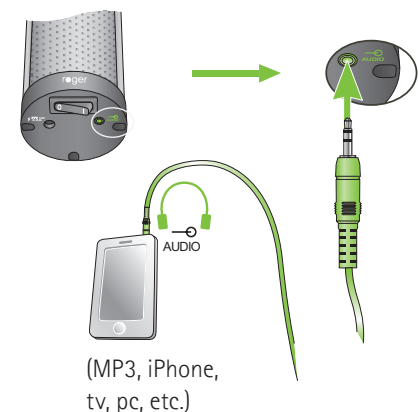

Belangrijke tips

De Roger DigiMaster-speaker blijft tot een afstand van 25 meter verbonden met de Roger Touchscreen Mic.



Tot 25 meter



Er kunnen op ieder moment maximaal 20 Roger DigiMaster 7000 V2-speakers worden aangesloten op hetzelfde netwerk.

Indicatorlampjes



Roger DigiMaster uit



Standaard bedrijfsmodus



Roger microfoon uit/buiten bereik



Gedempt



Volume +/-



Software-update



Neem contact op met Phonak

Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.