

Phonak

Target 9

Guide voor ALPS



Phonak Target™/ALPS biedt u de mogelijkheid om de gegevens via Phonak Target direct in ALPS in te voeren. Dit proces dat uit één stap bestaat, voorkomt dat er gegevens dubbel worden ingevoerd en biedt u de mogelijkheid om alle relevante aanpassings- en abonnementsgegevens voor de Lyric eenvoudig te beheren.

Voor gebruik van Phonak Target/ALPS dient de computer die u gebruikt voor de aanpassing over een internetverbinding te beschikken.

Na het installeren van Phonak Target, zijn de nieuwe functies automatisch beschikbaar. Bij elke Lyric-aanpassing, maakt Phonak Target automatisch verbinding met ALPS. Een wizard begeleidt u bij de noodzakelijke stappen.

Meer informatie, waaronder de Target/ALPS-video, is ook beschikbaar via [web help](#).


Content

Een nieuwe klant aanmaken in Phonak Target/ALPS	2
Toegang tot huidige cliënt in uw Phonak Target/ALPS-account verkrijgen	6
Het toestel verwisselen (incl. observatie gehoorgang)	7
Tourist case: een toestel verwisselen voor een cliënt van een andere praktijk.....	10
Tourist case: er is bij een cliënt van u een nieuwe aanpassing uitgevoerd door een andere erkende Lyric partner	11
Automatisch verlengen van een abonnement	12
Een actief abonnement annuleren	13
Een offline gebeurtenis synchroniseren	14
De startpagina van ALPS en rapporten	16
Uitgebreidere logregistratie voor support inschakelen.....	20
Informatie en beschrijving van de symbolen en systeemeisen.....	20

Een nieuwe klant aanmaken in Phonak Target/ALPS

Om een nieuwe cliënt in Phonak Target aan te maken en een Lyric-toestel uit de voorraad te selecteren:

1. Ga naar [Hoortoestellen] en selecteer de Lyric-toestellen in [Hoortoestellen]
2. Ga naar [Lyric-configuratie] en klik op [Kies toestel] om het Phonak Target/ALPS-wizard te openen.

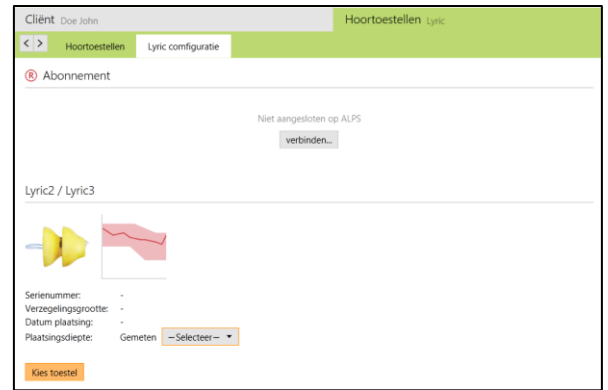

De ALPS-knop geeft de huidige status van de verbinding weer:


- Groen - verbonden
- Zwart - niet verbonden




Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen op uw Lyric-account.

Wij adviseren u de [Automatische login] functie te selecteren. Deze tijdbesparende feature maakt het mogelijk ingelogd te blijven in ALPS zonder dat u uw gegevens opnieuw moet ingeven.


In het geval dat u het wachtwoord bent vergeten, klik op de link [wachtwoord vergeten] en verander het in www.phonakpro.com direct.

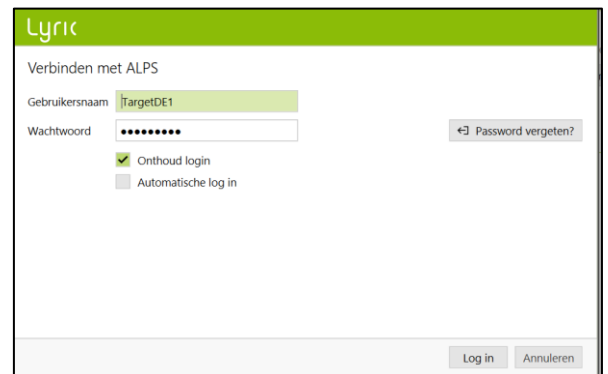

Nu verschijnt de volgende melding [Voeg nieuwe cliënt toe aan uw ALPS account]. Uw Accountgegevens staan in dit scherm, wat nuttig is voor praktijken die met verschillende logins werken.

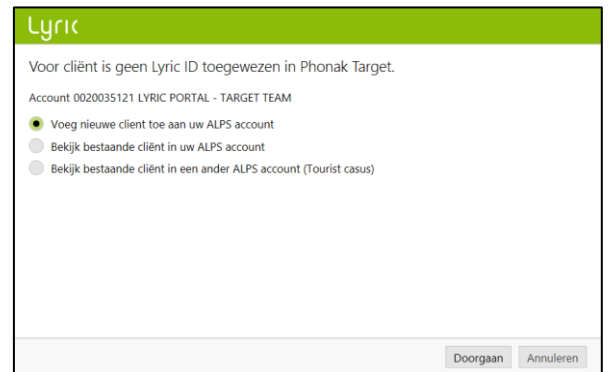

Indien u niet van plan bent de laatst getoonde login te gebruiken, kies [Wissel login] onder de ALPS knop en login met een andere naam.

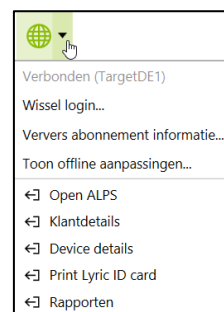

U kunt nu de voor- en achternaam, geboortedatum en het geslacht van de cliënt zien, zoals deze zijn ingevoerd in Phonak Target.

De overige informatie (geboortedatum en geslacht) is optioneel. Als u deze informatie niet wilt overbrengen, kunt u de optie [Voer aanvullende informatie in] uitvinken.

U wordt vervolgens gevraagd te bevestigen dat de cliënt toestemt dat zijn/haar data wordt gebruikt door Sonova voor product proces doeleinden. Als het vakje niet is aangevinkt, kan de aanpassing niet worden vervolgt.

Selecteer het gewenste type en kies het bovenste toestel aangezien de vervaldatum van dit toestel het eerst verstrijkt. Apparaten die binnen 30 dagen verlopen, zijn rood gemarkeerd.

Let op: gedateerde toestellen (expired) kunnen niet langer worden aangepast. Ga daarvoor naar uw dashboard via “wereldbol” en selecteer “open ALPS”. Selecteer [device return], kies het serienummer en als reden “expired” en stuur het toestel terug naar Phonak.

Selecteer de gemeten plaatsingsdiepte.

Het type abonnement voor deze cliënt staat standaard ingevuld. Kies de wijze waarop Phonak aan u factureert.

Zorg dat u een vinkje plaatst in het geval dat de klant Lyric voor tinnitus behandeling gebruikt.

The screenshot shows the 'Voer gegevens cliënt in' (Enter client data) form. It includes input fields for 'Voornaam' (First name) and 'Achternaam' (Last name), both with 'Voer in...' placeholder text. The 'Geboortedatum' (Date of birth) is set to 01.01.1948 and 'Geslacht' (Gender) is set to '-'. There is a checked checkbox for 'Voer aanvullende informatie in' (Enter additional information). At the bottom, there is a disclaimer: 'Hierbij onderschrijf ik dat ik mijn cliënt volledig heb geïnformeerd over het feit dat zijn/haar persoonlijke data ter verwerking wordt verzonden naar de hoortoestelfabrikant. Mijn klant heeft ingestemd met een dergelijke overdracht.' (I hereby declare that I have fully informed my client about the fact that their personal data is being sent for processing to the hearing aid manufacturer. My client has agreed to such a transfer.) Below the disclaimer are buttons for 'Create Lyric ID' and 'Annuleren' (Cancel).

The screenshot shows the 'Selecteer Lyric toestel van consignatie voorraad' (Select Lyric device from consignment stock) screen. It displays 'Seal afmeting vorig toestel: XXL' (Seal size of previous device: XXL) and 'Datum plaatsing: 14.03.2023' (Placement date: 14.03.2023). A search bar contains 'Lyric...'. Below is a table of devices:


Serie#	Model	Maat	XXL	Plaatsen voor
2307NY5EH	Lyric4	XXL		30.03.2023
2307NY5EK	Lyric4	XXL		05.04.2023
2307NY5EL	Lyric4	XXL		05.04.2023
2307NY5EJ	Lyric4	XXL		09.04.2023
2307NY5F2	Lyric4	XXL		13.04.2023
2307NY5EP	Lyric4	XXL		17.02.2024
2307NY5EW	Lyric4	XXL		17.02.2024
2307NY5EV	Lyric4	XXL		17.02.2024
2307NY5EU	Lyric4	XXL		17.02.2024

Buttons for 'Selecteer' (Select) and 'Annuleren' (Cancel) are at the bottom.


The screenshot shows the 'Geef gemeten diepte plaatsing aan' (Specify measured placement depth) screen. It asks for 'Eerste plaatsing in het oor.' (First placement in the ear.) and features a dropdown menu with options from 3 mm to 15 mm. The 3 mm option is currently selected. Buttons for 'Doorgaan' (Next) and 'Annuleren' (Cancel) are at the bottom.

The screenshot shows the 'Kies type inschrijving' (Choose type of registration) screen. It includes a dropdown for 'type Abonnement' (subscription type) set to '1-jarig abonnement' (1-year subscription), a dropdown for 'Betaalmethode' (payment method) set to 'Jaarlijkse termijn' (annual term), and a 'Start datum' (start date) of 19.11.2019. There is a checked checkbox for 'Lyric is used for tinnitus treatment'. Buttons for 'Doorgaan' (Next) and 'Annuleren' (Cancel) are at the bottom.

Phonak Target bevestigt de toestelselectie. U krijgt [Meer informatie] over het contract in dit scherm of kies [sluit]..Na het selecteren van een toestel wordt de einddatum van de proefperiode weergegeven in een overzicht. Voor binaurale aanpassingen wordt u gevraagd om [vervolg met de andere kant]. Deze actie leidt u direct naar het andere toestel uit uw voorraad.

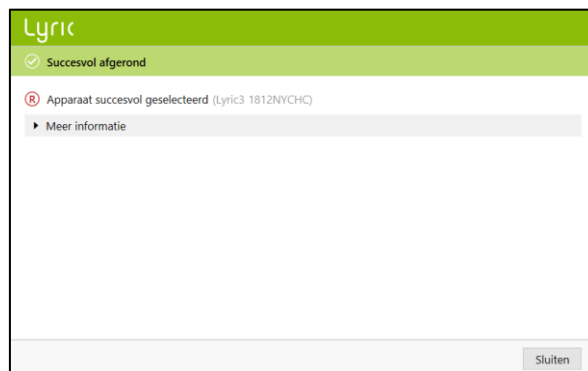


Hieronder worden de start- en einddatum van het abonnement, de einddatum van de proefperiode en de resterende hoeveelheid toestellen weergegeven.

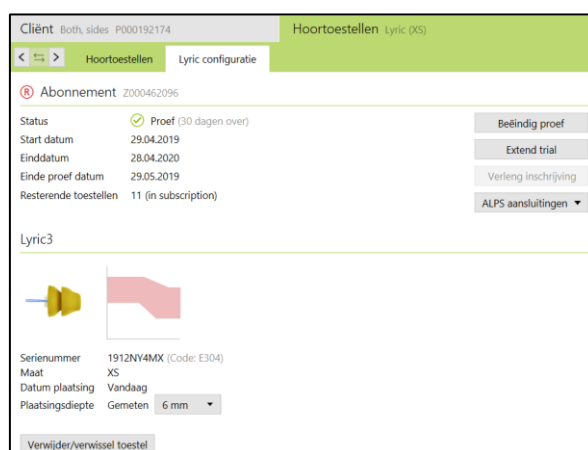


Nu is het mogelijk de proef eenmalig te verlengen met 10 dagen. De nieuwe einddatum zal worden weergegeven in Target/ALPS.


In het geval dat er een verkeerd serienummer is gekozen, kan het terug op voorraad worden gezet door op "terug op voorraad" te klikken.

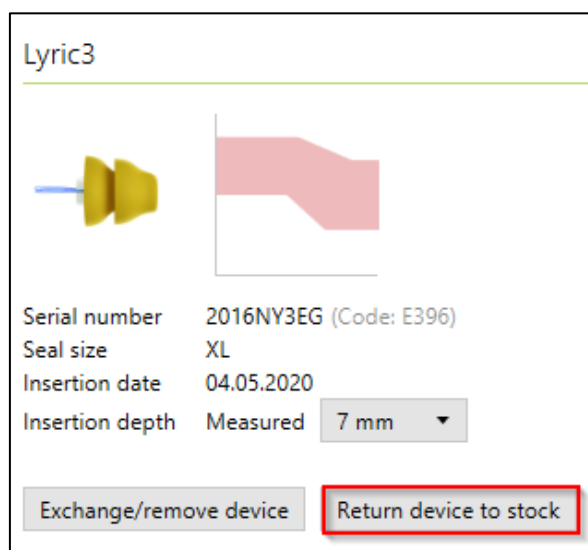


Door aan het einde van de sessie [Opslaan in database] te kiezen, worden uw aanpasgegevens gesynchroniseerd met ALPS.

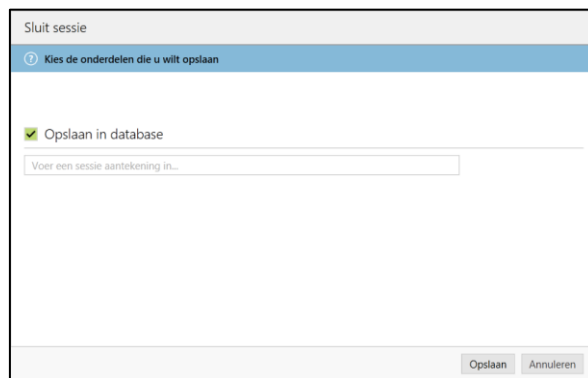


In het geval dat er meer notities over de klant nodig zijn, gebruik dan een nieuwe notitie sectie.

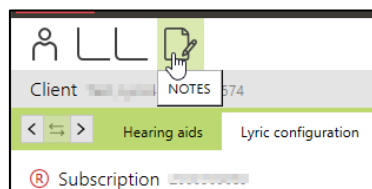

Een nieuwe notitie kan worden toegevoegd en Target maakt gebruik van een "herinner mij opnieuw in de volgende sessie" functie.

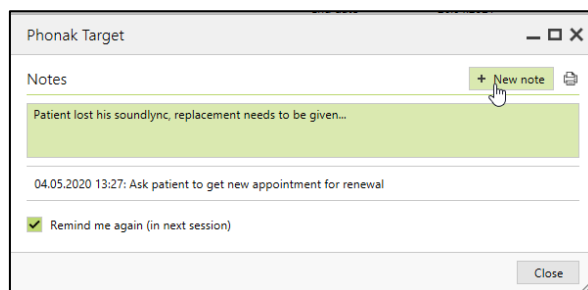

Alle notities zijn dan zichtbaar onder [Client, Notices].

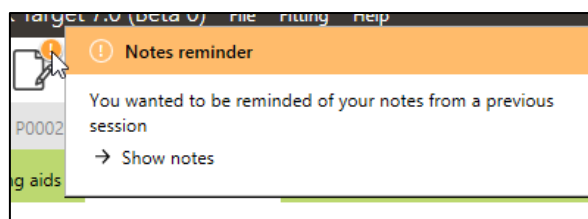

De onderstaande rapporten kunnen worden afgedrukt vanuit het Afdrukmenu:

Voor de audicien:



- Aanpasrapport
- Gegevensblad Lyric

Voor de cliënt:

- Hoortoestelinstructies
- Communicatietips
- Dagboek met waarnemingen
- Gehoorverlies begrijpen

De diagram rapporten kunnen als volgt worden geprint:

Kies [Instelling], [Rapporten], [Diagram] en kies tussen Versterking of Output.

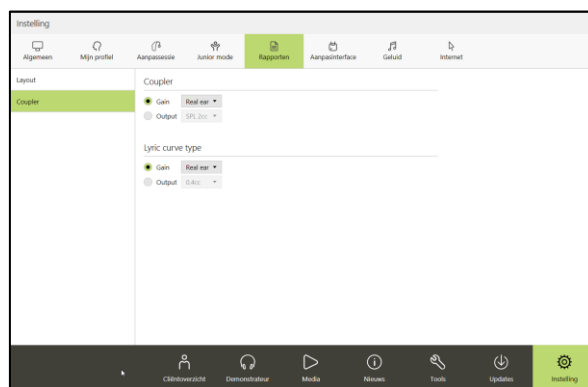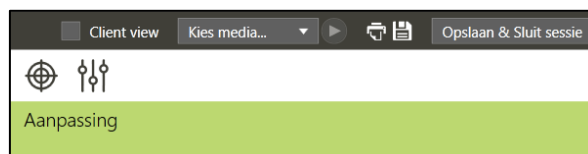

Het geselecteerde diagram wordt op het rapport afgedrukt.

Toegang tot huidige cliënt in uw Phonak Target/ALPS-account verkrijgen

Als de cliënt wel in ALPS staat, maar niet in Target (of bij een eerste invoer vanuit een ander filiaal) kiest u [Voeg bestaande cliënt toe aan uw ALPS account].

U dient eerst een cliënt aan te maken in Noah. Hierna worden de cliëntgegevens overgebracht naar Phonak Target. Ga verder tot u bij het scherm komt dat u vraagt een cliënt toe te voegen of de gegevens van een huidige klant te bekijken.

Om Phonak Target-gegevens met de ALPS-gegevens van uw Lyric klant te verbinden, selecteert u [Bekijk bestaande cliënt in uw ALPS account].

Voeg de juiste Lyric-ID en/of de voor- en achternaam in zoals deze zijn opgeslagen in ALPS.

U kunt de Lyric-ID terugvinden door in een afzonderlijke browser de ALPS-portal te openen of deze te zoeken op de afgedrukte Lyric-ID-kaart. Klik op Zoek voor het vinden van P#(Lyric ID)

U hoeft alleen de Lyric-ID in te vullen wanneer u voor de eerste keer een huidige cliënt probeert te verbinden. Bij het opnieuw openen van de sessie, heeft u automatisch toegang tot de ALPS-gegevens.

Door op de zoekknop te klikken zal P# automatisch worden ingevuld. Wanneer P# niet automatisch wordt ingevuld, betekent dit dat de cliënt geen huidige cliënt is of de naam komt niet overeen met de ALPS-informatie.

Wanneer de gegevens van de cliënt gevonden zijn, zal het Cliëntinformatie scherm alle relevante informatie tonen.

Lyric

Voor cliënt is geen Lyric ID toegewezen in Phonak Target.

Account 0020035121 LYRIC PORTAL - TARGET TEAM

Voeg nieuwe client toe aan uw ALPS account

Bekijk bestaande cliënt in uw ALPS account

Bekijk bestaande cliënt in een ander ALPS account (Tourist casus)

Doorgaan Annuleren

Lyric

Lyric client

Voornaam:

Achternaam:

Lyric ID:

Geboortedatum: -

Geslacht: -

Zoek

Doorgaan Annuleren

Lyric

Clientinformatie inschrijving

Voornaam: John

Achternaam: Doe


Lyric ID: P000087954

Informatie	Rechts	Links
Abonnement	Proef <input checked="" type="checkbox"/>	Geen inschrijving
Start datum	05.08.2014	
Einddatum		
Andere toestellen	6	
Toestel	Lyric3	
Serienummer	1406NV238	


Doorgaan Annuleren

Het toestel verwisselen (incl. observatie gehoorgang)


Voor het verwisselen van een Lyric-toestel, logt u in bij Phonak Target/ALPS, gaat u naar [Hoortoestellen], [Lyric-configuratie] en klikt u op [Verwissel/verwijder toestel].

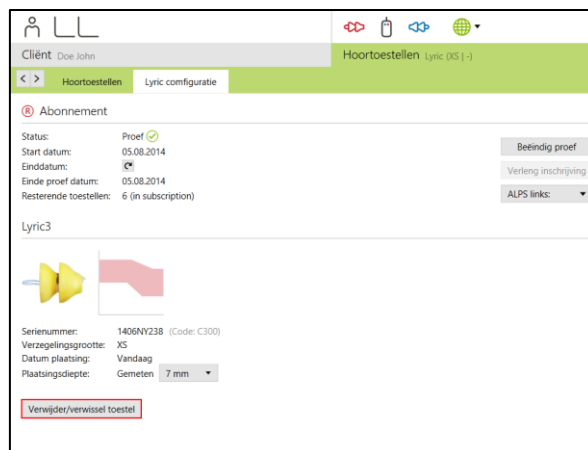

Selecteer of de aanpasser of de patiënt het toestel heeft verwijderd en noteer de datum van verwijdering als het voor vandaag was. Selecteer de bijbehorende verwijderingsreden. Deze redenen zijn onderverdeeld in vier categorieën (ongemak, toestel- of aanpassing gerelateerd en proactieve verwijdering).

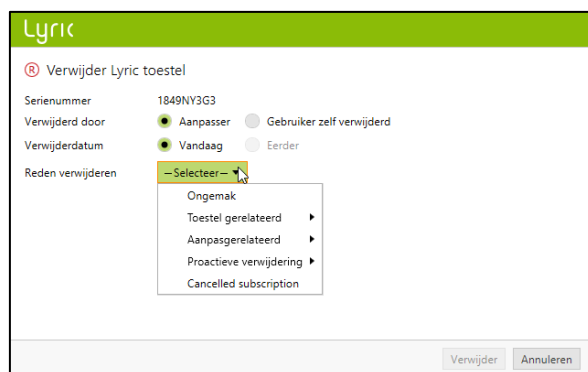

Door met uw muis over elke verwijderingsreden te bewegen, verschijnen de 'tooltips'. Deze geven u informatie die u helpt bij het kiezen van de juiste reden.

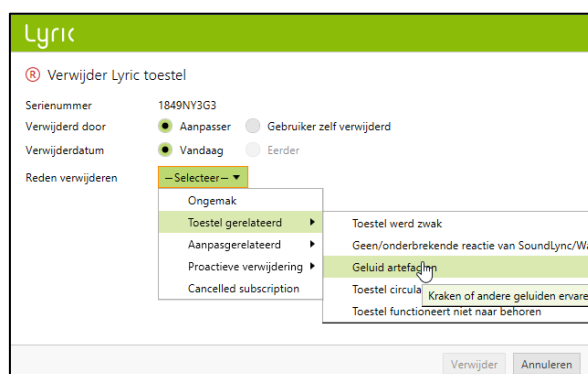





Phonak Target vraagt u ook naar de conditie van de gehoorgang. U kunt uit de volgende opties kiezen: [OK, gelijk heraanpassing mogelijk], [OK voor heraanpassing na rust] en [Vereist medische verwijzing]. Wanneer u voor [OK, gelijk heraanpassing mogelijk] kiest, kunt u het toestel direct verwisselen. Als de gehoorgang geïrriteerd is en rust nodig heeft of zelfs medische verwijzing vereist, zal het systeem u de daarbij passende informatie verstrekken.*

De opties voor het toevoegen van opmerkingen bij de verwijderingsredenen en de observatie van de gehoorgang zijn beide optioneel.

In geval er voor [Vereist medische verwijzing] is gekozen, kunnen aanvullende details over het oorkanaal moeten worden gekozen.

Als het tweede toestel verwijderd moet worden, kunt u voor [Verder gaan met andere zijde] kiezen. Bij sommige redenen (geplande verwijdering, benadering van levensduur toestel en proactieve verwijdering door clinicus) wordt standaard dezelfde reden ingevuld voor het tweede toestel. Deze kan echter worden aangepast indien de verwijderingsredenen per zijde verschilt.

* Als u voor [OK voor heraanpassing na rust] heeft gekozen of [Vereist medische verwijzing], toont Phonak Target de informatie in het hoofdscherm.

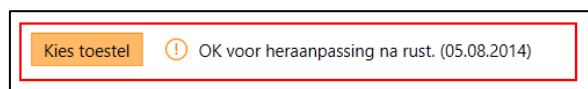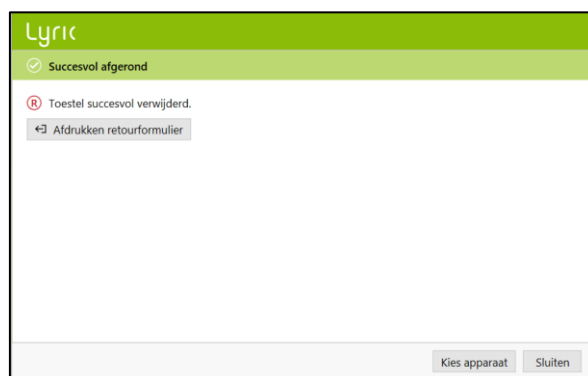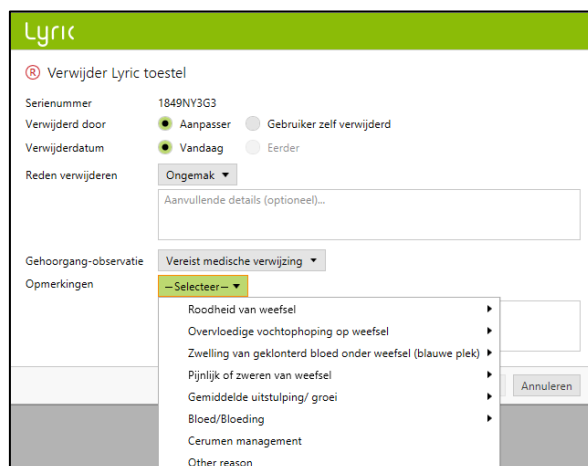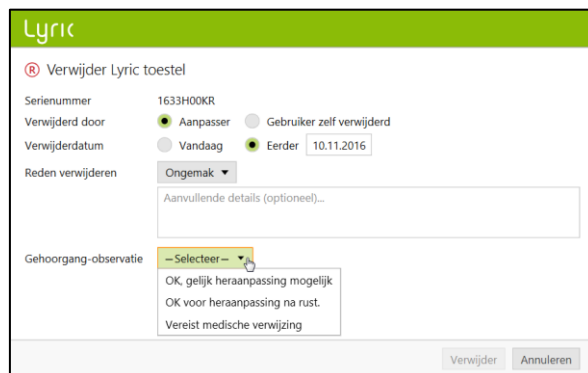

Voor het verwisselen van een toestel, bent u verplicht te bevestigen dat het oor de status [OK, gelijk heraanpassing mogelijk] (vandaag) heeft. Dit doet u door onder in het scherm dit vakje te selecteren. Het toevoegen van opmerkingen over de gehoorgang van de cliënt is optioneel.

Na te hebben bevestigd dat het oor direct voor heraanpassing geschikt is, kunt u een ander Lyric-toestel kiezen om te verwisselen.

Serie#	Model	Lyric3	Verzegelingsgrootte	M	Invoegen door
1420NY85P	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY85R	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY85T	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY85N	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY85K	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY85L	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY85M	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY85Y	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY860	Lyric3		M		03.07.2015
1420NY861	Lyric3		M		03.07.2015

De opmerkingen die u invoert, worden opgeslagen onder [Cliënt], [Aantekeningen].

Let op; wanneer het toestel langer dan 30 dagen werd gedragen, [Easy Refit] niet werkt en de standaard waarden worden getoond.

- Toestel is verwijderd door aanpasser
- Toestel is vandaag verwijderd
- Geplande verwijdering
- OK, gelijk heraanpassing mogelijk

Klik [Vervang] en kies voor een nieuw toestel.


Indien de criteria niet overeenkomen met de standaard waarden, deze aanpassen svp.

Tourist case: een toestel verwisselen voor een cliënt van een andere praktijk


Voor het verwisselen van een Lyric-toestel bij een cliënt waarvoor de oorspronkelijke aanpassing is uitgevoerd door een andere erkende Lyric partner, moet u de ALPS-aanpassingsgegevens van deze cliënt kunnen inzien. Om deze in te kunnen zien, heeft u de persoonlijke Lyric-ID van de cliënt nodig.

Om de procedure voor deze eenmalige cliënt uit te voeren, dient u de stappen die bij een nieuwe cliënt horen te doorlopen. Log in bij uw ALPS-account en selecteer vervolgens [Bekijk bestaande cliënt in een ander ALPS account (Tourist case)]

Voer de Lyric-ID van de cliënt in en controleer of de naam correct wordt weergegeven (zoals deze gedrukt staat op de Lyric-ID-kaart). Ga verder met het verwisselen van het toestel en, indien nodig, het aanpassen van de aanpassingsparameters. Indien de cliënt niet weet wat zijn/haar Lyric-ID is, kunt u deze opvragen door de klantenservice van Lyric te bellen.

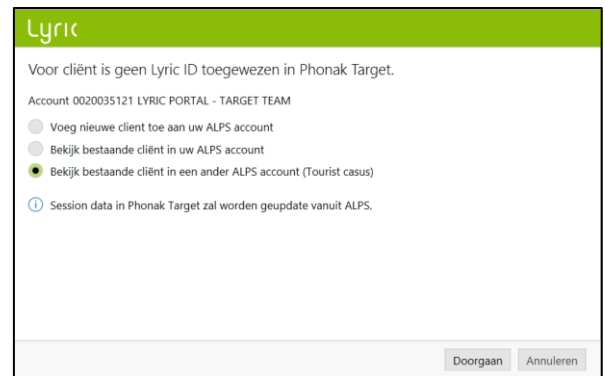

The screenshot shows the Lyric portal interface. At the top, there is a green header with the Lyric logo. Below the header, the text reads: "Voor cliënt is geen Lyric ID toegewezen in Phonak Target." Underneath, the account information is displayed: "Account 0020035121 LYRIC PORTAL - TARGET TEAM". There are three radio button options: "Voeg nieuwe client toe aan uw ALPS account", "Bekijk bestaande cliënt in uw ALPS account", and "Bekijk bestaande cliënt in een ander ALPS account (Tourist casus)". The third option is selected. Below the options, there is a note: "Session data in Phonak Target zal worden geupdate vanuit ALPS." At the bottom right, there are two buttons: "Doorgaan" and "Annuleren".

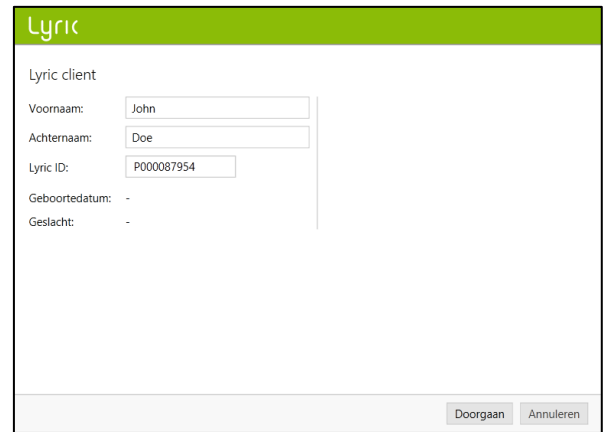

The screenshot shows the Lyric portal interface for entering client details. At the top, there is a green header with the Lyric logo. Below the header, the text reads: "Lyric client". There are four input fields: "Voornaam:" with the value "John", "Achternaam:" with the value "Doe", "Lyric ID:" with the value "P000087954", and "Geboortedatum:" with a dash "-" next to it. Below the input fields, there is a label "Geslacht:" with a dash "-" next to it. At the bottom right, there are two buttons: "Doorgaan" and "Annuleren".

Tourist case: er is bij een cliënt van u een nieuwe aanpassing uitgevoerd door een andere erkende Lyric partner

Wanneer er bij een cliënt van u een nieuwe aanpassing uitgevoerd is door een andere Lyric-partner, ontvangt u een melding dat ALPS (nieuwe aanpassing cliënt) niet overeenkomt met Phonak Target (uw aanpassing). Dit geeft aan dat het serienummer is gewijzigd.

Door op [Doorgaan] te klikken, zal het systeem het nieuwe serienummer synchroniseren.

Als de andere aanpasser ook de aanpassingsparameters heeft gewijzigd, wordt er ook melding gemaakt van deze verschillen. U kunt dit oplossen door de gewenste optie te kiezen.

Let op: de ALPS-gegevens zijn de nieuwste gegevens van de andere aanpasser en de Phonak Target-gegevens zijn de gegevens die u zelf eerder al heeft ingevoerd.

The screenshot shows a Lyric interface with a green header. Below the header is an orange banner with the text "Data conflict tussen ALPS en Phonak Target". The main content area displays client information: Voornaam John, Achternaam Doe, and Lyric ID P000104795. Below this, it states "Toestelgegevens in ALPS en Phonak Target komen niet overeen:". There are two tabs: "Rechts" (selected) and "Links". Under "Rechts", there is a table with columns "Abonnement", "ALPS", and "Phonak Target". The "ALPS" row shows "1432NY4WC (Tourist wissel)" and "Geen serienummer". The "Phonak Target" row shows "Geen serienummer" and "Geen toestel". Below the table, there is an "Action" section with a red warning icon and the text "Het serienummer zal geupdate worden in Phonak Target". At the bottom, there is a blue information icon and the text "Kies 'Annuleren' om het conflict handmatig op te lossen." and two buttons: "Doorgaan" and "Annuleren".

The screenshot shows a Lyric interface with a green header. Below the header is an orange banner with the text "Verkeerde aanpas parameter!". The main content area displays the text "De aanpasparameters in ALPS en Phonak Target komen niet overeen:". There are two tabs: "Rechts" (selected) and "Links". Under "Rechts", there is a section "Los probleem op" with two radio button options: "Gebruik gegevens Phonak Target" (unselected) and "gebruik ALPS data (nieuwer)" (selected). Below the "gebruik ALPS data" option, it says "Laatste update 29.08.2014 13:14" and "Update elders gedaan.". Under "Links", there is a green checkmark icon and the text "Fitting parameters zijn identiek". At the bottom, there is a blue information icon and the text "Kies 'Doorgaan' om het probleem op te lossen. Kies 'Annuleren' om dit handmatig te doen." and two buttons: "Doorgaan" and "Annuleren".

Automatisch verlengen van een abonnement




Twee maanden voordat het abonnement verloopt, krijgt u een informatie pop-up in Target / ALPS dat het abonnement klaar is voor automatische verlenging.

Zodra het abonnement gereed is om te vernieuwen, wordt het automatisch voor nog een jaar verlengd met een jaarlijkse betaling.


Het vernieuwde abonnement wordt automatisch een actief abonnement zonder proefversie.

In het geval dat de klant anders wenst, heeft u nog steeds de volgende keuzes voordat het abonnement automatisch wordt verlengd:

1. Vernieuw het contract en kies een ander betalingstype (jaarlijks of maandelijks)
2. Annuleer de verlenging van het komende abonnement

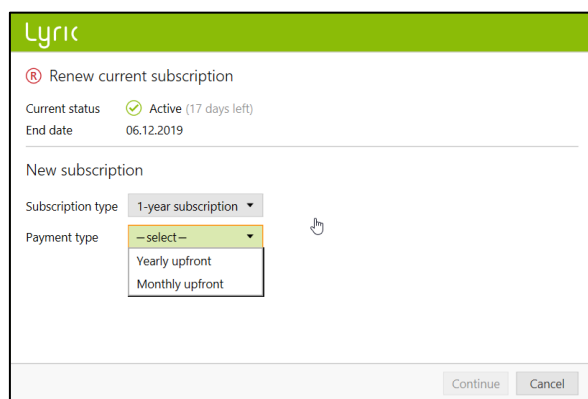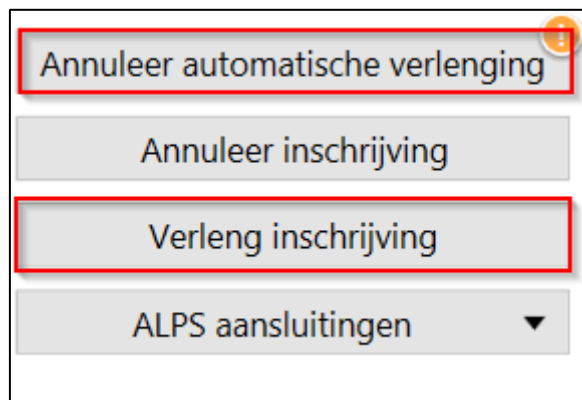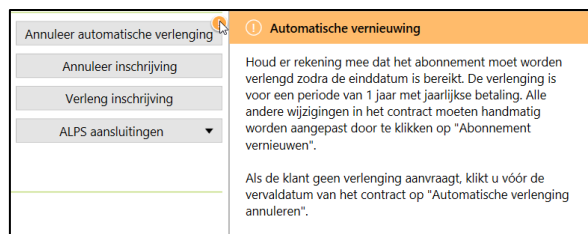


In het geval dat de klant het abonnement niet meer wil verlengen, dan is het verplicht om een reden aan te geven wanneer een annulering van het komende abonnement wordt ingevoerd.

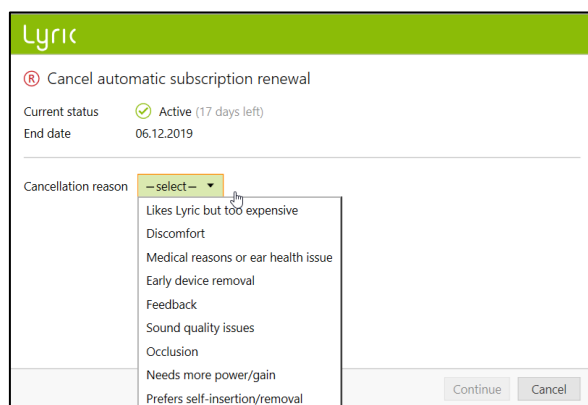


Een actief abonnement annuleren

Mocht het nodig zijn om een actief abonnement op te zeggen (op basis van medische complicaties), kunt u dit doen door in het scherm Lyric-configuratie [Annuleer inschrijving] te kiezen.

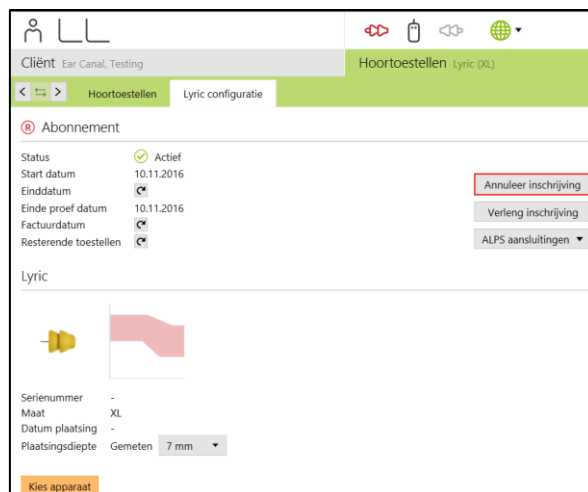

Het systeem waarschuwt u dat u op het punt staat een actief abonnement te annuleren. Om de annulering uit te voeren, kiest u de bijbehorende annuleringsreden en klikt u op Doorgaan. Het annuleringsverzoek wordt naar Phonak verzonden.

Let op dat [patiënt overleden] en [heraanpassen is bezwaarlijk] als nieuwe redenen voor het stoppen van het abonnement zijn toegevoegd.

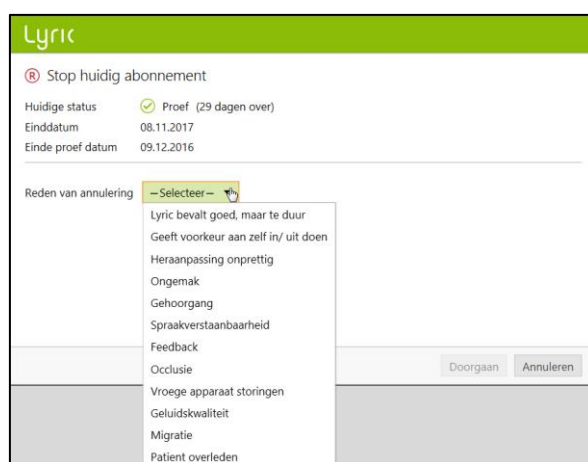

Een offline gebeurtenis synchroniseren

Het kan voorkomen dat u een cliënt heeft waarvan de gegevens al via Phonak Target/ALPS zijn ingesteld, maar u door verschillende redenen (tijdelijk geen internetverbinding of problemen met uw pc, etc.) genoodzaakt bent om tijdens een of meerdere sessies offline te werken. Hierdoor zijn de nieuwe gegevens in Phonak Target niet gesynchroniseerd met ALPS.

Het verwijderen van een toestel in de offline modus verloopt op dezelfde manier als het verwijderen van een toestel in de online modus.

U wordt gevraagd een nieuw toestel in te voeren.

The screenshot shows a dialog box titled "Lyric configuratie" with the main heading "Verwijder Lyric toestel". It contains the following fields and options:

- Serienummer:** 1633H00KR
- Verwijderd door:** Radio buttons for "Aanpasser" (selected) and "Gebruiker zelf verwijderd".
- Verwijderdatum:** Radio buttons for "Vandaag" (selected) and "Eerder".
- Reden verwijderen:** A dropdown menu set to "Ongemak" and a text input field "Aanvullende details (optioneel)...".
- Gehoorgang-observatie:** A dropdown menu set to "OK, gelijk heraanpassing mogelijk" and a text input field "Aanvullende observatie gehoorgang (optioneel)...".

At the bottom, there is an information icon and the text "Niet aangesloten op ALPS. Alle wijzigingen zullen later gesynchroniseerd worden." and two buttons: "Verwijder" and "Annuleren".

The screenshot shows the same "Lyric configuratie" dialog box, but now with a green success message at the top: "Toestel succesvol verwijderd". Below this, the heading is "Plaats een nieuw Lyric toestel:" and there is a text input field labeled "Plaats nieuwe toestel". A "Sluiten" button is located at the bottom right.

Voer zowel het serienummer als de code die zichtbaar is op de Lyric-verpakking in. Vervolgens voert u de gemeten plaatsingsdiepte in. Indien nodig, kunnen de aanpassingsparameters aangepast worden.

Wanneer het probleem verholpen is en u Phonak Target/ALPS weer kunt gebruiken, ontvangt u voor elke cliënt waarvoor offline de aanpassing is uitgevoerd een melding met een oranje uitroepteken: [Sessie niet opgeslagen in ALPS].

Zodra Phonak Target weer met ALPS is verbonden, zal de synchronisatie automatisch plaatsvinden

Na een offline aanpassing, zijn er logboeken beschikbaar op uw pc.

Een groen vinkje geeft aan dat de synchronisatie is gelukt.

Lyric configuratie

Ⓡ Geef toestel informatie in

Serienummer 1633H00KE
Code E394
Model Lyric3
Maat XL

ⓘ Niet aangesloten op ALPS. Alle wijzigingen zullen later gesynchroniseerd worden.


Selecteer Annuleren

Doe John

Sessie 1 07.08.2014 16:11

Ⓡ

Geen audiogram beschikbaar

 Lyric
SN: 1419NY7DR

ⓘ Sessie niet opgeslagen in ALPS

Lyric

ⓘ Synchroniseer offline toestelwijzigingen

Wijzig	Serienummer	Datum	Reden	Sync status
Ⓡ Verwijdering	1633H00KR	10.11.2016	Ongemak	⊖ In afwachting
Ⓡ Insertion	1633H00KE	10.11.2016		⊖ In afwachting

Sync met ALPS Annuleren

Lyric

✔ Alle offline veranderingen gesynchroniseerd naar ALPS

Wijzig	Serienummer	Datum	Reden	Sync status
Ⓡ Verwijdering	1633H00KR	10.11.2016	Ongemak	✔ Gesynchronis...
Ⓡ Insertion	1633H00KE	10.11.2016		✔ Gesynchronis...


✔ Succesvol gesynchroniseerd

Doorgaan Annuleren

De startpagina van ALPS en rapporten


Sommige handelingen vereisen een directe link met ALPS:

- Open ALPS
- Klantdetails
- Device Details
- Print Lyric ID card
- Rapporten

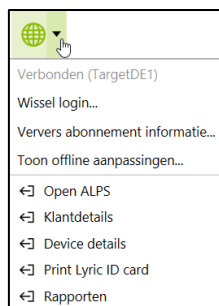

Op het Home Screen heb je een overzicht van de:

- Voorraad overzicht
- Proeven die over 7 dagen vervallen
- Abonnementen die binnen 90 dagen vervallen
- Toestellen die meer dan 120 dagen worden gedragen

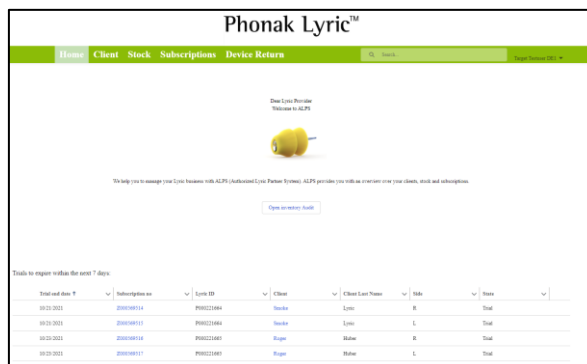

De client sectie geeft u een overzicht van al uw klanten. Door op de naam te klikken (blauw gemarkeerd), kom je op de niveau waar je ziet:

- Print Lyric ID
- Abonnement van client
- Vernieuwen van abonnement
- Toestellen verwijderen (nodig bij het opzeggen van het abonnement)
- Client details (zoals aanpas gegevens)

First name	Last name	Lyric ID	Patient Name	Phonak account number
03 Sep 2021	03 Sep 2021	P00022829	1 year	00200716403
1407	TC	P00018788	4 year	00200716403
1407 changed	TC	P00018788	4 year	00200716403
T.S.B	Blasdel	P00022848	1 year	00200716403
aa	aa	P00022829	1 year	00200716403
aaa	aaa	P00022889	1 year	00200716403
Alma	Alma	P00010188	2 year	00200716403
ALPS	Teri	P00022820	1 year	00200716403
Alpa	Lynn	P00022821	1 year	00200716403
Alpa	Lynn	P00022821	2 year	00200716403
Alp	Alp	P00022842	1 year	00200716403
ANDS	ANDS	P00022840	1 year	00200716403
Anonymous00000001	Anonymous00000001	P00022828	1 year	00200716403

Door op het blauwe abonnementsnummer te klikken, worden meer details over het abonnement getoond:

- Algemene Voorwaarden
- Abonnement annuleren
- Toestel geschiedenis

Subscription	Item
2000568483	TC
Class	TC
Check	X

Subscription type	Start date
TC	14/07/2021
Payment method	Start date
Direct payment	01/01/2021
Billable date	Start date
Contract date	Renewing device

Serial number	Item	Insertion date	Removal date	Removal Reason	Working Duration
2132N76TN	TC	07/2021			

Als u op het blauwe apparaat nummer klikt, is de volgende informatie beschikbaar:

- Toestel status
- Toestelcode, Garantie en uiterste gebruiksdatum
- Abonnement/Plaatsing
- Verwijder en Retour informatie

State	Short description
In use	Lyric4 (2X)

Account	Warranty date
Lyric-Testfonds #3	10/7/2021
Serial number	Use by
2132N76TN	8/13/2022
Device Code	
F306	
Subscription / Insertion	
Subscription	Insertion date
2000568483	9/7/2021
Removal	Removal date
Removal Reason:	
Removal Comment:	
Return	Return Date
Return reason:	

Het voorraadoverzicht toont alle apparaten in het betreffende account, gesorteerd op apparaatgrootte. Die lijst kan ook geëxporteerd worden naar Excel.

Device size	Device: Serial number	Material number	Short description	Use by
L (6)	2132N9141	078-0064	Lyric4 (L)	8/13/2022
	2132N9145	078-0064	Lyric4 (L)	8/13/2022
	2132N9146	078-0064	Lyric4 (L)	8/13/2022
	2132N9148	078-0064	Lyric4 (L)	8/13/2022
	2132N9143	078-0064	Lyric4 (L)	8/13/2022
	2132N914C	078-0064	Lyric4 (L)	8/13/2022
M (3)	2132N914V	078-0063	Lyric4 (M)	8/13/2022
	2132N91C0	078-0063	Lyric4 (M)	8/13/2022
	2132N91C4	078-0063	Lyric4 (M)	8/13/2022
S (3)	2132N771Y	078-0062	Lyric4 (S)	8/6/2022
	2132N77KA	078-0062	Lyric4 (S)	8/6/2022
	2132N77KC	078-0062	Lyric4 (S)	8/6/2022
XL (6)	2132N914WV	078-0065	Lyric4 (XL)	8/6/2022
	2132N914WE	078-0065	Lyric4 (XL)	8/6/2022
	2132N914WF	078-0065	Lyric4 (XL)	8/6/2022

Onder Abonnementen zijn alle abonnementen met alle statuses te vinden. Bij het werken in een satellietfiliaal dat in het systeem is aangesloten, zijn alle klanten zichtbaar maar zijn gescheiden door accountnummers. Die lijst kan worden geëxporteerd naar Excel.

Phonak account number	Account Name	Subscription no.	Split ID	Event name	Last name	Start date	End date	Side	Status	Subscription type	Payment mode
1002094402 (7)	Lyric Software #1 (7)	200049509	PH0021754	test	Reuter	10/02/2021		R	True	1 yr subscription	Monthly
		200049500	PH0021754	test	Reuter	10/02/2021		R	True	1 yr subscription	Monthly
		200049501	PH0021754	test	Reuter	10/02/2021		R	True	1 yr subscription	Monthly
		200049510	PH0021754	test	Reuter	10/02/2021		R	True	1 yr subscription	Monthly
		200049508	PH0021754	test	Reuter	10/02/2021		R	True	1 yr subscription	Monthly
		200049509	PH0021754	test	Reuter	10/02/2021		R	True	1 yr subscription	Monthly
		200049510	PH0021754	test	Reuter	10/02/2021		R	True	1 yr subscription	Monthly
		200049511	PH0021754	test	Reuter	10/02/2021		R	True	1 yr subscription	Monthly
		200049512	PH0021754	test	Reuter	10/02/2021		R	True	1 yr subscription	Monthly
		200049513	PH0021754	test	Reuter	10/02/2021		R	True	1 yr subscription	Monthly
		200049514	PH0021754	test	Reuter	10/02/2021		R	True	1 yr subscription	Monthly
		200049515	PH0021754	test	Reuter	10/02/2021		R	True	1 yr subscription	Monthly
		200049516	PH0021754	test	Reuter	10/02/2021		R	True	1 yr subscription	Monthly
		200049517	PH0021754	test	Reuter	10/02/2021		R	True	1 yr subscription	Monthly
		200049518	PH0021754	test	Reuter	10/02/2021		R	True	1 yr subscription	Monthly
		200049519	PH0021754	test	Reuter	10/02/2021		R	True	1 yr subscription	Monthly

In het gedeelte Apparaat retour kunt u apparaten terugsturen naar Phonak die ofwel:

- Nieuw (overvoorraad)
- Dead on arrival
- Verkeerd geleverd
- Verlopen

Kies de apparaten die teruggestuurd moeten worden naar Phonak. Klik op het betreffende apparaat en kies een retourreden. Klik op selecteren en druk vervolgens een retourformulier af dat kan worden verzonden met een apparaat om te retourneren (indien nodig).

Serial number	Device size	Side	Short description	Use by
<input type="checkbox"/> 2132NY7JY	S	R/L	Lyric4 (S)	8/6/2022
<input type="checkbox"/> 2132NY7KC	S	R/L	Lyric4 (S)	8/6/2022
<input type="checkbox"/> 2132NY7KA	S	R/L	Lyric4 (S)	8/6/2022
<input type="checkbox"/> 2132NY9WK	XL	R/L	Lyric4 (XL)	8/6/2022
<input type="checkbox"/> 2132NY9WD	XL	R/L	Lyric4 (XL)	8/6/2022
<input type="checkbox"/> 2132NY9WC	XL	R/L	Lyric4 (XL)	8/6/2022
<input type="checkbox"/> 2132NY9WG	XL	R/L	Lyric4 (XL)	8/6/2022
<input type="checkbox"/> 2132NY9WF	XL	R/L	Lyric4 (XL)	8/6/2022
<input type="checkbox"/> 2132NY9WE	XL	R/L	Lyric4 (XL)	8/6/2022
<input type="checkbox"/> 2132NY941	L	R/L	Lyric4 (L)	8/13/2022
<input type="checkbox"/> 2132NY94C	L	R/L	Lyric4 (L)	8/13/2022
<input type="checkbox"/> 2132NY943	L	R/L	Lyric4 (L)	8/13/2022
<input type="checkbox"/> 2132NY948	L	R/L	Lyric4 (L)	8/13/2022
<input type="checkbox"/> 2132NY946	L	R/L	Lyric4 (L)	8/13/2022
<input type="checkbox"/> 2132NY945	L	R/L	Lyric4 (L)	8/13/2022
<input type="checkbox"/> 2132NY8AY	M	R/L	Lyric4 (M)	8/13/2022
<input type="checkbox"/> 2132NY8C0	M	R/L	Lyric4 (M)	8/13/2022
<input type="checkbox"/> 2132NY8C4	M	R/L	Lyric4 (M)	8/13/2022

Onder uw naam zijn er de volgende secties:

- Home
- Mijn Profiel
- Mijn Account
- Uitloggen

Met Mijn profiel kunt u indien nodig uw taal wijzigen.

Onder Mijn Account kun je je huidige locatie kiezen (wanneer je op verschillende locaties werkt).

Please choose your current location:

Your current account is:

162220442
Lyric Testkunde #1
162220442
162220442

Please choose one account:	Phone account number	Account Name	Address	City	Zip code
<input type="checkbox"/>	162220442	Lyric Testkunde #1	Westerwalde 1	Stuttgart	70372

Submit

Als u wekelijks een e-mail wilt ontvangen over de proefversies, abonnementen en voorraad die bijna verlopen, kunt u maximaal vijf e-mailadressen invullen. Kies ook hoeveel maanden voor het verlopen van de abonnementen je een melding wilt krijgen. Voor satelliet filialen kan ook een rapport met een volledig overzicht van alle winkels worden opgevraagd door het vakje aan te vinken.

Notification Settings

Account Name: Lyric Testkunde #1

Notification e-Mail 1: thomas.ordahl@park.com

Notification e-Mail 2: kristina.lieping@park.com

Notification e-Mail 3:

Notification e-Mail 4:

Expiration Notification Time: 1 month

Notification Report Satellite Offices:

Save

Het dashboard geeft u een indicatie van hoe uw winkel ervoor staat. Uitleg vindt u in meer details in de legenda binnen het dashboard.

Trials 64 / New Subscriptions 67 / Renewals 0 / Active 3 / Trial Success Rate 4 % / TSR national 25.00 %

1. Trials with remaining trial days left - One Day
2. Renewals with remaining days left - One Day
3. Trial Success Rate (TSR) - One Day
4. Trial Success Rate (TSR) - One Day
5. Trial Success Rate (TSR) - One Day
6. Trial Success Rate (TSR) - One Day

Het toestel analyse formulier kan worden gedownload.

Forms to Download


In het zoekveld kunt u direct zoeken naar gegevens zoals abonnementen, klantnamen, apparaten etc..

Search...

Uitgebreidere logregistratie voor support inschakelen

Als u problemen ondervindt met Phonak Target, kan een uitgebreidere logregistratie onze Target-software support helpen de oorzaak te traceren.

Sla de logbestanden op uw pc op en verstuur ze naar uw Lyric-contactpersoon.

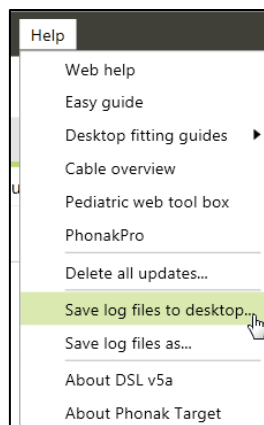

Informatie en beschrijving van de symbolen en systeemeisen

Informatie en beschrijving van de symbolen en een overzicht van de systeemeisen staan in de Phonak Target Aanpasgids.

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op Target 9.0 en latere subversies van de Target 9-aanpassoftware. Voor eerdere versies van de gebruikershandleiding van de aanpassoftware kunt u contact opnemen met uw lokale Phonak-vertegenwoordiger.



Sonova AG • Laubisrütistrasse 28 •
CH-8712 Stäfa • Switzerland



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen • Germany



058-0125-090
Phonak Target 9.0 DVD



0459
CE mark applied 2023