

Нулиране на слухови апарати за приложение при множество потребители.

Ръководство за експлоатация



Въведение

Трябва да се прилагат хигиенни стандарти за всички устройства, които се използват с множество клиенти (напр. пробни устройства, заемни устройства).

Това включва всички секции на слухова система: RIC или BTE, RIC говорител. Всяка секция трябва да премине щателно почистване, дезинфекция и нулиране на системата, преди да бъде използвана повторно с друг клиент.

RIC/BTE устройства: в допълнение към почистване/дезинфекция се изисква изтриване на личните данни на слуховия апарат и проверка за оценка на външния вид и функционирането.

RIC говорители: ако даден клиент е носил говорител за краткосрочно пробване, обикновено траещо до 15 минути, говорителят може да бъде почистен и дезинфекциран, за да бъде прехвърлен на друг клиент. Ако даден говорител е бил носен за по-дълго, той може да бъде прехвърлен към окончателното покупно устройство на клиента или ако не е необходим, трябва да бъде изхвърлен.

Процедура за почистване

1. Подготовка

Носете ръкавици по време на почистването и дезинфекцията на устройството

RIC

- Дръжте говорителя свързан или използвайте паста, за да попречите на почистващата течност да навлезе в порта на приемника

VTE

- Свалете отливката на клиента

Говорители

- Говорителите, носени за краткосрочно пробване, могат да бъдат хигиенично почистени за повторна употреба
- Отстранете и изхвърлете омотчето и защитата от ушна кал

2. Почистване и дезинфекция

- За почистване и дезинфекция използвайте кърпичка със следните активни съставки: четвъртични амониеви съединения и алкохол
- Първо избършете устройството(ата), за да премахнете видимото замърсяване (напр. Ушна кал)

- Увийте устройството(ата) с пресни кърпички, осигуряващи контакт на повърхността с устройството(ата)
- Не е необходимо да обвивате устройствата поотделно, множество RIC/BTE/говорители могат да бъдат обвити наведнъж в едни и същи кърпички

RIC и BTE

- Уверете се, че устройството(ата) е/са в контакт с кърпичката за най-малко 8 минути
- Ако кърпичката изсъхне, използвайте нова кърпичка, за да се уверите, че устройствата остават мокри през цялото време за почистване

Говорители

- Уверете се, че говорителят/говорителите/са в контакт с кърпичката за най-малко 4 минути

3. Подсушаване

- Избършете устройствата/говорителите с кърпа без мъх, навлажнена с чешмяна вода, за да премахнете остатъка от почистваща течност от тях
- Оставете устройствата да изсъхнат напълно преди повторна употреба

Проверка

Направете следните проверки:

- Няма видими признаци на физическо влошаване на качеството на повърхността, напр. надраскан корпус.
- Слуховият апарат може да се зареди (за устройствата с презареждане), капакът на батерията е цял (за устройствата с батерия).
- Направете акустичен тест чрез задействане на обратна връзка. За устройствата RIC прикрепете говорител към устройството за тест с обратна връзка.

Ако се прилагат тези точки, продължете с приготвяне на устройствата за повторна употреба, в противен случай - за говорителите: изхвърлете; за слуховите апарати: изпратете до GC за ремонт (прилага се такса за ремонт, ако не са в гаранционен срок, специфично за държавата) или ако не са необходими повече, изхвърлете.

Възстановяване до фабричните настройки

Всички пробни устройства трябва да се нулират до фабричните настройки в края на всеки пробен период. Можете да постигнете това чрез софтуера за настройка, като отидете на [Тестови период & инструменти] > [Връщане към фабрични настройки] > [Възстановяване].

Ако слуховият апарат не може да се свърже със софтуера за настройка или е неизправен по време на настройката, изпратете до GC за ремонт (прилага се такса за ремонт, ако не са в гаранционен срок, специфично за държавата) или ако не са необходими повече, изхвърлете.



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Германия



Производитель:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Швейцария
www.phonak.com

V2.00/2025-06/ZT

sonova
HEAR THE WORLD



CE
0459

