

Resetování sluchadel pro použití u vícero uživatelů.

Uživatelská příručka



Úvod

Hygienické normy je nutné aplikovat na všechna sluchadla, která se používají u vícero klientů (např. zkušební sluchadla, zapůjčená sluchadla).

Týká se to všech součástí poslechového systému: RIC nebo BTE, reproduktor sluchadla RIC. Každou součást je nutné před jejím opětovným použitím u dalšího zákazníka důkladně vyčistit, dezinfikovat a celý systém resetovat.

Sluchadla RIC/BTE: Kromě čištění/dezinfekce je nutné vymazat osobní údaje o sluchadle a provést kontrolu vzhledu a funkčnosti.

Reproduktory sluchadel RIC: Pokud byl reproduktor použit klientem ke krátkodobému vyzkoušení, které obvykle trvá maximálně 15 minut, lze jej vyčistit a vydezinfikovat, aby mohl být použit u jiného klienta. Pokud byl reproduktor používán déle, lze jej buďto přenést na sluchadlo, které si klient nakonec zakoupil, nebo by se měl zlikvidovat, pokud již není potřeba.

Postup čištění

1. Příprava

Během čištění a dezinfekce sluchadla používejte rukavice

RIC

- Reproduktor ponechejte připojený, nebo jeho vstup uzavřete tmelem, aby se do něj nedostala čisticí tekutina

BTE

- Sejměte tvarovku klienta

Reproduktory

- Reproduktry nasazené na krátkodobé vyzkoušení lze hygienicky vyčistit a znovu použít
- Sejměte a zlikvidujte tovární koncovka a filtr proti ušnímu mazu

2. Čištění a Dezinfekce

- K čištění a dezinfekci používejte ubrousek s následujícími účinnými látkami: kvartérní amonium a alkohol
- Nejprve otřete zařízení, abyste odstranili viditelné znečištění (např. ušní maz)
- Zabalte zařízení do čerstvých ubrousků a zajistěte povrchový kontakt se zařízením
- Sluchadla není nutné balit jednotlivě; do stejného ubrousku lze zabalit několik sluchadel RIC/BTE/reproduktorů současně

RIC a BTE

- Ujistěte se, že jsou sluchadla v kontaktu s ubrouskem celkem alespoň 8 minut
- Jestliže ubrousek vyschne, použijte nový, aby byl povrch sluchadel po celou dobu čištění navlhčený

Reproduktory

- Ujistěte se, že jsou reproduktory v kontaktu s ubrouskem celkem alespoň 4 minuty

3. Vysoušení

- Zbytky čisticí tekutiny ze sluchadel/reproduktorů odstraňte jejich otřením tkaninou, která nepouští vlákna, navlhčenou ve vodě z kohoutku
- Před opakovaným použitím nechejte sluchadla zcela vyschnout

Kontrola

Proveďte následující kontroly:

- Nejsou viditelné žádné známky fyzického poškození povrchu, např. poškrábaný kryt.
- Sluchadlo je možné nabít (v případě nabíjecích sluchadel), dvířka přihrádky baterie jsou nepoškozená (v případě sluchadel na baterii).
- Proveďte akustickou zkoušku spuštěním zpětné vazby. U sluchadel RIC k nim připojte reproduktory a proveďte test zpětné vazby.

Pokud tyto body platí, pokračujte v přípravě sluchadel k opětovnému použití; pokud neplatí, v případě reproduktorů: zlikvidujte; v případě sluchadel: zašlete do GC k opravě (pokud není v záruce, platí se poplatek za opravu dle dané země) nebo, pokud již není potřeba, zlikvidujte.

Obnovení výrobního nastavení

U všech zkušebních sluchadel je nutné na konci zkušebního období nastavit výrobní nastavení. Lze to provést pomocí nastavovacího softwaru přechodem na položku [Zkouška a nástroje] > [Obnovit výrobní nastavení] > [Obnovit].

Jestliže sluchadlo nelze připojit k nastavovacímu softwaru nebo u sluchadla během nastavení dojde k poruše, zašlete je do GC k opravě (pokud není v záruce, platí se poplatek za opravu dle dané země) nebo, pokud již není potřeba, zlikvidujte.



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Německo



Výrobce:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Švýcarsko
www.phonak.com

Distributor pro Českou republiku:

REJA spol. s r. o.
www.reja.cz
www.phonak.cz
www.sluchadla-deti.cz
www.komunikacnisystem.cz
www.audiodum.cz

V2.00/2025-06/ZT

sonova
HEAR THE WORLD

