

# Επαναφορά ρυθμίσεων ακουστικών βαρηκοΐας για εφαρμογή σε πολλαπλούς χρήστες.

Οδηγίες Χρήσης



# Εισαγωγή

Σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούνται από πολλούς πελάτες πρέπει να εφαρμόζονται υγειονομικά πρότυπα (π.χ. δοκιμαστικές και δανεικές συσκευές).

Αυτό αφορά όλα τα τμήματα ενός συστήματος ακοής: RIC ή BTE, δέκτης RIC. Κάθε τμήμα πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά, να απολυμαίνεται και το σύστημα πρέπει να επαναρρυθμίζεται πριν επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλον πελάτη.

Συσκευές RIC/BTE: Επιπλέον του καθαρισμού/απολύμανσης, απαιτείται διαγραφή προσωπικών δεδομένων από το ακουστικό, καθώς και επιθεώρηση για αξιολόγηση της εμφάνισης και της απόδοσης.

Δέκτες RIC: Εάν ο δέκτης χρησιμοποιήθηκε από κάποιον πελάτη για βραχυπρόθεσμη δοκιμή, διάρκειας έως και 15 λεπτών κατά κανόνα, μπορεί να καθαριστεί και να απολυμανθεί για επόμενο πελάτη. Εάν ο δέκτης χρησιμοποιήθηκε για μεγαλύτερο διάστημα μπορεί να μεταφερθεί στην τελική συσκευή που θα αγοράσει ο πελάτης ή εάν δεν πραγματοποιηθεί αγορά, θα πρέπει να απορρίπτεται.

# Διαδικασία καθαρισμού

## 1. Προετοιμασία

---

Φοράτε γάντια κατά τον καθαρισμό και απολύμανση της συσκευής

---

### RIC

- Διατηρήστε τον δέκτη συνδεδεμένο ή χρησιμοποιήστε ειδικό μείγμα για να αποτρέψετε την είσοδο υγρού καθαρισμού στη θύρα του δέκτη

### BTE

- Αφαίρεση του εκμαγείου του πελάτη

### Δέκτες

- Οι δέκτες που χρησιμοποιούνται από κάποιον πελάτη για βραχυπρόθεσμη δοκιμή μπορούν να καθαρίζονται με βάση τα υγειονομικά πρότυπα για επαναχρησιμοποίηση
- Αφαιρέστε και απορρίψτε την θηλής και προστατευτικού κυψελίδα

## 2. Καθαρισμός και απολύμανση

---

- Για καθαρισμό και απολύμανση, χρησιμοποιήστε ένα μαντηλάκι με τα ακόλουθα δραστικά συστατικά: τεταρτοταγές αμμώνιο και αλκοόλη
- Πρώτα σκουπίστε τη (τις) συσκευή(-ές) για να αφαιρέσετε την ορατή μόλυνση (π.χ. Κυψελίδα)

- Τυλίξτε τη (τις) συσκευή(-ές) με φρέσκα μαντηλάκια που εξασφαλίζουν την επαφή της επιφάνειας με τη (τις) συσκευή(-ές)
- Δεν είναι απαραίτητο να τυλίγετε μεμονωμένες συσκευές, μπορείτε να τυλίγετε περισσότερες από μία συσκευές RIC/BTE/δέκτες στα ίδια υγρομάντιλα

---

#### RIC και BTE

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή(ές) είναι σε επαφή με το υγρομάντιλο για τουλάχιστον 8 λεπτά συνολικά
- Εάν το υγρομάντιλο στεγνώσει, χρησιμοποιήστε ένα καινούριο υγρομάντιλο για να διασφαλίσετε ότι οι συσκευές παραμένουν υγρές καθ' όλη τη διάρκεια καθαρισμού

#### Δέκτες

- Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης(ες) είναι σε επαφή με το υγρομάντιλο για τουλάχιστον 4 λεπτά συνολικά

### 3. Στέγνωμα

---

- Για να αφαιρέσετε υπολείμματα καθαριστικού υγρού από τις συσκευές/δέκτες, σκουπίστε με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι βρεγμένο σε νερό βρύσης
- Αφήστε τις συσκευές να στεγνώσουν πλήρως πριν την επαναχρησιμοποίηση

# Ελεγχος

Εκτελέστε τους ακόλουθους ελέγχους:

- Δεν υπάρχουν ορατά σημάδια φυσικής φθοράς στην επιφάνεια, π.χ. χαρακιές στο περίβλημα.
- Λειτουργεί η φόρτιση του ακουστικού (για επαναφορτιζόμενες συσκευές), η μπαταριοθήκη είναι άθικτη (για συσκευές με μπαταρία).
- Εκτελέστε ακουστική δοκιμή προκαλώντας μικροφωνισμό. Για συσκευές RIC προσαρτήστε στη συσκευή έναν δέκτη για δοκιμή μικροφωνισμού.

Εάν ισχύουν τα παραπάνω, προχωρήστε στην προετοιμασία της συσκευής για επαναχρησιμοποίηση, διαφορετικά, για δέκτες: απορρίψτε. Για ακουστικά: αποστείλετε στο GC για επιδιόρθωση (υπόκειται σε τέλος επισκευής, εάν δεν ισχύει η εγγύηση) ή εάν δεν τα χρειάζεστε, απορρίψτε.

## Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Σε όλες τις δοκιμαστικές συσκευές πρέπει να εκτελείται επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά το πέρας κάθε δοκιμαστικής περιόδου. Για την επαναφορά χρησιμοποιήστε το λογισμικό εφαρμογής επιλέγοντας [Δοκιμή και εργαλεία] > [Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις] > [Επαναφορά].

Εάν δεν είναι δυνατή ή σύνδεση του ακουστικού στο λογισμικό εφαρμογής ή διακόπτεται κατά την εφαρμογή, αποστείλετε στο GC για επιδιόρθωση (υπόκειται σε τέλος επισκευής, εάν δεν ισχύει η εγγύηση, ειδικά ανά χώρα), ή εάν δεν το χρειάζεστε, απορρίψτε.



Sonova Deutschland GmbH  
Max-Eyth-Strasse 20  
70736 Fellbach-Oeffingen  
Γερμανία



**Κατασκευαστής:**

Sonova AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa  
Ελβετία  
[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

V2.00/2025-06/ZT

**sonova**  
HEAR THE WORLD



**CE**  
0459

