

Restablecimiento de los audífonos para aplicaciones multiusuario.

Instrucciones de uso



Introducción

Deben aplicarse las normas de higiene a todos los dispositivos que se utilicen con varios usuarios (por ejemplo, dispositivos de prueba o prestados).

Aquí se incluyen todas las secciones de un sistema auditivo: dispositivos RIC o BTE y auricular RIC. Cada sección debe someterse a una limpieza, desinfección y reajuste del sistema completos antes de que otro usuario proceda a la reutilización.

Dispositivos RIC/BTE: Además de la limpieza/desinfección, se requiere la eliminación de los datos personales del audífono y una inspección que evalúe el aspecto y el rendimiento.

Auriculares RIC: Si un auricular ha sido usado por un usuario para una prueba breve, normalmente de hasta 15 minutos, puede limpiarse y desinfectarse para transferirse a otro usuario. Si un auricular se ha utilizado durante más tiempo, puede transferirse al dispositivo que compre finalmente el usuario o, si no es necesario, debe desecharse.

Procedimiento de limpieza

1. Preparación

Utilice guantes durante la limpieza y desinfección del dispositivo

RIC

- Mantenga el auricular conectado o utilice masilla para evitar que el líquido de limpieza entre en el puerto del auricular

BTE

- Quite el molde al usuario

Auriculares

- Los auriculares utilizados para pruebas breves pueden limpiarse higiénicamente para su reutilización
- Quite y deseche la protección anticerumen y la cápsula

2. Limpieza y desinfección

- Para la limpieza y desinfección, utilice una toallita con los siguientes ingredientes activos: amonio cuaternario y alcohol
- Primero limpie el dispositivo para eliminar la contaminación visible (por ejemplo, cerumen)

- Envuelva el dispositivo con toallitas limpias asegurando el contacto de la superficie con el dispositivo
- No es necesario envolver los dispositivos individualmente, varios RIC/ BTE/auriculares pueden envolverse simultáneamente en las mismas toallitas.

RIC y BTE

- Asegúrese de que los dispositivos estén en contacto con la toallita durante al menos 8 minutos en total
- Si la toallita se seca, utilice una nueva para asegurarse de que los dispositivos permanecen húmedos durante el tiempo que dure la limpieza

Auriculares

- Asegúrese de que los auriculares estén en contacto con la toallita durante al menos 4 minutos en total

3. Secado

- Para eliminar los restos de líquido de limpieza de los dispositivos/ auriculares, límpielos con un paño que no deje pelusas humedecido en agua del grifo
- Deje que los dispositivos se sequen completamente antes de volver a utilizarlos

Inspección

Realice las siguientes comprobaciones:

- No se aprecian signos de deterioro físico de la superficie, por ejemplo, la carcasa está rayada.
- El audífono puede cargarse (en el caso de los dispositivos recargables), la tapa del portapilas está intacta (en el caso de los dispositivos de pila).
- Realice una prueba acústica activando la realimentación. En el caso de los dispositivos RIC, conecte un auricular al dispositivo para la prueba de retroalimentación.

Si estos puntos son aplicables, proceda a preparar los dispositivos para su reutilización, de lo contrario, en el caso de los auriculares, deséchelos; en el caso de los audífonos, envíelos a fábrica para su reparación (se aplica una tarifa de reparación si no están en garantía, según el país) o, si ya no los necesita, deséchelos.

Restablecer los ajustes de fábrica

Todos los dispositivos de prueba deben restablecerse con los ajustes de fábrica al final de cada periodo de prueba. Puede conseguirlo a través del software de adaptación desde [Trial y herramientas] > [Volver a poner ajustes "de fábrica"] > [Resetear].

Si el audífono no puede conectarse al software de adaptación o falla durante la adaptación, envíelo a la fábrica para su reparación (se aplicarán los gastos de reparación si no está en garantía, según el país) o bien, si ya no lo necesita, deséchelo.



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Alemania



Fabricante:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Suiza
www.phonak.com

V2.00/2025-06/ZT

sonova
HEAR THE WORLD



CE
0459

