

# Kuuldeaparaadi lähtestamine mitme kasutaja rakenduseks.

Kasutusjuhend



# Juhised

Kõigile mitmel kliendil kasutatavatele seadmetele (nt prooviseadmed, laenutatavad seadmed) tuleb kohaldada asjakohaseid hügieeniprotseduure.

See hõlmab kõiki kuuldesüsteemi osi: RIC või BTE, RIC-vastuvõtja. Enne järgmisel kliendil kasutamist tuleb iga osa hoolikalt puhastada ja desinfitseerida ning süsteem lähtestada.

RIC/BTE seadmed: lisaks puhastamisele/desinfitseerimisele tuleb kustutada kuuldeinstrumenti salvestatud isikuandmed ning teha seadme väljanägemise ja toimivuse ülevaatus.

RIC-vastuvõtjad: kui klient on kandnud vastuvõtjat lühiajalise proovimise käigus, mis harilikult kestab kuni 15 minutit, saab selle järgmisele kliendile anda pärast vastuvõtja puhastamist ja desinfitseerimist. Kui vastuvõtjat on kantud kauem, tuleb see kas paigaldada kliendi ostetud seadmesse või, kui klient seda ei vaja, siis ära visata.

# Puhastamise protseduur

## 1. Ettevalmistused

---

Kandke seadme puhastamise ja desinfitseerimise ajal kindaid

---

### RIC

- Hoidke vastuvõtja ühendatuna või kasutage kitti, et vältida puhastusvedeliku pääsemist vastuvõtja porti

### BTE

- Eemaldage kliendi otsak

### Vastuvõtjad

- Proovimiseks lühiajaliselt kantud vastuvõtja saab järgmisele kasutajale anda pärast hügieeniliselt puhastamist
- Eemaldage ja visake ära otsak ja vaigukaitse

## 2. Puhastamine ja desinfitseerimine

---

- Puhastamiseks ja desinfitseerimiseks kasutage salvrätikut järgmiste toimeainetega: kvaternaarne ammoonium ja alkohol
- Esimene seade/seadmed nähtava saaste (nt vaik) eemaldamiseks
- Mähkige seade/seadmed värskete salvrätikutega, tagades pinna kokkupuute seade/seadmed ga
- Seadmeid pole tarvis mähkida ühekaupa, vaid sama lapi sisse võib mähkida korraga ka mitu RIC-i/BTE-d/vastuvõtjat

---

### RIC ja BTE

- Tagage, et seadme kontakt lapiga kestaks kokku vähemalt 8 minutit
- Kui lapp muutub kuivaks, asendage see värskel lapiga, et seade oleks kogu puhastamisaja vältel märg

### Vastuvõtjad

- Tagage, et vastuvõtja kontakt lapiga kestaks kokku vähemalt 4 minutit

## 3. Kuivatamine

---

- Puhastusvedeliku jääkide eemaldamiseks seadmelt/vastuvõtjalt pühkige see üle kraanivees niisutatud ebemevaba riidelapiga
- Enne uuesti kasutamist laske seadmel täielikult kuivada

# Ülevaatus

Tehke järgmised kontrolltoimingud

- Kontrollige, kas puuduvad nähtavad märgid füüsilistest pinnakahjustustest, nt kriimustused korpusel.
- Kontrollige, kas kuuldeinstrumenti saab laadida (kui see on taaslaetav seade), või kas patarei luuk on terve (kui see on patareitoitel seade).
- Tehke helitest, käivitades tagasiside. RIC-seadmel kinnitage tagasiside testi tegemiseks seadme külge vastuvõtja.

Kui nende punktidega on kõik korras, jätkake seadme ettevalmistamist järgmiseks kasutuskorraks. Kui mitte, siis vastuvõtja korral: visake ära; kuuldeinstrumendi korral: saatke parandamiseks GC-le (garantii mittekehtimisel kohalduvad riigist sõltuvalt remonditasud) või kui seadet ei vajata, visake ära.

# Lähtestamine tehaseadetele

Kõik prooviseadmed tuleb iga prooviperioodi lõppedes lähtestada tehaseadetele. Seda saab teha sobitustarkvara abil, valides [Trial Et tools] > [Reset to factory settings] > [Reset] (Proovimine ja tööriistad > Lähtestamine tehaseadetele > Lähtesta).

Kui kuuldeinstrumenti ei saa ühendada sobitustarkvaraga või kuuldeinstrument sobitamise ajal töötamast lakkab, saatke see parandamiseks GC-le (garantii mittekehtimisel kohalduvad riigist sõltuvalt remonditasud) või kui seadet ei vajata, visake ära.

EC REP

Sonova Deutschland GmbH  
Max-Eyth-Strasse 20  
70736 Fellbach-Oeffingen  
Saksamaa



**Tootja:**

Sonova AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa  
Šveits  
[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

V2.00/2025-06/ZT

**sonova**  
HEAR THE WORLD



CE  
0459

