

# Kuulokojeiden nollaaminen ja palauttaminen tehdasasetuksiin seuraavaa käyttäjää varten.

Käyttöohje



# Johdanto

Erityisiä hygieniavaatimuksia on noudatettava kaikkien sellaisten kuulokojeiden (esim. kokeilu- ja lainakojien) suhteen, joita käyttää useampi käyttäjä.

Tämä koskee kaikkia kuulokojejärjestelmän osia, eli kuuloke korvakäytävässä kojetta tai korvantauskojetta sekä kuuloke korvakäytävässä kojeen kuuloketta. Jokainen osa on puhdistettava perusteellisesti ja desinfioitava, ja koje nollattava ennen kuin toinen henkilö voi käyttää sitä.

RIC/BTE-kojeet: puhdistuksen ja desinfioinnin lisäksi vaaditaan henkilökohtaisten tietojen poistaminen kuulokojeesta sekä kuulokojeen ulkoisen kunnon ja suorituskyvyn arviointi.

RIC-kojeiden kuulokkeet: jos asiakas on kokeillut kuuloketta lyhytaikaisesti, tyypillisesti korkeintaan 15 minuutin ajan, se voidaan puhdistaa ja desinfioida toiselle asiakkaalle siirtämistä varten. Jos kuuloketta on käytetty tätä pidempään, se voidaan joko siirtää saman asiakkaan lopulliseen laitteeseen tai hävittää siinä tapauksessa, että sitä ei tarvita enää.

# Puhdistusmenettely

## 1. Valmistelu

---

Käytä hanskoja laitteen puhdistuksen ja desinfioinnin aikana

---

Kuuloke korvakäytävässä -koje

- Pidä kuuloke liitettynä kojeeseen tai käytä tiivistemassaa, jotta puhdistusneste ei pääse sisään kuulokkeen liitoskohdasta

Korvantauskoje

- Ota pois asiakkaan korvakappale

Kuulokkeet

- Lyhytaikaiseen kokeiluun käytetyt kuulokkeet voidaan puhdistaa uudelleenkäyttöä varten
- Poista ja hävitä sovite ja vahasuoja

## 2. Puhdistus ja Desinfiointi

---

- Käytä puhdistukseen ja desinfiointiin pyyhettä, jossa on seuraavat vaikuttavat aineet: kvaternaarinen ammonium ja alkoholi
- Pyyhi ensin laite/laitteet näkyvän epäpuhtauden (esim. vahan) poistamiseksi

- Kääri laite/laitteet tuoreilla pyyhkeillä, jotka varmistavat pinnan kosketuksen laitteeseen/laitteisiin
- Kojeita ei tarvitse välttämättä kääriä pyyhkeiden sisään yksitellen, vaan useampia korvakäytävä-/korvantauskojeita ja kuulokkeita voidaan kääriä saman pyyhkeen sisään

---

Kuuloke korvakäytävssä- ja korvantauskojeet

- Varmista, että koje (tai kojeet) pysyy kosketuksissa pyyhkeen kanssa vähintään 8 minuutin ajan
- Jos pyyhe kuivuu, ota käyttöön uusi pyyhe sen varmistamiseksi, että kojeet pysyvät kosteina koko puhdistuksen ajan

Kuulokkeet

- Varmista, että kuuloke (tai kuulokkeet) pysyy kosketuksissa pyyhkeen kanssa vähintään 4 minuutin ajan

### 3. Kuivaus

---

- Poista puhdistusnestejäämät kuulokojeista/kuulokkeista pyyhkimällä nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu vesijohtovedellä
- Anna kojeiden kuivua täysin ennen uudelleenkäyttöä

# Tarkastus

Tee seuraavat tarkastukset:

- Pinnoilla ei ole näkyvissä fyysisiä vaurioita, kuten naarmuja kuorissa.
- Kuulokoje latautuu normaalisti (ladattava koje) ja paristoluukku on ehjä (paristokäyttöinen kuulokoje).
- Tee akustinen testi aktivoimalla vinkumistestaus. Kuuloke korvakäytävissä -kojeissa liitä kuuloke kojeeseen vinkumistestausta varten.

Jos näissä tarkastuksissa ei havaita ongelmia, valmistele kojeet uudelleenkäyttöä varten. Muussa tapauksessa hävitä kuulokkeet ja toimita kuulokojeet huoltoon (korjaus saattaa olla maksullinen, jos takuu ei ole voimassa) tai hävitä ne asianmukaisesti, jos niitä ei enää tarvita.

# Tehdasasetusten palauttaminen

Kaikki kokeilukojeet on palautettava tehdasasetuksiin kokeilujakson päätyttyä. Tämä voidaan tehdä sovitushjelmassa valitsemalla [Kokeilu&työkalut] > [Palauta tehdasasetukset] > [Palauta].

Jos kuulokojetta ei voida yhdistää sovitushjelmaan tai siihen tulee toimintahäiriö sovituksen aikana, ja kojeen nollaus ei auta (ladattava koje), niin toimita se huollettavaksi (korjaus saattaa olla maksullinen, jos takuu ei ole voimassa) tai hävitä se, jos sitä ei enää tarvita.



Sonova Deutschland GmbH  
Max-Eyth-Strasse 20  
70736 Fellbach-Oeffingen  
Saksa



**Valmistaja:**

Sonova AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa  
Sveitsi  
[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

V2.00/2025-06/ZT

**sonova**  
HEAR THE WORLD



**CE**  
0459

