

# Hallókészülékek alaphelyzetbe állítására többfelhasználós használathoz ●

Használati útmutató



# Bevezetés

A higiéniai előírásokat minden olyan készülékre alkalmazni kell, amelyet több ügyfél is használ (így például a Trial készülékek esetében is).

Ez a hallási rendszer minden szakaszára vonatkozik, legyen az külső hangszóró, fül mögötti készülék vagy külső hangszórós készülék. Mielőtt egy másik ügyfél újra használná, minden egyes résznek alapos tisztításon, fertőtlenítésen és alaphelyzetbe állításon kell átesnie.

Külső hangszórós/fül mögötti készülékek: a tisztításon/fertőtlenítésen kívül a hallókészülékben lévő személyes adatok törlése, valamint a megjelenést és a teljesítményt értékelő vizsgálat elvégzése is szükséges.

Külső hangszórók: ha a külső hangszórót az ügyfél rövid ideig, jellemzően legfeljebb 15 percig tartó felpróbálás céljából viseli, akkor a hangszóró megtisztítható és fertőtleníthető, hogy át lehessen adni egy másik ügyfélnek. Ha a külső hangszórót hosszabb ideig viselték, akkor áthelyezhető az ügyfél végleges, megvásárolt készülékébe, vagy pedig – ha nincs rá szükség – selejtezni szükséges.

# Tisztítási eljárás

## 1. Előkészítés

---

Az eszköz tisztítása és fertőtlenítése során viseljen kesztyűt.

---

Külső hangszórós hallókészülékek (RIC)

- A tisztítófolyadék hangszórónyílásba való bejutásának megakadályozásához tartsa a hangszórót csatlakoztatva, vagy pedig használjon tömítőgyurmát

Fül mögötti hallókészülékek (BTE)

- Távolítsa el az ügyfél fülillesztékét

Hangszórók

- A rövid ideig tartó felpróbáláshoz viselt hangszórók higiénikusan tisztíthatók az újbóli használathoz
- Távolítsa el és dobja el a dóm és a cerumen védelem

## 2. Tisztítás és Fertőtlenítés

---

- Tisztításhoz és fertőtlenítéshez használjon törülköndőt a következő hatóanyagokkal: kvaterner ammónium és alkohol
- Első törülköző(ek) a látható szennyeződések (pl. fülzsír) eltávolítására

- Tekerje be az eszköz(ek)e)t friss törlőkendővel, biztosítva a felületi érintkezést az eszköz(ök)kel
- A készülékeket nem szükséges egyenként beletekerni a kendőbe, több külső hangszórós/fül mögötti készülék/hangszóró is beletekerhető egyidejűleg ugyanabban a törlőkendőben.

- 
- Külső hangszórós (RIC) és fül mögötti készülékek (BTE)
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék(ek) összesen legalább 8 percig érintkezzen(ek) a törlőkendővel
  - Ha a törlőkendő megszárad, használjon új törlőkendőt annak biztosítására, hogy a készülékek a teljes tisztítási idő alatt nedvesek maradjanak

#### Hangszórók

- Gondoskodjon arról, hogy a hangszóró(k) összesen legalább 4 percig érintkezzen(ek) a törlőkendővel

### 3. Szárítás

---

- A tisztítófolyadék maradványainak eltávolításához törölje le a készüléket/hangszórókat csapvízben megnedvesített, nem szőszölő kendővel
- Az újbóli használat előtt hagyja a készülékeket teljesen megszáradni

# Ellenőrzés

Végezze el a következők ellenőrzését:

- A készüléken nem láthatók a felület fizikai károsodásának jelei, pl. nem karcos a burkolat.
- A hallókészülék (újratölthető készülékek esetén) tölthető, illetve (elemes készülékek esetén) az elemajtó sértetlen.
- Visszacsatolást kiváltva végezzen akusztikai tesztet. Külső hangszórós eszköz esetén a visszacsatolási teszthez csatlakoztasson hangszórót a készülékhez.

Ha a készülék megfelel a fenti pontok szerinti ellenőrzésen, folytassa a készülék előkészítését az újrahasználatra, ellenkező esetben a hangszórókat dobja ki, a hallókészüléket küldje el a Sonova Központba javításra.

## Visszaállítás a gyári beállításokra

Az egyes próbaidőszakok végén minden próbakészüléket vissza kell állítani a gyári beállításokra. Ezt az illesztőszoftveren keresztül teheti meg a [Kipróbálás és eszközök] > [Visszaállítás a gyári beállításokra] > [Visszaállítás] menüpontra kattintva.

Ha a hallókészülék nem csatlakoztatható az illesztőszoftverhez vagy meghibásodik illesztés közben, küldje el a Sonova Központba javításra.



Sonova Deutschland GmbH  
Max-Eyth-Strasse 20  
70736 Fellbach-Oeffingen  
Németország



**Gyártó:**

Sonova AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa  
Svájc  
[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

**Importőr az EU-ba:**

Sonova Hungary Kft.  
Dunavirág utca 2-6. 3.  
ép.7.em.,  
1138 Budapest,  
Hungary

V2.00/2025-06/ZT

**sonova**  
HEAR THE WORLD

