

Klausos aparatų nustatymas iš naujo, kai juos naudoja keli naudotojai •

Naudojimo instrukcija



Įvadas

Higienos standartai turi būti taikomi visiems prietaisams, kurie naudojami kelių klientų (pvz., bandomiesiems prietaisams, skolinamiems prietaisams).

Tai apima visas klausos sistemos dalis: RIC ar BTE, RIC garsiakalbį. Kiekvieną dalį reikia kruopščiai išvalyti, dezinfekuoti ir nustatyti jos sistemą iš naujo prieš tai, kai kitas klientas galės naudotis klausos sistema.

RIC / BTE prietaisai: būtina ne tik išvalyti / dezinfekuoti klausos prietaisą, bet ir panaikinti jame esančius asmens duomenis ir įvertinti jo išvaizdą bei veikimą.

RIC garsiakalbiai: jei klientas garsiakalbį dėvėjo trumpai, paprastai iki 15 minučių, jį galima išvalyti ir dezinfekuoti, kad būtų galima perduoti kitam klientui. Jei garsiakalbis buvo dėvimas ilgiau, jį galima perkelti į baigtą gaminti prietaisą, kurį klientas įsigyja, arba, jei garsiakalbis nereikalingas, jį reikia išmesti.

Valymo procedūra

1. Pasiruošimas

Valydami ir dezinfekuodami prietaisą mūvėkite pirštines

RIC

- Prijunkite garsiakalbį arba naudokite glaistą, kad į garsiakalbio prievadą nepatektų valymo skysčio

BTE

- Išimkite kliento ausies įdėklą

Garsiakalbiai

- Trumpai pasimatuotus garsiakalbius galima higieniškai išvalyti ir naudoti dar kartą
- Nuimkite ir išmeskite kepurėlę ir apsaugą nuo ausų sieros

2. Valymas ir Dezinfekavimas

- Valymui ir dezinfekavimui naudokite servetėlę su šiomis veikliosiomis medžiagomis: ketvirtiniu amoniu ir alkoholiu
- Pirmiausia nuvalykite įrenginį ar įrenginius, kad pašalintumėte matomą užterštumą (pvz. siera)
- Apvyniokite įrenginį ar įrenginius šviežiais servetėlėmis, užtikrindami paviršiaus kontaktą su įrenginiu ar įrenginiais.
- Nebūtina kiekvieno prietaiso apvynioti atskirai, vienu metu tomis pačiomis servetėlėmis gali būti apvynioti keli RIC / BTE / garsiakalbiai

RIC ir BTE

- Užtikrinkite, kad prietaisas (-ai) būtų apvyniotas (-i) iš viso bent 8 minutes
- Servetėlei išdžiuvus, naudokite naują servetėlę ir užtikrinkite, kad per visą valymo laiką prietaisai išliktų drėgni

Garsiakalbiai

- Užtikrinkite, kad garsiakalbis (-iai) būtų apvyniotas (-i) iš viso bent 4 minutes

3. Džiovinimas

- Norėdami pašalinti valymo skysčio likučius nuo prietaisų / garsiakalbių, nušluostykite juos vandeniu iš čiaupo sudrėkinta šluoste be pūkelių
- Prieš pakartotinį naudojimą prietaisai turi visiškai išdžiūti

Patikra

Atlikite toliau nurodytus sutikrinimus.

- Nėra matomų fizinio paviršiaus gedimo požymių, pvz., įbrėžtas korpusas.
- Klausos aparatą galima įkrauti (jei prietaisai yra įkraunami), elemento skyrelio dangtelis yra nepažeistas (jei prietaisuose naudojami elementai).
- Atlikite akustinį bandymą suaktyvindami atgalinį ryšį. RIC prietaisuose pritvirtinkite garsiakalbį, kad būtų galima atlikti atgalinio ryšio bandymą.

Jei šie punktai taikomi, paruoškite prietaisus pakartotiniam naudojimui, kitu atveju garsiakalbius išmeskite, o klausos aparatus išsiųskite GC remontuoti (reikės sumokėti remonto mokestį, jei netaikoma garantija (priklauso nuo šalies) arba, jeigu jų nebereikia, išmeskite juos.

Atkurti į gamyklinius nustatymus

Pasibaigus kiekvienam bandomajam laikotarpiui, visų bandomųjų prietaisų nustatymus reikia atkurti į gamyklinius. Tai galite padaryti derinimo programoje pasirinkdami [„Trial“ ir įrankiai] > [Atkurti į gamyklinius nustatymus] > [Atkurti].

Jei klausos aparato negalima prijungti prie derinimo programos arba jis sugenda derinimo metu, išsiųskite jį GC remontuoti (reikės sumokėti remonto mokestį, jei netaikoma garantija (priklauso nuo šalies) arba, jei jo nebereikia, išmeskite jį.



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Vokietija



Gamintojas:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Šveicarija
www.phonak.com

V2.00/2025-06/ZT

sonova
HEAR THE WORLD

