

# Dzirdes aparātu atiestatīšana vairāku lietotāju izmantošanai.

Lietošanas instrukcija



# Ievads

Higiēnas standarti ir jāpiemēro visām ierīcēm, kuras tiek izmantotas ar vairākiem klientiem (piemēram, izmēģinājuma ierīcēm, aizdotām ierīcēm).

Tas ietver visas dzirdes sistēmas daļas: RIC vai BTE, RIC uztvērēju. Katrai daļai ir jāveic rūpīga tīrīšana, dezinfekcija un sistēmas atiestatīšana, pirms to atkārtoti izmanto citam klientam.

RIC/BTE ierīces: papildus tīrīšanai/dezinficēšanai ir nepieciešama dzirdes aparāta personas datu dzēšana un pārbaude, lai novērtētu izskatu un veikspēju.

RIC uztvērēji: ja klients uztvērēju ir nēsājis īslaicīgai izmēģināšanai, kas parasti ilgst līdz 15 minūtēm, to var iztīrīt un dezinficēt, lai nodotu citam klientam. Ja uztvērējs ir valkāts ilgāk, to var vai nu pārsūtīt uz klienta iegādāto ierīci, vai arī, ja tas nav nepieciešams, to var izmest.

# Tīrīšanas procedūra

## 1. Sagatavošana

---

Ierīces tīrīšanas un dezinfekcijas laikā valkājiet cimdus

---

### RIC

- Turiet uztvērēju pievienotu vai izmantojiet blīvējošu materiālu, lai novērstu tīrīšanas šķidrums iekļūšanu uztvērēja pieslēgvietā

### BTE

- Noņemiet klienta auss ieliktni

### Uztvērēji

- Īslaicīgai izmēģināšanai valkātos uztvērējus var higiēniski notīrīt atkārtotai lietošanai
- Noņemiet un izmetiet kapsulas un pretsēra aizsardzības

## 2. Tīrīšana un Dezinfekcija

---

- Tīrīšanai un dezinfekcijai izmantojiet salveti ar šādām aktīvajām sastāvdaļām: kvartāro amoniju un alkoholu
- Vispirms noslaukiet ierīci(-as), lai noņemtu redzamo piesārņojumu (piemēram, sērs)
- Iesaiņojiet ierīci(-as) ar svaigām salvetēm, kas nodrošina virsmas saskari ar ierīci(-ām)
- Ierīces nav nepieciešams ietīt atsevišķi, kopā var ietīt vairākus RIC/ BTE/uztvērējus

---

### RIC un BTE

- Pārlicinieties, ka ierīce(-es) ir saskarē ar salveti kopumā vismaz 8 minūtes
- Ja salvete kļūst sausa, izmantojiet jaunu salveti, lai nodrošinātu, ka ierīces paliek mitras visu tīrīšanas laiku

### Uztvērēji

- Pārlicinieties, ka uztvērējs(-i) ir saskarē ar salveti kopumā vismaz 4 minūtes

## 3. Žāvēšana

---

- Lai noņemtu tīrīšanas šķidrums paliekas no ierīcēm/uztvērējiem, noslaukiet tos ar krāna ūdeni samitrinātu bezplūksnu drānu.
- Pirms atkārtotas lietošanas ļaujiet ierīcēm pilnībā nožūt

# Pārbaude

Veiciet tālāk minētās pārbaudes:

- Nav redzamas fiziskas virsmas degradācijas pazīmes, piem., saskrāpēts korpuss.
- Dzirdes aparātu var uzlādēt (uzlādējamām ierīcēm), baterijas vāciņš ir neskarts (ierīcēm ar baterijām).
- Veiciet akustisko pārbaudi, aktivizējot atgriezenisko saiti. RIC ierīcēm pievienojiet uztvērēju atgriezeniskās saites pārbaudei.

Ja šie punkti attiecas uz jūsu gadījumu, turpiniet ar ierīču sagatavošanu atkārtotai lietošanai, pretējā gadījumā uztvērējus izmetiet, bet dzirdes aparātus nosūtiet uz GC remontam (ja nav garantijas, tiek piemērota remonta maksa atkarībā no valsts) vai, ja vairs nav nepieciešams, izmetiet.

# Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem

Katra izmēģinājuma perioda beigās visām izmēģinājuma ierīcēm ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi. To var panākt, izmantojot pielāgošanas programmatūru, atverot sadaļu [Trial & tools] (Izmēģinājums un rīki) > [Reset to factory settings] (Atiestatīt rūpnīcas iestatījumus) > [Reset] (Atiestatīt).

Ja dzirdes aparātu nevar savienot ar pielāgošanas programmatūru vai pielāgošana neizdodas, nosūtiet uz GC remontam (ja nav garantijas, tiek piemērota remonta maksa atkarībā no valsts) vai, ja tas vairs nav nepieciešams, izmetiet.



Sonova Deutschland GmbH  
Max-Eyth-Strasse 20  
70736 Fellbach-Oeffingen  
Vācija



**Ražotājs:**

Sonova AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa  
Šveice  
[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

V2.00/2025-06/ZT

**sonova**  
HEAR THE WORLD



CE  
0459

