

# Tilbakestilling av høreapparater for gjenbruk.

Bruksanvisning



# Introduksjon

Hygienestandarder må gjelde for alle enheter som brukes av flere brukere (f.eks. Trailapparat, utlåsenheter).

Dette omfatter alle deler av et høreapparat: RIC eller BTE, RIC-mottaker. Hver del må gjennomgå grundig rengjøring, desinfisering og tilbakestilling av systemet før den kan brukes på nytt hos en annen bruker.

RIC-/BTE-enheter: I tillegg til rengjøring/desinfisering kreves det sletting av personopplysninger på høreapparatet og en inspeksjon for å vurdere utseende og ytelse.

RIC-mottakere: Hvis en receiver er blitt brukt av en bruker for kortvarig utprøving, vanligvis i opptil 15 minutter, kan den rengjøres og desinfiseres slik at den kan overføres til en annen bruker. Hvis en receiver har vært brukt i lengre tid, kan den enten overføres til brukers eget høreapparat, eller kasseres hvis den ikke er nødvendig.

# Prosedyre for rengjøring

## 1. Forberedelser

---

Bruk hansker under rengjøring og desinfisering av apparatet

---

### RIC

- Hold receiver tilkoblet eller bruk kitt for å hindre rengjøringsvæske i å trenge inn i receiverporten

### BTE

- Fjern brukers ørepropp

### Receiver

- Receiver som brukes til kortvarig utprøving, kan rengjøres hygienisk for gjenbruk
- Fjern og kast dome og voksfilter

## 2. Rengjøring og Desinfisering

---

- For rengjøring og desinfisering, bruk en serviett med følgende aktive ingredienser: kvartærammonium og alkohol
- Tørk først av enheten(e) for å fjerne synlig forurensning (f.eks. voks)
- Pakk enheten(e) med nye kluter som sikrer overflatekontakt med enheten(e)
- Det er ikke nødvendig å pakke inn enhetene hver for seg, flere RIC/BTE/receivere kan pakkes inn i samme våtserviett samtidig

---

### RIC og BTE

- Sørg for at enheten(e) er i kontakt med våtservietten i minst 8 minutter til sammen
- Hvis våtservietten blir tørr, bruker du en ny for å sikre at enhetene forblir våte under hele rengjøringen

### Receiver

- Sørg for at receiver er i kontakt med våtservietten i minst 4 minutter til sammen

## 3. Tørking

---

- For å fjerne rester av rengjøringsvæske fra enhetene/receiveren tørker du av dem med en lofri klut fuktet med vann fra springen
- La enhetene tørke helt før de brukes på nytt

# Undersøkelse

Utfør følgende kontroller:

- Ingen tegn på fysisk nedbrytning av overflaten, f.eks. riper i kassen, er synlige.
- Høreapparatet kan lades (for oppladbare enheter), batteridekselet er intakt (for batterienheter).
- Utfør en akustisk test ved å utløse feedback. For RIC-enheter kobles en receiver til enheten for feedback-test. Hvis disse punktene gjelder, fortsetter du med å klargjøre enhetene for gjenbruk, ellers: for Receiver: kasser; for høreapparater: send til GC for reparasjon (reparasjonsgebyr påløper hvis garantien ikke gjelder, landsspesifikt) eller kasser hvis de ikke lenger trengs.

## Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Alle Trailenheter må tilbakestilles til fabrikkinnstillingene ved slutten av hver prøveperiode. Du kan gjøre dette via tilpasningsprogramvaren ved å gå til [Trial & Verktøy] > [Tilbakestill til fabrikkinnstillinger] > [Tilbakestill].

Hvis høreapparatet ikke kan kobles til tilpasningsprogramvaren eller svikter under tilpasningen, sendes det til GC for reparasjon (reparasjonsgebyr påløper hvis garantien ikke gjelder, landsspesifikt), eller kasseres hvis det ikke lenger er behov for det.



Sonova Deutschland GmbH  
Max-Eyth-Strasse 20  
70736 Fellbach-Oeffingen  
Tyskland



**Manufacturer:**

Sonova AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa  
Sveits  
[www.phonak.com](http://www.phonak.com)

V2.00/2025-06/ZT

**sonova**  
HEAR THE WORLD



CE  
0459

